




Ameda

MOM INSPIRED. HOSPITAL TRUSTED.

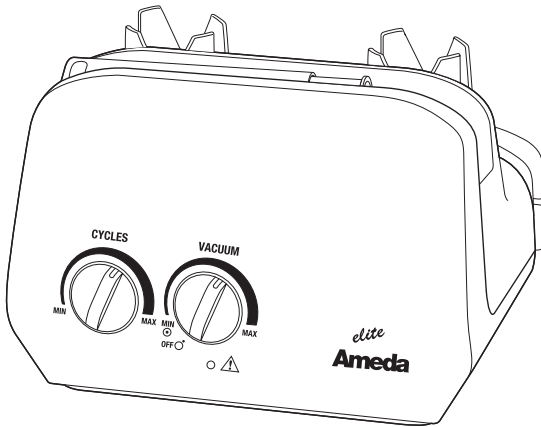

(EN) Ameda® Elite™ Breast Pump Instructions

English..... page 3

(CA) Instructions du tire-lait Ameda Elite

Français..... page 11

**(ES) Instrucciones para la bomba de extracción
Ameda Elite**

Español..... página 17

CONTENIDO

Medidas de seguridad importantes	17
Uso previsto	17
Diagrama de la bomba de extracción Ameda Elite	4
Base de la bomba de extracción Ameda Elite	5
Configuración y ensamblado	18
Sistema de recolección de leche Ameda HygieniKit®	18
Antes de cada uso	18
Extracción simple y doble	18
Funcionamiento de la bomba de extracción Elite	18
Ajuste de succión	18
Ajuste de velocidad	18
Apagado de la bomba	18
Remoción del sistema de recolección de leche Ameda HygieniKit de los pechos	18

Limpieza	19
Bomba de extracción Ameda Elite	19
Para consumidores domésticos/finales	19
Para hospitales/estaciones de alquiler	19
Diagnóstico y resolución de problemas	19
Mantenimiento	19
Información técnica	19
Cómo desechar el producto	22
Información de garantía	22

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar productos eléctricos, especialmente si hay niños presentes, siempre se deben cumplir las siguientes precauciones básicas de seguridad.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Peligro: Para reducir el riesgo de electrocución:

- Siempre desenchufe inmediatamente los artefactos eléctricos después de usar.
- No use el producto al bañarse, ducharse o nadar.
- No coloque ni guarde el producto donde pueda caerse al piso o a una bañera, lavabo o piscina.
- No sumerja ni tire el producto al agua ni a ningún otro líquido.
- No intente tomar un producto eléctrico que se haya caído al agua. Desenchufe del tomacorriente de pared inmediatamente.

Advertencia: para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales:

- Nunca deje el producto sin supervisión cuando esté enchufado a un tomacorriente eléctrico.
- Es necesaria una buena supervisión cuando el producto se usa cerca de niños o inválidos.
- Use el producto únicamente para el uso indicado según lo que se describe en este manual.
- No use accesorios u otros juegos de recolección de leche que no sean los recomendados por el fabricante.
- Nunca haga funcionar el producto si tiene el cable o el enchufe dañados, no está funcionando correctamente, o se ha caído, dañado o mojado.
- Mantenga el cable y todos los accesorios alejados de superficies calientes.
- Nunca use mientras duerme o está somnolienta.
- No use en exteriores con cable.
- No opere donde se estén usando productos en aerosol o se esté administrando oxígeno.

Precaución: Para reducir el riesgo de incendios o quemaduras con sustancias químicas:

- No desarme ni caliente a más de 100°C (212°F).

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Uso previsto

El extractor de leche Ameda está diseñado para facilitar la extracción y recolección de la leche materna de una mujer lactante con el propósito de alimentar al niño con la leche recolectada.

Cómo conectar la bomba de extracción

Ameda Elite a la base (si correspondiera)

Base

La base está disponible como artículo accesorio.

- Conecte la bomba a la base antes de enchufar el cable al tomacorriente de pared.
- Alinee la parte delantera de la bomba de extracción Ameda Elite con el texto "Front of Ameda Platinum Pump and Elite Pump" que se encuentra en la parte superior de la placa de montaje de la base.
- Baje la bomba a la placa, introduciendo las cuatro patas de la bomba en los orificios, uno en cada esquina de la placa de montaje de la base.
- Ubique el orificio de montaje con el texto "Ameda Platinum Pump and Elite Pump Mounting" que se encuentra en la parte inferior de la placa de montaje de la base.
- Use el tornillo de montaje para la bomba de extracción Ameda Elite que viene con la base para asegurar la bomba a la base.

Configuración y ensamblado

Sistema de recolección de leche Ameda HygieniKit


Antes de cada uso



Siempre lávese bien las manos con agua y jabón antes de manipular la bomba de extracción Ameda Elite y el sistema de recolección de leche HygieniKit de Ameda.

NOTA IMPORTANTE: USE EL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LECHE AMEDA HYGIENIKIT ÚNICAMENTE CON BOMBAS DE EXTRACCIÓN ELÉCTRICAS AMEDA.

Antes de comenzar a usar la bomba, arme y conecte el sistema de recolección de leche Ameda HygieniKit, según las instrucciones que se incluyen. Si el sistema de recolección de leche Ameda HygieniKit es estéril, úselo tal cual está. Si no es estéril, consulte las instrucciones de limpieza del sistema de recolección de leche Ameda HygieniKit.

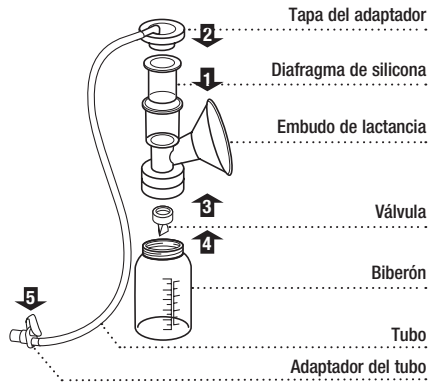


El sistema de extracción de leche HygieniKit de Ameda puede usarse para una bomba simple o doble.



Para extracción simple:
Quite un tubo y cierre el adaptador del tubo.




Para extracción doble:
Ambos tubos tienen que estar conectados al adaptador del tubo.

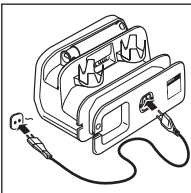


Elite con cable de corriente desmontable

- Enchufe el cable de corriente proporcionado por Ameda a la entrada de CA en la parte trasera de la bomba.
- Conecte el cable de corriente al tomacorriente de pared.

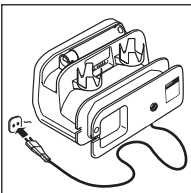


Elite con cable de corriente incorporado

- Conecte el cable de corriente al tomacorriente de pared.

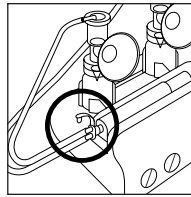


- Introduzca el adaptador del tubo en el puerto del adaptador del pistón/cilindro.

Funcionamiento de la bomba

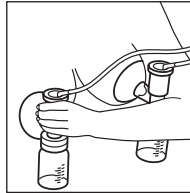


- Centre el pezón en el embudo y llene el embudo con el pecho para formar un sello que impida la entrada de aire.
- ENCIENDA la bomba girando el disco de 'VACUUM' a la derecha.

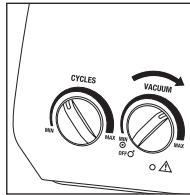

Ajuste de succión

- Aumente la succión girando el disco de 'VACUUM' a la derecha. Aumente la succión hasta alcanzar la máxima comodidad.
- Si siente molestias en el pezón o el pecho, disminuya la succión. Si siente molestias en todas las


configuraciones de succión, apague la bomba, introduzca un dedo entre el o los pechos y el o los embudos para romper la succión, quite el o los embudos de el o los pechos. Deje de bombear y póngase en contacto con un proveedor de atención médica.

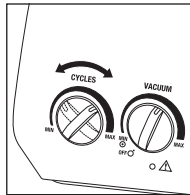

Ajuste de velocidad

- Gire el dial de 'CYCLES' totalmente a la derecha para aumentar la velocidad y activar un reflejo de descarga de leche (reflejo de eyección).
- Cuando la leche fluya (reflejo de eyección), gire el disco de 'CYCLES' hacia la izquierda

para bajar la velocidad para ayudar a drenar el pecho más rápidamente. Cuando el flujo de leche se haga más lento, gire el disco de 'CYCLES' totalmente a la derecha para ayudar a comenzar otro reflejo de eyección. Repita a medida que el flujo de leche cambia para bombear más leche.

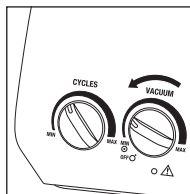


Apagado de la bomba

- Cuando haya terminado la extracción, gire el disco de 'VACUUM' completamente a la izquierda para apagar la bomba.


Remoción del sistema de recolección de leche Ameda HygieniKit de los pechos

- Luego de finalizada la succión, si fuera necesario, coloque un dedo entre el pecho y el embudo para eliminar la succión.
- Quite los embudos de los pechos.

Limpieza de la bomba de extracción Ameda Elite

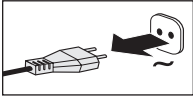

- Desconecte el cable de corriente de la bomba de extracción de la tomacorriente de pared.

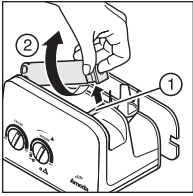

- Retire el pistón cilíndrico colocando el dedo índice en el tubo, levantándolo hacia arriba y girándolo a la derecha para liberarlo de las barras de sujeción.

Para consumidores domésticos/finales



Después de cada extracción, limpie la bomba con un paño humedecido con agua tibia y jabón.

Para hospitales/estaciones de alquiler

Limpíela después de cada uso. Rocíela con un desinfectante recomendado, como CaviCide™. Limpíela con un paño suave. No utilice productos que contengan fenol.

No utilice blanqueador en la bomba.

- Vuelva a colocar el pistón cilíndrico en las barras de sujeción y presione ligeramente en su lugar con el pulgar.

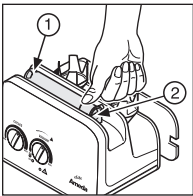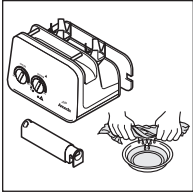

Diagnóstico y resolución de problemas

La bomba no se enciende

- Asegúrese de que el cable de corriente esté conectado a la bomba correctamente.
- Conecte el cable de corriente al tomacorriente de pared.
- Asegúrese de que el tomacorriente tenga corriente.

Succión baja o inexistente

- Compruebe que el embudo esté debidamente sellado contra el pecho.
- Compruebe que el sistema de recolección de leche Ameda HygieniKit esté correctamente armado.
- Compruebe que la tapa del adaptador esté calzada firmemente sobre el embudo.
- Asegúrese de que el diafragma de silicona esté en su sitio, dentro de la parte superior del embudo.
- Asegúrese de que el adaptador del tubo esté debidamente calzado dentro del puerto del adaptador del tubo de la bomba.
- Inspeccione la válvula en busca de estiramientos o rasgaduras. Si ve alguna, reemplace la válvula.
- Asegúrese de que la válvula sea colocada firmemente en su sitio a presión en la porción inferior del embudo.
- Asegúrese de que un lado del adaptador del tubo esté cerrado cuando esté realizando una extracción simple.

Mantenimiento

Se recomienda inspeccionar la bomba de extracción Ameda Elite por lo menos una vez al año incluyendo lo siguiente:

- Verifique visualmente que la cubierta de la bomba no tenga rajaduras, quiebres ni daños y asegúrese de que estén las patas de la bomba.
- Haga inspecciones visuales para detectar daños en el cable de corriente.
- Revisión del funcionamiento adecuado de los controles y botones.
- Verifique que no falten tornillos.

- Verifique que el puerto del adaptador del tubo del pistón/cilindro esté libre de obstrucción.

Revisión funcional rápida

Antes de que un nuevo usuario la utilice, deberán llevarse a cabo las siguientes revisiones/pruebas:

- Haga inspecciones visuales para detectar daños en el cable de corriente.
- Revisión para detectar ruidos anormales.
- Revisión del funcionamiento adecuado de los controles y botones.

Reemplazo del cable de corriente desmontable

(si correspondiera)

- El cable de corriente se puede desmontar de la entrada de corriente.
- Si duda del estado del cable de corriente, cámbielo únicamente por el cable de 2 hilos conductores proporcionado por Ameda.

Información técnica

Voltaje principal

Elite con cable de corriente desmontable 100 VCA a 240 VCA

Elite con cable de corriente incorporado 100/120V ~ o 220/240V ~ /CA

Frecuencia	50/60 Hz
Consumo de energía	30 VA
Fusible principal	T 1,6A
Clase de protección	Clase II
	Doble aislamiento

Nivel de seguridad = BF

Protección para el goteo IP 21

Condiciones de funcionamiento 33°F / 12°C a 99°F / 34°C, 20% a 70% humedad

Condiciones de transporte y almacenamiento -10°F / -23°C a 130°F / 54°C, 20% a 90% humedad

Frágil

Proteja de la luz del sol

Mantenga seco

Consulte Las Instrucciones de Uso

Peso

6,4 lb/2,9 kg

Dimensiones

10,0" de largo x 9,0" de ancho x 7,5" de alto
22,2 cm de largo x 26,7 cm de ancho x 18,4 cm de alto

Succión máxima

[mbar] [mm Hg]

HygieniKit simple

350 (-10%) 262 (-10%)

HygieniKit doble

310 (-15%) 232 (-15%)

Ciclo variable

30 - 60 / Min

De conformidad con



E325189 EQUIPO MÉDICO CON RESPECTO A DESCARGA ELÉCTRICA, INCENDIO Y PELIGROS MECÁNICOS SOLAMENTE. DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS IEC60601-1: 1988 + A1:1991 + A2:1995, IEC60601-1-2, CAN/CSA C22.2 No. 601.1-M90

CE 0086



Ameda, Inc.
485 Half Day Road
Buffalo Grove, IL 60089
USA

Los EQUIPOS MÉDICOS ELÉCTRICOS necesitan precauciones especiales con respecto a EMC y deben ser instalados y colocados en servicio de acuerdo con el EMC proporcionado en estas instrucciones de uso. Los equipos portátiles y móviles de comunicación RF pueden afectar los EQUIPOS MÉDICOS ELÉCTRICOS.

Advertencia: el uso de ACCESORIOS, transductores y cables que no sean los especificados, con excepción de los transductores y cables vendidos por el FABRICANTE de la bomba de extracción Ameda Elite como piezas de repuesto

para componentes internos, puede dar como resultado un aumento de las EMISIONES o una disminución de la INMUNIDAD de la bomba de extracción Ameda Elite.

Advertencia: la bomba de extracción Ameda Elite no debe ser usada junto a ni apilada con otros equipos y si fuera necesario el uso adyacente o apilado con otro equipo, debe observarse la bomba de extracción Ameda Elite para verificar el funcionamiento normal en la configuración en la cual será usada.


Pautas y declaración del fabricante; emisiones electromagnéticas		
La bomba de extracción Ameda Elite está diseñada para ser usada en el ambiente electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario de la		bomba de extracción Ameda Elite debe asegurarse de que se use en dicho ambiente.
Prueba de emisiones	Cumplimiento	Ambiente electromagnético - pautas
Emisiones de RF CISPR 11	Grupo 1	La bomba de extracción Ameda Elite usa energía RF únicamente para su funcionamiento interno. Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas, y no es probable que cause ninguna interferencia en los equipos electrónicos cercanos.
Emisiones de RF CISPR 11	Clase B	La bomba de extracción Ameda Elite es adecuada para el uso en todos los establecimientos, incluyendo establecimientos domésticos y en aquellos conectados directamente al suministro público de energía de bajo voltaje que abastece a los edificios usados con fines domésticos.
Emisiones armónicas IEC 61000-3-2	Clase A	
Fluctuaciones de voltaje/emisiones oscilantes IEC 61000-3-3	Cumple	

Pautas y declaración del fabricante; inmunidad electromagnética			
La bomba de extracción Ameda Elite está diseñada para ser usada en el ambiente electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario de la		bomba de extracción Ameda Elite debe asegurarse de que se use en dicho ambiente.	
Prueba de INMUNIDAD	Nivel de prueba IEC 60601	Nivel de cumplimiento	Ambiente electromagnético - pautas
Descarga electrostática (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV contacto ± 8 kV aire	± 6 kV contacto ± 8 kV aire	Los pisos deben ser de madera, hormigón o baldosas cerámicas. Si los pisos están cubiertos con un material sintético, la humedad relativa debe ser por lo menos del 30%.
Oscilaciones momentáneas/ráfagas eléctricas rápidas IEC 61000-4-4	± 2 kV para líneas de alimentación de corriente ± 1 kV para líneas de entrada/salida	± 2 kV para líneas de alimentación de corriente ± 1 kV para líneas de entrada/salida	La calidad de la alimentación principal debe ser la de un entorno típico comercial u hospitalario.
Sobrecarga IEC 61000-4-5	± 1 kV línea a línea ± 2 kV línea a tierra	± 1 kV línea a línea ± 2 kV línea a tierra	La calidad de la alimentación principal debe ser la de un entorno típico comercial u hospitalario.
Disminuciones de voltaje, las interrupciones cortas y las variaciones de voltaje en las líneas de entrada de suministro de energía IEC 61000-4-11	<5% U _T (>95% disminución en U _T) para 0,5 ciclo 40% U _T (60% disminución en U _T) para 5 ciclos 70% U _T (30% disminución en U _T) para 25 ciclos <5% U _T (>95% disminución en U _T) para 5 s	<5% U _T (>95% disminución en U _T) para 0,5 ciclo 40% U _T (60% disminución en U _T) para 5 ciclos 70% U _T (30% disminución en U _T) para 25 ciclos <5% U _T (>95% disminución en U _T) para 5 s	La calidad de la alimentación principal debe ser la de un entorno típico comercial u hospitalario. La calidad de la alimentación principal debe ser la de un entorno típico comercial u hospitalario. Si la usuaria de la bomba de extracción Ameda Elite necesita un funcionamiento continuo durante las interrupciones de energía principal, se recomienda conectar la bomba de extracción Ameda Elite a un suministro ininterrumpible de energía o a una batería.
Frecuencia de la energía (50/60 Hz) campo magnético IEC 61000-4-8	3A/m	3A/m	Los campos magnéticos de la frecuencia de la energía deben estar a niveles característicos de una ubicación típica en un entorno comercial u hospitalario.
REMARQUE : U _T es el voltaje principal CA antes de la aplicación del nivel de prueba.			

Pautas y declaración del fabricante; inmunidad electromagnética

La bomba de extracción Ameda Elite está diseñada para ser usada en el ambiente electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario de la

bomba de extracción Ameda Elite debe asegurarse de que se use en dicho ambiente.

Prueba de INMUNIDAD	Nivel de prueba IEC 60601	Nivel de cumplimiento	Ambiente electromagnético - pautas
RF conducida IEC 61000-4-6 RF emitida IEC 61000-4-3	3 Vrms 150 kHz a 80 MHz 3 V/m 80 MHz a 2,5 GHz	3 Vrms 3 V/m	<p>Los equipos portátiles y móviles de comunicaciones por RF no deben usarse a menos de la distancia de separación recomendada de cualquier parte de la bomba de extracción Ameda Elite, incluyendo los cables, la cual surge de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor.</p> <p>Distancia de separación recomendada $d = 1,2\sqrt{P}$</p> <p>$d = 1,2\sqrt{P}$ 80 MHz a 800 MHz $d = 2,3\sqrt{P}$ 800 MHz a 2,5 GHz</p> <p>En donde P es la clasificación máxima de potencia de salida del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor y d es la distancia de separación recomendada en metros (m).</p> <p>Las potencias de campo de los transmisores de RF fijos, tal como lo determina una inspección electromagnética del sitio^a deben ser menores que el nivel de cumplimiento en el rango de frecuencia.^b</p> <p>Puede tener lugar una interferencia cerca del equipo marcado con el siguiente símbolo:</p> 

NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de la frecuencia más alta.

NOTA 2 Estas pautas pueden no aplicarse en todas las situaciones. La propagación electromagnética es afectada por la absorción y reflexión de las estructuras, objetos y personas.

^a Las potencias de campo de los transmisores fijos, como estaciones base para radio teléfonos (celular/inalámbrico) y radios móviles terrestres, radio amateur, transmisión de radio AM y FM y transmisión de TV no pueden ser predichas teóricamente con

precisión. Para evaluar el ambiente electromagnético debido a transmisores de RF fijos, debe considerarse una inspección electromagnética de sitio. Si la potencia de campo medida en la ubicación en que se usa la bomba de extracción Ameda Elite excede el nivel de cumplimiento de RF mencionado anteriormente, debe observarse la bomba de extracción Ameda Elite para verificar su funcionamiento anormal. Si se observa un funcionamiento normal, puede ser necesario tomar medidas adicionales, como cambiar la orientación o ubicación de la bomba de extracción Ameda Elite.

^b Superado el rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las potencias de campo deben ser menores a 3 V/m.

Distancias de separación recomendadas entre equipos de comunicación de RF portátiles y móviles y la bomba de extracción Ameda Elite

La bomba de extracción Ameda Elite está diseñada para ser usada en un ambiente electromagnético donde las alteraciones de RF estén controladas. El cliente o el usuario de la bomba de extracción Ameda Elite puede ayudar a evitar la interferencia electromagnética manteniendo una

distancia mínima entre los equipos de comunicación por RF portátiles y móviles transmisores y la bomba de extracción Ameda Elite tal como se recomienda a continuación, de acuerdo con la potencia máxima de salida del equipo de comunicación.

Potencia máxima clasificada de salida del transmisor W	Distancia de separación de acuerdo con la frecuencia del transmisor m		
	150 kHz a 80 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	80 MHz a 800 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	800 MHz a 2,5 GHz $d = 2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Para transmisores clasificados con una potencia de salida máxima no mencionada, la distancia de separación d recomendada en metros (m) puede estimarse usando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, en donde P es la clasificación máxima de salida del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor.

NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de la frecuencia más alta de la distancia de separación.

NOTA 2 Estas pautas pueden no aplicarse en todas las situaciones. La propagación electromagnética es afectada por la absorción y reflexión de las estructuras, objetos y personas.

Cómo desechar el producto

Este producto contiene equipos eléctricos y electrónicos.



1. Los componentes internos de este producto pueden contener materiales peligrosos. Deseche este producto de acuerdo con los sistemas y las reglamentaciones locales o regionales para la manipulación de residuos.
2. No lo arroje a la basura municipal sin clasificar.

3. Para obtener más información sobre el comportamiento ambiental de este producto, visite nuestro sitio web www.ameda.com.

Garantía limitada Únicamente para producto original fabricado y para el usuario original

NO SE APLICA A PRODUCTOS REPARADOS O REACONDICIONADOS

La bomba de extracción eléctrica Ameda Elite (el "Producto") tiene garantía únicamente para el usuario original únicamente, ya sea este institucional o individual ("Primer usuario").

A partir de la fecha de compra de este Producto por parte del Primer usuario, Ameda, Inc. ("Ameda") garantiza el Producto al Primer usuario contra defectos del material o de mano de obra durante tres años para el mecanismo de la bomba. La única obligación de Ameda bajo esta garantía limitada será reparar o reemplazar, a su entera discreción, cualquier Producto que Ameda determine como defectuoso y que se confirme que está cubierto por esta garantía limitada expresa. La reparación o el reemplazo bajo esta garantía limitada es el único y exclusivo recurso para el Primer usuario. A fin de obtener servicio de garantía, deberá presentarse comprobante de compra en la forma de una factura recibida o documento de venta que pruebe que el Producto se encuentra dentro del período de garantía. Esta garantía limitada es emitida por Ameda ÚNICAMENTE al Primer usuario y no es asignable ni transferible. Para obtener servicios bajo garantía, póngase en contacto con Ameda por el 1.866.99 AMEDA(26332).

POR LA PRESENTE SE NIEGA RESPONSABILIDAD RESPECTO A TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR DEL PRODUCTO, SALVO HASTA DONDE LO PROHIBAN LAS LEYES CORRESPONDIENTES. AMEDA NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO—O INCIDENTAL, CONSIGUIENTE, ESPECIAL NI PUNITIVO DE TIPO ALGUNO POR INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA SOBRE EL PRODUCTO NI DE NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA POR IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY, SALVO LA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA ANTERIORMENTE ESTIPULADA; NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS SOBRE ESTE PRODUCTO Y POR LA PRESENTE SE DESLINDA RESPONSABILIDAD SOBRE CUALQUIER REPRESENTACIÓN ORAL, ESCRITA O DE CUALQUIER OTRO TIPO.

No aplicabilidad de la garantía

La garantía que antecede no se aplicará a insumos ni accesorios del producto. Entre ellos se incluyen:

- (i) el cable de corriente; y
- (ii) el sistema de recolección de leche Ameda HygieneKit (se vende por separado).

Además de cualquier otra limitación de la garantía anteriormente comentada, la garantía vencerá y perderá vigencia o efecto si ocurriera cualquiera de las siguientes cosas:

- (i) la causa del daño al Producto se debe a manipulación o uso inadecuado
- (ii) el Producto no recibió el mantenimiento adecuado por parte del usuario o del Cliente conforme a las indicaciones de Ameda
- (iii) se usaron accesorios o repuestos no aprobados por Ameda en el Producto conforme a las indicaciones de Ameda
- (iv) el Producto fue reparado por un proveedor de servicios no aprobado por Ameda.

Si ocurriera cualquiera de lo anteriormente descrito, Ameda no será responsable del daño del Producto, de sus piezas ni de lesiones que surjan de ello, ya sea directa o indirectamente. La garantía establecida previamente sustituye a todas las garantías previas con respecto al Producto comprado, ya sea por escrito o por otro medio.

Dentro de Estados Unidos: Llame a Servicio al cliente de Ameda al 1.866.99.AMEDA (26332) por cualquier duda respecto de esta garantía limitada y su aplicación a su producto.

Fuera de los Estados Unidos: llame a su distribuidor local o al lugar donde compró el Producto. Para obtener una lista de distribuidores en su país, visite www.ameda.com.



MOM INSPIRED. HOSPITAL TRUSTED.

Distributed in USA by:

Ameda, Inc.

485 Half Day Road

Buffalo Grove, IL 60089

1.866.99.AMEDA (26332)

Distributed in Canada by:

Distribué au Canada par:

Mothers Choice Products Ltd.

2133-11871 Horseshoe Way

Richmond, BC V7A 5H5

1.800.604.6225

Ameda, Elite, SMB, Lact-e, HygieniKit and associated logos are trademarks of Ameda, Inc.

Any other trademarks, brand or images appearing herein are property of their respective owners and are used herein with expressed or implied permission.

©2013 Ameda, Inc.

25706202-0813

Distributed in Australia by:

Advantage Health Care

34 Percy Street

Mordialloc VIC 3195

61 (3) 9580 9288

Distribution in other countries:

For product information or feedback, visit

www.ameda.com

CE 0086



Ameda, Inc.
485 Half Day Road
Buffalo Grove, IL 60089
USA