Capnostream[™]20p Monitor portátil de mesa para oximetría de pulso/capnografía

Manual del usuario

PN: PT00095119A

(E₀₄₈₂

Aviso: La compra de este producto no otorga licencia expresa ni implícita bajo ninguna patente de Oridion Medical 1987 Ltd. respecto al uso del instrumento con cualquier accesorio que no haya sido fabricado por o bajo licencia de Oridion Medical 1987 Ltd.

La posesión o compra de este dispositivo no otorga licencia expresa ni implícita para usar el dispositivo con sensores o cables no autorizados que pudieran, solos o en combinación con este dispositivo, estar dentro del ámbito de una o más de las patentes relacionadas con este dispositivo.

Medtronic, el logotipo de Medtronic y las palabras Further, Together son marcas comerciales de Medtronic. TM* Marca comercial de su respectivo propietario. Todas las demás marcas son marcas comerciales de una empresa de Medtronic.

Oridion Medical 1987 Ltd., Covidien y Nellcor Puritan Bennett LLC son empresas de Medtronic.

El componente de capnografía de este producto está cubierto por Patentes de EE. UU.: www.covidien.com/patents.

El componente de oximetría de pulso de este producto está cubierto por Patentes de EE. UU.: www.covidien.com/patents.

Exenciones

La responsabilidad de Oridion Medical 1987 Ltd. al amparo de esta garantía no incluye ningún daño provocado durante el transporte ni otros cargos o responsabilidad por daños directos, indirectos o derivados ni retrasos provocados por un uso incorrecto o una mala aplicación del producto, o la sustitución de piezas o accesorios por piezas o accesorios no aprobados por Oridion Medical 1987 Ltd.

Se considera que toda la información recogida en este manual es correcta. Oridion Medical 1987 Ltd. no será responsable de errores derivados de la aplicación de las instrucciones de funcionamiento o uso de este manual.

Copyright © 2018 Oridion Medical 1987 Ltd. Todos los derechos reservados.

Índice

Índice	1
Lista de figuras	8
Lista de tablas	10
Oridion Medical 1987 Ltd. ("Oridion Medical") –	
Garantía de los monitores Oridion	11
Información de seguridad	13
Advertencias	
Consideraciones generales	
Exploración de RM	14
Uso del monitor con desfibriladores	14
Alarmas	14
Peligro de incendio	15
Electricidad	
Interferencia electromagnética	
Definiciones	
Capítulo 1	17
Acerca de este manual	17
Descripción general	
Uso previsto	
Indicaciones específicas de uso	
Quién debe leer este manual	
Servicio técnico	
Símbolos	
Capítulo 2	20
Descripción general de la tecnología utilizada	20
Introducción	
Características	
Descripción general de la tecnología utilizada	21
¿Qué es la capnografía?	21
¿Qué es la oximetría de pulso?	21

Capítulo 3	22
Monitor Capnostream™20p	22
Desembalaie e inspección	
Instalación del paquete de baterías	
Comprobación de la batería v las conexiones de CA	
Manipulación de la batería	25
Almacenamiento de la batería	25
Eliminación de la batería	25
Uso con la batería y con corriente eléctrica	26
Montaje del monitor	26
Configuración del mantenimiento periódico	27
Accesorios	27
Accesorios disponibles	27
Placa de montaje del monitor	28
Papel de impresora	28
Botones, indicadores y conexiones	
Vista frontal del monitor	28
Botones de control del panel frontal	
Panel trasero del monitor	31
Vistas laterales izquierda y derecha del monitor	32
Encendido del monitor	32
Secciones estándar de la pantalla de visualización	
Visualización estándar de la pantalla de inicio	34
Visualización numérica de la pantalla de inicio	
Parada del monitor	
Desplazamiento por la pantalla	
Cambios de configuración	40
Configuración de fecha, hora, idioma y otras opciones	41
Tiempos de espera de la pantalla	41
Tiempos de espera de la pantalla	41
Capnostream [™] 20p: hoja de verificación funcional	
Capítulo 4	44
, Uso del monitor Capnostream™20p	44
Preparación del monitor para un paciente	44
Configuración del tipo de paciente	
Liso de casos y números de identificación de nacientes	
Introducción de eventos de paciente	
Cambio del volumen de las alarmas y los pulsos	۲۲۲ 17
	۲+۲
Volumen del tono de pulso	۰۰۰۰۰٬۰۰۰ ۸۹
Opciones predeterminadas de volumen de alarma	

Uso del sistema de evacuación de gases 49 Apagado de la bomba para succión o lavado 50 Modo Demo	Retraso de alarma	49
Apagado de la bomba para succión o lavado 50 Modo Demo. 50 Gráfico de referencia de los menús de pantallas del monitor. 50 Capítulo 5 53 Capnografía con el monitor Capnostream™20p 53 Consumibles Microstream™ EtCO2 53 Principios básicos 54 Consumibles Microstream™ EtCO2 54 Datos de CO2 que muestra el monitor Capnostream™20p 55 Parámetros de CO2 ajustables. 56 Monitorización de cO2 ajustables. 56 Monitorización de cO2 durante una exploración de RM 57 Capítulo 6 58 Distores Nellcor™ SpO2 58 Sensores Nellcor™ SpO2 58 Periodo de actualización de datos, promediación de los datos y procesamiento de señales. 59 Selecidn de los sensores Nellcor™ SpO2 58 Nensaje de límite de alarma de SPO2 64 Capítulo 7 65 Nensaje de límite de alarma de SPO2 64 Capítulo 7 65 Sensores Nelloor™ SpO2 64 Consideraciones sobre el funcionamiento. 60 Conasideraciones dos po 2 ajustables 63 <th>Uso del sistema de evacuación de gases</th> <th> 49</th>	Uso del sistema de evacuación de gases	49
Modo Demo	Apagado de la bomba para succión o lavado	50
Gráfico de referencia de los menús de pantallas del monitor. 50 Capítulo 5 53 Capnografía con el monitor Capnostream™20p 53 Consumibles Microstream™ EtCO2 53 Principios básicos 54 Consumibles Microstream™ EtCO2 54 Datos de CO2 que muestra el monitor Capnostream™20p 55 Parámetros de CO2 ajustables 56 Monitorización de CO2 durante una exploración de RM. 57 Capítulo 6 58 Datos de Dulso con el monitor Capnostream™20p 58 Sensores Nellcor™ SpO2 58 Periodo de actualización de datos, promediación de los datos y procesamiento de señales.59 59 Consideraciones sobre el funcionamiento. 60 Conexión de un sensor SpO2 al monitor 62 Datos de SpO2 que muestra el monitor Capnostream™20p 62 Parámetros de SpO2 que subables 63 Mensaje de límite de alarma de SPO2 64 Capítulo 7 65	Modo Demo	50
Capítulo 5 53 Capnografía con el monitor Capnostream™20p 53 Consumibles Microstream™ EtCO2 53 Principios básicos 54 Consumibles Microstream™ EtCO2 54 Consumitorización de una FilterLine™ 55 Parámetros de CO2 ajustables 56 Monitorización de CO2 durante una exploración de RM	Gráfico de referencia de los menús de pantallas del monitor	50
Capnografía con el monitor Capnostream™20p 53 Consumibles Microstream™ EtCO2 53 Principios básicos 54 Consumibles Microstream™ EtCO2 54 Datos de CO2 que muestra el monitor Capnostream™ 20p. 55 Parámetros de CO2 ajustables 56 Monitorización de CO2 durante una exploración de RM. 57 Capítulo 6 58 Dximetría de pulso con el monitor Capnostream™20p 58 Sensores Nellcor™ SpO2 58 Periodo de actualización de datos, promediación de los datos y procesamiento de señales59 59 Consideraciones sobre el funcionamiento. 60 Conexión de un sensor SpO2 al monitor 62 Parámetros de SpO2 que muestra el monitor Capnostream™20p 62 Parámetros de SpO2 ajustables 63 Mensaje de límite de alarma de SPO2 64 Capítulo 7 65 Introducción 65	Capítulo 5	53
Consumibles Microstream [™] EtCO2 53 Principios básicos 54 Consumibles Microstream [™] EtCO2 55 Parámetros de CO2 ajustables 56 Monitorización de CO2 durante una exploración de RM. 57 Capítulo 6 58 Detos de actualización de datos, promediación de los datos y procesamiento de señales. 59 Sensores Nellcor [™] SpO2 59 Consideraciones sobre el funcionamiento. 60 Conexión de un sensor SpO2 al monitor 62 Parámetros de SpO2 que muestra el monitor Capnostream [™] 20p 62 Parámetros de SpO2 quistables 63 Mensaje de límite de alarma de SPO2 64	Capnografía con el monitor Capnostream™20p	53
Principios básicos 54 Consumibles Microstream™ EtCO2 54 Conexión de una FilterLine™ 54 Datos de CO2 que muestra el monitor Capnostream™20p. 55 Parámetros de CO2 ajustables 56 Monitorización de CO2 durante una exploración de RM. 57 Capítulo 6 58 Dximetría de pulso con el monitor Capnostream™20p 58 Sensores Nellcor™ SpO2 58 Periodo de actualización de datos, promediación de los datos y procesamiento de señales. 59 Selección de los sensores Nellcor™ SpO2 58 Periodo de actualización de datos, promediación de los datos y procesamiento de señales. 59 59 Consideraciones sobre el funcionamiento. 60 Conexión de un sensor SpO2 al monitor 62 Datos de SpO2 que muestra el monitor Capnostream™20p 62 Parámetros de SpO2 ajustables 63 Mensaje de límite de alarma de SPO2 64 Capítulo 7 65 Integrated Pulmonary Index™ 65 Introducción 66 Advertencias 66 Opciones del IPI 66 Opciones del IPI 66 Advertencias	Consumibles Microstream [™] EtCO₂	53
Consumibles Microstream™ EtCO2 54 Conexión de una FilterLine™ 54 Datos de CO2 que muestra el monitor Capnostream™20p. 55 Parámetros de CO2 ajustables 56 Monitorización de CO2 durante una exploración de RM. 57 Capítulo 6 58 Dximetría de pulso con el monitor Capnostream™20p 58 Sensores Nellcor™ SpO2 58 Periodo de actualización de datos, promediación de los datos y procesamiento de señales. 59 Consideraciones sobre el funcionamiento. 60 Conexión de un sensor SpO2 al monitor. 62 Datos de SpO2 que muestra el monitor Capnostream™20p. 62 Parámetros de SpO2 ajustables 63 Mensaje de límite de alarma de SPO2 64 Capítulo 7 65 Integrated Pulmonary Index™ 65 Introducción 66 Advertencias 66 Opciones del IPI 66 Opciones del IPI 66 Apneas por hora 67 Apneas por hora 67 Apneas por hora 67 Apneas por hora 67 Apneas por hora 67 <td>Principios básicos</td> <td>54</td>	Principios básicos	54
Conexión de una FilterLine™ 54 Datos de CO2 que muestra el monitor Capnostream™20p 55 Parámetros de CO2 ajustables 56 Monitorización de CO2 durante una exploración de RM 57 Capítulo 6 58 Dximetría de pulso con el monitor Capnostream™20p 58 Sensores Nellcor™ SpO2 58 Periodo de actualización de datos, promediación de los datos y procesamiento de señales. 59 Selección de los sensores Nellcor™ SpO2 59 Conexión de un sensor SpO2 al monitor 60 Conexión de un sensor SpO2 al monitor Capnostream™20p 62 Parámetros de SpO2 que muestra el monitor Capnostream™20p 62 Parámetros de SpO2 que muestra el monitor Capnostream™20p 62 Parámetros de SpO2 ajustables 63 Mensaje de límite de alarma de SPO2 64 Capítulo 7 65 Integrated Pulmonary Index™ 65 Advertencias 66 Pantalla del IPI 66 Opciones del IPI 66 Capítulo 8 67 Apneas por hora 67 Apneas por hora 67 Apneas por hora 67	Consumibles Microstream™ EtCO₂	54
Datos de CO2 que muestra el monitor Capnostream™20p	Conexión de una FilterLine™	54
Parámetros de CO2 ajustables 56 Monitorización de CO2 durante una exploración de RM. 57 Capítulo 6 58 Dximetría de pulso con el monitor Capnostream™20p 58 Sensores Nellcor™ SpO2. 58 Periodo de actualización de datos, promediación de los datos y procesamiento de señales. 59 Selección de los sensores Nellcor™ SpO2. 59 Consideraciones sobre el funcionamiento. 60 Conexión de un sensor SpO2 al monitor . 62 Datos de SpO2 que muestra el monitor Capnostream™20p. 62 Parámetros de SpO2 ajustables 63 Mensaje de límite de alarma de SPO2 64 Capítulo 7 65 Integrated Pulmonary Index™ 65 Advertencias 66 Parialla del IPI. 66 Opciones del IPI. 66 Capítulo 8 67 Apneas por hora e índice de desaturación de oxígeno 67 Apneas por hora. 67 Apneas por hora de Capnostream™2	Datos de CO₂ que muestra el monitor Capnostream™20p	55
Monitorización de CO₂ durante una exploración de RM	Parámetros de CO2 ajustables	56
Capítulo 6 58 Dximetría de pulso con el monitor Capnostream™20p 58 Sensores Nellcor™ SpO2 58 Periodo de actualización de datos, promediación de los datos y procesamiento de señales. 59 59 Selección de los sensores Nellcor™ SpO2 60 Consideraciones sobre el funcionamiento. 60 Conexión de un sensor SpO2 al monitor 62 Datos de SpO2 que muestra el monitor Capnostream™20p. 62 Parámetros de SpO2 ajustables 63 Mensaje de límite de alarma de SPO2 64 Capítulo 7 65 Integrated Pulmonary Index™ 65 Introducción 66 Pantalla del IPI 66 Opciones del IPI 67 Apneas por hora e índice de desaturación de oxígeno 67 Apneas por hora 67 Apneas por hora de Capnostream™20p. 67 Apneas por hora 68 <	Monitorización de CO2 durante una exploración de RM	57
Dximetría de pulso con el monitor Capnostream™20p 58 Sensores Nellcor™ SpO2	Capítulo 6	58
Sensores Nellcor™ SpO2 58 Periodo de actualización de datos, promediación de los datos y procesamiento de señales. 59 Selección de los sensores Nellcor™ SpO2 59 Consideraciones sobre el funcionamiento 60 Conexión de un sensor SpO2 al monitor 62 Datos de SpO2 que muestra el monitor Capnostream™20p 62 Parámetros de SpO2 ajustables 63 Mensaje de límite de alarma de SPO2 64 Capítulo 7 65 Integrated Pulmonary Index™ 65 Advertencias 66 Pantalla del IPI 66 Opciones del IPI 66 Capítulo 8 67 Apneas por hora e índice de desaturación de oxígeno 67 Apneas por hora 67 Apneas por hora de Capnostream™20p 67 Alarma visual de A/h 68 Índice de desaturación de oxígeno (ODI) 68 Índice de desaturación de oxígeno (ODI) 68	Oximetría de pulso con el monitor Capnostream™20p	58
Periodo de actualización de datos, promediación de los datos y procesamiento de señales59 Selección de los sensores Nellcor™ SpO2 Consideraciones sobre el funcionamiento	Sensores Nellcor™ SpO₂	58
Selección de los sensores Nellcor™ SpO2 59 Consideraciones sobre el funcionamiento 60 Conexión de un sensor SpO2 al monitor 62 Datos de SpO2 que muestra el monitor Capnostream™ 20p 62 Parámetros de SpO2 ajustables 63 Mensaje de límite de alarma de SPO2 64 Capítulo 7 65 Integrated Pulmonary Index™ 65 Introducción 65 Advertencias 66 Pantalla del IPI 66 Opciones del IPI 66 Capítulo 8 67 Apneas por hora e índice de desaturación de oxígeno 67 Apneas por hora 67 Apneas por hora de Capnostream™20p 67 Alarma visual de A/h 68 Índice de desaturación de oxígeno (ODI) 68 Índice de desaturación de oxígeno (ODI) 68	Periodo de actualización de datos, promediación de los datos y procesamiento de	señales59
Consideraciones sobre el funcionamiento	Selección de los sensores Nellcor™ SpO₂	
Conexión de un sensor SpO₂ al monitor 62 Datos de SpO₂ que muestra el monitor Capnostream™20p 62 Parámetros de SpO₂ ajustables 63 Mensaje de límite de alarma de SPO₂ 64 Capítulo 7 65 Integrated Pulmonary Index™ 65 Introducción 65 Advertencias 66 Pantalla del IPI 66 Opciones del IPI 66 Capítulo 8 67 Apneas por hora e índice de desaturación de oxígeno 67 Apneas por hora 67 Apneas por hora de Capnostream™20p. 67 Apneas por hora 68 Índice de desaturación de oxígeno (ODI) 68 Índice de desaturación de oxígeno (ODI) 68	Consideraciones sobre el funcionamiento	60
Datos de SpO2 que muestra el monitor Capnostream™20p	Conexión de un sensor SpO2 al monitor	62
Parámetros de SpO₂ ajustables 63 Mensaje de límite de alarma de SPO₂ 64 Capítulo 7 65 Integrated Pulmonary Index [™] 65 Introducción 65 Advertencias 66 Pantalla del IPI 66 Opciones del IPI 66 Capítulo 8 67 Apneas por hora e índice de desaturación de oxígeno 67 Apneas por hora 67 Apneas por hora 67 Apneas por hora de Capnostream [™] 20p 67 Alarma visual de A/h 68 Índice de desaturación de oxígeno (ODI) 68 Índice de annea y desaturación de Oc 68	Datos de SpO₂ que muestra el monitor Capnostream™20p	62
Mensaje de límite de alarma de SPO₂ 64 Capítulo 7 65 Integrated Pulmonary Index™ 65 Introducción 65 Advertencias 66 Pantalla del IPI 66 Opciones del IPI 66 Capítulo 8 67 Apneas por hora e índice de desaturación de oxígeno 67 Apneas por hora 67 Apneas por hora de Capnostream™20p 67 Alarma visual de A/h 68 Índice de desaturación de oxígeno (ODI) 68 Índice de apnea y desaturación de Os 68	Parámetros de SpO2 ajustables	63
Capítulo 7 65 Integrated Pulmonary Index™ 65 Introducción 65 Advertencias 66 Pantalla del IPI 66 Opciones del IPI 66 Capítulo 8 67 Apneas por hora e índice de desaturación de oxígeno 67 Introducción 67 Apneas por hora 67 Apneas por hora de Capnostream™20p 67 Alarma visual de A/h 68 Índice de desaturación de oxígeno (ODI) 68 Índice de annea y desaturación de Ope 68	Mensaje de límite de alarma de SPO2	64
Integrated Pulmonary Index™ 65 Introducción	Capítulo 7	65
Introducción	Integrated Pulmonary Index™	65
Advertencias 66 Pantalla del IPI 66 Opciones del IPI 66 Capítulo 8 67 Apneas por hora e índice de desaturación de oxígeno 67 Introducción 67 Apneas por hora 67 Apneas por hora de Capnostream™20p 67 Alarma visual de A/h 68 Índice de desaturación de oxígeno (ODI) 68 Informe de appea y desaturación de Op 68	Introducción	65
Pantalla del IPI 66 Opciones del IPI 66 Capítulo 8 67 Apneas por hora e índice de desaturación de oxígeno 67 Introducción 67 Apneas por hora 67 Apneas por hora 67 Apneas por hora 67 Apneas por hora 67 Apneas por hora de Capnostream™20p 67 Alarma visual de A/h 68 Índice de desaturación de oxígeno (ODI) 68 Informe de appea y desaturación de Os 68	Advertencias	
Opciones del IPI	Pantalla del IPI	
Capítulo 8 67 Apneas por hora e índice de desaturación de oxígeno 67 Introducción	Opciones del IPI	66
Apneas por hora e índice de desaturación de oxígeno 67 Introducción	Capítulo 8	67
Introducción	Apneas por hora e índice de desaturación de oxígeno	67
Apneas por hora 67 Apneas por hora de Capnostream™20p 67 Alarma visual de A/h 68 Índice de desaturación de oxígeno (ODI) 68 Informe de apnea y desaturación de Os 68	Introducción	67
Apneas por hora de Capnostream™20p	Apneas por hora	67
Alarma visual de A/h	Apneas por hora de Capnostream™20p	67
Índice de desaturación de oxígeno (ODI)	Alarma visual de A/h	68
$lnforme de annea y desaturación de O_{a}$	Índice de desaturación de oxígeno (ODI)	68
	Informe de apnea y desaturación de O2	68
Monitorización con A/h y ODI68	Monitorización con A/h y ODI	68

Visualización de A/h y ODI inteligente en la pantalla de inicio	
Opción A/h y ODI	
Modo Demo de A/h y ODI	
Capítulo 9	71
Alarmas y mensajes	71
Introducción	71
Visualización de alarmas	
Prioridad de los mensajes	74
Retraso de alarma	74
Tipos de alarmas	75
Alarmas de prioridad alta	76
Alarmas de prioridad media	77
Mensajes de aviso	77
Mensajes de aviso silenciosos	78
Modo de espera de parámetros	
Silenciamiento de alarmas	
Cambio de los límites de alarma	
Comprobación de la configuración de las alarmas	
Alarmas de SpO2 y SatSeconds	
Pantalla de alarma de SatSeconds	84
Configuración predeterminada de los límites de alarma	
Capítulo 10	85
Uso de las tendencias	85

Introducción	85
Pantallas de visualización de tendencias	
Pantalla de visualización gráfica de las tendencias	86
Visualización gráfica de las tendencias	87
Uso de DESPLAZAR y ZOOM	
Pantalla de vista tabular de las tendencias	89
Selección de parámetros de tendencias	
Notas importantes sobre los informes de tendencias	
Eventos específicos como se muestran en los datos de tendencias	
Uso de la pantalla Tendencia gráfica para monitorizar a los pacientes	
Impresión de los datos de tendencia	
Borrado de la memoria de tendencias	
Configuración de tendencias	
Modo de marcaje de eventos	94
Pantalla gráfica de tendencias	94
Pantalla de incremento de tendencia	94

Informes 95 Informe de apnea y desaturación de O₂	Capítulo 11	95
Informe de apnea y desaturación de O₂	Informes	95
Opciones para informes impresos 99 Informes impresos 99 Ejemplos de informes. 103 Ejemplos de informes de casos 103 Ejemplos de informes de casos 104 Capítulo 12 105 Descarga de los datos de pacientes 105 Introducción 105 Transferencia de datos a través del puerto de datos USB 106 Convención de nomenclatura para archivos USB 108 Ejemplos 109 Mensajes de error USB 109 Lectura de los datos del paciente almacenados en archivos de Capnostream [™] 20p 110 Transferencia de datos a través del puerto RS-232 110 Salida de datos analógica con Capnostream [™] 20p 111 Cambio de los valores predeterminados de los canales digital/analógico en Capnostream [™] 20p Capinostream [™] 20p 114 Sesión de trabajo con el sistema digital/analógico. 116 Tipos de sistemas de llamada a enfermera. 117 Cable de llamada a enfermera. 118 Comprobación de la llamada a enfermera. 117 Cable de llamada a enfermera. 118 Comprobación de la llamada a enfermera.	Informe de apnea y desaturación de O2	95
Informes impresos	Opciones para informes impresos	99
Ejemplos de informes 103 Ejemplos de informes de casos 103 Ejemplos de informes de tendencias 104 Capítulo 12 105 Descarga de los datos de pacientes 105 Introducción 105 Transferencia de datos a través del puerto de datos USB 105 Convención de nomenclatura para archivos USB 108 Ejemplos 109 Mensajes de error USB 109 Lectura de los datos del paciente almacenados en archivos de Capnostream™20p 110 Transferencia de datos a través del puerto RS-232 110 Salida de datos analógica con Capnostream™20p 110 Convención de Capnostream™20p 110 Capitotá de las valores predeterminados de los canales digital/analógico en 113 Calibración del dispositivo analógico para Capnostream™20p 114 Sesión de trabajo con el sistema digital/analógico 116 Tipos de sistemas de llamada a enfermera 117 Cable de llamada a enfermera 118 Comprobación de la llamada a enfermera 118 Comprobación de la llamada a enfermera 118 Capítulo 13 121 Introducción	Informes impresos	99
Ejemplos de informes de casos 103 Ejemplos de informes de tendencias 104 Capítulo 12 105 Descarga de los datos de pacientes 105 Introducción 105 Transferencia de datos a través del puerto de datos USB 105 Convención de nomenclatura para archivos USB 108 Ejemplos 109 Lectura de los datos del paciente almacenados en archivos de Capnostream™20p 110 Transferencia de datos a través del puerto RS-232 110 Salida de datos analógica con Capnostream™20p 110 Conexión de Capnostream™20p un dispositivo analógico mediante el cable D/A 111 Capitoria di dispositivo analógico para Capnostream™20p 114 Sesión de trabajo con el sistema digital/analógico 116 Función de Ilamada a enfermera 116 Tipos de sistemas de lamada a enfermera. 117 Activación de la llamada a enfermera. 118 Comprobación de la llamada a enfermera. 119 Funcionamiento con sistemas de datos de pacientes del hospital 119 Funcionamiento con sistemas de datos de pacientes del hospital 119 Funcionamiento y solución de problemas 121	, Ejemplos de informes	103
Ejemplos de informes de tendencias 104 Capítulo 12 105 Descarga de los datos de pacientes 105 Introducción 105 Transferencia de datos a través del puerto de datos USB 105 Convención de nomenclatura para archivos USB 108 Ejemplos 109 Mensajes de error USB 109 Lectura de los datos del paciente almacenados en archivos de Capnostream™20p 110 Transferencia de datos a través del puerto RS-232 110 Salida de datos analógica con Capnostream™20p 110 Convexión de Capnostream™20p y un dispositivo analógico mediante el cable D/A 111 Cambio de los valores predeterminados de los canales digital/analógico en 113 Calibración del dispositivo analógico para Capnostream™20p 114 Sesión de trabajo con el sistema digital/analógico. 114 Sesión de trabajo con el sistema digital/analógico. 116 Tipos de sistemas de llamada a enfermera. 117 Cable de llamada a enfermera 118 Comprobación de la llamada a enfermera 118 Funcionamiento con sistemas de datos de pacientes del hospital. 119 Funcionamiento con sistemas vEGA™* de Nuvon 120 <td>Ejemplos de informes de casos</td> <td> 103</td>	Ejemplos de informes de casos	103
Capítulo 12 105 Descarga de los datos de pacientes 105 Introducción. 105 Transferencia de datos a través del puerto de datos USB. 105 Convención de nomenclatura para archivos USB. 108 Ejemplos. 109 Mensajes de error USB. 109 Lectura de los datos del paciente almacenados en archivos de Capnostream™20p. 110 Transferencia de datos a través del puerto RS-232 110 Salida de datos analógica con Capnostream™20p 110 Conexión de Capnostream™20p y un dispositivo analógico mediante el cable D/A. 111 Cambio de los valores predeterminados de los canales digital/analógico en 113 Calibración del dispositivo analógico para Capnostream™20p. 114 Sesión de trabajo con el sistema digital/analógico. 116 Función de llamada a enfermera. 117 Cable de llamada a enfermera. 117 Cable de la llamada a enfermera. 118 Comprobación de la llamada a enfermera. 117 Activación de la llamada a enfermera. 118 Funcionamiento con sistemas VEGA™* de Nuvon. 120 Capítulo 13 121 Introducción 121	Ejemplos de informes de tendencias	104
Descarga de los datos de pacientes 105 Introducción 105 Transferencia de datos a través del puerto de datos USB 105 Convención de nomenclatura para archivos USB 108 Ejemplos 109 Mensajes de error USB 109 Lectura de los datos del paciente almacenados en archivos de Capnostream™20p 110 Transferencia de datos a través del puerto RS-232 110 Salida de datos analógica con Capnostream™20p 110 Conexión de Capnostream™20p un dispositivo analógico mediante el cable D/A 111 Cambio de los valores predeterminados de los canales digital/analógico en 113 Calibración del dispositivo analógico para Capnostream™20p 114 Sesión de trabajo con el sistema digital/analógico 116 Función de llamada a enfermera 117 Cable de la llamada a enfermera 118 Comprobación de la llamada a enfermera 118 Funcionamiento con sistemas de datos de pacientes del hospital 119 Funcionamiento y solución de problemas 121 Introducción 121 Información sobre las horas que faltan para el mantenimiento del monitor 121 Información de CO2 123	Capítulo 12	105
Introducción. 105 Transferencia de datos a través del puerto de datos USB. 105 Convención de nomenclatura para archivos USB. 108 Ejemplos. 109 Mensajes de error USB. 109 Lectura de los datos del paciente almacenados en archivos de Capnostream™20p 110 Transferencia de datos a través del puerto RS-232 110 Salida de datos analógica con Capnostream™20p 110 Conexión de Capnostream™20p y un dispositivo analógico mediante el cable D/A 111 Cambio de los valores predeterminados de los canales digital/analógico en Capnostream™20p Capnostream™20p 113 Calibración del dispositivo analógico para Capnostream™20p 114 Sesión de trabajo con el sistema digital/analógico 116 117 Cable de llamada a enfermera 116 117 Cable de llamada a enfermera 117 Activación de la llamada a enfermera 118 Comprobación de la llamada a enfermera 118 119 119 Funcionamiento con sistemas de datos de pacientes del hospital 119 119 Funcionamiento con sistemas du datos de pacientes del hospital 121 121 Mantenimiento y solución de problemas 121 <td>Descarga de los datos de pacientes</td> <td>105</td>	Descarga de los datos de pacientes	105
Transferencia de datos a través del puerto de datos USB. 105 Convención de nomenclatura para archivos USB. 108 Ejemplos. 109 Mensajes de error USB. 109 Lectura de los datos del paciente almacenados en archivos de Capnostream™20p 110 Transferencia de datos a través del puerto RS-232 110 Salida de datos analógica con Capnostream™20p 110 Conexión de Capnostream™20p y un dispositivo analógico mediante el cable D/A 111 Cambio de los valores predeterminados de los canales digital/analógico en Capnostream™20p Calibración del dispositivo analógico para Capnostream™20p 114 Sesión de trabajo con el sistema digital/analógico. 116 <i>Función de llamada a enfermera</i> 117 Cable de llamada a enfermera 118 Comprobación de la llamada a enfermera 119 Funcionamiento con sistemas de datos de pacientes del hospital 119 Funcionamiento con sistemas du data en a entermera 121 Introducción 121 Introducción 121 Introducción 121 Mantenimiento y solución de problemas 121 Introducción 123 Procedimiento	Introducción	105
Convención de nomenclatura para archivos USB. 108 Ejemplos. 109 Mensajes de error USB. 109 Lectura de los datos del paciente almacenados en archivos de Capnostream™20p 110 Transferencia de datos a través del puerto RS-232 110 Salida de datos analógica con Capnostream™20p 110 Conexión de Capnostream™20p y un dispositivo analógico mediante el cable D/A 111 Cambio de los valores predeterminados de los canales digital/analógico en 113 Calibración del dispositivo analógico para Capnostream™20p 114 Sesión de trabajo con el sistema digital/analógico 116 Función de llamada a enfermera. 116 Tipos de sistemas de llamada a enfermera. 117 Cable de llamada a enfermera. 118 Comprobación de la llamada a enfermera. 119 Funcionamiento con sistemas de datos de pacientes del hospital. 119 Funcionamiento y solución de problemas 121 Información sobre las horas que faltan para el mantenimiento del monitor 121 Información de calibración de CO2 123 Procedimiento de comprobación de la calibración 123 Mantenimiento. 124 Sustitución de fusibles.	Transferencia de datos a través del puerto de datos USB	105
Ejemplos. 109 Mensajes de error USB. 109 Lectura de los datos del paciente almacenados en archivos de Capnostream™20p. 110 Transferencia de datos a través del puerto RS-232. 110 Salida de datos analógica con Capnostream™20p. 110 Conexión de Capnostream™20p y un dispositivo analógico mediante el cable D/A 111 Cambio de los valores predeterminados de los canales digital/analógico en 113 Capnostream™20p. 114 Sesión de trabajo con el sistema digital/analógico. 116 Función de llamada a enfermera. 116 Tipos de sistemas de llamada a enfermera. 117 Cable de llamada a enfermera. 118 Comprobación de la llamada a enfermera. 118 Funcionamiento con sistemas VEGA™* de Nuvon. 120 Capítulo 13 121 Mantenimiento y solución de problemas 121 Información sobre las horas que faltan para el mantenimiento del monitor 121 Calibración de comprobación de la calibración de CO2 123 Procedimiento de comprobación de la calibración 123 Mantenimiento. 124 Sustitución de comprobación de la calibración 123 <t< td=""><td>Convención de nomenclatura para archivos USB</td><td> 108</td></t<>	Convención de nomenclatura para archivos USB	108
Mensajes de error USB. 109 Lectura de los datos del paciente almacenados en archivos de Capnostream™20p 110 Transferencia de datos a través del puerto RS-232 110 Salida de datos analógica con Capnostream™20p 110 Conexión de Capnostream™20p y un dispositivo analógico mediante el cable D/A 111 Cambio de los valores predeterminados de los canales digital/analógico en 113 Calibración del dispositivo analógico para Capnostream™20p 114 Sesión de trabajo con el sistema digital/analógico 116 Función de llamada a enfermera. 116 Tipos de sistemas de llamada a enfermera. 117 Cable de llamada a enfermera. 118 Comprobación de la llamada a enfermera. 118 Funcionamiento con sistemas de datos de pacientes del hospital. 119 Funcionamiento con sistemas VEGA™* de Nuvon. 120 Capítulo 13 121 Información sobre las horas que faltan para el mantenimiento del monitor 121 Información de calibración de CO2 122 Comprobación de calibración de CO2 123 Procedimiento de comprobación de la calibración 123 Mantenimiento 124 Información sobre las horas	Ejemplos	
Lectura de los datos del paciente almacenados en archivos de Capnostream™20p 110 Transferencia de datos a través del puerto RS-232 110 Salida de datos analógica con Capnostream™20p 110 Conexión de Capnostream™20p y un dispositivo analógico mediante el cable D/A 111 Cambio de los valores predeterminados de los canales digital/analógico en Capnostream™20p 113 Calibración del dispositivo analógico para Capnostream™20p 114 Sesión de trabajo con el sistema digital/analógico 116 Función de llamada a enfermera 116 Tipos de sistemas de llamada a enfermera 117 Cable de llamada a enfermera 118 Comprobación de la llamada a enfermera 118 Funcionamiento con sistemas de datos de pacientes del hospital 119 Funcionamiento con sistemas VEGA™* de Nuvon 120 Capítulo 13 121 Información sobre las horas que faltan para el mantenimiento del monitor 121 Información de comprobación de la calibración 123 Procedimiento de comprobación de la calibración 123 Nantenimiento. 124 Sustitución de comprobación de la calibración de la calibración 124 Sustitución de lordo de zapel de la impresora	Mensajes de error USB	109
Transferencia de datos a través del puerto RS-232. 110 Salida de datos analógica con Capnostream™20p 110 Conexión de Capnostream™20p y un dispositivo analógico mediante el cable D/A 111 Cambio de los valores predeterminados de los canales digital/analógico en 113 Calibración del dispositivo analógico para Capnostream™20p 114 Sesión de trabajo con el sistema digital/analógico 116 Función de llamada a enfermera 116 Tipos de sistemas de llamada a enfermera 117 Cable de llamada a enfermera 118 Comprobación de la llamada a enfermera 118 Funcionamiento con sistemas de datos de pacientes del hospital 119 Funcionamiento con sistemas vEGA™* de Nuvon 120 Capítulo 13 121 Información sobre las horas que faltan para el mantenimiento del monitor 121 Información de comprobación de CO2 123 Procedimiento de comprobación de la calibración 123 Mantenimiento 123 Procedimiento de comprobación de la calibración 124 Sustitución de fusibles 125 Sustitución de fusibles 125	Lectura de los datos del paciente almacenados en archivos de Capnostream™20p	110
Salida de datos analógica con Capnostream [™] 20p 110 Conexión de Capnostream [™] 20p y un dispositivo analógico mediante el cable D/A. 111 Cambio de los valores predeterminados de los canales digital/analógico en 113 Calibración del dispositivo analógico para Capnostream [™] 20p 114 Sesión de trabajo con el sistema digital/analógico 116 Función de llamada a enfermera 116 Tipos de sistemas de llamada a enfermera 117 Cable de llamada a enfermera 118 Comprobación de la llamada a enfermera 118 Comprobación de la llamada a enfermera 118 Funcionamiento con sistemas de datos de pacientes del hospital 119 Funcionamiento con sistemas VEGA [™] * de Nuvon 120 Capítulo 13 121 Información sobre las horas que faltan para el mantenimiento del monitor 121 Información de CO2 123 Procedimiento de comprobación de la calibración 123 Mantenimiento 123 Mantenimiento 123 Mantenimiento 123 Mantenimiento 123 Mantenimiento 123 Mantenimiento 124 Sustituci	Transferencia de datos a través del puerto RS-232	110
Conexión de Capnostream™20p y un dispositivo analógico mediante el cable D/A 111 Cambio de los valores predeterminados de los canales digital/analógico en 113 Capnostream™20p 113 Calibración del dispositivo analógico para Capnostream™20p 114 Sesión de trabajo con el sistema digital/analógico 116 <i>Función de llamada a enfermera</i> 116 <i>Tipos de sistemas de llamada a enfermera</i> 117 Cable de llamada a enfermera 117 Activación de la llamada a enfermera 118 Comprobación de la llamada a enfermera 118 <i>Funcionamiento con sistemas de datos de pacientes del hospital</i> 119 <i>Funcionamiento con sistemas VEGA™* de Nuvon</i> 120 <i>Capítulo 13</i> 121 Información sobre las horas que faltan para el mantenimiento del monitor 121 Información de CO2 122 Comprobación de calibración de CO2 123 Procedimiento de comprobación de la calibración 123 Mantenimiento 123 Mantenimiento 124 Sustitución de fusibles 125 Sustitución de la valor de papel de la impresora 125	Salida de datos analógica con Capnostream™20p	110
Cambio de los valores predeterminados de los canales digital/analógico en 113 Capiostream™20p 113 Calibración del dispositivo analógico para Capnostream™20p 114 Sesión de trabajo con el sistema digital/analógico 116 Función de llamada a enfermera 116 Tipos de sistemas de llamada a enfermera 117 Cable de llamada a enfermera 117 Cable de llamada a enfermera 117 Activación de la llamada a enfermera 118 Comprobación de la llamada a enfermera 118 Funcionamiento con sistemas de datos de pacientes del hospital 119 Funcionamiento con sistemas VEGA™* de Nuvon 120 Capítulo 13 121 Mantenimiento y solución de problemas 121 Información sobre las horas que faltan para el mantenimiento del monitor 121 Información de CO2 123 Procedimiento de comprobación de la calibración 123 Mantenimiento. 124 Sustitución de fusibles 125 Sustitución de fusibles 125	Conexión de Capnostream™20p y un dispositivo analógico mediante el cable D/A	
Calibración del dispositivo analógico para Capnostream ™20p	Cambio de los valores predeterminados de los canales digital/analógico en Capnostream™20p	113
Sesión de trabajo con el sistema digital/analógico. 116 Función de llamada a enfermera. 116 Tipos de sistemas de llamada a enfermera. 117 Cable de llamada a enfermera. 117 Activación de la llamada a enfermera. 117 Activación de la llamada a enfermera. 118 Comprobación de la llamada a enfermera. 118 Funcionamiento con sistemas de datos de pacientes del hospital. 119 Funcionamiento con sistemas VEGA™ * de Nuvon. 120 Capítulo 13 121 Mantenimiento y solución de problemas 121 Introducción. 121 Información sobre las horas que faltan para el mantenimiento del monitor 121 Comprobación de CO2. 122 Comprobación de calibración de CO2 123 Procedimiento de comprobación de la calibración 123 Mantenimiento. 124 Sustitución de fusibles. 125 Sustitución de l'ollo de papel de la impresora 125	Calibración del dispositivo analógico para Capnostream™20p	
Función de llamada a enfermera. 116 Tipos de sistemas de llamada a enfermera. 117 Cable de llamada a enfermera 117 Activación de la llamada a enfermera. 118 Comprobación de la llamada a enfermera 118 Funcionamiento con sistemas de datos de pacientes del hospital. 119 Funcionamiento con sistemas VEGA™* de Nuvon. 120 Capítulo 13 121 Mantenimiento y solución de problemas 121 Introducción. 121 Información sobre las horas que faltan para el mantenimiento del monitor 121 Calibración de CO2. 122 Comprobación de calibración de CO2. 123 Procedimiento de comprobación de la calibración 123 Mantenimiento. 124 Sustitución de fusibles. 125 Sustitución del rollo de papel de la impresora. 125	Sesión de trabajo con el sistema digital/analógico	116
Tipos de sistemas de llamada a enfermera. 117 Cable de llamada a enfermera 117 Activación de la llamada a enfermera. 118 Comprobación de la llamada a enfermera 118 Funcionamiento con sistemas de datos de pacientes del hospital. 119 Funcionamiento con sistemas VEGA™* de Nuvon 120 Capítulo 13 121 Mantenimiento y solución de problemas 121 Introducción. 121 Información sobre las horas que faltan para el mantenimiento del monitor 121 Calibración de CO2. 122 Comprobación de calibración de CO2 123 Procedimiento de comprobación de la calibración 123 Mantenimiento. 124 Sustitución de fusibles. 125 Sustitución del rollo de papel de la impresora. 125	Función de llamada a enfermera	116
Cable de llamada a enfermera 117 Activación de la llamada a enfermera 118 Comprobación de la llamada a enfermera 118 Funcionamiento con sistemas de datos de pacientes del hospital 119 Funcionamiento con sistemas VEGA™* de Nuvon 120 Capítulo 13 121 Mantenimiento y solución de problemas 121 Introducción 121 Información sobre las horas que faltan para el mantenimiento del monitor 121 Capítulo de CO2 122 Comprobación de calibración de CO2 123 Procedimiento de comprobación de la calibración 123 Mantenimiento 123 Sustitución de fusibles 124 Sustitución de fusibles 125 Sustitución del rollo de papel de la impresora 125	Tipos de sistemas de llamada a enfermera	117
Activación de la llamada a enfermera. 118 Comprobación de la llamada a enfermera 118 Funcionamiento con sistemas de datos de pacientes del hospital. 119 Funcionamiento con sistemas VEGA™* de Nuvon. 120 Capítulo 13 121 Mantenimiento y solución de problemas 121 Introducción. 121 Información sobre las horas que faltan para el mantenimiento del monitor 121 Capítulo de CO2. 122 Comprobación de calibración de CO2 123 Procedimiento de comprobación de la calibración. 123 Mantenimiento. 124 Sustitución de fusibles. 124 Sustitución de l'asibles. 125	, Cable de llamada a enfermera	117
Comprobación de la llamada a enfermera118Funcionamiento con sistemas de datos de pacientes del hospital119Funcionamiento con sistemas VEGA™* de Nuvon120Capítulo 13121Mantenimiento y solución de problemas121Introducción121Información sobre las horas que faltan para el mantenimiento del monitor121Capitulo de CO₂122Comprobación de calibración de CO₂123Procedimiento de comprobación de la calibración124Sustitución de fusibles125Sustitución del rollo de papel de la impresora125	Activación de la llamada a enfermera	118
Funcionamiento con sistemas de datos de pacientes del hospital	Comprobación de la llamada a enfermera	118
Funcionamiento con sistemas VEGA™* de Nuvon 120 Capítulo 13 121 Mantenimiento y solución de problemas 121 Introducción 121 Información sobre las horas que faltan para el mantenimiento del monitor 121 Calibración de CO2 122 Comprobación de calibración de CO2 123 Procedimiento de comprobación de la calibración 123 Mantenimiento 124 Sustitución de fusibles 125 Sustitución del rollo de papel de la impresora 125	Funcionamiento con sistemas de datos de pacientes del hospital	119
Capítulo 13121Mantenimiento y solución de problemas121Introducción	Funcionamiento con sistemas VEGA™* de Nuvon	120
Mantenimiento y solución de problemas 121 Introducción	Capítulo 13	121
Introducción 121 Información sobre las horas que faltan para el mantenimiento del monitor 121 Calibración de CO2 122 Comprobación de calibración de CO2 123 Procedimiento de comprobación de la calibración 123 Mantenimiento 124 Sustitución de fusibles 125 Sustitución del rollo de papel de la impresora 125	Mantenimiento y solución de problemas	121
Información sobre las horas que faltan para el mantenimiento del monitor 121 Calibración de CO2 122 Comprobación de calibración de CO2 123 Procedimiento de comprobación de la calibración 123 Mantenimiento 124 Sustitución de fusibles 125 Sustitución del rollo de papel de la impresora 125	Introducción.	121
Calibración de CO2	Información sobre las horas que faltan para el mantenimiento del monitor	121
Comprobación de calibración de CO2 123 Procedimiento de comprobación de la calibración 123 Mantenimiento 124 Sustitución de fusibles 125 Sustitución del rollo de papel de la impresora 125	Calibración de CO2	122
Procedimiento de comprobación de la calibración	Comprobación de calibración de CO ₂	123
Mantenimiento	Procedimiento de comprobación de la calibración	
Sustitución de fusibles	Mantenimiento	124
Sustitución del rollo de papel de la impresora	Sustitución de fusibles	125
	Sustitución del rollo de papel de la impresora	125
Limpieza	Limpieza	126

Solución de problemas	126
Electricidad	126
Problemas de CO ₂	127
Sensor SpO ₂	128
Impresora	128
Llamada a enfermera	129
Calibración de CO ₂	129
Envío del monitor para su revisión	129
Asistencia técnica	130
Anexo 1	131
Configuración oficial	131
Configuración oficial predeterminada	
Modificación de la configuración oficial	
Restablecimiento de la configuración predeterminada	
Carga o descarga de la configuración oficial	
Modificación de la configuración del monitor	
Límites de alarma	133
Retraso de alarma	135
Ajustes de tendencias	135
Cambio del orden de los parámetros de la pantalla de tendencias	136
Eventos	136
Procedimiento para cambiar la configuración predeterminada de los eventos	137
Configuración del monitor	137
Parámetros de CO ₂	138
Parámetros de SpO ₂	138
Anexo 2	139
Especificaciones	139
Alimentación eléctrica	
Batería	
Controles	
Visualización	
Capnografía Microstream [™]	
Oximetría de pulso Nellcor™ Oximax™	141
Alarmas	141
Salidas	
Salida analógica	142
Llamada a enfermera	142
RS-232	143
USB	143
Impresora térmica interna (opcional)	143
Características generales	

Clasificación del equipo	
Cumplimiento	
Inmunidad electromagnética	144
Anexo 3	148
Consumibles Microstream™ EtCO₂	148
Consumibles Microstream™ EtCO₂	
Anexo 4	150
Contraseña de servicio de Capnostream™	150
Contraseña de servicio de Capnostream™	

Lista de figuras

Figura 1 – Instalación del paquete de baterías	23
Figura 2 – Primer plano del paquete de baterías	24
Figura 3 – Barra de menús con indicador de nivel de carga de la batería	25
Figura 4 – Vista de la parte inferior del monitor	26
Figura 5 – Vista frontal de Capnostream™20p	29
Figura 6 – Botones de control del panel frontal	30
Figura 7 – Vista trasera de Capnostream™20p	31
Figura 8 – Vista lateral izquierda de Capnostream™20p	32
Figura 9 – Pantalla de saludo	33
Figura 10 – Pantalla de inicio habitual	34
Figura 11 – Pantalla de inicio habitual con A/h y ODI no disponibles	35
Figura 12 – Pantalla de inicio estándar sin la opción IPI	36
Figura 13 – Área de encabezado	36
Figura 14 – Pantalla de inicio numérica habitual	38
Figura 15 – Pantalla de configuración del sistema	41
Figura 16 – Barra de menús	48
Figura 17 – Selección del volumen de alarma	48
Figura 18 – Selección del volumen del tono de pulsación	48
Figura 19 – Punto de conexión del sistema de evacuación de gases	49
Figura 20 – Gráfico de referencia de los menús de pantallas cuando los parámetros A/h y ODI	
están disponibles	51
Figura 21 – Gráfico de referencia de los menús de pantallas cuando los parámetros A/h y ODI	
no están disponibles	52
Figura 22 – Datos de CO₂ en el monitor Capnostream [™] 20p	55
Figura 23 – Sección de CO ₂ de la pantalla de inicio numérica	56
Figura 24 – Datos de SpO₂ en el monitor Capnostream™20p (pantalla estándar)	62
Figura 25 – Datos de SpO₂ en el monitor Capnostream™20p (pantalla estándar con IPI	
desactivado)	63
Figura 26 – Sección de SpO ₂ de la pantalla de inicio numérica	63
Figura 27 – Gráfico de tendencias del IPI	65
Figura 28 – Pantalla de revisión de alarmas de Capnostream™20p	73
Figura 29 – Ejemplo del aspecto de las alarmas	75
Figura 30 – Pantalla de límites de alarma	82
Figura 31 – Visualización de tendencias en gráfico	86
Figura 32 – Modo de desplazamiento en Tendencia gráfica	88
Figura 33 – Visualización tabular de las tendencias	89
Figura 34 – Mensaje sobre la memoria de tendencias	93
Figura 35 – Pantalla de informe de apnea y desaturación de O2	97
Figura 36 – Informe de apnea y desaturación impreso	98
Figura 37 – Pantalla de impresión	100
Figura 38 – Ejemplos de informes de casos impresos	103
Figura 39 – Informes de tendencias impresos	104
Figura 40 – Memoria USB común	107
Figura 41 – Icono USB	107
Figura 42 – Cable D/A de Capnostream™20p (PN PM20ACB)	111
Figura 43 – Puerto analógico en Capnostream™20p	112
Figura 44 – Pantalla de configuración de digital a analógico de Capnostream™20p	114
Figura 45 – Conector de sonido estéreo para llamada a enfermera	117

Figura 46 – Punto de conexión para la llamada a enfermera	118
Figura 47 – Pantalla de servicio	122
Figura 48 – Colocación del rollo de papel en la impresora	125
Figura 49 – Pantalla de configuración oficial	132
Figura 50 – Pantalla de mantenimiento de software	133
Figura 51 – Pantalla de límites de alarma de la configuración oficial	134
Figura 52 – Configuración oficial: Monitor	137

Lista de tablas

Tabla 1 – Símbolos que aparecen en el monitor	19
Tabla 2 – Accesorios de Capnostream™20p	27
Tabla 3 – Especificaciones del papel de impresora	28
Tabla 4 – Vista frontal de Capnostream™20p	30
Tabla 5 – Vista trasera de Capnostream™20p	31
Tabla 6 – Vista lateral izquierda de Capnostream™20p	32
Tabla 7 – Sección de encabezado	36
Tabla 8 – Marcaje de eventos	47
Tabla 9 – Volumen de las alarmas sonoras	49
Tabla 10 – Parámetros de CO ₂ ajustables	56
Tabla 11 – Sensores Nellcor™ SpO ₂	60
Tabla 12 – Parámetros de SpO ₂ ajustables	64
Tabla 13 – Opciones ajustables del IPI	66
Tabla 14 – Indicaciones de alarmas	71
Tabla 15 – Alarmas de prioridad alta	76
Tabla 16 – Alarmas de prioridad media	77
Tabla 17 – Mensajes de aviso	77
Tabla 18 – Mensajes de aviso silenciosos	78
Tabla 19 – Estado de mensajes y alarmas en distintas situaciones del modo de espera de	
parámetros	81
Tabla 20 – Ejemplo de visualización en formato de tabla	90
Tabla 21 – Ejemplo de visualización detallada en formato de tabla	91
Tabla 22 – Parámetros del monitor	93
Tabla 23 – Informes impresos – Parámetros	. 101
Tabla 24 – Tipos de transferencia de datos	. 105
Tabla 25 – Selección del tipo de salida de datos	. 107
Tabla 26 – Convenciones de nomenclatura de archivos	. 109
Tabla 27 – Códigos de colores del cable D/A	. 112
Tabla 28 – Valores de calibración de D/A	. 115
Tabla 29 – Solución de problemas	. 116
Tabla 30 – Especificaciones del cable de llamada a enfermera	. 117
Tabla 31 – Indicadores de llamada a enfermera	. 119
Tabla 32 – Configuración predeterminada de los límites de alarma/indicadores	. 134
Tabla 33 – Configuración predeterminada y configuración opcional del retraso de alarma	. 135
Tabla 34 – Configuración predeterminada y configuración opcional de las tendencias	. 135
Tabla 35 – Guía y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas	. 145
Tabla 36 – Guía y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética	. 145
Tabla 37 – Distancias de separación recomendadas entre los equipos de comunicaciones por	
RF portátiles y móviles y el monitor	. 147

Oridion Medical 1987 Ltd. ("Oridion Medical") – Garantía de los monitores Oridion

ESTA GARANTÍA LIMITADA se aplica a cualquier monitor de paciente fabricado por Oridion Medical 1987 Ltd. ("Oridion"), ("Productos"). Con sujeción a las limitaciones expuestas en este documento, Oridion garantiza que los Productos, cuando sean entregados por Oridion o un distribuidor autorizado suyo, estarán libres de defectos de material y fabricación durante los dos (2) años posteriores a la fecha de entrega pero no más de 27 meses después de la fecha de producción, y cumplirán con las especificaciones publicadas por Oridion aplicables a dichos productos en el momento de su fabricación. Esta garantía limitada excluye: (i) los Productos adquiridos a través de terceros no autorizados; (ii) los Productos que hayan sido sometidos a un uso incorrecto o indebido, accidente, alteración, negligencia, reparación o instalación no autorizadas; y (iii) los Productos que hayan sido utilizados con productos consumibles accesorios distintos a los productos FilterLine[™] de Oridion. Además, esta garantía limitada no se aplicará al uso de los Productos en aplicaciones o entornos no incluidos en las especificaciones de Oridion o en caso de actuaciones, errores, negligencia o falta del Cliente. Oridion sustituirá o reparará los Productos dañados basándose en su propio criterio. El Cliente no devolverá los Productos sin haber obtenido primero el número de autorización de devolución de material (RMA) que le proporcionará Oridion o alguno de los centros de servicio técnico autorizados, y una copia de la factura de compra del producto.

Exención de responsabilidad

EL USUARIO PUEDE USAR LOS PARÁMETROS (INCLUIDAS TODAS LAS REFERENCIAS A CO2, SPO2, ÍNDICE PULMONAR INTEGRADO (INTEGRATED PULMONARY INDEX™) ACTUAL Y FUTURO, E ÍNDICES Y CONFIGURACIONES RELACIONADAS, ASÍ COMO NOTIFICACIONES DE ALARMAS) QUE APARECEN EN LOS DISPOSITIVOS DE MONITORIZACIÓN DE PACIENTES DE ORIDION, EL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN DE ORIDION O CUALQUIER RESULTADO DE LOS INFORMES DESCARGADOS DE LOS DISPOSITIVOS DE MONITORIZACIÓN DE PACIENTES DE ORIDION EN IMPRESORAS O MEMORIAS USB O SISTEMAS APROBADOS ("DATOS") CON EL FIN ÚNICO Y EXCLUSIVO DEL CUIDADO DEL PACIENTE. EL USUARIO ACEPTA QUE LOS DATOS TRANSMITIDOS DESDE LOS DISPOSITIVOS DE MONITORIZACIÓN DE PACIENTES DE ORIDION NO SE PUEDEN TRANSFERIR, INTERCONECTAR, INTERCAMBIAR O TRASMITIR DE NINGUNA OTRA FORMA, Y QUE ORIDION NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD DE NINGÚN TIPO SOBRE LA PRECISIÓN O EXHAUSTIVIDAD DE LOS DATOS TRANSFERIDOS, INTERCONECTADOS, INTERCAMBIADOS O TRANSMITIDOS DE CUALQUIER OTRA FORMA. EL USUARIO TAMBIÉN ACEPTA QUE NO PODRÁ VENDER, OTORGAR LICENCIAS O COMERCIALIZAR DE NINGUNA OTRA FORMA LOS DATOS, TOTAL NI PARCIALMENTE. CUALQUIER OTRO USO DE LOS DATOS O INTERFAZ CON OTROS SISTEMAS, YA SEA POR PARTE DEL USUARIO O DE CUALQUIER TERCERO QUE ACTÚE EN SU NOMBRE, ESTARÁ SUJETO A UN ACUERDO DE LICENCIA INDEPENDIENTE CON ORIDION QUE INCLUYA, SIN LIMITACIÓN, TÉRMINOS COMERCIALES NEGOCIADOS DE BUENA FE.

EL USUARIO ACEPTA Y COMPRENDE QUE LOS DATOS SE PROPORCIONAN "TAL Y COMO ESTÁ" Y QUE ORIDION DECLINA CUALQUIER GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO. ORIDION NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA LESIÓN O DAÑO SUFRIDO POR PERSONAS O PROPIEDADES TANGIBLES O INTANGIBLES, CUALQUIERA QUE SEA SU CAUSA. ORIDION DECLINA TODA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, SECUNDARIOS, ESPECIALES, DERIVADOS U OTROS DAÑOS PARECIDOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA ACCIÓN LEGAL, YA SEA CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD DE PRODUCTO O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL O DERIVADA DEL RÉGIMEN DE EQUIDAD, AUNQUE SE HAYA ADVERTIDO A ORIDION DE LA POSIBILIDAD DE DICHAS PÉRDIDAS O DAÑOS.

Si surgiera alguna discrepancia entre la versión original en inglés y la versión traducida de esta garantía y renuncia de responsabilidad, prevalecerá la versión en inglés.

Oridion Medical 1987 Ltd. ("Oridion Medical") -Warranty for Oridion Monitors

THIS LIMITED WARRANTY applies to any patient monitor manufactured by Oridion Medical 1987 Ltd. ("Oridion"), ("Products"). Subject to the limitations herein, Oridion warrants that Products, when delivered by Oridion or its authorized distributor, for two (2) years following the delivery date, but no more than 27 months following the date of production, will be free from defects in material and workmanship and will substantially conform to published Oridion specifications for the respective Products and in effect at the time of manufacture. This limited warranty excludes (i) Products purchased through unauthorized third parties; (ii) Products that have been subject to misuse, mishandling, accident, alteration, neglect, unauthorized repair or installation; and (iii) Products that have been used with accessory consumable products other than Oridion's FilterLine[™] products. Furthermore, this limited warranty shall not apply to the use of Products in an application or environment that is not within Oridion specifications or in the event of any act, error, neglect or default of Customer. Oridion at its sole discretion will replace or repair the damaged Products. Customer may not return Products without first obtaining a customer return material authorization (RMA) number from Oridion or one of the Authorized Service centers and a copy of the Product purchase invoice.

Disclaimer

USER MAY USE THE PARAMETERS (INCLUDING ANY AND ALL REFERENCES TO CO2, SPO2, CURRENT INTEGRATED PULMONARY INDEXTM AND FUTURE AND RELATED INDICES AND CONFIGURATIONS AND SIGNAL ALARM NOTIFICATIONS) WHICH APPEAR ON ORIDION'S PATIENT MONITORING DEVICES AND/OR ORIDION'S COMMUNICATION PROTOCOL AND/OR ANY OUTPUT IN REPORTS DOWNLOADED FROM ORIDION'S PATIENT MONITORING DEVICES TO PRINTERS OR USB MEMORY STICKS OR APPROVED SYSTEMS ("DATA") SOLELY AND EXCLUSIVELY FOR THE PURPOSE OF PATIENT CARE. USER ACKNOWLEDGES THAT DATA TRANSMITTED FROM ORIDION'S PATIENT MONITORING DEVICES MAY NOT BE TRANSFERRED, INTERFACED, EXCHANGED OR OTHERWISE TRANSMITTED AND THAT ORIDION ACCEPTS NO RESPONSIBILITY WHATSOEVER FOR THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF DATA THAT HAS BEEN TRANSFERRED, INTERFACED, EXCHANGED OR OTHERWISE TRANSMITTED. USER FURTHER ACKNOWLEDGES THAT IT MAY NOT SELL, LICENSE OR OTHERWISE COMMERCIALIZE THE DATA, IN WHOLE OR IN PART. ANY OTHER USE OF THE DATA OR INTERFACE WITH OTHER SYSTEMS, WHETHER BY USER OR ANY PARTY ON ITS BEHALF, SHALL BE SUBJECT TO A SEPARATE LICENSING ARRANGEMENT WITH ORIDION INCORPORATING, BUT NOT LIMITED TO, COMMERCIAL TERMS TO BE NEGOTIATED IN GOOD FAITH.

USER ACKNOWLEDGES AND UNDERSTANDS THAT THE DATA IS PROVIDED "AS-IS" AND THAT ORIDION DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. ORIDION WILL NOT BE LIABLE FOR ANY INJURIES OR DAMAGES TO ANY PERSONS OR TANGIBLE OR INTANGIBLE PROPERTY RESULTING FROM ANY CAUSE WHATSOEVER. ORIDION DISCLAIMS ANY AND ALL LIABILITY FOR DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR OTHER SIMILAR DAMAGES REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT PRODUCT LIABILITY OR ANY OTHER LEGAL OR EQUITABLE THEORY, EVEN IF ORIDION HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH LOSSES OR DAMAGES.

In case of discrepancy between the English and translated version of this warranty and disclaimer, the English version shall prevail.

Información de seguridad

Advertencias Definiciones

Para usar el monitor CapnostreamTM20p de modo correcto y seguro, lea cuidadosamente el manual del usuario y las *Instrucciones de uso* que acompañan a los consumibles MicrostreamTM etCO₂ (FilterLineTM) y a los sensores SpO₂. El uso del monitor exige comprender perfectamente y seguir al pie de la letra estas instrucciones, la información de medidas de precaución indicada en negrita y las especificaciones.

Advertencias

Consideraciones generales

ADVERTENCIA: Si no está seguro de la exactitud de alguna medición, primero compruebe las constantes vitales del paciente por medios alternativos y luego verifique si el monitor está funcionando correctamente.

- ADVERTENCIA: El dispositivo no se debe utilizar para monitorizar casos de apnea.
- ADVERTENCIA: El dispositivo se debe considerar como un equipo de advertencia temprana. Mientras se indique una tendencia hacia la desoxigenación del paciente, será necesario analizar muestras de sangre con un cooxímetro de laboratorio para comprender plenamente el estado del paciente.
- ADVERTENCIA: Para garantizar la seguridad del paciente, no coloque el monitor en una posición en la que se pueda caer encima del paciente.
- **ADVERTENCIA:** Coloque con cuidado los cables al paciente (sensor SpO₂ y FilterLine[™]) para reducir la posibilidad de que se le enreden o le estrangulen.
- **ADVERTENCIA:** No levante el monitor agarrando el cable del sensor SpO₂ ni de FilterLine[™]; podrían desconectarse del monitor y hacer que el monitor se caiga encima del paciente.
- **ADVERTENCIA:** El monitor no se debe usar cerca de otros equipos ni encima de ellos; si fuera necesario utilizarlo de esta forma, vigile el monitor para verificar que funciona con normalidad en la configuración en la que se va a utilizar.
- ADVERTENCIA: Para asegurar un funcionamiento preciso y evitar posibles fallos, no exponga el monitor a una humedad extrema, por ejemplo la lluvia.
- ADVERTENCIA: El uso de accesorios, transductores, sensores y cables distintos de los especificados puede aumentar las emisiones o reducir la inmunidad del equipo o sistema.
- ADVERTENCIA: La reutilización de accesorios diseñados para un solo uso puede constituir un riesgo de contaminación cruzada para el paciente o dañar el funcionamiento del monitor.
- **ADVERTENCIA:** Las lecturas de CO₂, la frecuencia respiratoria, las lecturas de oximetría de pulso y las señales de pulso pueden verse afectadas por errores en la aplicación de los sensores, determinadas condiciones ambientales y ciertos estados del paciente.
- ADVERTENCIA: El monitor es un dispositivo de prescripción que solo debe ser manejado por personal médico cualificado.

ADVERTENCIA: No se permite ninguna modificación de este equipo.

ADVERTENCIA:	Si la calibración no se lleva a cabo conforme a las instrucciones del manual de servicio
	correspondiente, el monitor podría no estar bien calibrado. Los resultados proporcionados
	por un monitor mal calibrado pueden ser inexactos.

ADVERTENCIA: Si el puerto de evacuación de gases parece estar dañado, no use el dispositivo con gases anestésicos.

Nota: Los dispositivos conectados al monitor deben ser exclusivamente de grado médico.

Nota: La precisión de los parámetros siguientes es fundamental para rellenar la información de funcionamiento esencial del dispositivo: los niveles de dióxido de carbono en el aire espirado (CO₂) y la frecuencia respiratoria en la monitorización mediante capnografía; y la saturación arterial de oxígeno en sangre (SpO₂) y la frecuencia cardiaca en la monitorización mediante oximetría de pulso. Si la monitorización del paciente se está realizando con ambas funciones, se mostrarán todos los parámetros mencionados.

Exploración de RM

- ADVERTENCIA: No use los sensores de oximetría durante una exploración de resonancia magnética (RM). La corriente conducida podría producir quemaduras. Los sensores pueden afectar a las imágenes de RM y la unidad de RM puede afectar a la precisión de las mediciones de oximetría.
- **ADVERTENCIA:** No use el conjunto FilterLine[™] H para pacientes infantiles/neonatos durante una exploración de resonancia magnética (RM). El uso del conjunto FilterLine[™] H para pacientes infantiles/neonatos durante una exploración de RM podría dañar al paciente.
- PRECAUCIÓN: Cuando se está realizando una exploración de RM, el monitor debe estar fuera de la sala de RM. Cuando el monitor se utiliza fuera de la sala de RM, la monitorización de etCO₂ se puede llevar a cabo mediante FilterLineTM XL. Consulte Monitorización de CO2 durante una exploración de RM en la página 57.
- PRECAUCIÓN: El uso de una línea de muestreo de CO₂ con una letra "H" en su nombre (la cual indica que se debe usar en entornos húmedos) durante la exploración de RM podría provocar interferencias. Se recomienda usar líneas de muestreo cuyo nombre no tenga la letra "H". Para ver una lista de las líneas de muestreo modelo H, consulte Consumibles MicrostreamTM EtCO2 en la página 148.

Uso del monitor con desfibriladores

ADVERTENCIA: Todos los cables y tubos (incluidos los sensores de SpO₂ y líneas de muestreo de CO₂) deben mantenerse alejados del desfibrilador y sus electrodos, y deben estar dispuestos de modo que no queden entre, junto a o superpuestos a los electrodos ni los cables de los electrodos, para reducir posibles interferencias entre el monitor y el equipo de desfibrilación.

ADVERTENCIA: Todos los sensores de SpO₂ deben estar completamente intactos y sin daño alguno para poder usar el desfibrilador con el monitor.

Alarmas

ADVERTENCIA:	No desactive las alarmas sonoras si esto pudiera comprometer la seguridad del paciente.
ADVERTENCIA:	Responda siempre de inmediato a una alarma del sistema, ya que la monitorización del paciente podría interrumpirse durante determinadas situaciones de alarma.
ADVERTENCIA:	Antes de cada uso, verifique que los límites de alarma sean los adecuados para el paciente bajo monitorización.
ADVERTENCIA:	Verifique cuánto tiempo permanecerá la alarma sonora desactivada antes de silenciar temporalmente este tipo de alarmas.

ADVERTENCIA: Unos niveles de presión acústica de la señal de alarma sonora inferiores a los niveles de ruido ambiental pueden impedir que el operario reconozca situaciones de alarma.

PRECAUCIÓN: La definición de unos límites de alarma con valores extremos puede afectar negativamente la eficacia del sistema de alarmas.

Peligro de incendio

ADVERTENCIA: Cuando use el monitor con anestésicos, óxido nitroso o altas concentraciones de oxígeno, conecte las salidas de gas a un sistema de evacuación de gases.

- ADVERTENCIA: El monitor no es apto para ser utilizado en presencia de mezclas anestésicas inflamables con aire, oxígeno u óxido nitroso.
- ADVERTENCIA: FilterLine[™] puede arder en presencia de O₂ cuando se expone directamente a un láser, dispositivos electroquirúrgicos o calor elevado. Cuando realice procedimientos en cabeza y cuello con láser, dispositivos electroquirúrgicos o calor elevado, tenga precaución para evitar que FilterLine[™] o los paños quirúrgicos de su alrededor se inflamen.

Electricidad

ADVERTENCIA: Para proteger contra el peligro de descarga eléctrica, la cubierta del monitor solo debe retirarla personal técnico cualificado. En su interior no hay ninguna pieza que el usuario pueda reparar.

- ADVERTENCIA: Para asegurarse de que el paciente esté eléctricamente aislado, realice la conexión solamente con otros equipos cuyos circuitos estén eléctricamente aislados.
- **ADVERTENCIA:** Conecte el dispositivo únicamente a una toma de corriente de grado hospitalario que tenga tres cables y conexión a tierra. El enchufe de tres conductores se tiene que conectar a una toma de corriente de tres cables; si no hay ninguna disponible, encargue a un electricista debidamente cualificado que instale una de conformidad con la normativa sobre el código eléctrico aplicable. No quite bajo ninguna circunstancia el conector de conexión a tierra del enchufe eléctrico. No use cables de extensión ni adaptadores de ningún tipo. El cable de alimentación y el enchufe deben estar intactos y sin ningún daño. Para evitar el riesgo de que se produzcan descargas eléctricas, este equipo solo debe conectarse a una línea de alimentación con la debida toma de tierra.
- **ADVERTENCIA:** Asegúrese de que el monitor esté colocado de tal forma que se pueda acceder fácilmente a su enchufe de corriente para desconectarlo de inmediato de la línea de alimentación si fuera necesario.
- **ADVERTENCIA:** Si tiene alguna duda sobre la integridad de la disposición del conductor protector de conexión a tierra, haga funcionar el dispositivo con la batería interna hasta que el conductor protector del suministro eléctrico de CA esté totalmente operativo.
- ADVERTENCIA: No conecte a una toma de corriente controlada por un interruptor mural o un regulador.
- ADVERTENCIA: Mida la corriente de fuga del dispositivo cada vez que conecte un dispositivo externo al puerto de serie. La corriente de fuga no debe exceder los 100 microamperios.
- ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de que se produzcan descargas eléctricas, este equipo solo debe conectarse a una línea de alimentación con la debida toma de tierra.

ADVERTENCIA: Cada vez que vaya a usar la toma a tierra equipotencial ubicada en la parte posterior del dispositivo (consulte la Figura 7 – Vista trasera de Capnostream[™]20p de la página 31), el usuario debe asegurarse de realizar la conexión de tal forma que la imposibilidad de que se desconecte accidentalmente quede garantizada.

ADVERTENCIA:	En un centro con conductores de ecualización de potencial desmontables, la toma a tierra equipotencial de la parte posterior del dispositivo (consulte la Figura 7 – Vista trasera de Capnostream TM 20p de la página 31) se puede usar para establecer una conexión opcional entre Capnostream TM 20P y la barra colectora de ecualización de potencial de la instalación eléctrica. La toma a tierra equipotencial ubicada en la parte posterior del dispositivo no se debe utilizar como una conexión con toma a tierra.
ADVERTENCIA:	Conecte siempre primero el cable de alimentación al dispositivo, y luego enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente de la pared.
PRECAUCIÓN:	La instalación eléctrica de la sala o del edificio donde se va a utilizar el monitor debe cumplir con las normativas especificadas por el país en el que se vaya a usar el equipo.
PRECAUCIÓN:	Asegúrese de que se pueda acceder fácilmente al cable de alimentación, al enchufe y a la toma de corriente por si fuera urgente desconectar el equipo del suministro eléctrico.

Interferencia electromagnética

Este dispositivo ha sido sometido a distintas pruebas que confirman su cumplimiento con los requerimientos aplicables a dispositivos médicos según la norma EN 60601-1-2. Esta norma está diseñada para ofrecer una protección razonable frente a interferencias nocivas en una instalación médica convencional.

Sin embargo, debido a la proliferación de equipos que transmiten radiofrecuencias y de otras fuentes de ruido eléctrico en los entornos sanitarios (por ejemplo, teléfonos móviles, radios móviles de dos vías, aparatos eléctricos), es posible que los altos niveles de interferencia originados por la proximidad o intensidad de una fuente den lugar a perturbaciones en el funcionamiento de este dispositivo.

ADVER	TENCIA : El uso de equipos electroquirúrgicos de alta frecuencia cerca del monitor puede producir interferencias en el monitor y dar lugar a mediciones incorrectas.		
ADVER	TENCIA: No use el monitor con tomografía de espín nuclear (TRM, RMN, TMN) ya que puede afectar al funcionamiento del monitor.		
ADVERTENCIA: Los equipos portátiles de comunicación por RF (incluidos los periféricos tales como cabl de antena y antenas externas) deben mantenerse a una distancia mínima de 30 cm (12 pulgadas) de cualquier parte del monitor Capnostream [™] 20p, incluidos los cables. De contrario, puede producirse una disminución del rendimiento de este equipo.			
Nota:	Las características de emisiones del monitor Capnostream™20p hacen que sea adecuado para su uso en zonas industriales y hospitales (EN 55011 Clase A). Si se utiliza en un entorno residencial (para el que normalmente se exige la norma EN 55011 Clase B), este equipo podría no ofrecer la protección adecuada a los servicios de comunicaciones por radiofrecuencia. El usuario podría tener que adoptar medidas de mitigación, como reorientar o reubicar el equipo.		

Definiciones

Nota: Sirve para apuntar procedimientos o situaciones que de otra manera podrían malinterpretarse u omitirse, y para clarificar situaciones aparentemente contradictorias o confusas.

Precaución: Sirve para llamar la atención sobre un procedimiento que, si no se sigue exactamente, puede provocar daños en el equipo, o incluso su destrucción.

Advertencia: Sirve para llamar la atención sobre situaciones peligrosas o arriesgadas inherentes al funcionamiento, limpieza y mantenimiento del equipo, que podrían provocar lesiones personales o incluso la muerte del operario o del paciente.

Capítulo 1

Acerca de este manual

Descripción general Uso previsto Indicaciones específicas de uso Quién debe leer este manual Servicio técnico Símbolos

Descripción general

Este manual proporciona las instrucciones de instalación y funcionamiento del monitor Capnostream[™]20p. Capnostream[™]20p es un monitor portátil de mesa que controla de forma continua los valores siguientes del paciente:

- Dióxido de carbono al final de la espiración (etCO₂): nivel de dióxido de carbono en el aire espirado.
- Frecuencia respiratoria (FR).
- Concentración de dióxido de carbono inspirado (FiCO₂): nivel de dióxido de carbono presente durante una inhalación.
- Saturación de oxígeno (SpO₂).
- Frecuencia del pulso (FP).

El dispositivo proporciona también el algoritmo Integrated Pulmonary Index[™] (o índice pulmonar integrado, en adelante IPI), un valor numérico que integra cuatro parámetros principales medidos por Capnostream[™]20p con el fin de proporcionar una indicación sencilla del estado respiratorio global del paciente. Los parámetros integrados son etCO₂, FR, SpO₂ y FP. En el cálculo del IPI solo se emplean estos cuatro parámetros; los demás parámetros no se tienen en cuenta.

Además, el dispositivo proporciona información sobre Apnea por hora (A/h) e índice de desaturación de oxígeno (ODI), valores utilizados para ayudar en la identificación y cuantificación de los eventos de apnea y de desaturación de oxígeno en pacientes de más de 22 años de edad, como se indica a continuación:

- A/h: es el número de pausas en la respiración (de al menos 10 segundos) que el paciente ha experimentado, ya sea durante la última hora (en la página de inicio) o la media de pausas por hora en un periodo de tiempo determinado (en la pantalla de Apnea y Desaturación de O₂).
- ODI: es el número de veces que el valor de SpO₂ desciende un 4% o más respecto de la línea de base y regresa a dicha línea de base en 240 segundos o menos, ya sea durante la última hora (en la página de inicio) o la media de pausas por hora en un periodo de tiempo determinado (en la pantalla de Apnea y Desaturación de O₂).

Los índices A/h y ODI no están disponibles en todas las ubicaciones. Para equipar el dispositivo con las funciones A/h y ODI, póngase en contacto en la dirección <u>Capnographyinfo@covidien.com</u>.

Uso previsto

El monitor combinado de capnografía/oximetría de pulso Capnostream[™]20p y sus accesorios tienen por finalidad proporcionar al personal profesional sanitario cualificado una medición y una monitorización continua no invasiva de la concentración de dióxido de carbono del aire inspirado y espirado, y la frecuencia respiratoria, además de una monitorización continua no invasiva de la saturación de oxígeno funcional de hemoglobina arterial (SpO₂) y el pulso. Está destinado a su uso con pacientes neonatos, pediátricos y adultos en hospitales, centros hospitalarios y entornos de desplazamiento intrahospitalario.

Capnostream[™]20p solo debe ser manejado por personal médico cualificado.

El monitor Capnostream[™]20p proporciona al médico un índice pulmonar integrado (IPI). Este índice IPI se basa en cuatro parámetros proporcionados por el monitor: dióxido de carbono al final de la espiración, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y pulso. El IPI es un índice único del estado respiratorio de un paciente adulto o pediátrico que se muestra en una escala del 1 al 10, donde 10 indica el estado pulmonar óptimo. La monitorización del IPI muestra un valor único que representa los parámetros pulmonares del paciente y alerta a los médicos de los cambios en el estado pulmonar del paciente.

El IPI no sustituye la monitorización de las constantes vitales, sino que la complementa.

Indicaciones específicas de uso

El monitor incluye una indicación adicional para ofrecer información que ayude en la identificación de eventos de apnea y de desaturación de oxígeno en pacientes adultos (de 22 años en adelante) en las unidades UCI y en las plantas generales de los hospitales, mediante la generación de un informe de estos eventos y el cálculo de la apnea por hora (A/h) y el índice de desaturación de oxígeno (ODI) asociados.

Quién debe leer este manual

Se recomienda que lean este manual:

- Profesionales sanitarios que vayan a usar CapnostreamTM20p.
- Los responsables encargados de garantizar que el equipo cumpla con las políticas del centro.
- Los investigadores o el personal de laboratorio que vayan a descargar los datos de los pacientes.
- Expertos técnicos que vayan a conectar Capnostream[™]20p a un ordenador a través de la interfaz RS-232.

ADVERTENCIA: Las leyes federales de Estados Unidos restringen la venta de este dispositivo a médicos o mediante la prescripción facultativa correspondiente.

Servicio técnico

Para cualquier cuestión técnica relacionada con el monitor CapnostreamTM20p, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Medtronic:

América del Norte: Tel.: +1-888-ORIDION (674-3466), Fax: +1 (781) 453-2722; Fuera de América del Norte: Tel.: +1 (972) 2-589-9104, Fax: +1 (972) 2-582-8868; Correo electrónico: Capnographytechnicalsupport@medtronic.com.

Símbolos

La carcasa del monitor presenta los siguientes símbolos:

Tabla 1 – Símb	olos que	anarecen	en	el	monitor
	vius que	aparecen	en	eı	momilor

Símbolo	Descripción				
%	Botón de encendido/apagado del monitor				
~	Indicador de suministro de CA activo				
$\overline{\mathbf{O}}$	Indicador de UNIDAD ENCENDIDA				
	Selección de evento				
₽	Ingreso/Alta del paciente				
	Bomba desactivada				
$\not \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \!$	Alarmas silenciadas temporalmente				
⊣★⊦	Tipo BF, protección a prueba de desfibrilador				
÷	Entrada de gas				
	Salida de gases				
\bigtriangledown	Toma a tierra equipotencial				
•	Puerto de conexión de memoria USB				
CE 0482	Marca CE				
R only	Solo para el uso prescrito				
X	Directiva sobre el desecho de equipos eléctricos y electrónicos				
Follow instructions for use	Seguir las instrucciones de uso				

Descripción general de la tecnología utilizada

Introducción Características Descripción general de la tecnología utilizada

Introducción

El monitor de mesa Capnostream[™]20p ofrece una monitorización precisa y continua de capnografía y oximetría de pulso para pacientes intubados y no intubados, desde neonatos hasta adultos. Si se usa la tecnología Microstream[™], consumibles FilterLine[™] etCO₂ patentados y la tecnología de oximetría de pulso, Capnostream[™]20p le permite monitorizar "sin complicaciones" los valores de etCO₂ y SpO₂.

Características

- Monitor de dos parámetros que admite el estándar actual de cuidados ofreciendo mediciones de CO₂ y SpO₂
- Integrated Pulmonary Index[™] (IPI: índice pulmonar integrado), que proporciona una indicación sencilla, clara y completa del estado respiratorio del paciente y las tendencias
- Apnea por hora (A/h) e índice de desaturación de oxígeno (ODI), índices utilizados para ayudar en la identificación y cuantificación de los eventos de apnea y de desaturación (si están disponibles)
- Interfaz de usuario sencilla con pantalla en color
- Acceso a las funciones de uso habitual con 2 clics
- Tendencias de 72 horas para revisar el historial del paciente
- Revisión de alarma con un solo clic
- SARA[™] (*Smart Alarm for Respiratory Analysis*, alarma inteligente para análisis respiratorio), una tecnología incorporada de gestión de alarmas inteligentes de capnografía que reduce las alarmas carentes de importancia clínica
- Marcaje de eventos para comparar los eventos y la administración de una medicación con los cambios detectados en el estado del paciente
- Registro de casos para ayudar a organizar los archivos de los pacientes
- Llamada a enfermera
- Impresora interna opcional
- Salida USB para transferir datos del paciente a dispositivos de memoria USB
- Salida analógica para uso en laboratorios del sueño y otros tipos de laboratorio
- Puerto RS-232 para transferencia de datos

Descripción general de la tecnología utilizada

Esta sección le ofrece una descripción básica de la capnografía y la oximetría de pulso.

¿Qué es la capnografía?

La capnografía es un método no invasivo para monitorizar el nivel de dióxido de carbono en el aire espirado $(etCO_2)$ con el fin de evaluar el estado respiratorio del paciente.

Capnostream[™]20p usa la espectroscopia infrarroja no dispersiva (NDIR) Microstream[™] para la medición continua de la concentración de CO₂ durante cada respiración, la concentración de CO₂ presente al final de cada espiración (etCO₂), la concentración de CO₂ presente durante la inhalación (FiCO₂) y la frecuencia respiratoria.

La espectroscopia infrarroja se usa para medir la concentración de moléculas que absorben luz infrarroja. Dado que la absorción es proporcional a la concentración de la molécula absorbente, es posible determinar la concentración comparando la capacidad de absorción con la de un patrón conocido.

Los consumibles Microstream[™] etCO₂ proporcionan una muestra de los gases inhalados y exhalados por el ventilador o directamente por el paciente (mediante una cánula oral o nasal) al monitor para la medición de CO₂. La humedad y las secreciones del paciente se extraen de la muestra manteniendo al mismo tiempo la forma de la onda de CO₂.

La velocidad de flujo de muestreo de 50 ml/min reduce la acumulación de líquido y de secreciones, reduciendo el riesgo de obstrucciones en la vía de muestreo en entornos de UCI húmedos.

Una vez dentro del sensor Microstream[™] CO₂, la muestra de gas atraviesa una celda de micromuestra (15 microlitros). Este volumen extremadamente pequeño se elimina rápidamente, lo que permite un tiempo de elevación rápido y lecturas de CO₂ precisas, incluso a altas frecuencias respiratorias.

La fuente de IR Micro Beam ilumina la microcelda de muestra y la celda de referencia. Esta fuente de luz IR patentada genera solamente longitudes de onda específicas características del espectro de absorción de CO₂. Por lo tanto, no es necesaria compensación alguna cuando en el aire inhalado o exhalado hay presentes distintas concentraciones de N₂O, O₂, agentes anestésicos o vapor de agua. La IR que pasa a través de la microcelda de muestra y la IR que atraviesa la celda de referencia son medidas por los detectores de IR.

El microprocesador del monitor calcula la concentración de CO2 comparando las señales de ambos detectores.

¿Qué es la oximetría de pulso?

La oximetría de pulso se basa en:

- La diferencia en la absorción de luz roja e infrarroja (espectrofotometría) existente entre la oxihemoglobina y la desoxihemoglobina
- Los cambios en el volumen de sangre arterial en los tejidos durante el ciclo pulsátil (pletismografía) y, por lo tanto, la absorción de luz por esa sangre.

Un oxímetro de pulso determina la saturación de oxígeno puntual (SpO₂) haciendo pasar luz roja e infrarroja a través de un lecho arteriolar y midiendo los cambios de absorción de luz durante el ciclo pulsátil. Los diodos emisores de luz (LED) roja e infrarroja de baja potencia en el sensor de oximetría sirven como fuentes luminosas; un fotodiodo sirve como fotodetector.

Dado que la oxihemoglobina y la desoxihemoglobina difieren en la absorción de la luz, la cantidad de luz roja e infrarroja absorbida por la sangre está relacionada con la saturación de oxígeno en la hemoglobina. Para identificar la saturación de oxígeno en la hemoglobina *arterial*, el monitor usa la naturaleza pulsátil del flujo arterial. Durante la sístole, un nuevo pulso de sangre arterial penetra en el lecho vascular y aumenta el volumen de sangre y la absorción de la luz. Durante la diástole, el volumen de sangre y la absorción de la luz alcanzan su punto más bajo. El monitor basa sus mediciones de SpO₂ en la diferencia entre las absorciones máxima y mínima (mediciones durante sístole y diástole). El enfoque en la absorción de luz por parte de la sangre arterial pulsátil elimina el efecto de los absorbentes no pulsátiles, como los tejidos, los huesos y la sangre venosa.

Capítulo 3

Monitor Capnostream[™]20p

Desembalaje e inspección Instalación del paquete de baterías Montaje del monitor Configuración del mantenimiento periódico Accesorios Botones, indicadores y conexiones Botones de control del panel frontal Encendido del monitor Secciones estándar de la pantalla de visualización Visualización numérica de la pantalla de inicio Parada del monitor Desplazamiento por la pantalla Configuración de fecha, hora, idioma y otras opciones Tiempos de espera de la pantalla

En este capítulo se explican los componentes físicos del monitor y cómo se configura este último para que esté listo para ser utilizado.

Al final de este capítulo encontrará una hoja de verificación funcional de Capnostream[™]20p que ayuda a simplificar los procesos de instalación, configuración y puesta en marcha. Haga una fotocopia de la hoja de verificación del manual y vaya marcando la casilla correspondiente a cada paso a medida que los va realizando.

Desembalaje e inspección

Saque el monitor de su caja y compruebe todos los componentes antes de realizar cualquier otro procedimiento.

> PARA DESEMPAQUETAR E INSPECCIONAR EL MONITOR:

- 1. Extraiga cuidadosamente el monitor CapnostreamTM20p y los accesorios de la caja.
- 2. Compruebe que la caja contenga todos los artículos indicados en la lista incluida:
 - Monitor CapnostreamTM20p
 - Manual de funcionamiento
 - Dos fusibles de acción rápida y baja capacidad de ruptura de 3,15 amperios
 - Equipo básico FilterLine[™]
 - Cable de alimentación
 - Paquete de sensores SpO₂
 - Cable de extensión de SpO₂
 - Rollo de papel de impresora (uno instalado y un rollo adicional)
 - Paquete de baterías
 - CD con documentación complementaria (protocolos de transferencia de datos de Capnostream a través del puerto RS-232, la nota de aplicación de transferencia de datos de pacientes y este manual en otros idiomas)

- Inspeccione cada componente.
 Si falta algún componente o hay alguno dañado, póngase en contacto con su representante local.
- **Nota:** Una vez que haya sacado el monitor de la caja, deseche el material de embalaje conforme a la normativa local relativa al desecho de residuos.

Instalación del paquete de baterías

ADVERTENCIA: La unidad se debe utilizar siempre con la batería puesta para disponer de alimentación eléctrica de reserva si se produjera alguna interrupción momentánea o temporal del suministro eléctrico.

ADVERTENCIA: La compuerta de la batería debería estar siempre cerrada cuando la unidad esté en funcionamiento o conectada a la alimentación de CA.

El monitor funciona con la energía que recibe de una toma de CA o de la batería. Está equipado con un paquete de baterías recargables de ion litio. Para instalar el paquete de baterías, abra la puerta del compartimiento de las baterías ubicada en el lateral del monitor como se muestra a continuación.



Figura 1 – Instalación del paquete de baterías

> PARA INSTALAR EL PAQUETE DE BATERÍAS:

- 1. Deslice las dos pestañas de sujeción de la puerta del compartimiento de las baterías hacia dentro y abra la puerta.
- 2. Mientras sujeta el paquete de baterías con los cables hacia la derecha, gire la palanca de sujeción hacia arriba hasta que quede en posición horizontal y coloque el paquete de baterías en el monitor.
- 3. Empuje el paquete de baterías hacia dentro hasta que encaje en su sitio.
- 4. Mantenga la batería presionada hacia dentro y fíjela en esa posición volviendo a colocar la palanca de sujeción en posición vertical.
- 5. Conecte el conector de la batería a la toma de conexión de la batería asegurándose de que el lado con las protuberancias esté a la derecha para que el conector encaje en la toma. Introduzca de nuevo los cables en el monitor.

Toma de conexión de la batería



Palanca de sujeción

Figura 2 – Primer plano del paquete de baterías

- 6. Alinee las pestañas de la puerta del compartimiento de las baterías con las ranuras de la carcasa del monitor, cierre la puerta y deslice las dos pestañas hacia fuera.
- 7. Cargue el paquete de baterías antes de usarlo por primera vez; para ello, coloque el paquete de baterías en el monitor y conecte el monitor pero no lo encienda. El paquete de baterías se cargará en un plazo de aproximadamente 12 horas. Una vez que se haya cargado, puede encender el monitor y empezar a usarlo. Si el monitor no está enchufado a la corriente, no funcionará con la batería suministrada si esta no se ha cargado antes.

Asegúrese de que el paquete de baterías esté completamente cargado antes de usar el monitor sin estar conectado a una toma de CA. Un paquete de baterías completamente cargado ofrece 2,5 horas de funcionamiento (sin usar la impresora). Si el monitor está conectado a la toma de CA, el paquete de baterías se carga automáticamente. Un paquete de baterías totalmente descargado tarda unas 12 horas en cargarse por completo.

Cuando comience a usar el monitor, compruebe que el icono de la batería que aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla del monitor indique que la batería está llena. Consulte Comprobación de la batería y las conexiones de CA más adelante para obtener más información.

Si no se ha instalado ningún paquete de baterías, aparecerá en pantalla el icono que indica la ausencia de la

batería y se mostrará el mensaje de aviso *BATERÍA NO INSTALADA*. Se recomienda apagar el monitor antes de instalar o cambiar la batería.

ADVER'	TENCIA: Es recomendable que en el dispositivo haya instalada una batería extraíble en todo momento. Si la batería no está instalada, la unidad funcionará correctamente cuando está conectada a la alimentación de CA, pero si el suministro eléctrico se interrumpiera por cualquier motivo, el monitor dejará de funcionar.
ADVER'	TENCIA: Para cambiar los fusibles, apague primero el monitor y luego desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente de CA. No intente desconectar ni conectar una batería mientras la unidad está encendida o conectada a una toma de corriente de CA.
Nota:	Si la batería no está totalmente cargada, el icono de la batería indicará el nivel de carga de la misma.

Comprobación de la batería y las conexiones de CA

Antes de cada uso es recomendable verificar el nivel de carga de la batería y la conexión a CA.

PARA COMPROBAR LA BATERÍA:

- 1. Pulse el botón de encendido/apagado ^(%) para encender el monitor.
- 2. Observe el nivel de carga indicado por el icono de la batería situado en la esquina inferior izquierda de la pantalla.





Figura 3 – Barra de menús con indicador de nivel de carga de la batería

- 3. Si previamente ya ha cargado por completo la batería, el icono de la batería debe indicar que la batería está llena.
- Nota: Como parte del proceso de encendido del monitor, el indicador del nivel de carga de la batería aparecerá como lleno durante unos 15 segundos después de encenderse el monitor. Seguidamente, el monitor actualizará la indicación del nivel de carga de la batería para mostrar el nivel de carga real de la misma.

Recargue el paquete de baterías cuando aparezca en pantalla el mensaje de aviso BATERÍA BAJA. Para recargar la batería, asegúrese de que el monitor esté enchufado a una toma de CA. Se iluminará el indicador

naranja de alimentación de CA del panel frontal del monitor $\overline{\sim}$.

Para garantizar un funcionamiento normal, compruebe siempre que el indicador naranja de alimentación de CA esté iluminado mientras se usa el monitor. Esto garantizará que la batería se cargará durante el uso del monitor y que este estará preparado si se produjera una interrupción del suministro eléctrico o hubiera que trasladar a un paciente. Si hubiera que trasladar a un paciente a otro lugar, la unidad puede desenchufarse y ser desplazada con el paciente. Hay que acordarse de volver a conectar el monitor a la toma de CA cuando se llegue al destino del traslado.

Manipulación de la batería

PRECAUCIÓN: No sumerja el paquete de baterías en agua, podría dejar de funcionar correctamente.

PRECAUCIÓN: El paquete de baterías se debe recargar únicamente en el monitor para evitar un posible recalentamiento del mismo, que se queme o presente alguna fuga.

Almacenamiento de la batería

La batería se debe almacenar en un lugar fresco y seco, no dentro del monitor. Su carga disminuye con el tiempo. Para que la batería vuelva a tener su carga completa, recárguela antes del uso. La batería debe recargarse por completo cada 3 meses como mínimo. Se debe almacenar a una temperatura de entre -20 y 25 °C.

PRECAUCIÓN: Si el monitor se almacena o transporta en unas condiciones medioambientales distintas a las mencionadas en las especificaciones, su rendimiento se verá afectado y la batería o el monitor podrían sufrir daños.

Eliminación de la batería

PRECAUCIÓN: No arroje la batería al fuego, ya que podría explotar.

Siga las normativas y las instrucciones de reciclaje locales en lo relacionado con la eliminación y reciclaje de las baterías.

Uso con la batería y con corriente eléctrica

Si se produce un corte del suministro eléctrico cuando el monitor está funcionando con corriente alterna, el monitor empezará a funcionar automáticamente con su paquete de baterías interno. El tiempo de funcionamiento con esta alimentación de reserva, basado en la capacidad de la batería, es de 2,5 horas como máximo. Cuando funciona con la batería el monitor conserva su configuración, incluidos los ajustes de las alarmas. Si se han definido ajustes en la Configuración oficial, dichos ajustes permanecerán en la memoria del monitor incluso si este no está recibiendo alimentación alguna, y estarán disponibles cuando el monitor se vuelva a encender. Del mismo modo, los datos de tendencia del dispositivo permanecerán en la memoria del monitor incluso si este no está recibiendo alimentación alguna, y estarán disponibles cuando el monitor se vuelva a encender.

La luz del indicador naranja de alimentación de CA está encendida cuando el monitor funciona mediante una fuente de alimentación externa, independientemente del estado del paquete de baterías.

El indicador verde de encendido está iluminado cuando el monitor está encendido.

Si la luz del indicador naranja de alimentación de CA está apagada y la del indicador verde de encendido está iluminada, el monitor está funcionando con la alimentación que recibe del paquete de baterías.

El icono de batería mostrará el nivel de carga aproximado de la batería. El mensaje de aviso *BATERÍA BAJA* aparece cuando quedan aproximadamente 15 minutos de carga (equivalente a 14 V).

Montaje del monitor

La parte inferior del equipo Capnostream[™]20p está diseñada para encajar sobre una placa de montaje estándar VESA[™]* de 100 mm. (Un ejemplo es la placa de montaje FLP-002-17C modelo GCX que encaja en el conjunto de soporte con ruedas RS-0006-64D modelo GCX). Puede adquirir la placa de montaje VESA[™]* a través de Medtronic; el número de referencia es 010713. Consulte las *Instrucciones de uso* apropiadas para estos productos.



Figura 4 – Vista de la parte inferior del monitor

PRECAUCIÓN: No quite las patas de goma de la parte inferior del monitor. Estas patas de goma son necesarias cuando el monitor funciona colocado sobre una mesa, ya que previene que se mueva cuando está en uso. Aunque las patas de goma no se estén utilizando en un momento dado, se recomienda dejarlas puestas por si hicieran falta en alguna ocasión.

Configuración del mantenimiento periódico

Si su centro dispone de una base de datos de mantenimiento periódico, registre el monitor en ella para su procedimiento de calibración periódica. Es necesario realizar una calibración después de las primeras 1.200 horas de uso (o los primeros 12 meses, lo que ocurra primero) y, a partir de ahí, cada 4.000 horas o 12 meses de uso (lo que ocurra primero). El número de horas de funcionamiento aparece en la pantalla de servicio del monitor justo después de encenderlo. Para obtener más detalles sobre la calibración y otros procedimientos de mantenimiento, consulte Mantenimiento y solución de problemas en la página 121.

Accesorios

Accesorios disponibles

Consulte la lista de accesorios disponibles para Capnostream™20p.

Accesorio	N.º de referencia Medtronic	Uso
Papel (6 rollos)	010516	El papel se adapta a la impresora integrada de Capnostream™20p. El monitor se entrega con un rollo de papel colocado y un rollo de papel de repuesto. Consulte Sustitución del rollo de papel de la impresora en la página 125 para saber cómo se instala el papel.
Placa adaptadora de montaje (VESA™*)	010713	Sirve para montar Capnostream™20p en los soportes con ruedas GCX y en otros equipos de montaje. Consulte Montaje del monitor en la página 26 para ver las instrucciones de montaje.
Pinza para poste de apertura rápida	011782	La pinza se acopla a la montura tipo poste (diámetro del poste: 19 mm [0,75 in] a 38 mm [1,5 in]) o a la montura tipo riel (tamaño del riel: 10 mm [0,39 in] x 25 mm [0,98 in]).
		La placa adaptadora de montaje está incluida.
Soporte con ruedas y cesta	Medtronic no suministra este producto	RS-0006-64D modelo GCX
		Kit de soporte con ruedas y poste de 38", y placa de montaje tipo deslizante de 5" que incluye: base de 53,3 cm (21 in), ruedas de 10,1 cm (4 in), contrapeso de 1,8 kg (10 lb), tirador y cesta de 15,2 cm (6 in).
		La placa de montaje es necesaria para usar el soporte con ruedas.
Placa adaptadora de montaje para transmisor Bernoulli	011892	Se utiliza con un sistema hospitalario Bernoulli u Oxinet. Consulte Funcionamiento con sistemas de datos de pacientes del hospital en la página 119.
Paquete de baterías	BP01000	Consulte Instalación del paquete de baterías en la página 23 para saber cómo instalar la batería.
Cable para llamada a enfermera	011149	Cable de 3,5 metros de longitud: el cable se suministra sin conector en su extremo, de modo que pueda acoplarle el más adecuado para el sistema con el que se va a usar. Consulte las instrucciones de configuración en la sección Función de llamada a enfermera de la página 116.

Accesorio	N.º de referencia Medtronic	Uso
Cable digital/analógico (D/A)	PM20ACB	Sirve para transferir datos desde el Capnostream™20p a un dispositivo analógico, por ejemplo un polisomnógrafo. Consulte las instrucciones de configuración en la sección Salida de datos analógica con Capnostream de la página 110.
Cable de alimentación para EE. UU.	014256	
Cable de alimentación para Europa	014255	

Placa de montaje del monitor

El kit de montaje contiene un adaptador de montaje VESA^{TM*}, de 100 x 100 mm a 75 x 75 mm, que se puede fijar a la parte inferior del monitor como se ha explicado anteriormente. Esto permite montar el monitor sobre una amplia gama de monturas y soportes GCX, incluido el conjunto de soporte con ruedas RS-0006-64D modelo GCX. Póngase en contacto con GCX (www.gcx.com) para obtener más información sobre las soluciones de montaje disponibles para el monitor.

Tenga en cuenta que, al montar el monitor en un soporte con ruedas u otra montura tipo poste, es importante usar un soporte cuya base con ruedas tenga 53,5 cm (21 in) de diámetro como mínimo para garantizar su estabilidad.

Papel de impresora

El monitor usa papel térmico para impresora con las siguientes especificaciones:

Elemento	Valor		
Anchura del papel	58 mm (2 ¼ in)		
Diámetro del rollo de papel (máximo)	40 mm (1 1/2 in)		
Longitud del papel (máxima)	15,2 m (50 ft)		

Tabla 3 – Especificaciones del papel de impresora

Nota: Algunos fabricantes usan diferentes grosores de papel, de modo que un rollo de 15,2 metros de un fabricante distinto puede superar el límite de diámetro máximo y no encajar en el monitor.

Puede obtener rollos de papel de recambio con las especificaciones correctas a través de Medtronic (número de referencia 010516 para un paquete de 6 rollos) o en América del Norte a través del sitio web www.thermalpaperdirect.com (número de modelo 22550).

Botones, indicadores y conexiones

A continuación encontrará ilustraciones de las vistas frontal, trasera y laterales del monitor en las que puede ver los detalles de la pantalla, los controles y los puntos de conexión externos.

Vista frontal del monitor

El panel frontal del monitor contiene la pantalla de visualización, los botones de acción y el mando de control.



En la Tabla 4 – Vista frontal de CapnostreamTM20p se explican los números indicados en la figura anterior.

N.º	Nombre	Descripción	N.º	Nombre	Descripción
1	Encendido/Apagado del monitor	Botón interruptor	7	Botón de silenciamiento temporal de alarmas	Deshabilita temporalmente las alarmas sonoras durante dos minutos.
2	Indicador de alimentación de CA	Luz naranja	8	Indicador de alarma rojo	Indicador que parpadea durante alarmas de prioridad alta (consulte Alarmas de prioridad alta en la página 76).
3	Indicador de monitor encendido	Luz verde	9	Indicador de alarma amarillo	Indicador que se ilumina o parpadea según el estado de la alarma (consulte Visualización de alarmas en la página 72).
4	Botón de evento	Inicia el proceso de colocación de un marcador de evento rápido o detallado en los datos de tendencia.	10	Mando de control	Mando giratorio que sirve para navegar por la pantalla y seleccionar una función cuando se pulsa.
5	Botón de alta/baja del paciente	Permite iniciar y detener un caso e introducir la identificación de un paciente.	11	Pantalla de visualización	La pantalla muestra los datos del paciente, la barra de menús, el modo de paciente, la fecha y la hora, y cualquier otra información o mensaje de error.
6	Botón de bomba desactivada	Desactiva la bomba de capnografía durante un periodo de tiempo predefinido para proteger el monitor durante las operaciones de succión.	12	Asa de transporte	Permite coger el monitor cuando hay que desplazarlo de un sitio a otro.

Tabla 4 – Vista frontal de Capnostream™20p

Botones de control del panel frontal

La siguiente figura muestra un primer plano de los controles indicados en la Figura 5 – Vista frontal de Capnostream™20p de la página 29 y explicados en la Tabla 4 – Vista frontal de Capnostream™20p anterior.



Figura 6 – Botones de control del panel frontal

Panel trasero del monitor

El panel trasero del monitor contiene las conexiones de alimentación y comunicación.



Figura 7 – Vista trasera de Capnostream™20p

La Tabla 5 – Vista trasera de CapnostreamTM20p describe las funciones de las conexiones de la parte trasera del monitor.

N.º	Función	Descripción	N.º	Función	Descripción
1	Caja de fusibles	Dos fusibles de acción rápida y baja capacidad de ruptura de 3,15 amperios.	6	Salida analógica	Conector hembra tipo D de 15 patillas para salida analógica de 7 canales.
2	Enchufe de corriente	Conexión a la alimentación de CA.	7	Terminal de ecualización de potencial	Sirve para conectar el conductor de ecualización de potencial.
3	Puerto USB	Para la memoria USB.	8	Etiquetas del fabricante	
4	RS-232	Conector hembra tipo D de 9 patillas para comunicación RS-232.	9	Asa de transporte	
5	Llamada a enfermera	Puerto usado para conectar el sistema de llamada a enfermera.	10	Mecanismo para aliviar la tensión del cable de alimentación	

Tabla 5 – Vista trasera de Capnostream™20p

Vistas laterales izquierda y derecha del monitor

En el lado izquierdo del monitor se encuentran el compartimiento para la batería y los puntos de conexión para la interfaz del paciente.



Figura 8 – Vista lateral izquierda de Capnostream™20p

La Tabla 6 describe la función de los distintos elementos del lado izquierdo del monitor.

N.º	Función	Descripción
1	Conector de entrada de FilterLine™	Para conectar FilterLine™ al monitor. Incorpora un cierre automático.
2	Salida de gases	Para conectar un sistema de evacuación de gases cuando el monitor se usa en presencia de gases anestésicos. La salida de gases es un conector dentado diseñado para tubos con diámetro interior de 2,38 mm (3/32 in).
3	SpO ₂	Para conectar el sensor SpO ₂ al monitor con un cable de extensión.
4	Compartimiento de las baterías	Aquí es donde se instala el paquete de baterías.
5	Etiqueta de código de barras	Código de barras correspondiente al número de serie y al número de modelo del monitor.

Tabla 6 –	· Vista	lateral	izquierda	de	Capnostream	™20p
-----------	---------	---------	-----------	----	-------------	------

El lado derecho del monitor incluye solamente el rollo de papel utilizado para imprimir informes del paciente y los botones para controlar la impresora. El soporte de sujeción de este rollo de impresora se muestra en la Figura 48 – Colocación del rollo de papel en la impresora de la página 125 y las instrucciones para sustituir el rollo se indican en la sección Sustitución del rollo de papel de la impresora de la página 125.

Encendido del monitor

En esta sección se explica cómo se enciende el monitor.

PRECAUCIÓN: El monitor está destinado exclusivamente a ayudar en la evaluación del paciente. Debe usarse en combinación con el análisis de los síntomas y los signos clínicos.

PRECAUCIÓN: Use únicamente consumibles Microstream[™] etCO₂ y sensores Nellcor[™] para garantizar que el monitor funciona correctamente.

- **PARA ENCENDER EL MONITOR:**
 - Conecte el cable de alimentación al enchufe de corriente de la parte trasera del monitor (consulte la Figura 7 – Vista trasera de Capnostream[™]20p de la página 31). Enrolle el mecanismo para aliviar la tensión del cable de alimentación alrededor del cable y apriételo para garantizar que el cable no se desconecte del monitor sin querer.
 - 2. Enchufe el cable de alimentación a la toma de alimentación de CA.
 - 3. El indicador naranja de alimentación de CA del panel frontal se iluminará.

PRECAUCIÓN: Si el indicador luminoso naranja no se enciende, el monitor está funcionando solo con la alimentación que recibe de la batería y dejará de funcionar cuando esta se agote.

- 4. Pulse el botón de encendido/apagado ⁶⁶ del panel frontal para encender el monitor. Sucederá lo siguiente:
 - El indicador verde de encendido se ilumina para indicar que el monitor está encendido.
 - Aparece el icono de un reloj de arena en la pantalla durante unos segundos seguido de la pantalla azul de saludo del monitor durante aproximadamente 5 segundos mientras el monitor realiza una comprobación automática.
 - Los indicadores luminosos de alarma rojo y amarillo se iluminarán brevemente y el altavoz emitirá un pitido.

PRECAUCIÓN: Si los indicadores luminosos de alarma rojo y amarillo no se encienden o no suena ningún pitido por el altavoz, no utilice el monitor y envíelo para que lo revisen.

• Oirá que la bomba se enciende brevemente durante unos segundos y luego se apaga sola. Sin embargo, si hay una FilterLine[™] conectada al monitor, la bomba seguirá encendida.



Figura 9 – Pantalla de saludo

Secciones estándar de la pantalla de visualización

Después de la pantalla azul de saludo aparece una pantalla solicitando al usuario que borre la memoria de tendencias. Consulte la explicación de dicha pantalla en la sección Uso de casos y números de identificación de la página 45. Tras esa pantalla, aparecerá la pantalla de inicio.

La pantalla de inicio muestra la información de CO_2 y de SpO_2 , junto con el valor de IPI y otra información común a la mayoría de las demás pantallas. Esta sección explica las partes principales de la pantalla.

La pantalla de inicio puede mostrarse en uno de dos formatos básicos: gráfico y numérico. La pantalla predeterminada es la visualización estándar que se describe a continuación. El formato numérico proporciona una pantalla numérica más grande y más fácil de leer sin la distracción que suponen las formas de onda gráficas. Para obtener más información sobre la pantalla numérica, consulte Visualización numérica de la pantalla de inicio en la página 38.

Visualización estándar de la pantalla de inicio

En la pantalla de inicio estándar mostrada en las dos figuras siguientes se presentan los datos y las formas de onda de un paciente monitorizado con FilterLine™ y un sensor SpO₂.




Figura 11 - Pantalla de inicio habitual con A/h y ODI no disponibles

La pantalla de inicio contiene las siguientes secciones:

- Área de encabezado :se describe en la página 36
- Barra de menús: se describe en la página 37
- Datos del IPI en tiempo real con pantalla gráfica de tendencias: se describe en la página 39
- Datos de A/h y ODI: se describe en la página 38 (si está disponible)
- Datos de CO2 en tiempo real y onda de CO2: se describen en la página 37
- Datos de SpO2 en tiempo real: se describe en la página 37

La mayoría de las demás pantallas contiene el área de encabezado, la barra de menús y los datos de CO_2 y de SpO_2 en tiempo real.

En la mayoría de los casos, a medida que se desplaza de una pantalla a otra, el monitor mostrará siempre el encabezado, la barra de menús, las secciones de datos numéricos de CO_2 en tiempo real y datos numéricos de SpO_2 en tiempo real. La visualización permanente de los datos numéricos de CO_2 y de SpO_2 en tiempo real mostrada a la derecha de la pantalla permite una monitorización continua del paciente incluso cuando se cambia la configuración del sistema o se observa el historial del paciente en las pantallas de tendencias.

La opción IPI de la pantalla se puede desactivar como parte de la configuración oficial. (Si el tipo de paciente especificado es Infantil/Neonato, el IPI se desactiva automáticamente y en la pantalla de inicio estándar solo está disponible la opción de onda de SpO₂ en lugar de la onda de tendencia del IPI). Consulte el Capítulo 7 Integrated Pulmonary IndexTM en la página 65 para obtener más información. Si la opción IPI está desactivada, la pantalla de inicio no incluirá esta opción. Puede ver un ejemplo de esta pantalla de inicio en la Figura 12 – Pantalla de inicio estándar sin la opción IPI de la página 36.



Figura 12 – Pantalla de inicio estándar sin la opción IPI

Área de encabezado

La sección de encabezado aparece siempre en la parte superior de la pantalla y contiene la información que se indica en la siguiente tabla:



La Tabla 7 explica los elementos del área de encabezado.

Tabla 7 – Sección de encabezado

Elemento	Función	Descripción
1	Hora/Fecha	Muestra la hora y la fecha en los formatos seleccionados.
2	Tipo de paciente	Indica el modo de paciente. Las opciones son: ADULTO, PEDIÁTR. 1-3 AÑO, PEDIÁTR. 3-6 AÑO, PEDIÁTR. 6-12 AÑO e INFANTIL/NEONATO (para niños de menos de 1 año).
3	Nombre de la pantalla	Indica el nombre de la pantalla actual.
4	Área de mensajes	Los mensajes que explican las alarmas y el estado del equipo aparecen en esta área.
5	ID.Paciente	Si se ha introducido la identificación del paciente del caso actual, aparecerá la ID de dicho paciente.
6	Indicador del estado de alarma	Indica si las alarmas sonoras están activadas, desactivadas temporalmente o desactivadas permanentemente.
7	Indicador USB	Indica si hay algún dispositivo de memoria USB conectado actualmente al monitor.

Barra de menús

La barra de menús de las opciones y funciones disponibles está situada a lo largo de la parte inferior de la pantalla de visualización del monitor. A la izquierda está el indicador de nivel de carga de la batería. A la derecha está el control de volumen del altavoz.

La barra de menús cambia en función de las opciones y funciones disponibles en una pantalla específica. Algunas pantallas incluyen opciones seleccionables adicionales en el área específica de la pantalla en cuestión.

Datos de CO₂ en tiempo real

Esta área de la pantalla muestra los valores de etCO₂ y FiCO₂ en tiempo real acompañados de las unidades seleccionadas y la frecuencia respiratoria (FR) en respiraciones por minuto. Los datos numéricos aparecen a la derecha y la forma de onda a la izquierda. Para obtener más información sobre los datos de la pantalla, consulte Datos de CO2 que muestra el monitor Capnostream[™]20p en la página 55.

Cuando se cruza el umbral límite de la alarma de CO₂, el dispositivo avisará de esta circunstancia del siguiente modo: los datos numéricos afectados parpadearán, los números aparecerán con un fondo rojo o amarillo (dependiendo de si se trata de una alarma [urgente] de alta prioridad relacionada con el paciente o de una alarma de advertencia) y aparecerá un mensaje en el área de encabezado de la pantalla.

Esta área de la pantalla puede seleccionarse como si se tratara de una opción de menú. La selección de esta área le da acceso a la pantalla de configuración para cambiar los valores del parámetro CO₂.

Datos de SpO2 en tiempo real

Esta área de la pantalla muestra los datos de SpO₂ en tiempo real: SpO₂, FP y la forma de onda pletismográfica o barra de latido de pulso están visibles en todo momento. (Si el IPI está habilitado y no aparece por tanto la onda de SpO₂, el latido del pulso de SpO₂ se representa mediante la barra verde que aparece a la izquierda de este cuadro).

Para obtener más información sobre los datos de SpO₂ mostrados, consulte el Capítulo 6 Oximetría de pulso con el monitor CapnostreamTM20p en la página 58.

Cuando se cruza el umbral límite de la alarma de SpO₂, el dispositivo avisará de esta circunstancia del siguiente modo: los datos numéricos afectados parpadearán, los números aparecerán con un fondo rojo o amarillo (dependiendo de si se trata de una alarma [urgente] de alta prioridad relacionada con el paciente o de una alarma de advertencia) y aparecerá un mensaje en el área de encabezado de la pantalla.

Esta área de la pantalla puede seleccionarse como si se tratara de una opción de menú. Al seleccionar esta área puede acceder a la pantalla de configuración para modificar los valores del parámetro SpO₂, incluida la opción para activar o desactivar el tono del latido cardiaco.

Datos del IPI en tiempo real con pantalla gráfica de tendencias

Esta área de la pantalla muestra el valor en tiempo real del IPI, un valor numérico que resume cuatro parámetros (etCO₂, FR, SpO₂, FP) para proporcionar una indicación rápida del estado respiratorio del paciente. El gráfico de tendencias del IPI indica la tendencia de este valor durante el periodo de tiempo seleccionado (el periodo predeterminado es una hora).

En el gráfico de tendencias del IPI, las líneas horizontales roja y amarilla indican los límites actuales de la alarma (urgente) de alta prioridad relacionada con el paciente y de advertencia, respectivamente.

Para obtener más información sobre este parámetro, consulte el Capítulo 7 Integrated Pulmonary Index™ en la página 65.

Cuando se supera el límite de la alarma del IPI, el dispositivo avisará de esta circunstancia del siguiente modo: los datos numéricos afectados parpadearán, los números aparecerán con un fondo rojo o amarillo (dependiendo de si se trata de una alarma [urgente] de alta prioridad relacionada con el paciente o de una alarma de advertencia) y aparecerá un mensaje en el área de encabezado de la pantalla.

Los datos del IPI no están disponibles para algunos pacientes; para obtener más información al respecto, consulte el Capítulo 7 Integrated Pulmonary Index[™] en la página 65.

Datos de A/h y ODI

Esta área de la pantalla muestra los valores de A/h y ODI (si están disponibles).

Para obtener más información sobre A/h y ODI, consulte la sección Apneas por hora e índice de desaturación de oxígeno de la página 67.

Si el recuento de apneas en cualquier periodo de una hora de las últimas 12 horas supera el número especificado, aparecerá en la pantalla una alarma visual en forma de asterisco junto al valor de A/h; esta alarma indica al usuario que debe consultar la pantalla de A/h y de desaturación de O_2 . A la pantalla A/h y de desaturación de O_2 se accede con el botón INFORMES de la barra de menús. Para obtener más información sobre la alarma visual de A/h, consulte la sección Alarma visual de A/h en la página 68.



Visualización numérica de la pantalla de inicio

Figura 14 – Pantalla de inicio numérica habitual

La pantalla numérica contiene las siguientes secciones:

- Área de encabezado en la página 38
- Barra de menús en la página 37
- Datos del IPI en tiempo real con pantalla gráfica de tendencias en la página 39
- Datos de CO2 en tiempo real en la página 37
- Datos de SpO2 en tiempo real en la página 37
- Datos de A/h y ODI en la página 38 (si está disponible)

Área de encabezado

La sección de encabezado es idéntica al área de encabezado de la pantalla de inicio estándar.

Barra de menús

La barra de menús es idéntica a la de la pantalla de inicio estándar.

Datos de CO₂ en tiempo real

Esta área de la pantalla muestra los valores de etCO₂ y FiCO₂ en tiempo real acompañados de las unidades seleccionadas y la frecuencia respiratoria (FR) en respiraciones por minuto. Solo se proporciona la visualización numérica y en un tamaño tal que se pueda leer con facilidad incluso desde cierta distancia. Para obtener más información sobre los datos de la pantalla, consulte Datos de CO2 que muestra el monitor Capnostream[™]20p en la página 55.

Cuando se cruza el umbral límite de la alarma de $etCO_2$, $FiCO_2$ o FR, el dispositivo avisará de esta circunstancia del siguiente modo: los datos numéricos afectados parpadearán, los números aparecerán con un fondo rojo o amarillo (dependiendo de si se trata de una alarma [urgente] de alta prioridad relacionada con el paciente o de una alarma de advertencia) y aparecerá un mensaje en el área de encabezado de la pantalla.

Esta área de la pantalla puede seleccionarse como si se tratara de una opción de menú. La selección de esta área le da acceso a la pantalla de configuración para cambiar los valores del parámetro CO₂.

Datos de SpO2 en tiempo real

Esta área de la pantalla muestra los datos de SpO₂ en tiempo real. La visualización numérica se proporciona en un tamaño tal que se pueda leer con facilidad incluso desde cierta distancia. Como en la pantalla estándar, en esta pantalla solo aparecerán los parámetros medidos por la sonda conectada actualmente al dispositivo. Para obtener más información sobre los datos de SpO₂ mostrados, consulte el Capítulo 6 Oximetría de pulso con el monitor CapnostreamTM20p en la página 58.

Cuando se cruza el umbral límite de la alarma de SpO_2 , el dispositivo avisará de esta circunstancia del siguiente modo: los datos numéricos afectados parpadearán, los números aparecerán con un fondo rojo o amarillo (dependiendo de si se trata de una alarma urgente o de advertencia) y aparecerá un mensaje en el área de encabezado de la pantalla.

Datos de A/h y ODI

Esta área de la pantalla muestra los valores de A/h y ODI (si están disponibles).

Para obtener más información sobre A/h y ODI, consulte la sección Apneas por hora e índice de desaturación de oxígeno de la página 67.

Si el recuento de apneas en cualquier periodo de una hora de las últimas 12 horas supera el número especificado, aparecerá en la pantalla una alarma visual en forma de asterisco junto al valor de A/h; esta alarma indica al usuario que debe consultar la pantalla de A/h y de desaturación de O_2 . A la pantalla A/h y de desaturación de O_2 se accede con el botón INFORMES de la barra de menús. Para obtener más información sobre la alarma visual de A/h, consulte la sección Alarma visual de A/h en la página 68.

Datos del IPI en tiempo real con pantalla gráfica de tendencias

Esta área de la pantalla muestra el valor en tiempo real del IPI, un valor numérico que resume cuatro parámetros (etCO₂, FR, SpO₂, FP) para proporcionar una indicación rápida del estado respiratorio del paciente. El gráfico de tendencias del IPI mostrado debajo del valor numérico indica la tendencia de este valor a lo largo del periodo de tiempo seleccionado.

En el gráfico de tendencias del IPI, las líneas horizontales roja y amarilla indican los límites actuales de alarma urgente y de advertencia, respectivamente.

Para obtener más información sobre este parámetro, consulte el Capítulo 7 Integrated Pulmonary Index™ en la página 65.

Cuando se supera el límite de la alarma del IPI, el dispositivo avisará de esta circunstancia del siguiente modo: los datos numéricos afectados parpadearán, los números aparecerán con un fondo rojo o amarillo (dependiendo de si se trata de una alarma [urgente] de alta prioridad relacionada con el paciente o de una alarma de advertencia) y aparecerá un mensaje en el área de encabezado de la pantalla.

Parada del monitor

Una vez concluida la monitorización del paciente, el funcionamiento del monitor se debe detener como se indica a continuación:

- 1. Retírele la FilterLineTM y el sensor SpO₂ al paciente.
- 2. Apague el monitor pulsando el botón de encendido/apagado situado en el panel frontal del monitor.
- 3. Si el monitor se había conectado a una toma de corriente alterna con el adaptador de CA, ahora puede desconectarlo de la toma. Para seguir cargando el paquete de baterías cuando el monitor no está en funcionamiento, deje el monitor conectado a la toma de corriente alterna. La batería interna del monitor se seguirá cargando aunque el monitor esté apagado.

Precaución:Use siempre el botón de encendido/apagado para apagar el monitor. No retire la batería ni
desenchufe el monitor para apagarlo. Si el monitor se apaga retirando la batería y
desenchufando el monitor, podrían perderse los datos de configuración.

Desplazamiento por la pantalla

Seleccione las opciones y ajuste los valores con el mando de control. El mando de control funciona de modo similar a un ratón de ordenador normal. También se usa como teclado para introducir letras y números.

> PARA DESPLAZARSE POR LA PANTALLA:

- 1. Gire el mando de control hacia derecha o izquierda para acceder a la siguiente área de la pantalla; el área donde se encuentra se identifica por el marco azul que la rodea.
- 2. Para realizar una selección, pulse el mando de control hasta que haga clic.
- > PARA INTRODUCIR LETRAS Y NÚMEROS:
 - Cuando tenga que introducir datos alfanuméricos, gire el mando de control para desplazarse según sea necesario y haga clic en el bloque de datos de entrada de la pantalla. El contenido del bloque de datos se borra y aparecerá un bloque pequeño con fondo amarillo en el lugar del primer carácter. Aparecerá una letra A negra en el bloque.
 - 2. A medida que gira el mando de control hacia derecha o izquierda, verá el alfabeto completo y los números de 0-9, el símbolo ← de la tecla de retroceso, un espacio en blanco y el símbolo ← de la tecla Intro.
 - 3. Cuando aparezca el carácter que desea introducir, pulse el mando de control hasta que haga clic. El carácter introducido se pondrá en su color habitual (blanco) y el bloque amarillo se moverá al espacio del siguiente carácter.
 - 4. Vuelva a girar el mando de control para iniciar la selección de un nuevo carácter.
 - 5. Para poner fin a la introducción de caracteres alfanuméricos, pulse el mando de control dos veces después de introducir la última letra o símbolo.

PARA CAMBIAR LOS AJUSTES:

- 1. Cuando esté en una pantalla donde hay ajustes que se pueden cambiar, gire el mando de control hasta que el ajuste deseado quede resaltado con un marco azul.
- 2. Para seleccionar el ajuste, pulse el mando de control hasta que haga clic.
- 3. Gire el mando de control hasta que llegue al ajuste nuevo.
- 4. Para especificar el ajuste, pulse el mando de control hasta que haga clic.
- 5. Continúe con seleccionado ajustes, o gire el mando de control para seleccionar ATRÁS o INICIO.

Cambios de configuración

En la mayoría de las pantallas de selección, cuando realice un cambio en uno o más parámetros del sistema, los ajustes nuevos solo se aplicarán al salir de la pantalla seleccionando *INICIO* o *ATRÁS*. Si sale de la pantalla de selección pulsando uno de los botones del panel frontal situado debajo de la pantalla, o espera más de un minuto y se agota el tiempo de espera de la pantalla y se reinicia, los cambios realizados en los ajustes no se guardarán.

Configuración de fecha, hora, idioma y otras opciones

Cuando encienda por primera vez el monitor, fíjese en la esquina superior izquierda del encabezado y asegúrese de que la fecha y la hora sean correctas.

- ▶ PARA CAMBIAR LA FECHA, LA HORA, EL IDIOMA Y OTRAS OPCIONES:
 - 1. A partir de la pantalla de inicio, use el mando de control para seleccionar *SISTEMA* (sistema) en la barra de menús.
 - 2. Para ajustar la fecha y la hora, use el mando de control para seleccionar y cambiar cada parámetro.
 - 3. Para cambiar el idioma de la pantalla, use el mando de control.
 - 4. Las opciones que acaba de configurar (incluido el idioma) permanecerán activas hasta que apague el monitor. Para cambiar permanentemente el idioma de la pantalla y otros ajustes, consulte la información de la sección Modificación de la configuración oficial en la página 131.
 - 5. Para cambiar cualquier otro de los parámetros de la lista, seleccione la opción correspondiente y, a continuación, seleccione el botón *INICIO* de la barra de menús para regresar a la pantalla de inicio.
 - 6. Si los parámetros A/h y ODI no están disponibles, la opción de visualización no aparecerá en esta pantalla.

12:00 AM 17 ENE	12						
ADULTO							⇔ 🛆
CONFIGURACIÓN E	DEL SISTEMA				5		
FECHA			17 EN	IE 12	Eto	CO 2	mmHg
HORA			12:45	āΑΜ		30	60
IDIOMA			ESP			55	-15
MODO MARCAJE E	EVENTOS		DETA	LL		FF	ર
PANTGRÁFICATEN	[hora]		12 ho	ora	FiC	02	18
PANTINCRETEN [m	in]		1.5 m	in		0	10
LLAMADA DE ENFE	RMERA		DESA	ст	Sp	02	%
PANTALLA DE INICIO			PATR	ÓN		101	
PANT. IPI INICIO (h)			2 hor	a			
ALARMA IPI			DESA	CT			~
PANTALLA A/h, ODI			ACTIN	l -	s	RI AT. SEG.	77
						0	11
BORRAR TENDENC.	CONFIG. D/A	CON CAL.	1PR. CO2	SERVICIO	SALIDA DE DATOS	INICI	•

Figura 15 – Pantalla de configuración del sistema

Tiempos de espera de la pantalla

Tiempos de espera de la pantalla

Todas las pantallas de configuración y del sistema volverán a la pantalla de inicio cuando hayan transcurrido 60 segundos sin que se haya accionado el mando de control.

Capnostream[™]20p: hoja de verificación funcional

Para instalar el monitor Capnostream™20p y empezar a trabajar con él de forma rápida y sencilla, siga la siguiente lista de instrucciones:

□ 1. Saque el monitor de la caja

- Saque el monitor Capnostream[™]20p y los accesorios de la caja.
- Compruebe que la caja contenga todos los artículos indicados en la lista incluida.
- Compruebe que la impresora tenga papel.

2. Instale el paquete de baterías

• Consulte las instrucciones de instalación en la sección Instalación del paquete de baterías de la página 23.

3. Encienda el monitor

- Conecte el cable de alimentación al enchufe de corriente de la parte trasera del monitor. Enrolle el mecanismo para aliviar la tensión del cable de alimentación alrededor del cable y apriételo para garantizar que el cable no se desconecte del monitor sin querer.
- Enchufe el cable de alimentación a la fuente de alimentación de CA.
- El indicador naranja de alimentación del panel frontal del monitor se iluminará.
- Pulse el botón de encendido/apagado ^(%) del panel frontal para encender el monitor. El indicador verde de encendido se iluminará para indicar que el monitor está encendido.
- Tenga en cuenta que los dos indicadores (el naranja de alimentación y el verde de encendido) deben estar iluminados durante el funcionamiento del monitor.

4. Cambie la fecha, la hora o el idioma

- Verifique que la fecha y la hora mostradas son correctas.
- Use el mando de control para seleccionar SISTEMA en la barra de menús.
- Si lo desea, cambie cada parámetro, incluidos el de fecha y hora, en esa pantalla.

5. Ajuste el tipo de paciente y el modo

- Use el mando de control para seleccionar la función *TIPO DE PACIENTE* en la barra de menús de la pantalla de inicio.
- Seleccione ADULTO, PEDIÁTRICO (por edad), o INFANTIL/NEONATO según corresponda.

□ 6. Conecte una FilterLineTM

- Deslice el cierre del conector de entrada de FilterLine[™] para dejar el conector al descubierto y conecte la FilterLine[™] adecuada.
- Conecte la FilterLine[™] al paciente como se explica en las Instrucciones de uso que se entregan con FilterLine[™]. El conector de la línea de muestreo se debe enroscar al puerto de CO₂ del monitor girándolo hacia la derecha hasta que ya no se pueda girar más, para asegurarse de que queda conectado con seguridad al monitor. Esto impedirá que durante la medición se produzcan fugas de gases por el punto de conexión y garantizará también la precisión de la medición.

7. Conecte un sensor SpO₂

- Conecte el cable de extensión de SpO₂ con seguridad al puerto del sensor de SpO₂ del monitor, y luego conecte el sensor de SpO₂ apropiado al cable de extensión.
- Conecte el sensor SpO₂ al paciente como se explica en las Instrucciones de uso.

3 8. Una vez conectado(s) uno o ambos sensores al monitor, está listo para funcionar

9. Compruebe los límites de alarma

- Compruebe los límites de alarma predeterminados y realice cualquier cambio permanente deseado en la configuración oficial.
- Para obtener más información sobre las alarmas, consulte Alarmas y mensajes en la página 71.

10. Abra un caso de paciente

- Para registrar los datos de un paciente de modo que sean fáciles de seguir y recuperar, se recomienda abrir un caso de paciente. Cuando se registra un informe de caso en tabla, es necesario abrir un caso de paciente.
- Consulte las instrucciones en la sección Uso de casos y números de identificación de pacientes de la página 45.

□ 11. Imprima los datos del paciente

- Elija el tipo deseado de informe del paciente y pulse el botón IMPRIMIR de la pantalla.
- Para obtener más información, consulte el Capítulo 11 Informes en la página 95.

Configure la función de llamada a enfermera (si corresponde; los accesorios de conectividad de llamada a enfermera deben comprarse por separado)

- Conecte el cable de llamada a enfermera al conector específico situado en la parte trasera del monitor y conecte el otro extremo del cable al sistema del centro conforme a los requisitos oficiales. Compruebe que todos los cables estén conectados y bien sujetos.
- Active la llamada a enfermera en el monitor como se explica en la sección Función de llamada a enfermera de la página 116.
- Compruebe la comunicación establecida entre el sistema de llamada a enfermera y el monitor.

Configure la función de salida de datos analógica (si corresponde; los accesorios de conectividad del sistema analógico deben comprarse por separado)

- Conecte el cable de datos D/A (digital/analógico) de Oridion (número de referencia PM20ACB) a la parte trasera del monitor y conecte el otro extremo del cable a un sistema analógico, por ejemplo un polisomnógrafo, según sea necesario. Compruebe que todos los cables estén conectados y bien sujetos.
- Configure la salida de datos analógica en el monitor como se explica en la sección Salida de datos analógica con Capnostream de la página 110.
- Verifique que la transferencia de datos entre el monitor y el sistema se está produciendo.

14. Configure la interfaz del sistema Bernoulli (si corresponde; el sistema de monitorización central y los accesorios deben comprarse por separado)

- Conecte Client Bridge (puente cliente) al puerto RS-232 de la parte trasera del monitor. Asegúrese de que todas las conexiones se hayan realizado y estén bien sujetas.
- Verifique que Client Bridge (puente cliente) está montado con seguridad.
- Verifique la comunicación entre el monitor Capnostream[™]20p, Client Bridge (puente cliente) y la estación central Bernoulli.
- Para obtener más información, consulte Funcionamiento con sistemas de datos de pacientes del hospital en la página 119.

15. Configure la transferencia de datos a través de USB (la memoria USB debe comprarse por separado)

- Conecte la memoria USB a la parte trasera del monitor.
- Elija el tipo deseado de informe del paciente y pulse el botón INICIAR USB de la pantalla.
- Para obtener más información, consulte Transferencia de datos a través del puerto de datos USB en la página 105.

Uso del monitor Capnostream[™]20p

Preparación del monitor para un paciente Uso de casos y números de identificación de pacientes Introducción de eventos de paciente Cambio del volumen de las alarmas y los pulsos Retraso de alarma Uso del sistema de evacuación de gases Apagado de la bomba para succión o lavado Modo Demo Gráfico de referencia de los menús de pantallas del monitor

Preparación del monitor para un paciente

PRECAUCIÓN: Si alguna respuesta del monitor le parece inadecuada, no use el monitor. En su lugar, póngase en contacto con su representante local.

Los siguientes pasos describen el procedimiento de preparación del monitor para un paciente.

> PARA PREPARAR EL MONITOR PARA UN PACIENTE:

- 1. Encienda el monitor pulsando el botón de encendido/apagado ^(%) del panel frontal.
- 2. La secuencia completa de encendido se explica en la sección Encendido del monitor de la página 32.
- 3. Confirme si los dos indicadores (el verde de encendido y el naranja de alimentación de CA) están iluminados.

PRECAUCIÓN: Si el indicador luminoso naranja no se enciende, el monitor está funcionando solo con la alimentación que recibe de la batería y dejará de funcionar cuando esta se agote. Consulte Encendido del monitor en la página 32.

4. Los indicadores luminosos de alarma rojo y amarillo se iluminarán brevemente y el altavoz emitirá un pitido.

PRECAUCIÓN: Si los indicadores luminosos de alarma rojo y amarillo no se encienden o no suena ningún pitido por el altavoz, no utilice el monitor y envíelo para que lo revisen.

- 5. Verifique la fecha y la hora para asegurarse de que coinciden con la fecha y hora actuales. Si no es así, ajuste la hora en la pantalla del sistema según se explica en la sección Configuración de fecha, hora, idioma y otras opciones de la página 41.
- Conecte uno o ambos sensores al monitor siguiendo las instrucciones de este manual. Para conectar los sensores, consulte Conexión de una FilterLine en la página 54 y Conexión de un sensor SpO2 al monitor en la página 62.

Una vez conectado(s) uno o ambos sensores al monitor, está listo para funcionar

Si no hay ninguna FilterLine[™] conectada, no se muestra ninguna onda de CO₂ y aparece el mensaje *FILTERLINE DESCONECTADA*.

Si no hay ningún sensor SpO_2 conectado, no se muestra ninguna onda de SpO_2 y aparece el mensaje SENSOR SpO_2 DESCONECTADO.

Se pueden utilizar la función de capnografía (EtCO₂) o la función de oximetría de pulso (SpO₂) sin usar la otra función. Si desea trabajar con una sola función, conecte ÚNICAMENTE el sensor para esa función en particular y el monitor funcionará con normalidad.

Nota: El monitor Capnostream[™]20p está diseñado para ser utilizado en un solo paciente cada vez.

Configuración del tipo de paciente

El monitor reconoce los 5 tipos de paciente siguientes:

- Infantil/Neonato: para pacientes recién nacidos y de hasta un 1 año de edad.
- Pediátrico 1-3 años: para pacientes de uno a tres años de edad.
- Pediátrico 3-6 años: para pacientes de tres a seis años de edad.
- Pediátrico 6-12 años: para pacientes de seis a doce años de edad.
- Adulto: para pacientes de 12 años de edad en adelante.

El tipo de paciente aparece indicado en la esquina superior izquierda de la pantalla. Es obligatorio especificar el tipo de paciente.

El tipo de paciente predeterminado original en el monitor es ADULTO; cuando se cambia el tipo de paciente, el tipo predeterminado pasará a ser el tipo de paciente actual.

PRECAUCIÓN: Las características de una respiración se calculan de modo diferente según los distintos tipos de pacientes. Por lo tanto, es fundamental especificar el tipo de paciente correcto. Si la configuración no es la correcta, la monitorización de la respiración del paciente será imprecisa y afectará al valor del IPI del paciente.

> PARA CAMBIAR EL TIPO DE PACIENTE:

- 1. Si el tipo de paciente que aparece indicado en la pantalla es correcto para el paciente actual, no es necesario realizar ningún cambio en el tipo de paciente. Si desea realizar algún cambio, use el mando de control para seleccionar la función *TIPO DE PACIENTE* en la barra de menús de la pantalla de inicio.
- 2. Gire el mando de control para cambiar el tipo de paciente y púlselo para registrar el cambio. Este cambio permanecerá activo hasta que cambie el tipo de paciente.

El monitor tiene unos parámetros de límite de alarma independientes para los tipos de paciente adulto/pediátrico e infantil/neonato que se pueden configurar según la fisiología observada en los grupos de edad específicos. Consulte la información pertinente en la sección Cambio de los límites de alarma de la página 72.

Uso de casos y números de identificación de pacientes

Se recomienda encarecidamente asociar todos los datos almacenados en el monitor con una ID de paciente que identifique su origen con un paciente particular. Esto permite que los datos de tendencias almacenados se asocien con una ID de paciente y evita la posibilidad de que se confundan los datos de varios pacientes al imprimir una tendencia o al descargarlos.

> PARA COMENZAR UN CASO NUEVO:

1. Una vez conectado el paciente al monitor, pulse el botón de **alta/baja del paciente** [¶][∠] del panel frontal del monitor. En la pantalla aparece el campo *ID.PACT*. y, en el campo de ID, un número de 14 dígitos generado automáticamente:

```
ID.PACT. 20101209072645
```

- Esta identificación generada automáticamente indica la fecha y hora de inicio de la sesión del caso (en formato AAAAMMDDhhmmss, que indica año, mes, día, hora, minuto y segundo en que se inicia la sesión). Para usar el número de ID automáticamente generado, use el mando de control para seleccionar *INICCASO* y haga clic en el botón *INICCASO* para iniciar el caso.
- 3. Para cambiar el número de ID, si así lo desea, gire el mando de control para resaltar *ID.PACT*. en azul en la pantalla y haga clic en el mando de control. Use el mando de control para introducir una nueva ID de paciente alfanumérica girando y pulsando el mando de control para seleccionar las letras y los números. Si desea introducir un espacio, gire el mando hasta que vea un cuadro vacío en lugar de una letra o un número, y haga clic para introducir el espacio. Notará que el espacio que está rellenando actualmente se resalta en amarillo. La longitud máxima permitida de la ID del paciente es de 20 caracteres. Seleccione el símbolo ←

para terminar. Para obtener las instrucciones de introducción de letras y números, consulte la sección Desplazamiento por la pantalla en la página 40.

- 4. Si desea cambiar el tipo de paciente para este paciente, puede hacerlo desde esta pantalla con el mando de control para seleccionar y cambiar el tipo de paciente.
- 5. Use el mando de control para seleccionar INICCASO.
- **Nota:** El caso comienza cuando se pulsa el botón *INICCASO* que, una vez pulsado, pasa a ser el botón *PARACASO*.
- **Nota:** Para iniciar un caso nuevo es imprescindible haber detenido el caso anterior con el botón PARACASO.

Nota: Si no está seguro de si el monitor está monitorizando un caso en esos momentos, haga clic en el botón de alta/baja del paciente para que aparezca la pantalla donde está el botón *INICCASO*. El estado del botón *INICCASO* le indica el estado actual: cuando no se ha iniciado ningún caso, aparecerá como *INICCASO*, y, cuando hay un caso en curso, aparecerá como *PARACASO*.

6. Para finalizar un caso cuando haya terminado la monitorización del paciente, pulse la tecla de alta/baja del

paciente **P**^{*E*} y después seleccione *PARACASO*. Esto marca el final de los datos correspondientes a ese paciente. Al detener un caso se borrará la memoria de tendencias y en la pantalla aparecerá la advertencia *SI DETIENE EL CASO, SE BORRARÁ LA MEMORIA DE TENDENCIAS. PULSE DE NUEVO "DETENER IMPRIMIR" PARA CONFIRMAR* cuando pulse el botón *PARACASO*. Si quiere transferir o imprimir un caso o datos de tendencias, *debe* hacerlo antes de detener el caso. Si no quiere parar el caso, solo tiene que girar el mando de control para que la pregunta desaparezca de la pantalla y seguir con el caso. Si quiere detener el caso, vuelva a hacer clic en el mando de control.

7. Si el usuario no pulsa el botón PARACASO cuando termina la monitorización y apaga el monitor, el caso continuará si el monitor se apaga y se vuelve a encender. No obstante, cuando el monitor se vuelve a encender en estas circunstancias, aparecerá una advertencia sugiriéndole al usuario que borre los datos de tendencias y cierre el caso (para borrar la ID del paciente) antes de iniciar una nueva sesión de monitorización. Puede ver esta pantalla en la Figura 34 – Mensaje sobre la memoria de tendencias de la página 93. Medtronic recomienda encarecidamente que así lo haga para evitar la posibilidad de que los datos del paciente se identifiquen incorrectamente. Sin embargo, si pretende continuar monitorizando al mismo paciente que antes, puede que le interese conservar los datos de tendencias y del caso.

Haciendo clic en SI y CONFIRM? en la pantalla que se muestra en la Figura 34 – Mensaje sobre la memoria de tendencias de la página 93, borrará la memoria de tendencias y cerrará el caso actual, borrando así todos los datos del monitor relacionados con ese caso.

ADVERTENCIA: El monitor solo puede almacenar un caso a la vez. La memoria de tendencias solo incluye los datos del caso en curso y se borra cuando se detiene el caso.

El monitor almacena automáticamente los datos del paciente y registra la fecha y la hora de todos los casos, tanto si se usa la opción de caso del paciente como si no. Mientras no se borre la memoria de tendencias, los datos permanecen almacenados en el monitor hasta que no quede espacio en la memoria de tendencias; cuando esto sucede, los datos nuevos irán sobrescribiendo el principio de los datos de tendencias. (Consulte el Capítulo 10 Uso de las tendencias en la página 85 para obtener más información sobre la capacidad de tendencias). Por su parte, las copias impresas de los casos solo incluirán los datos registrados después de iniciar el caso en curso (incluso si la memoria de tendencias también incluye los datos anteriores al caso actual). Por otro lado, los datos de tendencias mostrados y las copias impresas de tendencias incluyen todos los datos guardados en la memoria de tendencias.

Introducción de eventos de paciente

Cuando se analiza el historial de un paciente en el monitor, suele ser útil tener un registro de los eventos del paciente que podrían haber influido en las lecturas registradas. El monitor tiene la capacidad de registrar una amplia variedad de eventos de paciente. Hay dos opciones: eventos rápidos y eventos detallados.

Si el monitor se configura para registrar eventos rápidos, al pulsar el botón de evento ($\overline{\mathbf{A}}$) se coloca una marca en la memoria de tendencias que muestra que en la fecha y hora en la que el botón se pulsó tuvo lugar un evento. Consulte la Tabla 20 – Ejemplo de visualización en formato de tabla para ver un ejemplo de una marca de evento rápido.

Los eventos detallados permiten al médico registrar la información con más detalle. Hay tres categorías de eventos: administración de medicación, actividad física del paciente e intervenciones. Estos eventos pueden marcarse en la memoria del monitor para facilitar el seguimiento de los cuidados prestados a un paciente, y se muestran en las pantallas de tendencias y salida de datos.

PARA USAR LOS EVENTOS DETALLADOS:

- 1. Pulse el botón de evento 🛣 del panel frontal del monitor.
- 2. Aparecerá en pantalla la tabla siguiente. Use el mando de control para hacer clic en un evento.
- 3. Haga clic en el mando de control para almacenar el evento y regresar a la pantalla de INICIO.

La tabla siguiente muestra la configuración predeterminada. Los nombres de los eventos se pueden cambiar mediante la configuración oficial según se explica en la sección Modificación de la configuración oficial de la página 131.

MEDICACIÓN	PACIENTE	INTERVENIDO
Fentanilo	COME	OXÍGENO
Versed	BEBE	SUCCIÓN
MIDAZOLAM	TOSE	AJUSTVÍARES
Morfina	CAMINA	NARCAN
Demerol	FT PECHO	ROMAZICON
Propofol	VUELTO	TTONEBULIZA
SURFACTANTE	RONCA	ESTIMULAR
Otros	OTROS	INSUFL. CO2*
		ABG
		OTROS

Tabla 8 - Marcaje de eventos

* Insuflación de CO2

Si el monitor está ajustado para que registre eventos detallados, pero no desea designar un nombre de evento específico, al pulsar el botón de evento 🛋 dos veces se registrará un evento sin rotular similar a la marca de un evento rápido. Esto es útil cuando no hay tiempo para designar los datos detallados.

Cambio del volumen de las alarmas y los pulsos

El volumen de las alarmas de paciente y del tono de pulso se puede subir o bajar. El tono de pulso también se puede desactivar desde el menú SpO₂. Por defecto, el tono de pulso está apagado.

Volumen de alarma

> PARA SUBIR O BAJAR EL VOLUMEN DE LAS ALARMAS:

1. Use el mando de control para seleccionar el icono de altavoz situado en el lado derecho de la barra de menús.



Figura 16 – Barra de menús

- 2. Haga clic en el mando de control una vez para seleccionar el control de volumen de las alarmas.
- 3. Gire el mando de control para subir o bajar el volumen. El nivel del volumen de alarma seleccionado se oirá a medida que gira el mando. Haga clic en el mando dos veces para fijar el nuevo nivel de volumen.



Figura 17 – Selección del volumen de alarma

Nota: El volumen de alarma no se puede ajustar en cero con el control de volumen de las alarmas. La alarma sonora solo se puede desactivar en la configuración oficial.

Volumen del tono de pulso

El monitor se puede configurar para que emita un pitido audible con cada latido cardiaco. El monitor se entrega de fábrica con el tono de pulsación desactivado.

El tono de pulso también se puede desactivar desde el menú SpO2. Por defecto, el tono de pulso está apagado.

Ajuste del volumen del tono de pulsación

Para subir o bajar el volumen del tono de pulsación, use el mando de control para seleccionar el icono de altavoz y haga clic dos veces para seleccionar el ajuste deseado para el volumen del tono de pulsación.



Figura 18 - Selección del volumen del tono de pulsación

El volumen del tono de pulsación se puede ajustar en cero.

Activación o desactivación del tono de pulsación

> PARA ACTIVAR EL VOLUMEN DEL TONO DE PULSACIÓN:

- 1. Use el mando de control para seleccionar el área de visualización de SpO₂. Haga clic en el mando de control para ir a la pantalla de configuración de SpO₂.
- 2. Gire el mando de control para resaltar el parámetro *TONO DE PULSACIÓN*, haga clic en el mando para seleccionar la opción, gire el mando una vez para elegir el modo activado y pulse el mando otra vez para guardar la opción.
- 3. Ahora se oye un pitido por cada latido cardiaco. Para desactivar el tono de pulsación, repita el procedimiento y seleccione el modo desactivado del *TONO DE PULSACIÓN*.

Opciones predeterminadas de volumen de alarma

El volumen de alarma predeterminado oficial se puede establecer en una de las tres opciones siguientes, en la pantalla *CONFIGURACIÓN OFICIAL>MONITOR*. Estas opciones determinan el volumen de las alarmas sonoras cuando el dispositivo está encendido. Para obtener más información sobre la configuración oficial, consulte la sección Configuración oficial predeterminada de la página 131.

Opción de volumen de alarma sonora	Descripción
Máximo	El volumen de la alarma sonora volverá al máximo cuando el dispositivo se encienda, independientemente del ajuste anterior.
Últ. ajuste	El volumen de la alarma sonora seguirá en el nivel establecido por última vez en el dispositivo, incluso después de apagarlo y volver a encenderlo.
Audio apag.	El volumen de la alarma sonora está desactivado.

Tabla 9 – Volumen de las alarmas sonoras

PRECAUCIÓN: La opción Audio apag. (que acciona el silenciamiento permanente de las alarmas) se debe establecer en la configuración oficial únicamente en aquellas situaciones en las que el profesional sanitario también esté monitorizando al paciente por otros medios; la finalidad de esto es evitar que las alarmas pasen desapercibidas.

Retraso de alarma

Hay disponible una opción de retraso de alarma (para varias alarmas). Para obtener más información, consulte Retraso de alarma en la página 74.

Uso del sistema de evacuación de gases

Cuando se está sedando al paciente con un anestésico gaseoso, se puede acoplar un sistema de evacuación de gases al monitor. La conexión para la salida de los gases es un conector de tipo dentado diseñado para tubos con diámetro interior de 2,38 mm (3/32 in). Utilice los tubos adecuados para conectar el sistema de evacuación a la salida de gases situada entre las conexiones de FilterLine[™] y de SpO₂, como se muestra en la Figura 19, más adelante.

Deseche los gases de muestra conforme a los procedimientos estándar o a la normativa local aplicable a la eliminación de gases.



Figura 19 - Punto de conexión del sistema de evacuación de gases

Apagado de la bomba para succión o lavado

Use el modo Bomba desactivada cuando vaya a realizar una succión o un lavado. En el modo Bomba desactivada, la actividad de la bomba se suspende para proteger al monitor contra la entrada de líquidos que puedan provocar un funcionamiento incorrecto.

En el modo Bomba desactivada, la bomba del módulo de CO_2 está *apagada* durante un tiempo predefinido para impedir que entre ningún líquido en el monitor.

ADVERTENCIA: Si en cualquier momento el dispositivo muestra el mensaje OBSTRUCCIÓN DE FILTERLINE, sustituya la FilterLine[™].

> PARA CAMBIAR EL MODO DE LA BOMBA:

1. Antes de realizar un lavado o una succión, pulse el botón de bomba apagada \textcircled{O}^{\times} situado en el panel frontal del monitor.

La bomba del módulo de CO_2 se apaga, el temporizador inicia la cuenta atrás y aparece la pantalla de bomba desconectada. El temporizador de cuenta atrás aparece en el área de la onda de CO_2 .

- **Nota:** Mientras la bomba esté apagada, el valor de CO₂ no se monitoriza y tampoco se muestran la onda de ausencia de respiración, ni los valores numéricos de EtCO₂, FiCO₂ o frecuencia respiratoria. La monitorización de SpO₂ y de pulso continúa.
- 2. El modo Bomba Off puede finalizarse pulsando de nuevo el botón de bomba apagada.
- 3. El modo Bomba Off puede prolongarse mediante el mando de control para seleccionar la opción de menú *AMP TPO*.

Cuando el monitor está en modo Bomba Off, aparece un temporizador en el área de mensajes de la parte superior de la pantalla y muestra las horas y minutos totales que ha estado apagada la función de monitorización de CO₂.

Cuando el temporizador termina o el usuario sale manualmente del modo Bomba Off pulsando de nuevo el botón de bomba apagada, la bomba se encenderá y se reanudará la monitorización de CO₂. El monitor vuelve automáticamente a la pantalla de inicio.

Nota: El botón de bomba apagada no funciona mientras se desplace por las pantallas de tendencias gráficas y tabulares.

Modo Demo

El monitor Capnostream™20p ofrece la posibilidad de ver los datos estándar pregrabados para mostrar un ejemplo del aspecto del monitor en condiciones de medición estándar. El modo Demo permite a médicos y técnicos comprender lo que la pantalla mostrará durante la monitorización de los pacientes y les resulta útil como guía antes de conectar el monitor a pacientes reales.

> PARA USAR EL MODO DEMO:

- 1. Para acceder al modo Demo, haga clic en *SISTEMA* y después a *SERVICIO* en la barra de menús, en la parte inferior de la pantalla. Introduzca la contraseña de servicio (consulte Modificación de la configuración oficial en la página 131) para acceder a la pantalla de servicio.
- 2. En la pantalla Servicio, haga clic en el botón MODO DEMO de la barra de menús. El monitor accederá ahora al modo Demo y mostrará los datos de CO₂ y de SpO₂ pregrabados. El encabezado, que en el modo Demo actúa como si se tratara de un indicador de funcionamiento, indicará MODO DEMO con un fondo de color naranja parpadeante. También se mostrará el mensaje de aviso DATOS REGISTRADOS PREVIAMENTE DEL MODO DEMO. Las opciones de servicio y la función de comprobación de calibración no están disponibles para el usuario mientras el dispositivo esté en modo Demo.
- 3. Para salir del modo Demo, debe apagar el monitor con el botón de encendido/apagado del panel frontal del monitor. Cuando el monitor se vuelve a encender, habrá regresado a su estado de funcionamiento estándar.

Gráfico de referencia de los menús de pantallas del monitor

El siguiente cuadro muestra las líneas de flujo del menú para desplazarse entre las diferentes pantallas de CapnostreamTM20p.



Figura 20 - Gráfico de referencia de los menús de pantallas cuando los parámetros A/h y ODI están disponibles



parámetros A/h y ODI no están disponibles

Capnografía con el monitor Capnostream™20p

Consumibles Microstream[™] EtCO₂ Conexión de una FilterLine Datos de CO₂ que muestra el monitor Capnostream[™]20p Parámetros de CO2 ajustables Monitorización de CO2 durante una exploración de RM

Consumibles Microstream[™] EtCO₂

ADVERTENCIA:	Las conexiones flojas o dañadas pueden poner en peligro la ventilación o hacer que las mediciones de los gases respiratorios no sean precisas. Conecte de forma segura todos los componentes y revise las conexiones de acuerdo con los procedimientos clínicos normalizados para asegurarse de que no presentan fugas.
ADVERTENCIA:	Si en la FilterLine [™] entra demasiada humedad (es decir, humedad ambiental o la respiración de aire inusualmente húmedo), en el área de mensajes de Capnostream [™] 20p aparecerá el mensaje <i>Limpieza de FilterLine</i> . Si la FilterLine [™] no queda limpia, aparecerá el mensaje <i>Obstrucción de FilterLine</i> en la sección de la pantalla de la onda de CO ₂ en la pantalla de inicio y en el área de mensajes de Capnostream [™] 20p. (Si no se muestra ninguna forma de onda, el mensaje aparecerá solamente en el área de mensajes). Sustituya la FilterLine [™] cuando aparezca el mensaje <i>Obstrucción de FilterLine</i> .
ADVERTENCIA:	FilterLine [™] puede arder en presencia de O ₂ cuando se expone directamente a un láser, dispositivos electroquirúrgicos o calor elevado. Cuando realice procedimientos en cabeza y cuello con láser, dispositivos electroquirúrgicos o calor elevado, tenga precaución para evitar que la FilterLine [™] o los paños quirúrgicos de su alrededor se inflamen.
PRECAUCIÓN:	Antes de usar estos productos, lea detenidamente las <i>Instrucciones de uso</i> de los consumibles Microstream [™] etCO ₂ .
PRECAUCIÓN:	Use únicamente consumibles Microstream [™] etCO ₂ para garantizar el funcionamiento correcto del monitor.
PRECAUCIÓN:	Los consumibles Microstream [™] etCO ₂ han sido diseñados para ser utilizados una sola vez en un único paciente, por lo que no se pueden volver a usar. No trate de limpiar, desinfectar ni soplar la FilterLine [™] ; si lo hace el monitor podría resultar dañado.
PRECAUCIÓN:	Deseche los consumibles Microstream [™] etCO ₂ conforme a los procedimientos estándar o a las normativas locales aplicables a la eliminación de residuos médicos contaminados.
PRECAUCIÓN:	Cuando se monitoriza mediante capnografía durante la sedación, tenga en cuenta que la sedación puede provocar hipoventilación y distorsión o desaparición de la forma de onda de CO ₂ . La atenuación o desaparición de la forma de onda es un indicador de que el estado de las vías respiratorias del paciente debe ser evaluado.
PRECAUCIÓN:	Cuando se monitoriza a los pacientes durante una endoscopia superior, el bloqueo parcial de las vías respiratorias debido a la colocación del endoscopio puede provocar periodos de lecturas bajas y formas de onda redondeadas. Este fenómeno será más pronunciado con niveles elevados de suministro de oxígeno.
PRECAUCIÓN:	Si se lleva a cabo la insuflación de CO_2 durante la monitorización de CO_2 , los valores de et CO_2 aumentarán en consecuencia de forma muy significativa, lo que podría disparar alarmas en el dispositivo y generar formas de onda anormalmente altas hasta que el CO_2 sea evacuado del paciente.

- **Nota:** Cuando conecte una línea de muestreo al monitor, acople el conector de la línea al puerto de CO₂ del monitor y gírelo todo lo posible hacia la derecha para asegurarse de que queda bien conectado al monitor. Esto impedirá que durante la medición se produzcan fugas de gases por el punto de conexión y garantizará también la precisión de la medición.
- **Nota:** Una vez realizada la conexión de la línea de muestreo de CO₂, compruebe que aparecen los valores de CO₂.
- **Nota:** Las líneas de muestreo de CO₂ utilizadas con el monitor están marcadas en cuanto al límite superior de oxígeno que es posible proporcionar con la línea de muestreo. Unos niveles de suministro de oxígeno mayores a los indicados en el envase de la línea de muestreo pueden dar lugar a la dilución de las lecturas de CO₂, lo que podría derivar en unos valores de CO₂ más bajos.

Principios básicos

Al elegir los consumibles Microstream[™] etCO₂, debe considerar lo siguiente:

- Si el paciente está intubado o no intubado
- Si el paciente está conectado a un sistema de ventilación mecánica
- El tiempo de uso
- La talla y el peso del paciente
- Si el paciente respira por la nariz o por la boca o alterna entre boca y nariz

Para obtener información adicional, póngase en contacto con su representante local.

Seleccione la FilterLine[™] adecuada y conéctela al monitor antes de acoplarla a las vías aéreas del paciente. Asegúrese de seguir las *Instrucciones de uso* de los consumibles Microstream[™] etCO₂ para conectarlos adecuadamente.

Consumibles Microstream[™] EtCO₂

En la sección Consumibles Microstream[™] EtCO2 de la página 148 encontrará una lista de los consumibles Microstream[™] etCO₂.

- Nota: Los productos Smart ofrecen muestreos orales y nasales. Los productos H son para uso a largo plazo.
 Nota: El término genérico FilterLine[™] usado en este manual es intercambiable con cualquiera de
- los consumibles Microstream™ etCO₂.
 Nota: Los productos incluidos en la lista están disponibles en distintas versiones para utilizar el adecuado para la talla específica del paciente.

El listado describe los principales productos disponibles. Para más información sobre los consumibles FilterLineTM de MicrostreamTM, u otras opciones de tamaño o envasado, visite http://www.covidien.com/rms/brands/microstream.

Conexión de una FilterLine™

Antes de monitorizar a un paciente con capnografía, debe conectar la FilterLine[™] apropiada al monitor y al paciente.

> PARA REALIZAR LAS CONEXIONES:

- 1. Deslice el cierre del conector de entrada de la FilterLine[™] para dejar el conector al descubierto y conecte la FilterLine[™] adecuada. Conecte la FilterLine[™] al monitor y enrosque el conector hacia la derecha todo lo posible.
- 2. Conecte la FilterLineTM al paciente como se explica en las *Instrucciones de uso* que se entregan con la FilterLineTM.

Cuando se conecta la FilterLine[™], el monitor empezará inmediatamente a buscar respiraciones, pero no indicará un estado de ausencia de respiración antes de que se produzcan respiraciones válidas.

Nota: La función CO₂ del monitor Capnostream[™]20p entrará automáticamente en modo de espera cuando el monitor se deja encendido durante 30 minutos o más sin tener una FilterLine[™] conectada. En este caso, la monitorización de CO₂ del monitor entrará automáticamente en modo de espera y se reiniciará cuando se conecte una FilterLine[™]. Este proceso de inicialización suele tardar unos 30 segundos, aunque puede llegar a tardar 180 segundos.

Datos de CO₂ que muestra el monitor Capnostream[™]20p

La pantalla Inicio del monitor CapnostreamTM20p muestra los datos de CO₂ en tiempo real. Los datos mostrados incluyen:

- Valores de etCO₂ y FiCO₂ en tiempo real junto con la unidad seleccionada (consulte Datos de CO2 que muestra el monitor Capnostream[™]20p en la página 55 para obtener más información sobre las unidades disponibles)
- Valores de FiCO₂ en tiempo real junto con la unidad seleccionada (consulte Parámetros de CO2 ajustables en la página 56 para más información sobre las unidades disponibles)
- Frecuencia respiratoria (FR) en respiraciones por minuto
- Forma de onda de CO₂



Figura 22 – Datos de CO₂ en el monitor Capnostream™20p

Adicionalmente, el monitor puede mostrar los datos de CO₂ en forma de tendencias, mostrando la hora, la fecha, etCO₂, FR, alarmas, eventos y un marcador INICIO DE CASO. Para más información sobre la pantalla de tendencias, consulte el Capítulo 11 Uso de las tendencias en la página 85.

Cuando se superan los límites mínimo o máximo de alarma de EtCO₂, el valor numérico afectado parpadeará para alertar al profesional sanitario sobre el parámetro específico que está afectado.

Si se desea, se puede establecer un retraso para una serie de alarmas de modo que suenen únicamente si el parámetro supera los límites de la alarma durante el número de segundos especificado. Esta opción se puede establecer mediante la configuración oficial. Consulte Configuración oficial predeterminada en la página 131 para obtener más información sobre cómo definir la configuración oficial.

Si se ha seleccionado la pantalla de inicio numérica, la forma de onda de CO_2 no aparecerá. En su lugar, aparecerán los datos de CO_2 con una fuente de letra grande para facilitar su lectura incluso desde cierta distancia. Puede ver el aspecto de la sección de CO_2 de la pantalla de inicio numérica en la Figura 23 – Sección de CO_2 de la pantalla de inicio numérica, más adelante.

Nota: Tanto en pacientes adultos como neonatos, el valor numérico de EtCO₂ mostrado en la pantalla es el valor máximo de CO₂ durante los últimos 20 segundos, actualizado cada segundo. Se emitirá una alarma de EtCO₂ basada en el valor de EtCO₂ indicado en la pantalla.
 Nota: En entornos de gran altitud, los valores de EtCO₂ pueden ser inferiores a los valores observados a nivel del mar, tal y como explica la ley de Dalton de presiones parciales. Cuando se use el monitor en entornos de gran altitud, se aconseja reajustar la configuración de la alarma de EtCO₂ como corresponda.
 Nota: Este modo de medición corrige el valor de CO₂ para BTPS (temperatura corporal, presión, saturación), que asume que los gases alveolares están saturados con vapor de agua. BTPS debe permanecer activado durante los procedimientos de medición del paciente. Para otros fines, se puede desactivar en la pantalla Configuración de CO₂.



Figura 23 – Sección de CO2 de la pantalla de inicio numérica

Parámetros de CO₂ ajustables

El monitor Capnostream™20p ofrece la opción de ajustar la configuración de algunos parámetros usados para la medición de CO₂ con el fin de adaptarlos a pacientes particulares, los requisitos del centro u otras necesidades. Para cambiar esta configuración de modo temporal (hasta que se apague el dispositivo), siga el procedimiento que se especifica a continuación. Para establecer los cambios realizados como la configuración oficial de modo que la configuración siga aplicándose tras apagar el monitor, consulte Parámetros de CO2 en la página 138.

➢ PARA CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CO₂:

- 1. En la pantalla de inicio, mueva el mando de control a la sección CO₂ de la pantalla para marcarla en azul. Haga clic en el mando de control.
- Aparecerá la pantalla de configuración de CO₂. Mueva el mando de control hasta el parámetro que desea cambiar y haga clic para seleccionar dicho parámetro. Mueva el mando de control para seleccionar la configuración deseada y haga clic para seleccionarla. Puede ver la lista de los parámetros que se pueden cambiar en la Tabla 10 Parámetros de CO2 ajustables, más adelante.
- 3. Mueva el mando de control hasta el botón *INICIO* y haga clic para seleccionar. La pantalla también regresará a la pantalla de inicio tras unos segundos si no se toman acciones adicionales en dicha pantalla, pero si el tiempo de espera expira y regresa a la pantalla de *INICIO* de esta manera, los cambios no serán grabados.
- 4. Los cambios de estos parámetros seguirán activos hasta que apague el dispositivo.

Parámetro	Opciones	Valor predeterminado
BTPS*	Activado/Desactivado	Activado
PANTALLA FiCO2	Activado/Desactivado	Activado
FINESP BOMBA OFF [min]	5, 10, 15 o 30	15
Escala de forma onda CO ₂ [mmHg]	50, 100, 150, Auto	Auto
Escala visualiz. tendencia EtCO ₂ [mmHg]	50; 100; 150	50
Escala visualiz. tendencia FR [rpm]	50; 100; 150	50
VELOC. BARRIDO** (mm/s) [para tipo de paciente actual]	1; 2; 3; 6,3; 12,5; 25	6,3
NIV ALERT VISUAL A/H (APNEA/H) (si está disponible)	1-99	10

Tabla 10 – Parámetros de CO₂ ajustables

- * BTPS denota la corrección estándar usada durante la medición de la temperatura corporal, la presión y la saturación. BTPS debería estar configurado como activado durante todos los procedimientos de medición. El dispositivo desactiva automáticamente la corrección BTPS durante los procedimientos de calibración y la activa de nuevo tras estos procedimientos. No es necesario que el usuario realice ningún cambio en la configuración del parámetro BTPS.
- ** La velocidad de barrido es la velocidad a la que la forma de onda completa un ciclo del gráfico para cubrir toda la pantalla de visualización una vez.
- **Nota:** Tenga en cuenta que si cambia la escala de forma de onda en la pantalla de configuración de CO₂ o en Configuración oficial, una forma de onda de CO₂ con valores que están por encima del nivel superior de la escala aparecerá incompleta, con los valores más altos cortados. Por tanto, la escala de forma de onda predeterminada es Auto.

Monitorización de CO2 durante una exploración de RM

ADVERTENCIA: No use el conjunto FilterLine[™] H para pacientes infantiles/neonatos durante una exploración de resonancia magnética (RM). El uso del conjunto FilterLine[™] H para pacientes infantiles/neonatos durante una exploración de RM podría dañar al paciente.

- **PRECAUCIÓN:** Cuando se está realizando una exploración de RM, el monitor debe estar fuera de la sala de RM. Cuando el monitor se utiliza fuera de la sala de RM, la monitorización de EtCO₂ se puede llevar a cabo conectando una FilterLine[™] XL para disponer de más longitud.
- PRECAUCIÓN: El uso de una línea de muestreo de CO₂ con una letra "H" en su nombre (la cual indica que se debe usar en entornos húmedos) durante la exploración de RM podría provocar interferencias. Se recomienda usar líneas de muestreo cuyo nombre no tenga la letra "H". Para ver una lista de las líneas de muestreo modelo H, consulte Consumibles MicrostreamTM EtCO2 en la página 148.

La monitorización de et CO_2 no invasiva durante una resonancia magnética (RM) se puede lograr con el monitor, una FilterLineTM XL y la línea de muestreo de CO_2 adecuada.

PARA USAR EL MONITOR DURANTE UNA EXPLORACIÓN DE RM:

- 1. Coloque el monitor fuera de la sala de RM. Tiene que haber un orificio en la pared de la sala (de un diámetro aproximado de 10 cm).
- 2. Conecte la FilterLine[™] XL al monitor y pase la FilterLine[™] XL por el orificio de la pared de la sala de RM.
- 3. Conecte la FilterLine[™] XL al paciente.
- Nota: Debido a la mayor longitud de FilterLine[™] XL, es posible que haya un retraso mayor y, por lo tanto, un tiempo de respuesta más lento.

Para comprar unidades FilterLine[™] XL, póngase en contacto con su representante local.

Oximetría de pulso con el monitor Capnostream™20p

Sensores Nellcor[™] SpO₂ Conexión de un sensor SpO₂ al monitor Datos de SpO₂ que muestra el monitor Capnostream[™]20p Parámetros de SpO₂ ajustables Mensaje de límite de alarma de SPO₂

Sensores Nellcor[™] SpO₂

- ADVERTENCIA: Antes de usar estos sensores, lea detenidamente sus *Instrucciones de uso*, incluidas todas las advertencias, precauciones e instrucciones.
- ADVERTENCIA: No sumerja los sensores en agua, disolventes ni soluciones de limpieza (el sensor tiene conectores que no son impermeables). No esterilice por radiación, vapor u óxido de etileno. Consulte las instrucciones de limpieza en las Instrucciones de uso de los sensores de oximetría de pulso reutilizables.
- ADVERTENCIA: Antes de cada uso de los sensores de SpO₂, asegúrese de que el sensor esté intacto. Se prohíbe el uso de sensores dañados (con algún desgarro, desgastados [erosionados] o expuestos a componentes ópticos, cables o metal). El uso de sensores dañados puede comprometer la seguridad del paciente y provocarle lesiones. La protección del monitor contra los efectos de la descarga de un desfibrilador cardiaco depende del uso de unos cables y sensores de SpO₂ adecuados según se enumeran en la Tabla 11 de la página 60.
- **ADVERTENCIA:** Para las mediciones de SpO₂ use solamente sensores Nellcor[™]. El uso de otros sensores puede hacer que el monitor no funcione correctamente.
- ADVERTENCIA: No use los sensores de oximetría durante una exploración de resonancia magnética (RM). La corriente conducida podría producir quemaduras. Los sensores pueden afectar a las imágenes de RM, y la unidad de RM puede afectar a la precisión de las mediciones de oximetría.
- ADVERTENCIA: Los tejidos del paciente pueden sufrir daños como consecuencia del uso o colocación incorrectos de un sensor de oximetría de pulso. Inspeccione el lugar del sensor como se indica en las instrucciones de uso. No aplique el sensor demasiado apretado o con una presión excesiva. No enrolle el sensor, aplique cinta adicional ni deje el sensor demasiado tiempo en un mismo lugar. Si la piel que queda debajo del sensor se irritara, cambie el sensor de sitio.
- **PRECAUCIÓN:** Los sensores para uso en un solo paciente y los sensores adhesivos están diseñados exclusivamente para ser utilizados en un solo paciente. No transfiera un sensor para un solo uso o un sensor adhesivo de un paciente a otro.
- **Nota:** Los transductores de oxígeno (sensores) que utiliza este dispositivo se pueden considerar como dispositivos de superficie que entran en contacto con la piel durante un periodo de tiempo limitado. Los sensores han superado las pruebas de biocompatibilidad recomendadas y, por tanto, cumplen con la norma ISO 10993-1.

Nota: Dado que la absorción de luz de la hemoglobina depende de la longitud de onda y que la longitud de onda media de los LED varía, un sistema de monitorización debe conocer la longitud de onda media del LED rojo del sensor para medir la SpO₂ con precisión. Durante el monitoreo, el software del sistema de monitorización selecciona coeficientes apropiados para la longitud de onda del LED rojo de ese sensor; estos coeficientes se usan entonces para determinar la SpO₂. Además, para compensar las diferencias en el grosor de los tejidos, la intensidad de la luz de los LED del sensor se ajusta automáticamente. Conjuntamente, estas funciones proporcionan la calibración automática de la SpO₂.

Periodo de actualización de datos, promediación de los datos y procesamiento de señales

El procesamiento avanzado de señales del algoritmo $OxiMax^{TM}$ prolonga automáticamente la cantidad de datos necesarios para la medición de SpO_2 y de la frecuencia cardiaca, en función de las condiciones de medición. El algoritmo $OxiMax^{TM}$ prolonga automáticamente el tiempo medio dinámico requerido más allá de siete (7) segundos cuando las condiciones de medición se han degradado o dificultado debido a una perfusión baja, interferencia de la señal, luz ambiental, electrocauterio, otras interferencias, o una combinación de estos factores, lo cual puede dar lugar a un aumento en el tiempo medio dinámico. Si el resultado del tiempo medio dinámico excede los 20 segundos para SpO_2 , el algoritmo establece la búsqueda de pulso al tiempo que continúa actualizando cada segundo los valores de SpO_2 y de frecuencia cardiaca.

A medida que las condiciones de medición se prolongan, la cantidad de datos requeridos puede seguir creciendo. Si el tiempo medio dinámico alcanza los 40 segundos, y/o 50 segundos para la frecuencia cardiaca, se produce un estado de alarma técnica: el algoritmo establece la búsqueda de pulso y el sistema de monitorización notifica una saturación cero para indicar una pérdida de pulso lo cual debería activar una alarma sonora.

Comprobadores de funcionamiento y simuladores de pacientes

En el mercado hay varios modelos disponibles de comprobadores de funcionamiento de sobremesa y de simuladores de pacientes que se pueden usar para comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas de monitorización Covidien NellcorTM, sensores y cables. Consulte el manual del usuario del dispositivo de pruebas individual para conocer los procedimientos específicos del modelo de comprobador que esté utilizando. Si bien este tipo de dispositivos puede resultar útil para verificar que el sensor, el cableado y el sistema de monitorización funcionan, no puede ofrecer los datos necesarios para evaluar correctamente la precisión de las mediciones de SpO₂ del sistema.

Una evaluación completa de la precisión de las mediciones de SpO₂ requiere, como mínimo, poder usar las características de longitud de onda del sensor y reproducir la compleja interacción óptica del sensor y del tejido del paciente. Estas prestaciones van más allá de las posibilidades de los comprobadores de sobremesa conocidos. La precisión de la medición de SpO₂ solo se puede evaluar in vivo, comparando las lecturas con valores identificables del sistema de monitorización y las mediciones de SaO₂ obtenidas de las muestras de sangre arterial tomadas simultáneamente con un oxímetro de monóxido de carbono de laboratorio.

Hay muchos comprobadores de funcionamiento y simuladores de pacientes diseñados para trabajar con las curvas de calibración esperadas del sistema de monitorización y que pueden ser adecuados para su uso con sistemas de monitorización y/o sensores. Sin embargo, no todos los dispositivos de este tipo están adaptados para ser utilizados con el sistema de calibración digital $OxiMax^{TM}$. Aunque esto no afectará al uso del simulador a la hora de verificar la funcionalidad del sistema, los valores de medición de SpO₂ mostrados pueden diferir del ajuste del dispositivo de prueba. En un sistema de monitorización que funciona correctamente, esta diferencia será reproducible en el tiempo y de un sistema de monitorización a otro conforme a las especificaciones de rendimiento del dispositivo de prueba.

Selección de los sensores Nellcor™ SpO₂

A la hora de seleccionar un sensor, tenga en cuenta el peso y la actividad del paciente, la idoneidad de la perfusión, los sitios disponibles para los sensores y la duración estimada de la monitorización. Los modelos de sensores se indican en la Tabla 11 – Sensores Nellcor™ SpO2, más adelante. Para obtener información adicional, póngase en contacto con su representante local.

Los sensores de oximetría de pulso Nellcor[™] tienen diodos emisores de luz (LED) que emiten luz roja a una longitud de onda de aproximadamente 660 nm, y luz infrarroja a una longitud de onda de aproximadamente 900 nm. La potencia de salida óptica total de los LED del sensor es inferior a 15 mW. Esta información puede ser útil para los profesionales sanitarios que practican, por ejemplo, terapias fotodinámicas.

Sensor de oxígeno	Modelo	Peso del paciente
Transductor de oxígeno <i>OxiMax</i> ™	MAX-N	<3 kg o >40 kg
(un solo uso en un único paciente)	MAX-I	De 3 a 20 kg
	MAX-P	De 10 a 50 kg
	MAX-A	>30 kg
	MAX-AL	>30 kg
	MAX-R	>50 kg
	MAX-FAST	>40 kg
Transductor de oxígeno <i>OxiMax</i> ™ OxiCliq™	Р	De 10 a 50 kg
(un solo uso)	А	>30 kg
Transductor de oxígeno multisitio <i>OxıM</i> ax [™] Dura-Y [™] (no estéril, reutilizable)	D-YS	>1 kg
Para uso con el sensor Dura-Y: Clip para la oreja (reutilizable, no estéril)	D-YSE	30 kg
Clip pediátrico de comprobación puntual Pedi- Check™ (reutilizable, no estéril)	D-YSPD	De 3 a 4 kg
Transductor de oxígeno <i>OxiMax</i> ™ Oxiband™ (reutilizable con adhesivo no estéril	OXI-A/N	<3 kg o >40 kg
desechable)	OXI-P/I	De 3 a 40 kg
Transductor de oxígeno <i>OxIMax</i> ™ Durasensor™ (no estéril, reutilizable)	DS-100A	>40 kg
Sensor de SpO₂ Nellcor™ Preemie, no adhesivo (uso en un solo paciente)	SC-PR	<1,5 kg
Sensor de SpO₂ Nellcor™ Neonatal, no adhesivo (uso en un solo paciente)	SC-NEO	De 1,5 a 5 kg
Sensor de SpO₂ Nellcor™ Adult, no adhesivo (uso en un solo paciente)	SC-A	>40 kg
Sensor de SpO₂ Nellcor™ Adult Respiratory, FR	10068119	>30 kg
Sensor Nellcor™ Flexible SpO₂	FLEXMAX	≥20 kg
(no estéril, reutilizable)	FLEXMAX-P	≥20 kg
Cable de sensor DOC-10	DOC-10	N/A
Cable de sensor OC-3	OC-3	N/A

Tabla 11 – Sensores Nellcor™ SpO₂

Consideraciones sobre el funcionamiento

- ADVERTENCIA: Las lecturas de oximetría de pulso y la señal del pulso pueden verse afectadas por determinadas condiciones medioambientales, errores en la colocación de los sensores y ciertos estados del paciente.
- ADVERTENCIA: Los tejidos del paciente pueden sufrir daños como consecuencia de la colocación incorrecta o una duración inapropiada del uso del sensor de SpO₂. Inspeccione el lugar donde se va a colocar el sensor como se indica en las *Instrucciones de uso*.

ADVERTENCIA: Use únicamente sensores y cables de oximetría de pulso aprobados por Nellcor[™]. Otros sensores o cables de oximetría pueden dar lugar a un rendimiento inadecuado del monitor y también a un aumento de la emisión electromagnética o una menor inmunidad a las interferencias electromagnéticas.

Las mediciones imprecisas pueden deberse a:

- La aplicación incorrecta del sensor
- La colocación del sensor en una extremidad donde hay colocado un manguito de presión sanguínea, un catéter arterial o una línea intravascular
- La luz ambiental
- El movimiento prolongado y/o excesivo del paciente
- Pigmentos intravasculares o coloraciones aplicadas externamente, como esmalte de uñas o cremas pigmentadas
- Dejar sin cubrir el sitio destinado al sensor con un material opaco en condiciones ambientales de alta luminosidad

La pérdida de la señal del pulso puede deberse a las siguientes razones:

- El sensor se ha puesto demasiado apretado
- Se ha inflado un manguito de presión sanguínea en la misma extremidad donde se ha colocado el sensor
- · Hay una oclusión arterial proximal al sensor
- Una perfusión periférica deficiente

Limpie y quite cualquier sustancia, por ejemplo esmalte de uñas, del lugar de aplicación. Realice comprobaciones periódicas para asegurarse de que el sensor permanece colocado correctamente en el paciente.

Seleccione un sensor apropiado, aplíquelo como se indica y tenga en cuenta todas las advertencias y medidas de precaución presentadas en las instrucciones de uso que acompañan al sensor.

Las fuentes de luz ambiental de mucha intensidad, como las luces de quirófano (especialmente las lámparas de xenón), luces de bilirrubina, lámparas fluorescentes, lámparas de calor por infrarrojos y la luz solar directa pueden interferir en el funcionamiento de un sensor SpO₂. Para prevenir la interferencia de la luz ambiente, asegúrese de que el sensor está bien colocado y de que la zona donde está el sensor se ha cubierto con un material opaco.

PRECAUCIÓN: Si el lugar destinado al sensor no se cubre con un material opaco en ambientes de alta luminosidad, las mediciones pueden ser incorrectas.

Si los movimientos del paciente suponen un problema, intente una o más de las siguientes soluciones:

- Verifique que el sensor está bien puesto y sujeto.
- Traslade el sensor a un lugar con menos movimiento.
- Use un sensor adhesivo que tolere cierto movimiento del paciente.
- Use otro sensor con adhesivo nuevo.

Si el rendimiento se ve afectado por una perfusión deficiente, considere la posibilidad de utilizar el sensor MAX-R, el cual obtiene las mediciones a través de la arteria etmoidal anterior del septo nasal, una rama de la carótida interna. Este sensor puede obtener mediciones cuando la perfusión periférica es relativamente escasa.

La precisión de lectura en presencia de una perfusión baja (modulación por amplitud de pulso IR detectada entre 0,03 % y 1,5 %) se validó mediante las señales emitidas por un simulador de pacientes. Los valores de SpO₂ y de pulso se variaron durante el intervalo de monitorización en un intervalo de condiciones de señal débil y se compararon con los valores conocidos de saturación y pulso reales de las señales de entrada.

Conexión de un sensor SpO2 al monitor

Antes de monitorizar a un paciente con oximetría de pulso, debe conectar el sensor SpO_2 apropiado al monitor y al paciente.

- > PARA CONECTAR EL SENSOR SPO₂:
 - 1. Conecte el cable de extensión de SpO₂ con seguridad al puerto del sensor SpO₂ del monitor, y luego conecte el sensor Nellcor[™] SpO₂ apropiado al cable de extensión.
 - 2. Conecte el sensor Nellcor[™] SpO₂ al paciente como se explica en las Instrucciones de uso, con la ayuda de un cable de extensión para sensores Nellcor SpO₂.
 - 3. Cuando el sensor SpO₂ se ha acoplado al cable de extensión y conectado al monitor, el monitor comienza inmediatamente a buscar el pulso. Indicará *PULSO NO DETECTADO* y *PACIENTE SIN SENSOR SpO₂* hasta el momento en que el sensor esté colocado en el paciente. Esto se clasifica como una alarma de prioridad media y generará un pitido triple cada treinta segundos. Para evitar el mensaje de alarma y el pitido, puede conectar el cable de extensión al monitor pero no conecte el sensor SpO₂ al cable de extensión hasta que sea el momento de conectar el paciente al monitor.

Datos de SpO₂ que muestra el monitor Capnostream™20p

La pantalla Inicio del monitor Capnostream[™]20p muestra los datos de SpO₂ en tiempo real. Los datos mostrados incluyen:

- Valor numérico de SpO₂
- Pulso
- Cifra de SatSeconds (consulte Alarmas de SpO2 y SatSeconds en la página 83 para obtener una explicación sobre este valor)
- Pletismógrafo (onda de SpO₂)
- Indicador de interferencia



Figura 24 – Datos de SpO₂ en el monitor Capnostream™20p (pantalla estándar)

En la pantalla de inicio estándar con el IPI habilitado (pantalla de inicio estándar predeterminada), el pletismógrafo (la onda de SpO_2) se muestra como una barra vertical verde en la sección de SpO_2 de la pantalla (justo a la izquierda del valor SatSeconds). Esta barra indica el latido del pulso subiendo y bajando al ritmo del latido del pulso del paciente. Un indicador de interferencia (la línea dentada amarilla que puede verse en la figura anterior) se muestra cuando la señal de entrada es insuficiente o débil. Si la señal es adecuada, este indicador no aparecerá.

Cuando la pantalla del IPI de la pantalla de inicio se desactiva (consulte Opciones del IPI en la página 66 y Configuración oficial predeterminada en la página 131), la sección de SpO₂ de la pantalla de inicio aparecerá como lo hace en la Figura 25 – Datos de SpO2 en el monitor CapnostreamTM20p (pantalla estándar con IPI desactivado), más adelante. La onda pletismográfica es de tipo no normalizada y utiliza la señal del sensor en tiempo real para reflejar la intensidad pulsátil relativa.



Figura 25 – Datos de SpO₂ en el monitor Capnostream™20p (pantalla estándar con IPI desactivado)

Adicionalmente, el monitor puede mostrar los datos de SpO₂ en forma de tendencias, mostrar la hora, la fecha, SpO₂, frecuencia del pulso (FP), alarmas, eventos y marcadores de casos para distinguir a los pacientes. Para más información sobre la pantalla de tendencias, consulte el Capítulo 11 Uso de las tendencias en la página 85.

Cuando se superan los límites de alarma de SpO_2 bajo o alto, la lectura afectada parpadeará para alertar al profesional sanitario de la lectura específica que está afectada.

Si se ha seleccionado la pantalla de inicio numérica, la onda de SpO_2 no aparecerá. En su lugar, los datos de SpO_2 aparecerán con una fuente grande para facilitar su lectura incluso desde cierta distancia. Puede ver la sección de SpO_2 de la pantalla de inicio numérica en la Visualización numérica de la pantalla de inicio de la página 38.



Figura 26 – Sección de SpO2 de la pantalla de inicio numérica

Parámetros de SpO₂ ajustables

El monitor CapnostreamTM20p ofrece la opción de ajustar la configuración de algunos parámetros usados para la medición de SpO₂ con el fin de adaptarlos a pacientes particulares, los requisitos del centro u otras necesidades. Para cambiar esta configuración de modo temporal (hasta que se apague el dispositivo), siga el procedimiento que se especifica a continuación. Para establecer los cambios realizados como la configuración oficial de modo que la configuración siga aplicándose tras apagar el monitor, consulte Configuración oficial predeterminada en la página 131.

➢ PARA CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE SPO₂:

- 1. En la pantalla de inicio, mueva el mando de control a la sección de SpO₂ de la pantalla para marcarla en azul. Haga clic en el mando de control.
- Aparecerá la pantalla de configuración de SpO₂. Mueva el mando de control hasta el parámetro que desea cambiar y haga clic para seleccionar dicho parámetro. Mueva el mando de control para seleccionar la configuración deseada y haga clic para seleccionarla. Puede ver la lista de los parámetros que se pueden cambiar en la Tabla 12 Parámetros de SpO2 ajustables, más adelante.

- 3. Mueva el mando de control hasta el botón *INICIO* y haga clic para seleccionar. La pantalla también regresará a la pantalla de inicio tras unos segundos si no se realizan acciones adicionales en ella.
- 4. Los cambios de estos parámetros seguirán activos hasta que apague el dispositivo.

Parámetro	Opciones	Valor predeterminado
Tono de pulso	Activado/Desactivado	Activado
SatSeconds (Segundos de saturación)	Activado/Desactivado	Activado
ESCALA SpO2 PANT TEND	0-100; 50-100	50-100
ESCALA FP PANT TEND	150; 300	150
VELOC. BARRIDO** (mm/s) [para tipo de paciente actual]	3; 6,3; 12,5; 25	25

Tabla 12 – Parámetr	s de SpO ₂ ajustables
---------------------	----------------------------------

** La velocidad de barrido es la velocidad a la que la forma de onda completa un ciclo del gráfico para cubrir toda la pantalla de visualización una vez.

Mensaje de límite de alarma de SPO2

Cuando el límite de la alarma de SpO₂ se establece por debajo del 85%, aparecerá el mensaje LÍMITE DE ALARMA DE SpO₂ BAJO: XX en el área de encabezado para indicar que el nivel del límite de la alarma de SpO₂ es bajo.

Integrated Pulmonary Index™

Introducción Advertencias Pantalla del IPI Opciones del IPI

Introducción

El algoritmo Integrated Pulmonary Index[™] (o índice pulmonar integrado, en adelante IPI) es un valor numérico que integra cuatro parámetros principales medidos por Capnostream[™]20p con el fin de proporcionar una indicación sencilla del estado respiratorio global del paciente. Los parámetros integrados son EtCO₂, FR, SpO₂ y FP. En el cálculo del IPI solo se emplean estos cuatro parámetros; los demás parámetros no se tienen en cuenta.

El IPI se calcula utilizando los valores actuales de estos cuatro parámetros y sus interacciones, conforme a los datos clínicos conocidos. Por lo tanto, el IPI puede proporcionar una indicación precoz de un cambio en el estado respiratorio que puede no ser mostrado por el valor actual de cualquiera de estos cuatro parámetros individualmente. El IPI está diseñado para proporcionar información adicional referente al estado del paciente, posiblemente antes de que los valores de EtCO₂, FR, SpO₂ o FP alcancen niveles preocupantes desde el punto de vista clínico.

El gráfico de tendencias del IPI (mostrado en la pantalla de inicio de CapnostreamTM20p) es particularmente valioso, ya que muestra la tendencia del estado respiratorio del paciente en un gráfico fácil de usar y, por lo tanto, puede alertar al profesional sobre los cambios en el estado del paciente. Por tanto, la importancia del IPI no solo reside en su cifra absoluta, sino también en su relación con los valores anteriores, de forma que un gráfico puede mostrar una tendencia al alza o a la baja en el estado del paciente e indicar al profesional que se necesita atención o intervención.

IPI TREND - 2 HOURS	
	5
2 hr	0

Figura 27 – Gráfico de tendencias del IPI

Medtronic pone a su disposición una nota técnica con información detallada sobre el algoritmo del IPI.

El índice utiliza datos obtenidos de la monitorización tanto de CO_2 como de SpO_2 , así que solo estará disponible cuando estos dos parámetros también lo estén.

	El rango del índice es	1-10; los valores	del índice deben entenderse	como se explica en la	tabla siguiente.
--	------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------	------------------

Rango del índice	Estado del paciente
10	Normal
8-9	Dentro del rango normal
7	Cerca del rango normal; necesita atención
5-6	Necesita atención y puede precisar una intervención
3-4	Necesita intervención
1-2	Necesita intervención inmediata

Nota: La interpretación del valor del IPI del paciente puede cambiar en los distintos entornos clínicos. Por ejemplo, los pacientes con dificultades respiratorias específicas (a diferencia de los pacientes sanos en general a los que se monitoriza durante la sedación o tratamiento del dolor) pueden necesitar un umbral de alarma de IPI bajo inferior que refleje su capacidad respiratoria deficiente.

El IPI está disponible para los tres grupos de pacientes pediátricos (1-3 años, 3-6 años y 6-12 años) y para los pacientes adultos. No está disponible para los pacientes del tipo infantil/neonato (pacientes de hasta un año de edad) y, por lo tanto, no aparecerá en sus pantallas.

Advertencias

- ADVERTENCIA: Asegúrese de haber seleccionado correctamente el tipo de paciente antes de comenzar la monitorización de un paciente. Si selecciona un tipo de paciente incorrecto, los datos del IPI obtenido podrían ser incorrectos.
- ADVERTENCIA: Cuando se activa una alarma de IPI bajo para un paciente, el personal médico debe revisar el estado del paciente para determinar si es necesario un cambio en los cuidados aplicados.

Pantalla del IPI

El IPI se muestra en la pantalla de inicio y está disponible en todas las funciones de Capnostream[™]20p como opción predeterminada, junto con otros parámetros del paciente como etCO₂ o SpO₂. En la pantalla de inicio, se muestran tanto el valor numérico como el gráfico de tendencias del IPI.

La opción IPI se puede deshabilitar en la pantalla de configuración oficial; siga leyendo para obtener más información. En el modo de medición neonatal, la opción IPI se desactiva automáticamente.

Opciones del IPI

> PARA CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN DE LAS OPCIONES DEL IPI:

- 1. En la pantalla de inicio, haga clic en el botón *SISTEMA* de la barra de menús en la parte inferior de la pantalla.
- 2. Aparecerá la pantalla de configuración del sistema. Mueva el mando de control hasta el parámetro que desea cambiar y haga clic para seleccionar dicho parámetro. Mueva el mando de control para seleccionar la configuración deseada y haga clic para seleccionarla. En la Tabla 13 Opciones ajustables del IPI, más adelante, puede ver la lista de las opciones del IPI que se pueden cambiar.
- 3. Mueva el mando de control hasta el botón *INICIO* y haga clic para seleccionar. La pantalla también regresará a la pantalla de inicio tras unos segundos si no se realizan acciones adicionales en ella.
- 4. Si la alarma del IPI está desactivada, no aparecerá ni en la pantalla de inicio ni en ninguna otra pantalla. Sí aparecerá en la pantalla Límites de alarma, pero estará deshabilitada.
- 5. Los cambios de estos parámetros seguirán activos hasta que apague el dispositivo.

Parámetro	Opciones	Valor predeterminado
PANT. IPI INICIO (h)	1 hora; 2 horas; 4 horas	1 hora
Alarma de IPI	Activado/Desactivado	Desactivado

Tabla 13	 Opciones 	ajustables	del IPI
----------	------------------------------	------------	---------

Para cambiar la pantalla del IPI y las opciones de alarma de forma permanente, utilice la opción de la configuración oficial predeterminada que se describe en Configuración oficial predeterminada en la página 131. Las opciones de la pantalla del IPI de inicio se pueden modificar en la pantalla Configuración oficial: Tendencias y la alarma de IPI bajo (activada o desactivada) se pueden modificar en la pantalla Configuración oficial: Monitor. Los límites de la alarma de IPI bajo se pueden cambiar en la pantalla Configuración oficial: Límites de alarma: Def. Adult/Ped.

Apneas por hora e índice de desaturación de oxígeno

Introducción Apneas por hora Índice de desaturación de oxígeno (ODI) Informe de apnea y desaturación de O₂ Monitorización con A/h y ODI Visualización de A/h y ODI inteligente en la pantalla de inicio Opción A/h y ODI Modo Demo de A/h y ODI

Introducción

El algoritmo Apneas por hora (A/h) e índice de desaturación de oxígeno (ODI) forma parte de la innovadora familia de algoritmos de capnografía inteligente desarrollada por Medtronic. La capnografía inteligente simplifica el uso de la monitorización de CO₂ con productos aptos para Microstream[™], para mejorar la seguridad del paciente y el flujo de trabajo clínico.

Los parámetros A/h y ODI no están disponibles en todas las ubicaciones. Para equipar el dispositivo con estos algoritmos, póngase en contacto en la dirección <u>Capnographyinfo@covidien.com</u>.

A/h y ODI ofrecen una forma sencilla de facilitar la identificación y cuantificación de los eventos de apnea y de desaturación de oxígeno mientras el paciente está en el hospital.

A/h y ODI informan sobre los eventos de apnea y de desaturación de oxígeno, y calculan el valor de Apnea por hora (A/h) y el índice de desaturación de oxígeno (ODI) asociados. Mediante A/h y ODI, los médicos pueden identificar anomalías en la respiración y oxigenación del paciente mientras se les monitoriza con CapnostreamTM20p durante su estancia en el hospital. A/h y ODI solo se pueden usar en pacientes adultos (22 años de edad en adelante).

Los valores de A/h y ODI se muestran en tiempo real en la pantalla de inicio y en la pantalla Informe de apnea y desaturación de O_2 de fácil lectura, disponible para los informes impresos y en formato de archivo exportado a una memoria USB.

Apneas por hora

Una apnea es un periodo de tiempo durante el cual la respiración del paciente se interrumpe o se reduce significativamente. El valor de Apnea por hora (A/h) calculado por el monitor CapnostreamTM20p e indicado en la pantalla de inicio ofrece un recuento del número de pausas de al menos 10 segundos que ha experimentado la respiración del paciente en la última hora.

En la pantalla Informe de apnea y desaturación O₂, A/h corresponde a la media de Apneas por hora experimentadas en el periodo de tiempo de 2, 4, 8 o 12 horas seleccionado. En esa pantalla también se muestra el número de eventos de apnea de ≥ 10 segundos; 10-19 segundos; 20-30 segundos; y >30 segundos que han tenido lugar durante el periodo de tiempo seleccionado.

Este valor de A/h indica al profesional sanitario la regularidad de la respiración del paciente.

Apneas por hora de Capnostream™20p

En el dispositivo CapnostreamTM20p, el parámetro Apnea por hora indica el recuento del número de veces que la respiración se ha detenido durante al menos diez segundos en una hora. Como se trata de un recuento por hora, en la pantalla aparecerá como guiones hasta que haya transcurrido una hora desde el inicio de la monitorización.

Por ahora, A/h solo se puede usar en pacientes adultos, pues está diseñado para personas de 22 años de edad en adelante. No está disponible para niños pequeños (de edades comprendidas entre 0 y 1 año) ni para pacientes de menos de 22 años de edad.

Alarma visual de A/h

La alarma visual de A/h (que aparece en forma de asterisco junto al valor de A/h) se usa para indicar al profesional sanitario que el número de eventos de apnea que se ha producido en cualquier hora (de las últimas 12 horas) ha superado el número establecido. (El valor predeterminado que activa la Alarma visual de A/h es 10). El asterisco solo aparece si se activa una alarma visual de A/h y se actualiza una vez cada 10 minutos. La alarma visual de la pantalla indica al profesional sanitario que debe consultar la pantalla Informe de apnea y desaturación O₂ para obtener información sobre el patrón de respiración del paciente. Para cambiar el valor que activa una Alarma visual de A/h, consulte Parámetros de CO2 ajustables en la página 56.

Índice de desaturación de oxígeno (ODI)

El índice de desaturación de oxígeno (ODI) indica las "caídas" de la SpO₂, es decir, el número de veces que el valor de SpO₂ ha caído un 4 % o más con respecto a la línea de base y ha regresado a ella en un periodo de 240 segundos o menos. (Esto hace referencia al porcentaje de saturación de oxígeno, no al porcentaje de la tasa de SpO₂ actual del paciente). La línea de base se crea cuando se detecta un valor de SpO₂ uniforme y estable (en el rango de ± 1 punto de SpO₂ [%]) en un periodo de 20 segundos. Esta línea de base, que se actualiza una vez por segundo, será la SpO₂ máxima redondeada durante estos 20 segundos. Si no se puede establecer una línea de base válida basada en la definición anterior, se conservará la línea de base anterior.

En la pantalla de inicio se muestra el índice ODI de la hora anterior. Un ODI más bajo (es decir, menos episodios de este tipo) indica más estabilidad en la saturación de oxígeno del paciente. Como este índice refleja un recuento por hora, en la pantalla aparecerá como guiones hasta que haya transcurrido una hora desde el inicio de la monitorización.

En la pantalla Informe de apnea y desaturación O_2 , ODI corresponde a la media de las "caídas" de la SpO2 por hora que se han producido en el periodo de tiempo de 2, 4, 8 o 12 horas seleccionado.

Por ahora, ODI solo se puede usar en pacientes adultos, pues está diseñado para personas de 22 años de edad en adelante. No está disponible para niños pequeños (de edades comprendidas entre 0 y 1 año) ni para pacientes de menos de 22 años de edad.

Informe de apnea y desaturación de O2

Los informes de apnea y de desaturación en pantalla e impresos muestran una imagen global del número de eventos de A/h y ODI que se han producido durante un periodo de tiempo determinado (2, 4, 8 o 12 horas). Estos informes proporcionan información detallada sobre los estados de A/h y ODI del paciente y una visión general que puede ayudar al profesional sanitario a determinar las tendencias del paciente en estas áreas. Para obtener más información sobre este parámetro, consulte Informe de apnea y desaturación de O2 en la página 95.

Monitorización con A/h y ODI

A la hora de monitorizar a los pacientes con A/h y ODI, tenga en cuenta los siguientes aspectos:

PRECAUCIÓN:	Tenga en cuenta que A/h y ODI no recogen los eventos de hipopnea.
PRECAUCIÓN:	Apnea por hora (A/h) e índice de desaturación de oxígeno (ODI) no representan y no se deben interpretar como un índice de apnea-hipopnea (IAH) según lo expresan los estudios polisomnográficos formales.
PRECAUCIÓN:	Apnea por hora (A/h) e índice de desaturación de oxígeno (ODI) no representan trastornos respiratorios del sueño y no se deben utilizar para diagnosticarlos.
PRECAUCIÓN:	Las alarmas y un entorno ruidoso pueden afectar a los valores de A/h y ODI. Consulte la siguiente Nota relativa a las recomendaciones sobre el cambio de los ajustes del dispositivo para pacientes que duermen.

- **PRECAUCIÓN:** El monitor indica los valores de A/h y ODI durante todo el periodo de monitorización; sin embargo, el monitor no puede distinguir si el paciente está dormido realmente. Además, si el paciente se retira algún sensor, el monitor puede indicar eventos de apnea que en realidad no han tenido lugar.
- **PRECAUCIÓN:** La administración de analgésicos opioides y sedantes puede provocar una depresión respiratoria, lo que resultaría en episodios de apnea transitoria y desaturación de O₂ que se reflejarían en los valores de A/h y ODI.
- **PRECAUCIÓN:** Lea toda la información del usuario para comprender perfectamente todo lo relacionado con A/h.
- **PRECAUCIÓN:** Los valores de ODI pueden verse afectados por los algoritmos empleados por el módulo de oximetría de pulso.
- **Nota:** Tenga en cuenta que el tipo de paciente se usa para calcular el valor de A/h y ODI. Por este motivo, es importante seleccionar correctamente el tipo de paciente. Por esta misma razón, cambiar el tipo de paciente (por ejemplo, de adulto a pediátrico) hará que se borren los datos de A/h y ODI almacenados para el paciente actual. Los encabezados de A/h y ODI no aparecerán cuando el tipo de pacientes es pediátrico o infantil/neonato.
- Nota: Durante la primera hora de monitorización no aparece ningún dato de A/h ni de ODI en la pantalla de inicio, ya que estos valores indican el número de eventos durante la última hora. Los índices aparecerán en la pantalla de inicio cuando haya transcurrido una hora de monitorización.
- Nota: Cuando se vayan a usar los índices A/h y ODI de Capnostream [™]20p con un paciente que duerme, se recomienda conectar el dispositivo Capnostream [™]20p a una estación de monitorización central en la que se oigan las alarmas. Esto permite deshabilitar la alarma sonora en Capnostream [™]20p que está junto al paciente para no perturbar su sueño. Las alarmas sonoras se silencian mediante *SISTEMA>SERVICIO>Contraseña de servicio* (consulte Contraseña de servicio de Capnostream [™] en la página 150) >CONFIG. OFICIAL>MONITOR. En la lista de opciones de esta pantalla, cambie VOLUMEN DE ALARMA a AUDIO APAG. Este cambio solo debe realizarse si Capnostream [™] 20p está supervisado continuamente a través de su conexión a una estación central (o algún otro mecanismo de vigilancia), de modo que los profesionales sanitarios reciban las alarmas relacionadas con el paciente cuando el sonido de las alarmas está desactivado en el dispositivo Capnostream [™]20p de mesa.

Visualización de A/h y ODI inteligente en la pantalla de inicio

A/h y ODI aparecen en la pantalla de inicio y están disponibles en todas las funciones de Capnostream[™]20p como opción predeterminada, junto con otros parámetros del paciente como EtCO₂ o SpO₂.

La opción A/h y ODI se puede desactivar en la pantalla *SISTEMA* o en la pantalla Configuración oficial; consulte la información que aparece a continuación para obtener más detalles. En el caso de los pacientes de tipo Infantil/Neonato y Pediátrico, la opción A/h y ODI inteligente se desactiva automáticamente.

Opción A/h y ODI

- ➢ PARA CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN DE LA OPCIÓN A/H Y ODI:
 - 1. En la pantalla de inicio, haga clic en el botón *SISTEMA* de la barra de menús en la parte inferior de la pantalla.
 - Aparecerá la pantalla de configuración del sistema. Cambie PANTALLA A/H, ODI a ACTIV o DESACT según desee.
 - 3. Mueva el mando de control hasta el botón *INICIO* y haga clic para seleccionar. La pantalla también regresará a la pantalla de inicio tras unos segundos si no se realizan acciones adicionales en ella.
 - 4. Los cambios de la visualización de A/h y ODI seguirán activos hasta que apague el dispositivo.

Para cambiar la opción A/h y ODI de forma permanente, utilice la opción Configuración oficial que se explica en la sección Configuración oficial predeterminada de la página 131.

Modo Demo de A/h y ODI

Para ver la visualización de A/h y ODI sin conectar el paciente, puede configurar el monitor en modo Demo haciendo clic en *Sistema>Servicio>Intr. contras. servicio>Modo Demo*. (Para obtener más información sobre la contraseña de servicio, consulte Contraseña de servicio de Capnostream[™] en la página 150).
Capítulo 9

Alarmas y mensajes

Introducción Visualización de alarmas Prioridad de los mensajes Retraso de alarma Tipos de alarmas Modo de espera de parámetros Silenciamiento de alarmas Cambio de los límites de alarma Comprobación de la configuración de las alarmas Alarmas de SpO₂ y SatSeconds Configuración predeterminada de los límites de alarma

Introducción

Capnostream[™]20p acciona distintas alarmas relacionadas con el estado del paciente o con errores del equipo. Las alarmas alertan al profesional sanitario de que el estado del paciente supera los límites predefinidos, o indican un mal funcionamiento o un estado de funcionamiento erróneo del hardware del monitor.

El monitor cuenta con cuatro niveles de alarma y aviso, cada uno definido por una serie de indicaciones sonoras o visuales:

- Alarmas de prioridad alta
- Alarmas de prioridad media
- Mensajes de aviso
- Mensajes de aviso silenciosos

Las alarmas de prioridad alta ofrecen la opción la posibilidad de definir, si lo desea, alarmas urgentes (de color rojo) o alarmas de advertencia (de color amarillo) para cada alarma específica con el fin de permitir que el médico pueda seguir la evolución de las distintas situaciones de alarma.

La tabla siguiente describe cómo se indican las alarmas.

Tipo de alarma	Indicadores			
	Sonoros	Numéricos	Mensajes	Indicador Iuminoso
Alarmas de prioridad alta relacionadas con el paciente (alarmas urgentes en rojo de alta prioridad relacionadas con el paciente)	Patrón de pitidos repetidos	Roja parpadeante (salvo SINRESP)	Área de mensajes	Parpadeo en rojo

Tipo de alarma	Indicadores			
	Sonoros	Numéricos	Mensajes	Indicador Iuminoso
Alarma de prioridad alta (paciente) SINRESP	Patrón de pitidos repetidos	El valor numérico vuelve a cero (0)	Área de mensaje (con indicación del tiempo transcurrido desde SINRESP) y en el área de forma de onda	Parpadeo en rojo
Alarmas de advertencia en amarillo	Ninguno	Parpadeo en amarillo	Área de mensajes	Parpadeo en amarillo
Prioridad media	Pitido triple repetido	N/A	Área de mensajes (también hay mensajes en el área de forma de onda; se detalla a continuación)	Amarillo iluminado
Mensajes de aviso	Un solo pitido	N/A	Área de mensajes	N/A
Mensajes de aviso silenciosos	Ninguno	N/A	Área de mensajes	N/A

En las áreas de forma de onda y de mensajes aparecen los siguientes mensajes:

Mensajes que aparecen en el área de onda de CO2:

- OBSTRUCCIÓN DE FILTERLINE
- EJECUCIÓN AUTOCERO
- LIMPIEZA FILTERLINE
- ERROR DE CO₂
- ESPERA CO₂
- FILTERLINE DESCONECTADA

Mensajes que aparecen en el área de onda de SpO_2 (cuando hay un área de forma de onda de SpO_2 en lugar de información del IPI):

- PACIENTE SIN SENSOR SpO₂
- ESPERA SpO₂
- SENSOR SpO₂ DESCONECTADO
- ERROR DE SpO₂
- ERROR DEL SENSOR SpO₂
- PULSO NO DETECTADO

Visualización de alarmas

Para ver los indicadores de alarmas visuales, el operario debe estar delante de la pantalla de visualización del monitor. La posición donde debe estar el operario para poder oír las señales sonoras es cualquier lugar próximo al monitor (en un rango de 360°).

Las alarmas se presentan de forma muy visible en la sección de datos numéricos en tiempo real de todas la pantallas mediante el parpadeo de las cifras y un cambio del color de fondo de las mismas: el fondo de los datos numéricos parpadeará en rojo si el valor cruza el umbral límite de una alarma (urgente) de alta prioridad del paciente y parpadea en amarillo si el valor cruza el umbral límite de una alarma de advertencia. (Esto último solo es relevante si los límites de la alarma de advertencia, que son opcionales, se han activado).

Las alarmas también aparecen en el área de encabezado de todas las pantallas para proporcionar información inmediata sobre las alarmas al profesional al cargo. Las preferencias para la visualización de alarmas en el área de encabezado se describen en Prioridad de los mensajes en la página 74.

Además, el mensaje "SINRESP" y "OBSTRUCCIÓN DE FILTERLINE" aparecen en el área de onda de CO₂ y en el encabezado si se produce esta situación de alarma. Si la opción de pantalla de inicio numérica está visible (es decir, no se ve ninguna área de forma de onda), este mensaje aparecerá solo en el área de encabezado.

De igual forma, el mensaje "PACIENTE SIN SENSOR SpO₂" aparece en el área de forma de onda de SpO₂, así como en el encabezado, si se produce esta situación de alarma. Si la opción IPI está activada o la pantalla de inicio numérica está visible (es decir, no se ve ninguna área de forma de onda), este mensaje aparecerá solamente en el área de encabezado.

Las alarmas de un paciente concreto en un determinado periodo de tiempo se pueden consultar en la pantalla de tendencias (consulte el Capítulo 10 Uso de las tendencias en la página 85 para obtener más detalles). CapnostreamTM20p también proporciona una pantalla de revisión de alarmas que muestra la cifra absoluta de cada tipo de alarma generada durante la última hora para el paciente que se está monitorizando en ese momento. La pantalla de revisión de alarmas aparece en la Figura 28 – Pantalla de revisión de alarmas de CapnostreamTM20p, más adelante.

Esta pantalla permite al profesional sanitario saber de un solo vistazo cuántas alarmas ha generado un paciente durante la última hora, con el fin de valorar el estado del paciente. Se accede haciendo clic en el botón *ALARMAS* de la barra de menús, desde la pantalla de inicio o las pantallas de tendencias.



Figura 28 – Pantalla de revisión de alarmas de Capnostream™20p

La pantalla de revisión de alarmas cubre las siguientes alarmas:

- Alarma de ausencia de respiración
- Alarmas de EtCO₂ alto y bajo
- Alarmas de frecuencia respiratoria alta y baja
- Alarmas de SpO₂ alto y bajo

- Alarmas de pulso alto y bajo
- IPI bajo

El orden en que aparecen los parámetros en esta pantalla se puede cambiar en la pantalla Configuración oficial (una vez hecho el cambio, afectará a esta pantalla y a la de tendencias). Consulte Cambio del orden de los parámetros de la pantalla de tendencias en la página 136 para obtener más información.

La pantalla de revisión de alarmas muestra la cifra absoluta de alarmas que se han producido en la última hora. Cada tipo de alarma se indica mediante una barra horizontal de un color diferente y con un tamaño que representa la cantidad de alarmas. El número de alarmas aparece a la derecha de la barra. Las delgadas líneas verticales rojas que aparecen en la barra indican el punto en el que se produjo un cambio en el límite de la alarma.

Todas las alarmas mostradas se basan en el límite de alarma (urgente) de alta prioridad del paciente establecido en el dispositivo. Por ejemplo, si la alarma de etCO₂ alto se establece en 60, este nivel de 60 aparecerá en la pantalla Revisión de alarma para etCO₂ alto, a la izquierda de la barra blanca superior. Si el límite de alarma se ha cambiado, aparecerá el límite actual pero la cantidad de alarmas reflejará el límite establecido en el momento en el que se produjo la alarma, representando así de forma precisa la cantidad de alarmas que se ha producido bajo cada límite de alarma distinto.

La pantalla de revisión de alarmas se borrará si el monitor se apaga o si la memoria de tendencias está vacía.

La pantalla de revisión de alarmas mostrará las alarmas emitidas en la última hora, si el monitor ha estado en funcionamiento durante una hora o más. Si el monitor ha estado en funcionamiento durante menos de una hora, la pantalla mostrará los datos desde el momento en que se encendió el monitor. Si se ha borrado la memoria de tendencias, se mostrarán los datos acumulados desde el momento en que se borró.

Prioridad de los mensajes

Las alarmas y los mensajes de aviso se muestran en el área de encabezado del monitor por orden de prioridad. Cuando se produce una alarma, los mensajes de alarma serán los únicos que aparezcan en el área de mensajes, los mensajes de aviso no aparecerán hasta que la alarma se haya solucionado. Por ejemplo, si se produce una ALARMA DE FR ALTA, este mensaje de alarma aparecerá en el área de mensajes pero el mensaje de aviso SpO_2 POBRE. SENSOR REPOSICIÓN. no aparecerá aunque exista la situación que genera este mensaje.

Si existe más de una condición de alarma, el monitor mostrará cada mensaje de alarma durante aproximadamente 4 segundos y seguirá repitiendo los mensajes hasta que se solucionen las condiciones que generan la alarma. Por ejemplo, en el área de mensajes se alternará ALARMA DE FR ALTA y ALARMA DE SpO₂ BAJO.

Si no existe ninguna condición de alarma pero hay más de una condición de mensaje de aviso, cada mensaje de aviso aparecerá durante cuatro segundos como se ha explicado anteriormente. Los mensajes de aviso seguirán apareciendo hasta que se solucione la condición o se produzca una condición de alarma y aparezca el mensaje de alarma en lugar del mensaje de aviso.

Retraso de alarma

CapnostreamTM20p ofrece la opción de retrasar las alarmas (tanto las sonoras como el indicador de la pantalla) un número específico de segundos. Si se utiliza esta opción, la señal de alarma (sonora o visual) solo aparecerá si la condición de alarma continúa estando presente una vez transcurrido el tiempo de retraso establecido.

Las alarmas de $EtCO_2$, FR y FP altos, y las alarmas de SpO_2 y FP bajos se pueden retrasar 10, 15, 20 o 30 segundos, o no retrasarse (retraso de alarma deshabilitado). La opción predeterminada es la de retraso de alarma desactivada. Esta opción está disponible para todos los tipos de pacientes.

El retraso de alarma se puede establecer desde la pantalla Configuración oficial; puede acceder a ella desde SISTEMA>SERVICIO>INTRODUZCA LA CONTRASEÑA DE SERVICIO>CONFIG. OFICIAL>LÍMITES DE ALARMA>ESTAB RET ALARMA.

Tipos de alarmas

Las alarmas (urgentes) de alta prioridad del paciente indican que el parámetro particular ha excedido el límite establecido. Para cada situación de alarma existe un límite de alarma predeterminado. Los límites de alarma se pueden cambiar para adecuarse a una institución particular, si así se desea.

Asimismo, Capnostream[™]20p ofrece la posibilidad de definir una alarma de advertencia para las alarmas de pacientes en un valor más bajo que el estándar establecido para las alarmas (urgentes) de alta prioridad del paciente, para proporcionar a los profesionales sanitarios información que les permita resolver la situación en cuestión antes de que sea crítica. Por defecto, estas alarmas de advertencia están desactivadas. Si están activadas, se facilita un límite que esté entre el límite de alarma de alta prioridad y el nivel normal (saludable) para cada situación de alarma y se puede definir para que emita una alarma de advertencia. Para activar estas alarmas de advertencia, consulte Cambio de los límites de alarma en la página 82.

Los datos numéricos asociados que se muestran en la pantalla parpadearán en amarillo si su valor ha alcanzado el límite de la alarma de advertencia, o en rojo si ha alcanzado el límite de alarma (urgente) de alta prioridad del paciente. Además, los indicadores LED de alarma urgente roja y de advertencia amarilla se iluminarán según corresponda. Si un usuario no desea usar esta alarma de advertencia con una alarma concreta, puede configurar para esta última los mismos límites aplicados a las alarmas (urgentes) de alta prioridad de los pacientes y a las alarmas de advertencia (consulte Cambio de los límites de alarma en la página 82). Esto hará que solo se emitan las alarmas (urgentes) de alta prioridad de los pacientes. También puede aplicar un sistema de un solo nivel a todas las alarmas, solo tiene que pulsar el botón DESACTIV.ADVERT.

Todos los registros e informes digitales de las alarmas de un paciente incluyen tanto las alarmas (urgentes) de alta prioridad de los pacientes como las alarmas de advertencia.

También se proporcionan alarmas de prioridad media que alertan al médico de problemas relacionados con el dispositivo (a diferencia de los problemas relacionados con el paciente de los que avisan las alarmas de prioridad alta y las alarmas de advertencia).

El ejemplo siguiente tiene fines meramente informativos; en él puede ver cómo se muestran en el monitor las alarmas (urgentes) de alta prioridad de los pacientes de color rojo y las alarmas de advertencia de color amarillo.



Figura 29 – Ejemplo del aspecto de las alarmas

En el ejemplo anterior, la FR ha superado el límite de la alarma de FR alta. La lectura de FR parpadeará en rojo, la flecha roja que apunta hacia arriba indica que se ha superado el límite superior, y aparece el mensaje *ALARMA DE FR ALTA* en el área de mensajes situada en la parte superior de la pantalla. Además, el valor de IPI está por debajo del límite de la alarma IPI bajo, indicado por el valor IPI que parpadea en rojo y la flecha roja que apunta hacia abajo. El mensaje *ALARMA IPI BAJ* también aparecerá en el encabezado de la pantalla (irá alternando con el mensaje *ALARMA DE FR ALTA*).

El fondo amarillo del valor de SpO_2 junto con la flecha amarilla que apunta hacia abajo indica que el nivel de la alarma de advertencia BAJA SpO_2 se ha superado.

Alarmas de prioridad alta

Mensaje	Descripción	Acción correctora
SIN RESPIRACIÓN XXX SEGUNDOS	No se ha detectado respiración válida durante xxx segundos.	El paciente requiere atención médica inmediata.
ALARMA DE ETCO2 ALTO	El valor de EtCO ₂ está por encima del límite de alarma superior.	El paciente requiere atención médica inmediata.
ALARMA DE ETCO ₂ BAJO	El valor de EtCO ₂ está por debajo del límite de alarma inferior.	El paciente requiere atención médica inmediata.
ALARMA DE FR ALTA	La FR está por encima del límite de alarma superior.	El paciente requiere atención médica inmediata.
ALARMA DE FR BAJA	La FR está por debajo del límite de alarma inferior.	El paciente requiere atención médica inmediata.
ALARMA DE SpO ₂ ALTO	El valor de SpO ₂ está por encima del límite de alarma superior.	El paciente requiere atención médica inmediata.
ALARMA DE SpO2 BAJO	El valor de SpO ₂ está por debajo del límite de alarma inferior.	El paciente requiere atención médica inmediata.
ALARMA DE PULSO ALTO	El pulso está por encima del límite de alarma superior.	El paciente requiere atención médica inmediata.
ALARMA DE PULSO BAJO	El pulso está por debajo del límite de alarma inferior.	El paciente requiere atención médica inmediata.
ALARMA DE FICO2 ALTO	El valor de FiCO ₂ está por encima del límite de alarma superior.	El paciente requiere atención médica inmediata.
ALARMA IPI BAJ*	El valor del IPI está por debajo del límite de alarma inferior.	El paciente requiere atención médica inmediata.
RESTAB SISTEMA, COMPROBAR CONFIG.	El sistema se ha restablecido y se recuperará la configuración oficial predeterminada.	Restablezca los límites de alarma y otros ajustes para adaptarlos a los requisitos del paciente que se está monitorizando.

Tabla 15 -	- Alarmas	de	prioridad	alta
------------	-----------	----	-----------	------

* ALARM IPI BAJ es una alarma destinada a indicar al médico un cambio en el estado del paciente. Cuando aparece, se deben evaluar los niveles de los demás parámetros del paciente.

Alarmas de prioridad media

Mensaje	Descripción	Acción correctora
ERROR DE CO2	Se ha producido un fallo que impide el funcionamiento de la función CO ₂ .	Póngase en contacto con el personal autorizado de Medtronic.
ERROR DE SpO ₂	Se ha producido un fallo que impide el funcionamiento de la función SpO ₂ .	Póngase en contacto con el personal autorizado de Medtronic.
ERROR DEL SENSOR SpO ₂	El sensor SpO₂ conectado al dispositivo no funciona.	Póngase en contacto con el personal autorizado de Medtronic.
PULSO NO DETECTADO	No se detecta el pulso.	El paciente requiere atención médica inmediata. Vuelva a colocarle el sensor al paciente.
FILTERLINE DESCONECTADA	No hay ninguna FilterLine™ conectada al dispositivo.	Solo tendrá lugar cuando el modo de espera de parámetros esté activado. Inserte la FilterLine™ en el puerto para CO₂ del dispositivo.
SENSOR SpO2 DESCONECTADO	No hay ningún sensor SpO ₂ conectado al dispositivo.	Solo tendrá lugar cuando el modo de espera de parámetros esté activado. Inserte el sensor de SpO ₂ en el puerto para SpO ₂ del dispositivo.
PACIENTE SIN SENSOR SpO ₂	El paciente no tiene puesto el sensor.	Coloque correctamente el sensor al paciente.
SUSTITUIR CABLE SpO2	El cable de SpO2 está defectuoso.	Sustituya el cable de SpO ₂ .
OBSTRUCCIÓN DE FILTERLINE	La FilterLine™ está retorcida u obstruida.	Desconecte y vuelva a conectar la FilterLine™. Compruebe el adaptador de vías respiratorias y, si fuera necesario, sustituya la FilterLine™.
BATERÍA BAJA	El nivel de carga de la batería es bajo y el monitor se apagará pronto.	Conecte el monitor a una toma de CA.
SISTEMA REMOTO DESCONECTADO	Capnostream™20p ya no está conectado a un sistema remoto. Este mensaje solo aparece si el equipo host lo tiene activado y su enunciado puede ser algo distinto según como se haya programado en el equipo host.	Compruebe la conexión con el sistema remoto.

Tabla 16 – Alarmas de prioridad media

Mensajes de aviso

Mensaje	Descripción
LIMPIEZA FILTERLINE	La FilterLine [™] está retorcida u obstruida con agua. Aparece durante el procedimiento de limpieza hasta que se elimina la obstrucción de la FilterLine [™] , o se determina el estado obstruido.
DISPOSITIVO USB NO DETECTADO	No hay ninguna memoria USB válida conectada al puerto USB.
MEMORIA USB LLENA	No hay espacio disponible en la memoria USB.
TIEMPO DE ESPERA USB	La comunicación USB se ha detenido porque el dispositivo USB no responde.

Tabla 17 – Mensajes de aviso

Mensaje	Descripción
SpO2 POBRE. SENSOR REPOSICIÓN.	El módulo de SpO ₂ detecta un pulso débil y
SpO ₂ POBRE. DEMASIADA LUZ.	sugiere las posibles causas.
SpO2 POBRE. PROBAR SENSOR OÍDO	
SpO2 POBRE. PROBAR SENS. NASAL	
SpO ₂ POBRE. PROB.SENS.ADHESIVO	
SpO ₂ POBRE. PROB. VENDA CABEZA	
SpO2 POBRE. SENS. EXCES.FRÍO	
SpO2 POBRE. COMPROBAR VENDAJE	
SpO₂ POBRE. ¿UÑAS PINTADAS?	
SpO2 POBRE. ¿SENS.EX.APRETADO?	
SPO2 POBRE. POR INTERFERENCIAS	
SpO2 POBRE. LIMP. ZONA SENSOR	

Mensajes de aviso silenciosos

Mensaje	Descripción
CALENTAMIENTO DE CO ₂	El módulo de CO ₂ se está preparando para comenzar a funcionar.
CO₂ LISTO	Antes de la primera medición de CO ₂ , es decir, después de conectar la FilterLine™ pero antes de detectar la respiración del paciente, el mensaje CO ₂ LISTO sustituye al mensaje CALENTAMIENTO DE CO ₂ .
SE REQUIERE CALIBRACIÓN	La calibración de CO2 se debería haber realizado ya.
MANTENIMIENTO NECESARIO	El mantenimiento de CO2 se debería haber realizado ya.
EJECUCIÓN AUTOCERO	El monitor realiza automáticamente una calibración del punto cero.
TRANS. DE DATOS USB EN PROGRESO	La comunicación de datos USB está en curso.
TRANS. DATOS RS-232 EN PROGRESO*	La comunicación de datos RS-232 está en curso.
TRANS. DATOS USB CANCELADA	La comunicación de datos USB se ha detenido.
TRANS. DATOS RS-232 CANCELADA	La comunicación de datos RS-232 se ha detenido.
ERROR DISP.USB	Se ha producido un error en un dispositivo USB conectado al monitor.
TRANSFERENCIA INFORME COMPLETA	La comunicación de datos ha finalizado.
MONITOR CO2 DESACTIV. [hh:mm]	Muestra las horas y los minutos que la bomba ha estado apagada durante el modo BOMBA DESACTIVADA.
DATOS REGISTRADOS PREVIAMENTE DEL MODO DEMO	Aparece durante el modo de demostración, cuando no aparece ningún otro mensaje.
LÍMITE DE ALARMA SpO2 BAJO: XX	Aparece si el límite de alarma de SpO ₂ bajo se ha establecido por debajo del 85%.
SISTEMA REMOTO CONECTADO*	Capnostream™20p está conectado a un sistema remoto. Este mensaje solo aparece si el equipo host lo tiene activado y su enunciado puede ser algo distinto según como se haya programado en el equipo host.
SISTEMA REMOTO DESCONECTADO*	Capnostream [™] 20p ya no está conectado a un sistema remoto. Este mensaje solo aparece si el equipo host lo tiene activado y su enunciado puede ser algo distinto según como se haya programado en el equipo host.

Tabla 18 -	Mensajes	de aviso	silenciosos
------------	----------	----------	-------------

Mensaje	Descripción
VERSIÓN DE SOFT. NO COINCIDE	Aparece durante la transferencia de la configuración oficial.
ARCHIVO NO ENCONTRADO	Aparece durante la transferencia de la configuración oficial.
A/H NECESITA 1 HORA DE DATOS (si está disponible)	El valor de A/h no aparece porque para poder calcularlo hace falta haber acumulado datos durante una hora y aun no ha transcurrido una hora completa.
ODI NECESITA 1 HORA DE DATOS (si está disponible)	El valor de ODI no aparece porque para poder calcularlo hace falta haber acumulado datos durante una hora y aun no ha transcurrido una hora completa.
ESPERA CO ₂	El parámetro Espera CO ₂ se ha activado.
ESPERA SpO ₂	El parámetro Espera SpO2 se ha activado.
BATERÍA NO INSTALADA	No hay ninguna batería instalada en el dispositivo.

* Si se utiliza con un sistema remoto, el enunciado de este mensaje puede ser distinto según como se haya programado en el equipo host. El equipo host también puede iniciar un mensaje que aparezca al detenerse las comunicaciones.

Modo de espera de parámetros

Hay una opción para poner el monitor en un modo de espera de parámetros distinto según se trate de capnografía o de oximetría de pulso. Una vez en este modo, el usuario puede activar el modo de espera de parámetros según le interese. La finalidad de esta opción es hacer posible que el dispositivo emita una alarma cuando una línea de muestreo/sensor se desconecte del dispositivo, pero permita al usuario desactivar esta opción según le convenga.

Las opciones son las siguientes:



En modo Estándar (cuando el modo de espera de parámetros no está habilitado), al retirar una FilterLine[™] o sensor SpO₂/cable de extensión del dispositivo se mostrará un mensaje en la pantalla (*FILTERLINE DESCONECTADA* o *SENSOR SpO₂ DESCONECTADO*, según corresponda) pero no sonará ninguna alarma. Al retirar el sensor SpO₂ del paciente se emitirá una alarma sonora y se mostrará un mensaje en pantalla. De forma predeterminada, el modo de espera de parámetros está deshabilitado.

Cuando el modo de espera de parámetros está habilitado, después de haber conectado una FilterLine[™] y retirarla del dispositivo, sonará una alarma de prioridad media *FILTERLINE DESCONECTADA*. Igualmente, después de haber conectado un sensor de oximetría de pulso/cable de extensión y retirarlo del dispositivo, sonará una alarma de prioridad media *SENSOR SpO₂ DESCONECTADO*. La finalidad de esta alarma es evitar la desconexión no autorizada de una FilterLine[™]/sensor SpO₂ del dispositivo, quizá por los propios pacientes o sus visitantes.

Cuando el modo de espera de parámetros está habilitado, al retirar el sensor SpO_2 del paciente se emitirá una alarma sonora y aparecerá un mensaje en pantalla, igual que en el modo Estándar.

El modo de espera de parámetros se puede habilitar mediante S/STEMA>SERV/C/O>Introduzca la contraseña de servicio>CONFIG. OF/C/AL>MON/TOR>Cambie el MODO DE ESPERA DE PARÁMETROS a ACT/V. Regrese a la página de inicio haciendo clic en ATRÁS>ATRÁS>/IN/C/O.

No obstante, puede haber situaciones en las que el médico desee usar el modo de espera de parámetros pero no quiera que las alarmas suenen, ya se haya desconectado una FilterLineTM o un sensor SpO₂, porque él mismo ha autorizado la desconexión. En estos casos, el monitor proporciona una opción para poner uno o ambos parámetros en modo de espera mientras estas actividades tienen lugar.

Una vez que el modo de espera de parámetros se ha habilitado en la configuración oficial, se puede activar como se indica a continuación:

- 1. Retire la FilterLine[™] o el sensor SpO₂ del dispositivo, o retírele el sensor SpO₂ al paciente.
- Nota: El modo de espera de parámetros de capnografía solo se puede activar si la alarma FilterLine ™ desconectada está activa en ese momento, o si no se ha conectado aún una FilterLine ™ al dispositivo desde el momento en que se encendió. Igualmente, al modo de espera de parámetros de oximetría de pulso solo se puede acceder si la alarma Sensor SpO₂ desconectado o la alarma Paciente sin sensor SpO₂ está activa en ese momento, o si no se ha conectado aun ningún sensor SpO₂ al dispositivo o no se ha detectado ningún pulso desde el momento en que se encendió.
- **Nota:** El modo de espera de parámetros de capnografía no se puede activar si el monitor está monitorizando en ese momento a un paciente con capnografía. Igualmente, el modo de espera de parámetros de oximetría de pulso no se puede activar si el monitor está monitorizando en ese momento a un paciente con oximetría de pulso.
- 2. Para activar el modo de espera de parámetros, pulse el botón de silenciamiento de alarmas ubicado en la

parte inferior del panel frontal () durante 2 segundos como mínimo. Ahora aparecerá un mensaje nuevo ESPERA CO₂ o ESPERA SPO₂ (según corresponda) en el área de forma de onda (si esta área está disponible) y en el área de mensajes. (Esto es adicional a las alarmas *FILTERLINE DESCONECTADA* o SENSOR SPO₂ DESCONECTADO o PACIENTE SIN SENSOR SpO₂, según sea oportuno, que seguirán apareciendo en las áreas de forma de onda y de mensajes).

Nota: Una pulsación breve del botón de silenciamiento de alarmas también desactivará temporalmente las alarmas sonoras (durante 2 minutos), igual que antes.

- 3. Una vez que el modo de espera de parámetros está activado, sucederá lo siguiente: en este modo, las alarmas CO₂ o SpO₂ no existen, por tanto, las alarmas sonoras, el indicador luminoso amarillo parpadeante del panel frontal de Capnostream[™]20p, el almacenamiento de estas alarmas mediante cualquier método de almacenamiento de datos ni la transferencia de las mismas a estaciones centrales, indicaciones de llamada a enfermera, etc., no tendrán lugar.
- 4. Para acceder a los dos modos de espera de parámetros al mismo tiempo, acceda a cada uno de ellos por

separado, o pulse el botón de silenciamiento de alarmas (\checkmark) mientras la FilterLineTM está desconectada y el sensor SpO₂ no está conectado a un paciente o un dispositivo para acceder a ambos al mismo tiempo.

Para salir del modo de espera de parámetros de capnografía, vuelva a conectar una FilterLine[™]. Para salir del modo de espera de parámetros de oximetría de pulso, vuelva a conectar el sensor SpO₂ al paciente y al dispositivo. (Así, si el usuario no sabe que el monitor está en modo de espera de parámetros, con solo volver a conectar una FilterLine[™] al monitor o un sensor SpO₂ al paciente, el monitor saldrá del modo de espera de parámetros y la monitorización se reanudará).

Característica	Estado con el modo de espera de parámetros deshabilitado	Estado con el modo de espera de parámetros habilitado pero no activado	Estado con el modo de espera de parámetros habilitado y activado
Mensaje FilterLine™ desconectada (del dispositivo) en pantalla / mensaje Sensor SpO₂ desconectado (del dispositivo) en pantalla	Sí	Sí	Sí
Alarma FilterLine [™] desconectada (del dispositivo) / alarma Sensor SpO ₂ desconectado (del dispositivo)	No	Sí	No
Alarma sonora de prioridad media Paciente sin sensor SpO ₂	Sí	Sí	Νο
Mensaje en pantalla Paciente sin sensor SpO ₂	Sí	Sí	Sí
Mensaje Espera CO ₂ / mensaje Espera SpO ₂	No	No	Sí
Alarmas de prioridad alta (paciente)	Sí	Sí	No (para el parámetro que está en modo de espera)
Indicadores luminosos parpadeando en rojo y en amarillo en el panel frontal de Capnostream™20p durante las alarmas de prioridad alta (paciente)	Sí	Sí	No, para el parámetro que está en modo de espera (puesto que las alarmas de prioridad alta [paciente] relacionadas con el parámetro en espera no existen en este caso)
Almacenamiento o transferencia a estaciones remotas de alarmas de prioridad alta (paciente)	Sí	Sí	No, para el parámetro que está en modo de espera (puesto que las alarmas de prioridad alta [paciente] relacionadas con el parámetro en espera no existen en este caso)

Tabla 19 - Estado de mensajes y alarmas en distintas situaciones del modo de espera de parámetros

Silenciamiento de alarmas

Para silenciar una alarma temporalmente o desactivarla, pulse el botón de silenciamiento de alarmas: 44.

Cuando se pulsa el botón de silenciamiento de alarmas, se silencian todas las alarmas sonoras durante 2 minutos. Esto incluye tanto alarmas que ya estén sonando como las alarmas que puedan producirse durante el periodo de 2 minutos. El silenciamiento de alarmas durante 2 minutos puede cancelarse pulsando otra vez el botón de silenciamiento de alarmas.

Las alarmas visuales siguen estando visibles. Mientras que esté activo el periodo de silenciamiento de alarmas, aparece una campana con una línea discontinua (🔊) en la pantalla. Un símbolo de campana tachada con líneas continuas (🖏) aparece si las alarmas sonoras están permanentemente desactivadas en la configuración oficial.

Si se ha definido el silenciamiento permanente de las alarmas en la Configuración oficial (haciendo clic en SISTEMA>SERVICIO>Introduzca la contraseña de servicio>CONFIG. OFICIAL>VOL. ALARMA SONORA>AUDIO APAG, consulte Modificación de la configuración oficial en la página 131), este botón de

silenciamiento de alarma (4) no establece el silenciamiento temporal de las alarmas. En su lugar, mientras el silenciamiento de alarmas permanente esté definido en la Configuración oficial, este botón no afecta al silenciamiento de las alarmas; emitirá un pitido de tecla errónea cuando se pulse. Cuando el silenciamiento de alarmas permanente esté activado, el icono de campana () parpadeará periódicamente.

ADVERTENCIA: No silencie las alarmas sonoras hasta que haya verificado que el paciente está siendo monitorizado por otros medios.

Cambio de los límites de alarma

Los límites de alarma son distintos según el tipo de pacientes en cuestión, es decir, Adulto/Pediátrico (para adultos y todos los pacientes pediátricos) o Infantil/Neonato. Cada conjunto de alarmas se configura por separado.

Los límites de alarma se pueden cambiar para alarmas de alta prioridad del paciente (alarmas urgentes) y alarmas de advertencia en la pantalla de límites de alarma. A la pantalla de límites de alarma se accede desde la pantalla de revisión de alarmas. En la pantalla de límites de alarma, se pueden habilitar o deshabilitar las alarmas de advertencia. (Si las alarmas de advertencia están deshabilitadas, los valores de la columna de alarmas de advertencia aparecerán atenuados). Los límites también se pueden restablecer a su configuración oficial con el botón *RESTABL. PREDET.* de la pantalla.

Nota: En entornos de gran altitud, los valores de EtCO₂ pueden ser inferiores a los valores observados a nivel del mar, tal y como explica la ley de Dalton de presiones parciales. Cuando se use el monitor en entornos de gran altitud, se aconseja reajustar la configuración de la alarma de EtCO₂ como corresponda.

	UNDS	ALARM.URG.	ALARM ADVE	EtCO2 mmHg
EtCO2AL	mmHg	60	55	
EtCO2BA	mmHg	15	17	39
Fico2AL	mmHg	8	8	
FR AL	bpm	30	25	FR
FR BA	bpm	5	7	FiCO2 11
SINRESP	sec	30		
SpO2AL	%	100	100	SpO2 %
SpO2BA	%	85	90	
FP ALTO	bpm	140	140	
FP BAJO	bpm	50	50	
PI BAJ		3	5	RP
				SAT. SEG. 77

Figura 30 – Pantalla de límites de alarma

> PARA CAMBIAR LOS LÍMITES DE ALARMA:

- 1. Abra la pantalla de límites de alarma seleccionando el botón *LÍMITES DE ALARMA* en la barra de menús de la parte inferior de la pantalla de revisión de alarmas.
- 2. Para modificar un parámetro, desplácese hasta el parámetro de límite individual con el mando de control. Haga clic en el mando de control para seleccionar ese parámetro y después gire el mando de control para seleccionar otro valor. Haga clic en el mando de control otra vez para ajustar el valor nuevo.
- 3. Para activar las alarmas de advertencia, haga clic en el botón ACTIVAR ADVERT. de la pantalla con el mando de control. Los valores de los límites de alarma de advertencia se activarán ahora y ya podrán cambiarse desde esta pantalla del mismo modo que se pueden cambiar los límites de alarma (urgente) de alta prioridad del paciente. El botón ACTIVAR ADVERT. pasará a ser DESACTIV.ADVERT. cuando se activen las alarmas de advertencia y, al hacer clic en el botón DESACTIV.ADVERT. se desactivarán las alarmas de advertencia.

4. Use el mando de control para seleccionar *INICIO* y haga clic en el mando de control para regresar a la pantalla de inicio.

Si el límite de alarma alto se cambia hacia el límite de alarma bajo, esto forzará un descenso en el límite de alarma bajo (si fuera necesario) para mantener una diferencia de al menos 5 unidades entre los límites de alarma alto y bajo. Este tipo de ajuste hace que el límite de alarma bajo cambie también de color para que sea evidente que está activo. De forma similar, si el límite de alarma bajo se cambia hacia el límite de alarma alto, esto forzará un ascenso en el límite de alarma alto (si fuera necesario) para mantener una diferencia de al menos 5 unidades entre los límites de alarma alto (si fuera necesario) para mantener una diferencia de al menos 5 unidades entre los límites de alarma alto y bajo. Este tipo de ajuste hace que el límite de alarma alto cambie también de color para que sea evidente que está activo.

La alarma sonará si se excede el valor del límite de alarma alto o desciende del límite de alarma bajo, pero no sonará si solo alcanza el valor.

Los límites de alarma se restablecerán a su valor predeterminado de fábrica cuando se apague la unidad. Para hacer que los cambios sean permanentes, use el modo de servicio para cambiar la configuración oficial de los límites de alarma (consulte Configuración oficial predeterminada en la página 131).

Nota: Es posible que exista un riesgo potencial si se utilizan valores de alarma predefinidos distintos para el mismo equipo o para un equipo diferente en un área de especialidad individual.

Nota: Cuando el límite de la alarma de SpO2 se establece por debajo del 85%, aparecerá el mensaje LÍMITE DE ALARMA DE SpO2 BAJO: XX en el área de encabezado para indicar que el nivel del límite de la alarma de SpO2 es bajo.

Comprobación de la configuración de las alarmas

Para comprobar la alarma *SINRESP*, determine una vista de respiración normal en el dispositivo. Cuando aparezca una respiración normal, retire la línea de muestreo de la boca del paciente para provocar una situación de ausencia de respiración. Ahora el dispositivo debería mostrar una alarma *SINRESP*.

Para comprobar la alarma de oximetría de pulso *PACIENTE SIN SENSOR*, determine una vista de los valores de SpO₂ en el monitor. Una vez que los valores de SpO₂ estén visibles, retire el sensor del sujeto de la prueba para crear una situación *PACIENTE SIN SENSOR*. Ahora el monitor debería mostrar una alarma *PACIENTE SIN SENSOR*.

Alarmas de SpO₂ y SatSeconds

Capnostream[™]20p utiliza la tecnología Nellcor[™] SatSeconds para reducir el número y la frecuencia de alarmas de SpO₂ falsas. La tecnología funciona con los límites de alarma de SpO₂ urgente en rojo y no con los límites de alarma de advertencia en amarillo.

Si al monitorizar los límites de alarma inferior y superior de saturación de oxígeno se infringe uno de estos límites (aunque solo sea un punto porcentual), se accionará una alarma sonora. En la gestión de alarmas tradicional, cuando el nivel de %SpO₂ cruza el límite de alarma, la alarma suena cada vez que el límite se excede.

Si prefiere no recibir estas alarmas tan frecuentes, las puede evitar utilizando la técnica SatSeconds desarrollada por Nellcor[™]. Esta técnica le permite definir los límites de alarma inferior y superior igual que en la administración de alarmas tradicional. También puede definir un límite de SatSeconds para que la alarma suene teniendo en cuenta no solo cuándo cruza el límite de la alarma %SpO₂, sino también el tiempo durante el que la lectura de %SpO₂ del paciente se encuentra por encima o por debajo del límite.

El método de cálculo es el siguiente:

SatSeconds se calcula multiplicando el número de puntos porcentuales que el valor de %SpO₂ cae fuera del límite de alarma por el número de segundos que el nivel de %SpO₂ permanece fuera de dicho límite. Este cálculo se puede expresar como ecuación:

Puntos x Segundos = SatSeconds

Donde:

Puntos = puntos porcentuales de %SpO2 fuera del límite

Segundos = número de segundos que %SpO2 permanece en ese punto fuera del límite

A continuación se explica e ilustra el tiempo de respuesta de alarma, asumiendo un límite de SatSeconds definido en 50 y un límite de alarma de SpO2 bajo definido en 90.

En este ejemplo, el nivel de %SpO₂ cae hasta 88 (2 puntos) y permanece ahí durante un periodo de 2 segundos (2 puntos x 2 segundos = 4 SatSeconds).

El nivel de %SpO2 cae entonces a 86 durante 3 segundos y después a 84 durante 6 segundos.

El valor de SatSeconds resultante es:

%SpO₂ Segundos SatSeconds

2	Х	2	=	4
4	Х	3	=	12
6	Х	6	=	36

Total SatSeconds = 52

La alarma de SpO_2 debería sonar cuando hayan transcurrido aproximadamente 10,9 segundos porque se habrían superado los 50 SatSeconds (observe la flecha en la ilustración siguiente).



Es posible que los niveles de saturación fluctúen en lugar de permanecer fijos durante un periodo de varios segundos. A menudo, los niveles de %SpO₂ fluctúan por encima y por debajo de los límites de alarma, regresando varias veces al intervalo normal que no acciona ninguna alarma.

Durante estas fluctuaciones, Capnostream[™]20p integra el número de puntos de %SpO₂, tanto positivos como negativos, hasta alcanzar el límite de SatSeconds (configuración de tiempo de SatSeconds) o hasta que el nivel de %SpO₂ regresa al intervalo normal y permanece en él.

Pantalla de alarma de SatSeconds

SatSeconds se muestra en el área de visualización de SpO₂ en la pantalla del monitor. Cuando SatSeconds está habilitado y la lectura de SpO₂ está por debajo del mínimo, el contador de SatSeconds se pone en marcha. Si se alcanza el límite de SatSeconds, se emite una alarma sonora y el valor numérico de %SpO₂ parpadea. Al igual que con la administración de alarmas tradicional, la alarma sonora se puede anular pulsando el botón

SILENCIAMIENTO DE ALARMA (44).

Configuración predeterminada de los límites de alarma

La configuración predeterminada de los límites de alarma para Adulto y Neonato se explican en la Tabla 32 – Configuración predeterminada de los límites de alarma/indicadores de la página 134.

Las alarmas de advertencia están deshabilitadas por defecto.

Capítulo 10

Uso de las tendencias

Introducción

Pantallas de visualización de tendencias Pantalla de visualización gráfica de las tendencias Pantalla de vista tabular de las tendencias Selección de parámetros de tendencias Notas importantes sobre los informes de tendencias Eventos específicos como se muestran en los datos de tendencias Uso de la pantalla Tendencia gráfica para monitorizar a los pacientes Impresión de los datos de tendencia Borrado de la memoria de tendencias Configuración de tendencias

Introducción

CapnostreamTM20p almacena datos de pacientes que ofrecen una información detallada del historial del paciente durante la monitorización.

Las visualizaciones de tendencias le permiten examinar el historial del paciente como parte del análisis médico para facilitar la evaluación del paciente.

El centro hospitalario puede definir si el almacenamiento de tendencias va a ser: 12 horas de datos a 5 segundos de resolución, 24 horas de datos a 10 segundos de resolución, o 72 horas de datos a 30 segundos de resolución. Una vez que el contenido de tendencia alcanza su capacidad máxima, los datos nuevos sobrescribirán los datos registrados al principio de los datos de tendencia almacenados.

Los datos de tendencias almacenan los siguientes parámetros:

- Hora, Fecha, EtCO₂, FR, SpO₂, FP, IPI (según corresponda)
- Alarmas urgentes de alta prioridad en rojo y alarmas de advertencia en amarillo
- Eventos originados por el equipo, por ejemplo LIMPIEZA FILTERLINE u otros mensajes relacionados con el monitor.
- Marcadores de evento introducidos por el usuario, junto con cualquier etiqueta de evento
- Marcador INICIO CASO para indicar el inicio del caso
- Recuento de alarmas emitidas (todas las alarmas urgentes de alta prioridad en rojo y alarmas de advertencia en amarillo)

Tenga en cuenta que los valores de A/h y ODI (aunque estén disponibles) no aparecen en las pantallas de tendencias ni en las impresiones. Los valores de A/h y ODI se registran y se pueden ver en la pantalla Informe de apnea y desaturación O_2 y en las impresiones. Para obtener más información, consulte Informe de apnea y desaturación de O2 en la página 95.

Nota: Se recomienda encarecidamente descargar la información de tendencias a una memoria USB antes de apagar o antes de finalizar el caso de un paciente para asegurarse de tener una copia de seguridad de los datos de tendencias.

El cambio de la resolución de la frecuencia de almacenamiento de los datos solo se puede hacer en la pantalla Configuración oficial (consulte Configuración oficial predeterminada en la página 131).

Nota: Al cambiar el ajuste de resolución se eliminarán los datos de tendencia almacenados previamente en la memoria.

Los datos de tendencia se pueden ver en el monitor, se pueden imprimir y descargar a través de una conexión RS-232 o un dispositivo de memoria USB para transferirlos a un ordenador para su análisis posterior. Si desea poder usar estos datos como referencia en el futuro, se recomienda descargar los datos de tendencia antes de apagar el monitor, y garantizar así la disponibilidad de una copia de seguridad.

Si se va a monitorizar al paciente durante más tiempo del que se puede almacenar en la memoria del monitor, se recomienda descargar regularmente los datos del paciente usando la interfaz USB como se describe en el Capítulo 12 Descarga de los datos de pacientes, en la página 105.

Pantallas de visualización de tendencias

Los datos de tendencias se muestran en dos formatos diferentes: en gráfico y en tabla. La pantalla Tendencia gráfica le permite visualizar los datos del paciente durante un periodo de tiempo más largo (2, 4 o 12 horas de una vez) y desplazarse por los datos para buscar patrones, eventos específicos o alarmas.

Una vez haya localizado los datos de interés, puede ampliar el evento específico o examinar los mensajes y los datos en la pantalla Tendencia tabular. La pantalla Tendencia tabular presenta los datos en un formato de tabla de fácil lectura.

Para cambiar el orden de los parámetros mostrados en las pantallas de tendencias, consulte Cambio del orden de los parámetros de la pantalla de tendencias en la página 136.

Pantalla de visualización gráfica de las tendencias

➢ PARA VER LA PANTALLA DE TENDENCIAS EN FORMATO GRÁFICO:

1. Desde la pantalla de inicio, use el mando de control para seleccionar *TENDENCIA* desde los botones de la barra de menús de la parte inferior de la pantalla. En la Figura 31 – Visualización de tendencias en gráfico, más adelante, puede ver el ejemplo de una pantalla de tendencia gráfica.



Figura 31 – Visualización de tendencias en gráfico

2. Tenga en cuenta que las pantallas de tendencias presentan tanto la información de tendencias (como se indica a continuación) como los datos numéricos del paciente en tiempo real, que se muestran a la derecha de la pantalla. Los datos de tendencias mostrados son datos históricos de la memoria de tendencias. Cuando se abre la pantalla, la línea del cursor se encuentra en la mitad de la pantalla gráfica que está en la parte central de los datos mostrados. Los datos relacionados con el paciente en el momento indicado por el cursor aparecen a la izquierda. Los detalles relacionados con la pantalla de tendencia gráfica aparecen en la sección siguiente.

Visualización gráfica de las tendencias

En el centro de la pantalla se muestran las tendencias en formato gráfico. Las dos gráficas de la parte superior muestran los datos de capnografía de tendencias históricas: $EtCO_2$ en blanco y valores de frecuencia respiratoria en azul. De modo similar, las dos gráficas de la parte central muestran los datos de oximetría de pulso de tendencias históricas del paciente: los datos de SpO₂ en rosa y los de pulso en verde. El gráfico de la parte inferior muestra los valores del IPI en un gráfico de color naranja.

A la izquierda de la pantalla están los datos históricos del paciente en la fecha y hora en las que se encuentra el cursor. Se muestran la fecha y la hora exactas registradas de la posición del cursor.

- Nivel de zoom: puede ajustarse en 2, 4 o 12 horas con la tecla ZOOM.
- Línea de cursor amarilla: la línea amarilla vertical se extiende por los cuatro gráficos y se puede desplazar con el mando de control cuando está seleccionada la opción *DESPLAZAR*. La línea del cursor muestra la localización actual en los datos de tendencias con la fecha y hora exactas enumeradas bajo el encabezado *UBIC.CURSOR* (posición del cursor) situado cerca de la parte superior izquierda de la pantalla, como se muestra en la Figura 31 – Visualización de tendencias en gráfico de la página 86.
- Indicador de alarma: líneas rojas verticales anchas (para las alarmas urgentes en rojo) y líneas amarillas (para las alarmas de advertencia en amarillo) que pueden aparecer en las cuatro gráficas para mostrar en qué momento se produjo una alarma. Para las alarmas de EtCO₂, SpO₂, FR y FP, la línea roja está dibujada a través del gráfico respectivo de la forma de onda para ese parámetro. En el caso de las alarmas *SINRESP*, la línea roja se extiende por ambos gráficos, el de EtCO₂ y el de FR. Los detalles de la alarma real se pueden ver en la pantalla de visualización Tendencia tabular que se explica en la sección Pantalla de vista tabular de las tendencias de la página 89.
- Indicador de eventos: la pequeña línea vertical rosa a lo largo de la parte inferior del gráfico muestra cuándo se ha registrado un evento. Los detalles del evento real se pueden ver en la pantalla de visualización Tendencia tabular que se explica en la sección Pantalla de vista tabular de las tendencias de la página 89.

Los controles siguientes para ver la tendencia gráfica se seleccionan en la barra de menús.

- *TABULAR*: alterna la pantalla entre vista gráfica y tabular (en la vista Tendencia tabular, este control cambia a Gráfica). Consulte la sección Pantalla de vista tabular de las tendencias de la página 89 para ver una explicación de la vista Tendencia tabular.
- *DESPLAZAR*: le permite desplazarse por los datos del paciente. La fecha y la hora de la posición del cursor se indican en UBIC.CURSOR.
- ZOOM: le permite ampliar o reducir el intervalo de tiempo que se está examinando.
- *IMPRIMIR TENDENC*.: le permite imprimir una copia de las tendencias visibles actualmente en la pantalla.
- *LÍMITES DE ALARMA*: muestra la pantalla de límites de alarma para que pueda ver cuáles son los ajustes establecidos y modificarlos si fuera necesario.

Uso de DESPLAZAR y ZOOM

Las pantallas de tendencias se pueden usar de muchos modos para examinar los datos del paciente. A continuación se presenta un breve resumen de un método general de búsqueda y presentación de eventos específicos en la pantalla Tendencia gráfica.

- > PARA VER LOS DATOS DE TENDENCIAS EN MODO DE DESPLAZAMIENTO:
 - 1. En el modo de tendencia gráfico, use el mando de control para seleccionar *DESPLAZAR* en la barra de menús. La casilla que rodea la palabra *DESPLAZAR* de la barra de menús y la cabecera de hora/fecha se ponen amarillas, lo que indica que se encuentra en modo desplazamiento.



Figura 32 – Modo de desplazamiento en Tendencia gráfica

- 2. Cuando se desplaza hasta el final de la pantalla y continua desplazándose, la pantalla cambiará para añadir a la visualización la mitad siguiente o anterior de ese periodo de tiempo (por ejemplo, si está viendo un periodo de 2 horas comprendido entre las 4 PM y 6 PM, y se desplaza hacia atrás para llegar a las 4 PM, la línea amarilla regresará a la mitad de la pantalla y ahora se verá en pantalla el periodo de tiempo comprendido entre las 3 PM y 5 PM). Si se desplaza todo lo posible hacia la derecha y suena un pitido, esto significa que está en la hora real. Si se desplaza todo lo posible hacia la izquierda y suena un pitido, esto significa que está al principio de los datos registrados.
- 3. Para ver un periodo de tiempo mayor o menor en la pantalla, seleccione *ZOOM* en la barra de menús y gire el mando de control para cambiar la resolución a 2, 4 o 12 horas. La casilla de la barra de menús que rodea a *ZOOM* se vuelve amarilla para indicar que está cambiando el nivel de aumento. Haga clic en el mando de control otra vez para salir de la función de zoom. Después puede regresar al modo de desplazamiento para seguir analizando los datos registrados del paciente.

Para ver la mayor cantidad de datos de un paciente, cambie la resolución a 12 horas. Para hacer esto, use el mando de control para seleccionar y haga clic en *ZOOM* en la barra de menús. La casilla que rodea a *ZOOM* cambiará de azul a amarilla y el área de título que muestra la resolución de la pantalla también se volverá amarilla. Gire el mando de control para seleccionar *PANTALLA DE 12 HORAS* y, a continuación, haga clic en el mando de control.

Ahora use el mando de control para seleccionar y haga clic en *DESPLAZAR* en la barra de menús. La casilla que rodea a *DESPLAZAR* cambiará de azul a amarilla, y la cabecera de hora y la fecha bajo *UBIC.CURSOR* también se pondrá amarilla. Gire el mando de control para mover el cursor de izquierda a derecha. A medida que gire el mando de control, la hora va cambiando y los datos del paciente mostrados en la parte izquierda de la pantalla también cambian para reflejar las lecturas correspondientes a esa hora en concreto.

Para encontrar un evento o una alarma, desplácese por la visualización gráfica para ver los marcadores de evento y alarma como se ha indicado anteriormente en la Figura 31 – Visualización de tendencias en gráfico de la página 86. Coloque la línea amarilla del cursor sobre el marcador de alarma en rojo y salga del modo de desplazamiento haciendo clic en el mando de control. Cuando utilice la función de zoom para ver un periodo de tiempo diferente, el cursor aparecerá en el centro de la pantalla gráfica a la hora apropiada en la que se marcó en la pantalla anterior.

Use el botón *ZOOM* para seleccionar una opción de aumento, es decir, para ir al nivel de aumento más bajo (4, 2 o 1 hora), y desplácese de nuevo hasta que haya encontrado el área específica de su interés.

Para salir del modo de cambio de zoom, haga clic en el mando de control.

4. Para salir del modo de desplazamiento, haga clic en el mando de control.

Para más información sobre la pantalla de paciente, use el mando de control para seleccionar la pantalla *TABULAR* de tendencias en la barra de menús y consulte las instrucciones que se indican a continuación en la sección Pantalla de vista tabular de las tendencias, página 89.

Pantalla de vista tabular de las tendencias

> PARA VER LA PANTALLA DE TENDENCIAS EN FORMATO TABULAR:

1. En el modo de tendencia gráfico, use el mando de control para seleccionar *TABULAR* en la barra de menús. Aparecerá la pantalla Tendencia tabular. Para acceder al modo tabular de tendencias desde la pantalla de inicio, haga clic en *TENDENCIA* en la barra de menús y después en *TABULAR* en la barra de menús.

12:00 Adul1	ip m F To	EB 03, 1	12 T J	TRANS. IANE DO	DE DA	ATOS US	B EN PROGRES	0		•\$÷ 🍐
HORA sec	EtCO	T <u>abula</u> 2 FR 1	R SpO ₂ %	RP bpm	IPI		EVENTO	S	EtCO	2 mmHg
12:43	AM	FEB 03	, 12	•						41 $\begin{bmatrix} 60\\ 15 \end{bmatrix}$
50	46	16	90	55	8					FR FR
55 12:44	46 AM	16 FEB 03	90 i, 12	55	8				FiCO2 3.0	14
00	46	16	84	55	8				SpO ₂	%
05	46	16	90	55	8					
10	46	16	90	55	8				1	
15	46	16	90	55	8					
20	46	16	90	55	8					PP
25	46	16	90	55	8				SAT. S	SEG. 77
									(o //
	ALARN	IAS	IMP Ten	RIMIR DENC		ZOOM	DESPLAZER	GRÁ	FICA	

Figura 33 – Visualización tabular de las tendencias

- 2. Tenga en cuenta que los datos del paciente en tiempo real aparecen a la derecha de la pantalla, mientras que a la izquierda se muestra la tendencia en tabla con los datos históricos del paciente detallados.
- 3. Haga clic en ZOOM en la barra de menús para cambiar la resolución de tiempo de la vista actual a 60, 15, 3 o 1,5 minutos, o al ajuste MÍNIMO. El ajuste MÍNIMO se define como la resolución de grabación de tendencias y puede ser de 5, 10 o 30 segundos (consulte Configuración oficial predeterminada en la página 131 para obtener instrucciones sobre cómo cambiar la resolución de grabación).

Los controles para ver los datos en forma de tabla son:

- *GRÁFICA*: alterna la pantalla entre el formato gráfico y el tabular (en la vista Tendencia gráfica, este control cambia a Tabular).
- DESPLAZAR: le permite desplazarse por la tabla de datos del paciente.
- ZOOM: le permite ampliar o reducir cuánto tiempo se promedia en cada punto de datos que se muestra en la tabla. En el ajuste más bajo, el nivel de zoom le permite examinar alarmas y eventos con detalle.
- *IMPRIMIR TENDENC*.: le permite imprimir una copia de las tendencias visibles actualmente en la pantalla.
- *LÍMITES DE ALARMA*: muestra la pantalla de límites de alarma para que pueda ver cuáles son los ajustes establecidos y modificarlos si fuera necesario.

La siguiente tabla le ofrece un ejemplo de visualización en formato tabular a una resolución de 1,5 minutos.

HORA	EtCO ₂ mmHg	FR rpm	SpO ₂ %	FP Ipm	IPI	EVENTOS
12:23 AM	23 de mayo	de 2010				
10	41	17	98	71	9	2*
12:24 AM	23 de mayo	de 2010				
40	48	16	98	71	7	5*
12:26 AM	23 de mayo	de 2010				
10	49	16	98	70	7	1 [°] ▲ 21*
12:27 AM	23 de mayo	de 2010				
40	35	17	98	71	7	22*
12:29 AM	23 de mayo	de 2010				
10	29	16	98	71	8	1 [°] ▲ 22*
12:30 AM	23 de mayo	de 2010				

Tabla 20 – Ejemplo de visualización en formato de tabla

Los eventos se indican con un triángulo (parecido al botón de evento situado en el panel frontal del monitor) y las alarmas se indican con un asterisco. El número que les acompaña indica cuántas alarmas o eventos tuvieron lugar durante ese periodo de tiempo.

4. Para ver eventos y alarmas específicos, cambie el ajuste *ZOOM* al valor MÍNIMO, que cambia el nivel de aumento al intervalo de tiempo más bajo. En la tabla aparecen ahora los eventos específicos, así como alarmas urgentes en rojo de alta prioridad del paciente y alarmas de advertencia en amarillo; puede usar la opción Desplazar para moverse hacia arriba y abajo por la tabla. La siguiente tabla le ofrece un ejemplo de vista en formato tabular con una resolución en ajuste MÍNIMO (en este caso la resolución mínima está definida en 5 segundos).

		2				
HORA seg.	EtCO ₂ mmHg	FR rpm	SpO ₂ %	FP lpm	IPI	EVENTOS
3:23 AM	23 de mayo	de 2010				
05	29	22	99	74	8	PROPOFOL
10	29	20	99	73	8	
15	29	20	100	71	8	
20	27	16	92	66	4	
25	26	14	88	64	4	
30	26	14	88	65	4	
35	26	14	88	65	4	
40	26	14	88	65	4	
45	26	14	88	65	4	
50	26	14	88	65	4	

Tabla 21 – Ejemplo de visualización detallada en formato de tabla

En el ejemplo anterior, se administró oxígeno al paciente durante el periodo comprendido entre las 3:23:05 y las 3:23:10 AM seguido por un aumento en la frecuencia respiratoria a un nivel que activó la alarma de valor alto. Esto se indica mediante una flecha roja que apunta hacia arriba. De modo similar, una alarma de frecuencia respiratoria baja tendría una flecha roja apuntando hacia abajo.

Si el modo de marcaje de eventos está definido como RÁPIDO, no hay disponible información textual en el nivel de zoom más bajo, pero seguirá apareciendo un triángulo para indicar que se ha marcado un evento.

5. El monitor guardará hasta 72 horas de datos de paciente. Si se han recopilado más datos de los que se pueden ver en la pantalla, puede desplazarse por la pantalla para ver datos anteriores (si se desplaza hacia arriba) o datos más recientes (si se desplaza hacia abajo).

Selección de parámetros de tendencias

El dispositivo muestra los siguientes parámetros de tendencias: EtCO₂, FR, SpO₂, FP e IPI. El usuario puede establecer el orden deseado de los parámetros en la pantalla Tendencia: Pantalla Configuración (para obtener más información, consulte Cambio del orden de los parámetros de la pantalla de tendencias en la página 136). Si no desea ver estos parámetros en los informes de tendencias, seleccione la opción VACÍO en algunas secciones de la pantalla Tendencia: Pantalla Configuración.

Notas importantes sobre los informes de tendencias

Tenga en cuenta las siguientes cuestiones relacionadas con los informes de tendencias, incluidos los informes tabulares de tendencias que se muestran en pantalla, los informes de tendencias impresos y los descargados:

- Cada cifra que aparece en la memoria de tendencias es una media de los resultados de cada segundo durante el periodo de muestra. Por ejemplo, en un periodo de muestra de 30 segundos, el resultado mostrado cada 30 segundos corresponde a la media de los puntos de datos de cada uno de los 30 segundos comprendido en el periodo de muestra.
- Si se ha producido una alarma en cualquier momento del periodo de muestra (es decir, en algún punto de los 30 segundos de un periodo en el que se están grabando datos cada 30 segundos) se indicará, incluso aunque la cifra media grabada no indique la causa de la alarma.
- Se genera el mensaje "EtCO₂ no disponible" cada vez que el dispositivo lleva a cabo el proceso de automantenimiento y tarda unos 10 segundos. Esto tiene lugar tras 1 hora de uso y, por tanto, aproximadamente cada 12 horas o después de un cambio de la temperatura o la presión ambiental. Cuando esto sucede, EtCO₂ y otros valores fisiológicos se mantienen en los valores que tenían antes del proceso de automantenimiento.

Este proceso permite que el módulo se ajuste por sí solo conforme a los cambios en la presión y temperatura ambientales.

Eventos específicos como se muestran en los datos de tendencias

> PARA BUSCAR EVENTOS ESPECÍFICOS EN LOS DATOS DE TENDENCIAS:

- 1. Use el cursor en la pantalla Tendencia gráfica para localizar un área de interés.
- 2. Use el ZOOM para acercarse tanto como sea posible al área específica.
- 3. Cambie a la vista Tendencia tabular.
- 4. Use DESPLAZAR para encontrar el área de interés.
- 5. Aplique el zoom a la resolución mínima para ver información detallada de las alarmas y eventos.

Uso de la pantalla Tendencia gráfica para monitorizar a los pacientes

Puede usar la pantalla Tendencia gráfica como pantalla de monitorización principal en lugar de la pantalla de inicio. En lugar de ver las formas de onda en tiempo real, la tendencia gráfica le permite seguir fácilmente los cambios experimentados en el estado del paciente. Los datos numéricos en tiempo real se muestran en el lado derecho de la pantalla, tanto en la pantalla de inicio como en la de tendencias.

Cuando use la pantalla Tendencia gráfica como pantalla de monitorización principal, es importante asegurarse de que los gráficos están actualizados con los datos más recientes. Esto ocurrirá automáticamente siempre y cuando la función Desplazar no se haya usado desde que se accedió a la pantalla Tendencia gráfica. Mientras esté en el modo de actualización automática, la pantalla se actualizará automáticamente para mostrar los datos nuevos a la derecha de la línea amarilla del cursor. Cuando el área de la derecha del cursor está llena, los gráficos se desplazarán para poder trazar puntos de datos adicionales.

Si usa la función Scroll y quiere volver a usar la tendencia gráfica en el monitor del paciente, vaya sencillamente a la pantalla de inicio y seleccione otra vez *TENDENCIA*.

Impresión de los datos de tendencia

Si tiene instalada la impresora opcional, puede imprimir los datos de tendencias que se muestran en la pantalla seleccionando *IMPRIMIR TENDENC*. en la barra de menús.

Borrado de la memoria de tendencias

Se recomienda borrar la memoria de tendencias cuando el monitor se cambia a un paciente nuevo para evitar confundir los datos del paciente anterior con los del paciente actual. Si está trabajando con casos, y el caso actual ha finalizado, la memoria de tendencias se borra automáticamente.

Nota: Se recomienda encarecidamente descargar la información de tendencias a una memoria USB antes de apagar o antes de finalizar el caso de un paciente para asegurarse de tener una copia de seguridad de los datos de tendencias.

> PARA BORRAR LA MEMORIA DE TENDENCIAS:

- 1. Para borrar los datos de tendencias de la memoria del monitor, use el mando de control para ir a la pantalla de inicio y seleccione *SISTEMA* en el menú.
- 2. En la pantalla Sistema, seleccione *BORRAR TENDENC*. La palabra *CONFIRM*? aparecerá justo encima de la barra de menús.
- 3. Si está seguro de que quiere borrar la memoria de tendencias, haga clic en el mando de control. Si no quiere borrar la memoria de tendencias, gire el mando hacia izquierda o derecha para cancelar la acción.
- 4. Cuando se enciende la máquina, aparece un mensaje sugiriéndole que borre la memoria de tendencias para iniciar un paciente nuevo sin información de pacientes anteriores en la memoria de tendencias. Puede ver esta pantalla en la Figura 34 Mensaje sobre la memoria de tendencias, más adelante. Haga clic en Sí para borrar la memoria de tendencias. Si lo que va a hacer es continuar con las mediciones de un mismo paciente, quizá le interese conservar los datos guardados en la memoria de tendencias. En ese caso, haga clic en NO. Si registra los datos de un paciente como parte de un caso, la memoria de tendencias siempre se borrará cuando cierre el caso.



Figura 34 – Mensaje sobre la memoria de tendencias

Configuración de tendencias

Para cambiar los parámetros de las pantallas de tendencias, acceda a la pantalla de inicio y seleccione *SISTEMA* para ver la pantalla de configuración del sistema. La siguiente tabla muestra las opciones que aparecen en la pantalla de configuración del sistema.

FECHA	25 de MAYO, 2011
HORA	11:27:32 AM
IDIOMA	ESPAÑOL
MODO MARCAJE EVENTOS	DETALL
PANTGRÁFICATEN [hora]	4 hora
PANTINCRETEN [min]	1,5 min.
LLAMADA DE ENFERMERA	DESACT
PANTALLA DE INICIO	ESTÁNDAR
PANT. IPI INICIO (h)	1 hora
ALARMA IPI	DESACT

Tabla 22 – Parámetros del monitor

Los parámetros de los datos de tendencias son Modo de marcaje de eventos, Pantalla gráfica de tendencias y Pantalla de incremento de tendencias.

Los ajustes de la pantalla de tendencias hacen referencia a la apariencia inicial de la pantalla cuando se accede al modo de tendencias. Una vez que ya esté en la pantalla de tendencias, puede cambiar fácilmente las vistas con la función de Zoom. Estos ajustes permanecerán activos hasta que apague el monitor.

El cambio de la resolución de la frecuencia de almacenamiento de los datos solo se puede hacer en la pantalla Configuración oficial (consulte Configuración oficial predeterminada en la página 131).

Modo de marcaje de eventos

- Marcaje de eventos detallado: al pulsar el botón Evento se accede a una descripción específica del evento desde una tabla de 30 valores definibles por el usuario (consulte la sección Introducción de eventos de paciente de la página 47).
- Marcaje de eventos rápido: marca que se ha producido un evento al pulsar el botón Evento, pero no ofrece más detalles.

Si el monitor está en el modo de marcaje de eventos detallado, pero no dispone de tiempo para acceder al evento detallado, puede acceder al marcaje de evento rápido pulsando dos veces el botón Evento.

Pantalla gráfica de tendencias

Las opciones de la pantalla gráfica de tendencias son 2, 4 y 12 horas. La configuración predeterminada es 4 horas.

Pantalla de incremento de tendencia

Las opciones de la pantalla de incremento de tendencia para la vista Tendencia tabular son MÍNIMO, 1,5, 3, 15 o 60 minutos. La configuración predeterminada es 1,5 minutos. El ajuste MÍNIMO se define como la resolución de grabación de tendencias y puede ser de 5, 10 o 30 segundos (consulte Modificación de la configuración oficial en la página 131 para obtener instrucciones sobre cómo cambiar la resolución de grabación).

El cambio de la resolución de la frecuencia de almacenamiento de los datos solo se puede hacer en la pantalla Configuración oficial (consulte Configuración oficial predeterminada en la página 131).

Capítulo 11

Informes

Informe de apnea y desaturación de O₂ Opciones para informes impresos Informes impresos Ejemplos de informes

Cuando el usuario hace clic en el botón *INFORMES* de la pantalla de inicio, aparece en pantalla el Informe de apnea y desaturación O₂. Consulte Informe de apnea y desaturación de O₂, más adelante para obtener más información. Para imprimir otros informes del paciente, haga clic en el botón *IMPRIMIR INFORME* de la pantalla Informe de apnea y desaturación O₂. Para obtener más información, consulte Informes impresos en la página 99.

Si los valores de A/h y ODI no están disponibles o están deshabilitados (ya sea en la pantalla Configuración oficial o Configuración del sistema), o el Tipo de paciente está definido como Infantil/Neonato o uno de los tipos de paciente Pediátrico, el botón *INFORMES* no aparecerá. En lugar de ello, al hacer clic en el botón *IMPRIMIR* de la pantalla de inicio se abrirá la pantalla de impresión. Para obtener más información, consulte Informes impresos en la página 99.

Informe de apnea y desaturación de O2

El informe de apnea y desaturación (ya sea en pantalla o impreso) muestra una visión completa del número de eventos de apnea y desaturación de O₂ que han tenido lugar durante un periodo de tiempo establecido (2, 4, 8 o 12 horas). Ofrece los valores medios de A/h y ODI correspondientes a todo el periodo, así como el número de eventos durante cada parte del periodo de tiempo establecido; los eventos de apnea se indican según el número de segundos que ha durado cada uno. También se muestra el número total de eventos en cada fila a lo largo de todo el periodo de tiempo (2, 4, 8 o 12 horas, según la elección del usuario). Estos informes proporcionan información detallada sobre los estados de A/h y ODI del paciente y una visión general que puede ayudar al profesional sanitario a determinar las tendencias del paciente en estas áreas.

El informe está disponible solo para pacientes adultos, ya que los valores de A/h y ODI solo están disponibles para dichos pacientes.

En situaciones en las que falta parte de la información del periodo definido (por ejemplo, la SpO₂ no se ha medido durante media hora concreta de las 12 horas que aparecen en la pantalla, por tanto tampoco se ha medido el ODI durante dicha media hora), la sección de tiempo relevante aparecerá sombreada en gris para indicar que faltan datos. Si aun no ha transcurrido la primera hora de monitorización, la sección de tiempo relevante de esta pantalla también aparecerá sombreada en gris (ya que los indicadores A/h y ODI reflejan valores por hora y, por tanto, no se pueden calcular ni mostrar mientras no se hayan recopilado los datos de una hora completa).

- **Nota:** Este informe se actualiza cada 60 segundos. Dado que los datos numéricos de A/h y ODI mostrados en la pantalla de inicio se actualizan cada segundo, en ocasiones puede haber una ligera discrepancia entre los datos numéricos de las dos pantallas.
- Nota: Se recomienda que el profesional sanitario consulte esta pantalla cuando desee tener más información sobre los eventos de apnea y desaturación de O₂ del paciente, o cuando algún indicador de la pantalla de inicio le aconseje consultar el informe. Cuando el informe se consulta en la pantalla del monitor, la información contenida en él no se actualiza, por lo que es aconsejable no tener el informe abierto en el monitor de forma continuada, es preferible estar en la pantalla de inicio durante el proceso de monitorización de un paciente. Los datos numéricos de EtCO₂, FiCO₂, FR, SpO₂ y FP se actualizan todos de forma continua en todas las pantallas, incluida la del informe de A/h y desaturación de O₂.

Para acceder a la pantalla de apnea y desaturación de O₂, pulse el botón *INFORMES* del menú de la pantalla de inicio. El informe que se ve en la pantalla Imprimir informe se puede imprimir desde la pantalla Informe de apnea y desaturación de O₂ con la impresora CapnostreamTM20p incorporada (con el botón *INIC*. *IMPRESORA*), o guardarse en una memoria USB (con el botón *INICIAR USB*).

Los botones incluidos en la pantalla Informe de apnea y desaturación O2 son los siguientes:

- TENDENCIA: muestra la pantalla Tendencia gráfica.
- IMPRIMIR: lleva al usuario a la pantalla de impresión estándar.
- ZOOM: cambia la opción de periodo de tiempo visualizado en la pantalla. Las opciones disponibles son 2, 4 y 12 horas.
- DESPLAZAR: mueve el cursor por la pantalla para poder visualizar distintos intervalos de tiempo.
- IMPRIMIR INFORME: lleva al usuario a la pantalla Informe de apnea y desaturación O₂: Imprimir informe.

La información del Informe de apnea	y desaturación O2 que se guard	la en una memoria USB es la siguiente:
-------------------------------------	--------------------------------	--

Nombre del informe	Descripción	Campos incluidos		
Informe de apnea y	Archivo delimitado por	FECHA, HORA, ID CASO, TIPO PACI., ZOOM SELEC.		
desaturación de O ₂	A/h y ODI y todos los datos de tendencias de las 2, 4, 8 o 12 horas anteriores (según el nivel de ZOOM seleccionado).	Recuento de eventos de apnea y de desaturación para cada periodo de tiempo incluido en el informe, suma de ambos recuentos durante todo el periodo y puntuación media de ambos parámetros: A/h y ODI		
		Lecturas del paciente: EtCO2, FR, SpO2, FP, IPI		
		Aparición de alarmas urgentes del paciente EtCO ₂ AL, EtCO ₂ BA, FR AL, FR BA, SINRESP, SpO ₂ AL, SpO ₂ BA, FP ALTA, FP BAJA, IPI BAJ		
		Emisión de mensajes de aviso del equipo:		
		Eventos: EVENTO 1, EVENTO 2, EVENTO 3		

El informe de apnea y desaturación de O₂ incluye la siguiente información:

Nombre del informe	Descripción	Campos incluidos
Informe de apnea y desaturación de O ₂	Datos de A/h y ODI junto con las lecturas del paciente (como en el informe de tendencias) y los datos de tendencias gráficas. El informe muestra los datos de las 2, 4, 8 o 12 horas anteriores (según el nivel	FECHA, HORA, ID CASO, TIPO PACI., ZOOM SELEC., suma de ambos recuentos (apnea y desaturación) durante todo el periodo, puntuación media de ambos parámetros (A/h y ODI) durante el periodo, y recuentos de apnea y de desaturación de cada uno de los periodos de tiempo incluidos en el informe.
	de ZOOM seleccionado).	Lecturas del paciente: EtCO2, FR, SpO2, FP, IPI
		Gráficos de tendencias gráficas del paciente: EtCO ₂ , FR, SpO ₂ , FP, IPI

Puede consultar un ejemplo de informe de apnea y desaturación de O_2 impreso en la Figura 36 – Informe de apnea y desaturación impreso de la página 98.

Puede consultar un ejemplo de la pantalla de informe de apnea y desaturación de O_2 en la Figura 35 – Pantalla de informe de apnea y desaturación de O_2 de la página 97.



Figura 35 – Pantalla de informe de apnea y desaturación de O2

Información del paciente en pantalla	Explicación
A/h (Apneas por hora)	Media de A/h por hora durante el periodo de tiempo completo que aparece en la pantalla
Recuento apneas	Suma de todos los eventos de ausencia de respiración (apnea) en cada categoría de tiempo (≥10 segundos, 10-19 segundos, 20-29 segundos) a lo largo de todo el periodo de tiempo que aparece en la pantalla
SUMA (suma de apneas)	Número de eventos de ausencia de respiración (apnea) en cada categoría de tiempo (≥10 segundos, 10-19 segundos, 20-29 segundos) en cada uno de los intervalos comprendidos en el periodo de tiempo pertinente (en este caso, de 12:00 AM a 1:00 AM)
Recuento de desaturación	Suma de todos los eventos de desaturación durante todo el periodo de tiempo que aparece en la pantalla
SUMA (suma de desaturación)	Número de eventos de desaturación en cada uno de los intervalos comprendidos en el periodo de tiempo pertinente (en este caso, de 12:00 AM a 1:00 AM)
ODI	Media de ODI por hora durante el periodo de tiempo completo que aparece en la pantalla

APNEA AND	O2 DESAT REP	ORT	
PRODUCT IE CS20P B646	DENTIFICATION		
CASE ID: A ADULT	ANN SIMON		
ZOOM SELE	CTED: 12 Hours	;	
START: STOP:	8:00 PM 8:00 AM	SEP 22, 12 SEP 23, 12	
Apnea Count	(sec)		
≥ 10	-	58	
10 - 1	.9 -	48	
20 - 2	.9 -	8	
> 30		2	
Desat Count	-	58	
A/hr Over 12	Hours -	5	
ODI Over 12 I	Hours -	5	
		Apnea	Desat
		Count	Count
		≥ 10	
		sec	
SEP 22, 12			
8:00 PM	9:00 PM	0	0
9:00 PM	10:00 PM	0	0
10:00 PM	11:00 PM	0	0
SEP 23, 12			
11:00 PM	12:00 AM	6	5
12:00 AM	1:00 AM	10	9
1:00 AM	2:00AM	8	8
2:00 AM	3:00 AM	8	8
3:00 AM	4:00 AM	12	12
4:00 AM	5:00 AM	8	8
5:00 AM	6:00 AM	6	6
6:00 AM	7:00 AM	0	0
7.00 AM	8.00 AM	0	0
SED 23 12	0.00 AN	0	0
JLI ZJ, IZ			

Figura 36 – Informe de apnea y desaturación impreso

Opciones para informes impresos

CapnostreamTM20p se puede adquirir con una impresora de papel térmico incorporada. El menú de impresión de informes en CapnostreamTM20p es para su uso con la impresora opcional.

Para imprimir un informe en una impresora externa, el procedimiento recomendado es transferir los datos a un ordenador mediante una memoria USB (consulte Transferencia de datos a través del puerto de datos USB en la página 105). Ya en el ordenador se le puede dar formato al informe e imprimirlo.

Hay disponibles los siguientes informes impresos:

- Informe de caso en tabla
- Informe de caso en gráfico
- Informe tabular de tendencias
- Informe gráfico de tendencias
- Formas de onda continua en tiempo real
- Onda de CO₂ continua en tiempo real
- Tabular continuo en tiempo real

El informe de apnea y desaturación de O2 (si está disponible) se ha explicado anteriormente.

Los datos que se imprimen en los informes de tendencias son los últimos datos que se vieron en la pantalla de tendencias cuando se seleccionó *IMPRIMIR TENDENC*. La resolución del informe del caso está siempre en el ajuste mínimo (máximo detalle).

Los datos del informe tabular continuo en tiempo real se imprimen en el mismo intervalo en que se actualizan los valores numéricos en la pantalla.

El gráfico o gráficos de forma de onda continua en tiempo real se imprimen como se ven en la pantalla.

Tenga en cuenta que todos los informes de tendencias y casos se deben imprimir *antes* de finalizar el caso. Una vez finalizado el caso, los datos de tendencias y del caso se borran de la memoria y ya no se podrán imprimir.

Informes impresos

A la pantalla de impresión se accede desde la pantalla Informe de apnea y desaturación O_2 (si A/h y ODI están habilitados) o desde la pantalla de inicio (si A/h y ODI no están disponibles o no están habilitados).

La pantalla de impresión le permite elegir qué informe imprimir, así como iniciar y detener la impresión de un informe.

PARA IMPRIMIR UN INFORME:

- 1. En la pantalla Inicio, seleccione INFORMES.
- 2. En la pantalla Informe de apnea y desaturación de O_2 que aparece, seleccione *IMPRIMIR* para acceder a la pantalla Imprimir que puede ver en la Figura 37 Pantalla de impresión de la página 100.
- 3. En el caso de pacientes Infantil/Neonato, seleccione *IMPRIMIR* en la pantalla de inicio para acceder a la pantalla Imprimir.
- 4. Use el mando de control para seleccionar el tipo de informe que desea imprimir. Solo se puede seleccionar un tipo de informe a la vez. Un asterisco (*) indicará el informe seleccionado. Si escoge un informe de caso y no hay ningún caso activo en ese momento, el campo situado a la derecha del nombre del informe indicará SIN CASOS.

1: A	2:00PM FEB 12, 12 DULTO	TRANS. DE DATOS USB E Jane doe	N PROGRESO		• 4
l li				EICO	a mmHa
	CASO TABL.			EICO	2 inini iy
	CASO GRÁF.				2 Q [⁶⁰
*	TENDENCIA TABULA	R			
	TENDENCIA GRÁFICA	A.			FR
	ONDA CONTINUA EN	TIEMPO REAL		FiC02	11
	ONDA CO2 CONT. EN	TIEMPO REAL		3.0	14
	TABLA CONTINUA T/	R		SpO ₂	%
				1	
				SAI.	
	INIC. IMPRESORA	FORMATO IMPRIMIR			

Figura 37 – Pantalla de impresión

5. Elija los datos que desea imprimir:

Seleccione la opción *FORM. IMPRIMIR* en la pantalla de impresión. En la pantalla Formato de imprimir, seleccione los parámetros que desea imprimir en el informe.

Cuando un informe se imprime en formato tabular aparecen en él tres columnas; cuando el informe se imprime en formato gráfico aparecen en él dos gráficas. El formato de impresión seleccionado se aplica a todos los informes que se van a imprimir.

Para informes tabulares, puede seleccionar EtCO₂, FiCO₂, FR, SpO₂, FP, IPI y en blanco. Para informes gráficos, puede seleccionar EtCO₂, FR, SpO₂, FP, IPI y en blanco. La selección de vacío significa que en esa columna no se imprimirá nada.

- 6. Haga clic en *ATRÁS* en la barra de menús en la parte inferior de la pantalla para regresar a la pantalla de impresión.
- 7. Haga clic en *INIC. IMPRESORA* en la pantalla de impresión para comenzar a imprimir. Para detener la impresión, ya sea para detener una impresión en curso o para cancelar otros informes que aun no se han imprimido, haga clic en el botón *PARAR IMPRESORA* de la pantalla.

Nombre del informe	Descripción	Campos incluidos	Marco temporal del informe
Todos los informes		CS20P (indica que el informe ha sido generado por Capnostream™20p) Número de serie del dispositivo en el que se imprimió el informe Nombre del informe (INFORME DE TENDENCIA, INFORME DE CASO o INFORME EN TIEMPO REAL) Tipo de paciente [ADULTO, PEDIÁTRICO (3 rangos de edad) o INFANTIL/NEONATO] ID de caso FECHA, HORA	
Informe de caso en tabla	Lecturas del paciente de un caso registrado en formato tabular. El tiempo entre las entradas de datos es la resolución más baja disponible para la pantalla de incremento de tendencias (30 segundos).	Lecturas del paciente al inicio y al final del periodo de grabación: EtCO ₂ , FiCO ₂ , FR, SpO ₂ , FP, IPI. Lecturas del paciente: Tres de los siguientes parámetros (según los parámetros seleccionados en la pantalla FORMATO DE IMPRESIÓN, consulte Para imprimir un informe en la página 99): EtCO ₂ , FiCO ₂ , FR, SpO ₂ , FP, IPI.	Desde el inicio de un caso hasta la hora actual; una vez que se ha detenido el caso, los datos ya no estarán disponibles.
		Aparición de alarmas urgentes del paciente y alarmas de advertencia. Todas las alarmas urgentes del paciente y alarmas de advertencia Aparición de mensajes de aviso del equipo Eventos: EVENTO 1, EVENTO 2, EVENTO 3	
Informe de caso en gráfico	Lecturas del paciente de un caso registrado en formato gráfico. El tiempo entre las entradas de datos es la resolución más baja disponible para la pantalla de incremento de tendencias (30 segundos).	Lecturas del paciente al inicio y al final del periodo de grabación: EtCO ₂ , FR, SpO ₂ , FP, IPI. Gráficos de los niveles de dos de los siguientes parámetros (según los parámetros seleccionados en la pantalla FORMATO DE IMPRESIÓN, consulte Para imprimir un informe en la página 99) a intervalos de 30 segundos: EtCO ₂ (mmHg), FR (rpm), SpO ₂ (%), FP (lpm), IPI.	Desde el inicio de un caso hasta la hora actual; una vez que se ha detenido el caso, los datos ya no estarán disponibles.
Informe tabular de tendencias	Lecturas del paciente de una memoria de tendencias en formato tabular. El tiempo entre las entradas de datos es la resolución definida para la pantalla de incremento de tendencias (MÍNIMO [30 segundos], 1,5 minutos, 3 minutos, 15 minutos, 60 minutos).	FECHA, HORA Lecturas del paciente al inicio de un periodo de grabación: EtCO ₂ , FiCO ₂ , FR, SpO ₂ , FP, IPI. Lecturas de pacientes a los intervalos definidos para la pantalla de incremento de tendencias: Tres de los siguientes parámetros (según los parámetros seleccionados en la pantalla FORMATO DE IMPRESIÓN, consulte Para imprimir un informe en la página 99): EtCO ₂ , FiCO ₂ , FR, SpO ₂ , FP, IPI. Aparición de alarmas urgentes del paciente y alarmas de advertencia Aparición de mensajes de aviso del equipo	Los datos de tendencias según aparecen en la pantalla de tendencias visualizada actualmente o, si se imprimen desde la pantalla IMPRIMIR, la pantalla de tendencias visualizada más recientemente. Solo se imprimirán los puntos de datos visibles actualmente en la pantalla (unos diez). Así pues, el nivel de ZOOM de la pantalla de tendencias (las opciones son 2, 4 y 12 horas) determinará el

Tabla 23 – Informes impresos – Parámetros

Nombre del informe	Descripción	Campos incluidos	Marco temporal del informe		
		Eventos: EVENTO 1, EVENTO 2, EVENTO 3	número de minutos/horas de los datos que aparezcan en la impresión. Una vez que se ha borrado la tendencia, los datos dejarán de estar disponibles.		
Informe gráfico de tendencias	Lecturas del paciente de una memoria de tendencias en formato gráfico. El tiempo entre las entradas de datos es la resolución definida para la pantalla de incremento de tendencias (MÍNIMO [30 segundos], 1,5 minutos, 3 minutos, 15 minutos, 60 minutos).	Lecturas del paciente al inicio de un periodo de grabación: EtCO ₂ , FR, SpO ₂ , FP, IPI. Gráficos de los niveles de dos de los siguientes parámetros (según los parámetros seleccionados en la pantalla FORMATO DE IMPRESIÓN, consulte Para imprimir un informe en la página 99) a los intervalos establecidos para la pantalla de incremento de tendencias: EtCO ₂ , FR, SpO ₂ , FP, IPI.	Los datos de tendencias según aparecen en la pantalla de tendencias visualizada actualmente o, si se imprimen desde la pantalla IMPRIMIR, la pantalla de tendencias visualizada más recientemente. Así pues, el nivel de ZOOM de la pantalla de tendencias (las opciones son 2, 4 y 12 horas) determinará el número de horas de los datos que aparezcan en la impresión. Una vez que se ha borrado la tendencia, los datos dejarán de estar disponibles.		
Forma de onda continua en tiempo real	Presentación gráfica de los niveles de EtCO ₂ y SpO ₂ con un punto de datos cada 50 milisegundos.	Lecturas del paciente al inicio de un periodo de grabación: EtCO ₂ , FiCO ₂ , FR, SpO ₂ , FP Gráficos de los niveles de EtCO ₂ y SpO ₂ .	Datos en tiempo real desde el momento en que se pulsa <i>INIC.</i> <i>IMPRESORA</i> hasta que se pulsa <i>PARAR</i> <i>IMPRESORA</i> .		
Onda de CO ₂ continua en tiempo real	Presentación gráfica de los niveles de etCO ₂ con un punto de datos cada 50 milisegundos.	Lecturas del paciente al inicio de un periodo de grabación: etCO ₂ , FiCO ₂ , FR, SpO ₂ , FP.	Datos en tiempo real desde el momento en que se pulsa INIC. IMPRESORA hasta que se pulsa PARAR IMPRESORA.		
Tabular continuo en tiempo real	Presentación tabular de EtCO ₂ , FR y FP con una línea de datos cada 2 segundos.	Lecturas del paciente al inicio de un periodo de grabación: EtCO ₂ , FiCO ₂ , FR, SpO ₂ , FP, IPI. Tres de los siguientes parámetros (según los parámetros seleccionados en la pantalla FORMATO DE IMPRESIÓN, consulte Para imprimir un informe en la página 99): EtCO ₂ , FiCO ₂ , FR, SpO ₂ , FP, IPI.	Datos en tiempo real desde el momento en que se pulsa INIC. IMPRESORA hasta que se pulsa PARAR IMPRESORA.		
porcentajes, FR en rpm (respiraciones por minuto) y FP en lpm (latidos por minuto)					

Ejemplos de informes

Ejemplos de informes de casos

A continuación puede ver ejemplos de informes de caso en formatos tabular y gráfico que reflejan las explicaciones anteriores.

PRODUCT IDENTIF	ICATION	PRODUCT IDENTIFICATION
CASE ID: ANN SMIT	н	CASE ID: ANN SMITH
ADULT		ADULT
START: 9:29:55 AN	JAN 04, 11	START: 9:29:55 AM JAN 04, 11
EtCO2 RR (mmHg) (bpm 39 1:)) 5	EtCO2 RR (mmHg) (bpm)
SpO2 PR (%) (bpm 98 7) 3	SpO2 PR (%) (bpm) 98 73
DATE/ EtCO2 FIME (mmHg)	RR PR (bpm) (bpm)	EtCO2 SpO2 (mmHg) (%)
9:30:00AM 39	15 71	0 100 0 100
9:32:00AM 39	16 71	
9:33:30AM 39	15 71	
9:35:00AM 39	15 71	
TURN	IED	
9:36:30AM 41	14 68	
9:38:00AM 41	16 68	
9:39:30AM 41	15 68	
9:41:00AM 41	15 68	
9:42:30AM 41	15 71	
9:44:00AM 39	16 71	X
9:45:30AM 39	16 71	
9:47:00AM 39	15 71	
9:48:30AM 39	15 73	
SNOR	ING	
9:50:00AM 40	15 73	
9:51:30AM 40	15 72	
9:53:00AM 39	15 72	
9:54:30AM 39	15 73	
9:56:00AM 39	15 73	FND: 9:56:01 AM IAN 04 11
END: 9:56:01 AM	JAN 04. 11	EtCO2 RR
EtCO2 RR (mmHg) (bp)	n)	(mmHg) (bpm) 39 15
39 1 SpO2 P1 (%) (bpn	5 R n)	(%) (bpm) 98 73

Figura 38 – Ejemplos de informes de casos impresos

Ejemplos de informes de tendencias

A continuación puede ver ejemplos de informes de tendencias en formato tabular y gráfico que reflejan las explicaciones anteriores.

PRODUC	T IDENTIFI	CATION		PRODUC	T IDENTIFICAT	ION
C3201 BC				C3201 B		
CASE ID: A DULT	ANN SMITH			CASE ID: ADULT	ANN SMITH	
START:	9:19:55 AM		JAN 04, 11	START:	9:29:55 AM	JAN 04, 11
EtCO2 (mmHg) 39	RR (bpm) 15			EtCO2 (mmHg) 39	RR (bpm) 15	
SpO2 (%) 98	PR (bpm) 73			SpO2 (%) 98	PR (bpm) 73	
DATE/ TIME	EtCO2 (mmHg)	RR (bpm)	PR (bpm)	EtCC)2 (Hg)	SpO2 (%)
9:20:00AN	4 39	15	71	0	100 0	100
9:22:00AN	1 39	16	71	1	II	I
9:23:30AN	1 39	15	71			
9:25:00AN	1 39	15	71			
	TURNI	ED				
9:26:30AN	4 41	14	68			
9:28:00AN	4 41	16	68			
9:29:30AN	4 41	15	68			
9:31:00AN	4 41	15	68			<u></u>
9:32:30AN	41	15	71			
9:34:00AN	1 39	16	71	<u> </u>		
9:35:30AN	1 39	16	71			
9:37:00AN	1 39	15	71			
9:38:30AN	4 39	15	73			
	SNORI	NG				
9:40:00AN	40	15	73			
9:41:30AN	40	15	72	······)···		
9:43:00AN	1 39	15	72	(
9:44:30AN	1 39	15	73			
9:46:00AN	1 39	15	73			
9:47:30AN	40	15	72			
9:49:00AN	1 39	15	72			
9:50:30AN	1 39	17	73			
9:52:00AN	4 39	16	73			
9:53:30AN	4 40	16	72			
9.55.00AN	1 39	15	72			

Figura 39 – Informes de tendencias impresos

Descarga de los datos de pacientes

Introducción

Transferencia de datos a través del puerto de datos USB Transferencia de datos a través del puerto RS-232 Salida de datos analógica con Capnostream Función de llamada a enfermera Tipos de sistemas de llamada a enfermera Funcionamiento con sistemas de datos de pacientes del hospital Funcionamiento con sistemas VEGA™* de Nuvon

Introducción

CapnostreamTM20p puede exportar datos almacenados y datos actuales a dispositivos externos mediante estos métodos:

- Transferencia de datos a una memoria USB para transferirlos posteriormente a un ordenador
- Conexión directa a un ordenador a través del puerto RS-232
- Salida analógica de 7 canales

La aparición de un estado de alarma también se puede indicar en un sistema externo mediante la función de llamada a enfermera.

Transferencia de datos a través del puerto de datos USB

Hay siete tipos de informes que se pueden transferir a una memoria USB como se describe en la siguiente tabla. En formato de texto hay cinco tipos de informe, adecuados para ser utilizados en aplicaciones como Microsoft Excel. Los dos tipos de informes de datos binarios son para aplicaciones de programación avanzadas.

Además, el informe de apnea y desaturación de O_2 (si A/h y ODI están disponibles) se puede descargar en una memoria USB. Consulte Informe de apnea y desaturación de O_2 en la página 95 para obtener más información.

Todas las alarmas sobre A/h y ODI no se registrarán cuando estos dos parámetros no están disponibles.

Nombre del informe	Descripción	Campos incluidos
Informe de caso en	Archivo delimitado por tabulaciones con la extensión .txt. (Los archivos delimitados por tabulaciones se pueden exportar a Excel usando la "tabulación" como delimitador). Informa sobre los datos almacenados en la memoria de tendencias que se asigna al caso seleccionado. El tiempo entre las entradas de datos es el ajuste de resolución para el almacenamiento de tendencias (5, 10 o 30 segundos).	FECHA, HORA
tabla		Lecturas del paciente: EtCO ₂ , FR, SpO ₂ , FP, IPI.
		Aparición de alarmas urgentes del paciente y alarmas de advertencia
		Aparición de mensajes de aviso del equipo
		Eventos: EVENTO 1, EVENTO 2, EVENTO 3
Informe tabular de tendencias	Archivo delimitado por tabulaciones (.txt). Recoge en el informe todos los datos almacenados en la memoria de tendencias. El tiempo entre las entradas de datos es el ajuste de resolución para el almacenamiento de tendencias (5, 10 o 30 segundos).	FECHA, HORA
		Lecturas del paciente: EtCO2, FR, SpO2, FP, IPI.
		Aparición de alarmas urgentes del paciente y alarmas de advertencia
		Aparición de mensajes de aviso del equipo
		Eventos: EVENTO 1, EVENTO 2, EVENTO 3

Tabla 24 – Tipos de transferencia de datos

Nombre del informe	Descripción	Campos incluidos
Onda de CO ₂ continua en tiempo	Archivo delimitado por tabulaciones (.txt) con entradas de datos cada 50 milisegundos.	FECHA, HORA
real		Lectura del paciente cada 50 milisegundos (para crear la onda de CO ₂): CO ₂ *
Tabular continuo en	Archivo delimitado por tabulaciones (.txt), parecido al informe de tendencia tabular, pero transmitido línea por línea en tiempo real.	FECHA, HORA
tiempo real		Lecturas del paciente: EtCO ₂ , FiCO ₂ , FR, SpO ₂ , FP, IPI, A/h, ODI.
		Aparición de alarmas urgentes del paciente y alarmas de advertencia
		Aparición de mensajes de aviso del equipo
		Eventos: EVENTO 1, EVENTO 2, EVENTO 3
Tabla continua en	Archivo delimitado por tabulaciones (.txt), parecido al informe tabular continuo en tiempo real, transmitido línea a línea en tiempo real, pero con entradas de datos cada 50 milisegundos (20 veces por segundo). Se muestran los datos de CO ₂ que se pueden utilizar para crear una forma de onda continua en tiempo real, con entradas de datos cada 50 milisegundos. Los datos tabulares se registran en puntos de datos según la	FECHA, HORA
tiempo real con forma de onda continua en tiempo real (el nombre abreviado es TRANSFERENCIA CONTINUA COMPLETA)		Lecturas de pacientes (a resolución de almacenamiento de tendencias): EtCO ₂ , FiCO ₂ , FR, SpO ₂ , FP, IPI, A/h, ODI.
		Aparición de alarmas urgentes del paciente y alarmas de advertencia
		Aparición de mensajes de aviso del equipo
		Eventos: EVENTO 1, EVENTO 2, EVENTO 3
	resolución establecida para el almacenamiento de tendencias (5, 10 o 30 segundos), de modo que los datos entre estos puntos se repiten en filas adicionales.	Lectura del paciente cada 50 milisegundos (para crear la onda de CO ₂): onda de CO ₂
Transferencia continua binaria completa	Consulte el documento Protocolos de transferencia de datos de Capnostream™20p.	
Transferencia de tendencias binaria completa	Consulte el documento Protocolos de transferencia de datos de Capnostream™20p.	

* CO₂ en mm/Hg (milímetros de mercurio)

Tenga en cuenta que en los archivos .txt, las seis primeras líneas de datos son las siguientes:

Línea 1 – El nombre del tipo de informe

Línea 2 - Aparece vacía o indica la ID del paciente si el informe es un informe de caso

Línea 3 – Tipo de paciente (consulte Configuración del tipo de paciente en la página 45 para obtener más información sobre los tipos de pacientes)

Línea 4 - Vacía

Línea 5 - Encabezados de las columnas

Línea 6 - Segunda línea de los encabezados de las columnas
Capnostream[™]20p reconoce los dispositivos de memoria USB fabricados por SanDisk, Lexar y PNY Technologies. No reconocerá unidades de memoria USB con funciones avanzadas que requieran la instalación de controladores adicionales, por ejemplo el modelo SanDisk U3. La capacidad máxima de las memorias USB que se puede utilizar con Capnostream[™]20p es de 8 GB. A continuación puede ver la imagen de una memoria USB común.



Figura 40 – Memoria USB común

▶ PARA GRABAR LOS DATOS DE CAPNOSTREAM[™]20P EN UNA MEMORIA USB:

- 1. Conecte una memoria USB al puerto USB de la parte trasera de Capnostream™20p.
- 2. Cuando el equipo haya detectado la memoria USB aparecerá un icono USB en la esquina superior derecha de la pantalla, junto al símbolo de alarma. Dependiendo del tipo de unidad, esto puede tardar hasta 40 segundos.

11:32 AM ENE 19, 07 ADULTO HOME	ALARMA DE PULSO ALTO JOHN SMITH	•<	— Icono de puerto USB
---------------------------------------	------------------------------------	----	--------------------------

Figura 41 – Icono USB

- Nota: El puerto USB del monitor Capnostream[™]20p está diseñado para ser utilizado únicamente con memorias USB. No se trata de un puerto USB con todas sus funciones propias. No intente conectar el monitor a un ordenador a través del puerto USB.
- **Nota:** La memoria USB se tiene que insertar con cuidado en el puerto USB, sin aplicar demasiada fuerza. Si la memoria USB no se puede insertar con facilidad en el puerto USB, no la utilice.
- 3. Cuando el icono USB aparezca en pantalla, el monitor está listo para comenzar a transferir datos a la memoria USB.
- 4. Desde la pantalla de inicio, seleccione el botón *SISTEMA* en la barra de menús para abrir la pantalla del sistema y entonces seleccione *SALIDA DE DATOS*.
- 5. Use el mando de control para seleccionar el informe deseado en la tabla SALIDA DE DATOS como se indica a continuación. Tenga en cuenta que las opciones CASO TABL. y TENDENCIA TABULAR solo están disponibles cuando hay un caso activo. Si se cierra el caso actual, el caso y la memoria de tendencias se borran y esta información dejará de estar disponible.

CASO EN TABLA
TENDENCIA EN TABLA
ONDA CO2 CONT. EN TIEMPO REAL
TABLA CONTINUA EN T/R
TRANSFERENCIA CONTINUA COMPLETA
TRANSFCONTBINCOMPLETA
TRANSFTENDBINCOMPLETA

Tabla 25 - Selección del tipo de salida de datos

6. Aparecerá un asterisco a la izquierda del nombre del informe seleccionado. Si no hay ningún caso activo, el texto SIN CASOS aparece a la derecha de la opción CASO TABL. si dicha opción está seleccionada.

7. Gire el mando de control para seleccionar *INICIAR USB* en la barra de menús y haga clic para empezar a transferir los datos. La salida de datos se puede cancelar volviendo a hacer clic para seleccionar *PARAR USB*.

PRECAUCIÓN: Si extrae la memoria USB del monitor Capnostream[™]20 mientras hay una transferencia de datos en curso, es posible que los datos no se puedan leer. Antes de quitar la memoria USB, finalice o detenga la transferencia de datos seleccionando *PARAR USB* en la barra de menús.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que la memoria USB no tenga ningún virus antes de conectarla al monitor.

- Nota: Si Capnostream[™]20p no detecta la memoria USB, extraiga la memoria y vuelva a conectarla. Si la memoria USB no es detectada, compruebe que la memoria que está usando sea de un fabricante compatible.
- Nota: Si el espacio libre disponible en la memoria USB es inferior a 100 KB, no podrá escribir en ella. En estas circunstancias, si la transferencia de datos ya está en curso será cancelada. Cualquier otra transferencia de datos NO SE PODRÁ iniciar cuando el espacio disponible es insuficiente.
- **Nota:** Consulte información adicional relacionada con los informes de tendencias en la sección Notas importantes sobre los informes de tendencias de la página 91.

La cantidad de datos máxima que se puede transferir en un solo archivo es de 65.536 filas (lo que corresponde al tamaño máximo de las hojas de datos de un archivo de Excel en Excel 2003 y versiones anteriores). Si los datos tienen más de estas 65.536 filas, se abrirá automáticamente otro archivo nuevo y los datos se seguirán transfiriendo a ese archivo nuevo. En esta situación, el nombre del archivo nuevo seguirá los criterios indicados en la Tabla 26 – Convenciones de nomenclatura de archivos.

A continuación se indica una estimación de los tamaños aproximados de los archivos que se pueden generar. Para los casos de pacientes en los que eventos y alarmas se registran de forma exhaustiva, los tamaños de archivo serán mayores.

Caso en tabla: 1 hora con resolución de 30 s: 21 kB

Tendencia tabular: 1 hora con resolución de 30 s: 24 kB

Onda de CO2 continua en tiempo real: 1 hora con resolución de 50 ms: 4,2 MB

Tabla continua en tiempo real 1 hora con resolución de 2s: 264 kB

Transferencia continua completa: 1 hora con resolución de 50 ms: 12 MB

Transferencia binaria continua completa: 1 hora con resolución de 50 ms: 732 kB

Transferencia de tendencia binaria completa: 1 hora con resolución de 30 s: 5 kB

Convención de nomenclatura para archivos USB

Los distintos tipos de informe siguen la siguiente convención de nomenclatura:

<TIPO DE INFORME>_<TIPO DE PACIENTE>_<FECHA DE INFORME>_<HORA DE INFORME>_<ID DE PACIENTE>_<N.º ARCHIVO>.ext

Donde:

- TIPO DE INFORME: es un identificador de tres letras del tipo de informe (consulte la Tabla 26 Convenciones de nomenclatura de archivos).
- TIPO DE PACIENTE: es el tipo de paciente (Adulto, Pediátrico de 6-12 años, etc.).
- FECHA DE INFORME: es la fecha de inicio en la que se creó el informe en formato aammdd.
- HORA DE INFORME: es la hora de inicio en la que se creó el informe en formato hhmmss.
- ID DE PACIENTE: es la ID de paciente introducida en el dispositivo (o suministrada automáticamente por él).
- N.º ARCHIVO: es un número de serie secuencial que indica si los datos se han dividido en varios archivos.

• La extensión (.ext) del archivo es .txt (archivo delimitado por tabulaciones) o .bin (tipo de archivo binario).

El campo ID.PACT. del monitor contiene el carácter "/", el cual no es un carácter válido para los nombres de archivos. Este carácter se sustituye por un guión "-" en los nombres de archivos. El monitor usa el carácter "/" para indicar varios archivos con la misma ID de paciente (por ejemplo Smith/1, Smith/2, Smith/3).

Ejemplos de nombres de archivos:

Para varios informes con fecha 15 de enero de 2011 a las 05:23:57 del paciente con ID "20090115035705", los nombres de los archivos serían:

Tipo de informe	Nombre de archivo			
Informe de caso en tabla	TCR_ADULT_110115_052357_20110115035705_1.txt			
Informe tabular de tendencias	TTR_ADULT _110115_052357_20110115035705_1.txt			
Onda de CO ₂ continua en tiempo real	RCW_ADULT_110115_052357_20110115035705_1.txt			
Tabla continua en tiempo real	RCT_ ADULT _110115_052357_20110115035705_1.txt			
Transferencia continua completa	FCTR_ADULT_110115_05235720110115035705_1.txt			
Transferencia continua binaria completa	FCT_ADULT _110115_052357_20110115035705_1.bin			
Transferencia de tendencias binaria completa	FTT_ ADULT _110115_052357_20110115035705_1.bin			
Informe de apnea y desaturación O ₂ (si está disponible)	ADR_ ADULT _110115_052357_20110115035705_1.txt			

Tabla 26 – Convenciones de nomenclatura de archivos

Ejemplos

Tomando el mismo ejemplo descrito anteriormente, cuando hay varios archivos para un informe de tabla continua en tiempo real, sus nombres serían:

Tipo de informe	Nombre de archivo
Tabla continua en tiempo real	RCT_110115_052357_1.txt RCT_110115_052357_2.txt RCT_110115_052357_3.txt RCT_110115_052357_4.txt RCT_110115_052357_10.txt RCT_110115_052357_100.txt RCT_110115_052357_1000.txt

Nota: Los archivos binarios nunca se dividen en varios archivos porque no tienen la limitación de tamaño impuesta por MS Excel.

Mensajes de error USB

Los mensajes siguientes aparecen en el área de mensajes del monitor.

DISPOSITIVO USB NO DETECTADO: Mensaje de aviso que aparece al intentar realizar una operación USB sin que haya un dispositivo USB conectado.

ERROR DISP.USB: Aparece cuando el dispositivo USB ha sido detectado pero la operación de transferencia de datos no se ha completado con éxito.

MEMORIA USB LLENA: Mensaje de aviso que aparece cuando ya no pueden descargarse más datos a una memoria USB porque ya está llena.

TIEMPO DE ESPERA USB: Mensaje de aviso que aparece cuando el monitor no logra establecer la comunicación con el dispositivo USB.

Lectura de los datos del paciente almacenados en archivos de Capnostream™20p

Los tipos de informe USB que tienen un tipo de archivo .txt (delimitado por tabulaciones) son archivos de texto. Esto facilita su lectura en la mayoría de las aplicaciones informáticas de hojas de cálculo y bases de datos. En este caso, el tipo de formato .txt significa que hay una tabulación entre cada fragmento de los datos, en cada línea del archivo. En el CD del Manual de usuario encontrará el documento *Nota de la aplicación de transferencia de datos de pacientes* donde se explica cómo se utilizan los datos transferidos.

Los dos tipos de informe USB con la extensión de archivo .bin son archivos binarios. Estos archivos están destinados a los programadores encargados de crear aplicaciones informáticas para usarlas con CapnostreamTM20p. Los formatos de archivo binario se describen en el documento *Protocolos de transferencia de datos de Capnostream* que puede encontrar en el CD del Manual de usuario.

Transferencia de datos a través del puerto RS-232

Capnostream[™]20p está equipado con una conexión RS-232 de 9 patillas en la parte trasera del monitor. Para obtener información detallada sobre el uso de esta función, consulte el documento *Protocolos de transferencia de datos de Capnostream*, disponible en el CD del Manual de usuario. La transferencia de datos para la interfaz RS-232 viene especificada en Configuración oficial: Monitor. La configuración predeterminada es la detección automática de la velocidad de transferencia de los datos. Consulte Modificación de la configuración oficial en la página 131 para obtener más información sobre cómo cambiar la tasa de transferencia de datos.

La transferencia de datos a través de RS-232 puede tener lugar al mismo tiempo que una transferencia de datos con una memoria USB.

Nota: El puerto RS-232 cuenta con aislamiento eléctrico conforme a la norma CEI 60101-1-1. A este puerto se pueden conectar dispositivos que no sean médicos (como un PC o una impresora) sin aislamiento eléctrico adicional. Estos dispositivos se deben colocar a una distancia de 1,5 metros como mínimo del entorno del paciente.

El puerto RS-232 se puede utilizar para transferir datos a un PC mediante Profox. Para obtener más información, póngase en contacto con Profox Associates, Inc. en el sitio web <u>http://www.profox.net/</u>.

Salida de datos analógica con Capnostream™20p

Equipo requerido

Aquí encontrará la lista de los elementos necesarios para configurar la transferencia de datos entre un monitor CapnostreamTM20p y un sistema analógico.

Elemento	Detalles/Nº de referencia Medtronic
Monitor Capnostream™20p	Cualquier monitor Capnostream™ 20 (CS20)
Cable digital/analógico	PM20ACB (debe comprarse por separado)
Sistema analógico (laboratorio del sueño u otro sistema análogo)	N/A
La mayoría de los sistemas necesitan cables de comunicación estándar con conector de audio monoaural de 3,5 mm (1/8 in) para la transferencia de datos desde el cable convertidor digital/analógico al sistema analógico (el número de cables necesarios dependerá del número de canales a los que se transferirán los datos). Algunos sistemas requieren cables distintos o un adaptador, por ejemplo Remlogic, que necesita conectores de tipo clavija telefónica.	Estos cables deben comprarse por separado y se pueden encontrar en cualquier tienda de electrónica. Los sistemas no estándar podrían requerir distintos tipos de cable.

Para configurar la transferencia de datos entre el monitor y el dispositivo analógico, deben llevarse a cabo las conexiones siguientes:

- Conexión del cable D/A al monitor
- Conexión del cable D/A al dispositivo de grabación analógico

Estas conexiones se explican a continuación. Una vez realizadas estas conexiones, los datos se transferirán desde el monitor al dispositivo analógico mientras los dos dispositivos permanezcan conectados.

ADVERTENCIA: El monitor solo se puede conectar utilizando el cable D/A a dispositivos con certificación CEI 60601-1.

El cable de datos que conecta los dos dispositivos incluye siete canales de datos. Cada canal de datos ofrece una salida de 0-1 voltio (1 voltio es el valor de Cal Alto, es decir, el valor máximo) con una corriente de colector de 12 mA como mínimo. Cada canal también está protegido contra cortocircuitos en las salidas.

Para todos los parámetros medidos, un valor de señal de medición de 0,9 voltios es la medición a escala completa (es decir, el valor válido más alto posible).

En la calibración de parámetros (que se lleva a cabo antes de la medición para preparar el dispositivo y que las mediciones sean precisas) se utiliza un valor de señal de 1,0 voltio (para Cal alto o Cal de ganancia); en la medición, este número indica un valor no válido. Si la señal es de 0,0 voltios (Cal bajo, Cal cero), indique el valor de escala cero para la señal enviada por CapnostreamTM20p al dispositivo analógico. Los valores 0 V y 1,0 V solo sirven para fines de calibración. Tenga en cuenta que 1,0 V no indica un valor real que pueda producir la medición de un paciente real.

Tenga en cuenta también que 1,0 V es la señal que envía CapnostreamTM20p, medida en el extremo del cable D/A. Los demás cables conectados al cable D/A pueden reducir ligeramente esta señal. En la Tabla 28 – Valores de calibración de D/A, más adelante, encontrará una lista de los valores de señales analógicas disponibles.

Conexión de Capnostream™20p y un dispositivo analógico mediante el cable D/A

> PARA CONECTAR EL CABLE D/A AL MONITOR:

Conector de salida analógica (para acoplar a Capnostream™)

 Conecte el conector de salida analógica del cable de comunicación al puerto analógico de 15 patillas del monitor. Este puerto, situado en la parte trasera del monitor Capnostream[™]20p, está marcado como Analog Out (salida analógica).



Conectores para el dispositivo analógico

Figura 42 – Cable D/A de Capnostream[™]20p (PN PM20ACB)



Figura 43 – Puerto analógico en Capnostream™20p

- 2. El dispositivo Capnostream[™]20p está configurado para dar salida a siete señales analógicas, cada una de las cuales transferirá datos relacionados con un parámetro diferente medido por el dispositivo.
- 3. Si desea realizar cambios en los parámetros predeterminados que tienen salida en los diferentes canales, consulte este tema más abajo.
- 4. Si no desea realizar cambios en los valores de señal predeterminados para cada canal, conecte el cable D/A al dispositivo analógico como se explica a continuación.

> PARA CONECTAR EL CABLE D/A AL DISPOSITIVO ANALÓGICO:

- En el extremo del cable D/A hay siete conectores de dos cables cada uno; los siete canales disponibles están codificados mediante colores para hacerlos coincidir con la funda de aislamiento del par de cables correspondiente del cable D/A. Consulte la tabla siguiente para conocer los códigos de colores. Ya ha especificado valores de señal para cada uno de estos conectores.
- 2. Seleccione cada uno de los conectores de salida deseados (cables con código de colores) y, utilizando un cable de comunicación estándar con conector de audio monoaural de 3,5 mm (1/8 in), conecte cada uno de ellos al canal de salida correspondiente en el dispositivo analógico. (Un extremo del cable debe tener un conector de audio monoaural de 3,5 mm (1/8 in) para acoplarlo al cable D/A; el otro extremo debe tener el conector apropiado para el dispositivo analógico.)
- 3. Repita este procedimiento para cada conexión que desee realizar.

La tabla siguiente especifica los colores de los cables y los canales del cable D/A.

Canal de datos	Color		
CH1	ROJO		
CH2	BLANCO		
CH3	VERDE		
CH4	AZUL		
CH5	AMARILLO		
CH6	MARRÓN		
CH7	NARANJA		

Tabla 27 –	Códigos	de	colores	del	cable	D/A
------------	---------	----	---------	-----	-------	-----

Cambio de los valores predeterminados de los canales digital/analógico en Capnostream™20p

CapnostreamTM20p puede generar siete señales analógicas que corresponden a los diferentes parámetros que monitoriza. Hay 12 configuraciones distintas disponibles para estas siete salidas de canales de datos. Aunque CapnostreamTM20p incluye valores de señal predeterminados para cada canal, dichos valores se pueden cambiar siguiendo el procedimiento que se explica a continuación.

La configuración actual y las opciones disponibles aparecen cuando se accede a la pantalla de configuración de digital a analógico de Capnostream™20p mostrada en la figura anterior.

- ➢ PARA CAMBIAR LOS VALORES PREDETERMINADOS DE LOS CANALES D/A EN CAPNOSTREAM[™]20P DE FORMA PERMANENTE MEDIANTE LA PANTALLA DE SERVICIO:
 - Para realizar cambios en los ajustes que se almacenarán de forma permanente en el monitor Capnostream[™]20p, acceda a la pantalla Configuración oficial como se explica a continuación: En la barra de menús de la pantalla de inicio de Capnostream[™]20p, haga clic en *SISTEMA>SERVICIO*. Introduzca la contraseña de servicio (consulte Contraseña de servicio de Capnostream[™] en la página 150) y haga clic en *CONFIG*. *OFICIAL>MONITOR>D/A*.
 - 2. Use el mando de control para seleccionar el canal al que desea asignarle una señal girando el mando de control hasta que llegue al canal deseado. Haga clic cuando ese canal quede resaltado. Ahora gire el mando de control para seleccionar la señal que se va a asignar a ese canal. Vuelva a hacer clic en el mando de control para seleccionar la señal. Repita el proceso para cada canal al que desee asignarle o volver a asignarle señales.
 - 3. Cualquier señal se puede asignar a cualquier canal. Además, la misma señal se puede asignar a varios canales.

➢ PARA CAMBIAR LOS VALORES PREDETERMINADOS DE LOS CANALES D/A EN CAPNOSTREAM[™]20P DE FORMA TEMPORAL MEDIANTE LA PANTALLA DEL SISTEMA:

- 1. Para realizar cambios temporales en los valores predeterminados de los canales D/A, seleccione *SISTEMA* en la barra de menús de la pantalla de inicio de Capnostream[™]20p. Seleccione CONFIG. D/A en la barra de menús de la página *SISTEMA*. Los siete canales de datos proporcionados aparecen indicados en la parte izquierda de la pantalla. Las señales disponibles para ser asignadas a los canales se indican a la derecha.
- 2. El procedimiento para realizar cambios es igual al que se ha descrito en el paso 2 de esta sección.
- 3. Una vez realizados todos los cambios deseados, lleve a cabo el proceso de conexión; para ello, conecte el cable D/A al dispositivo analógico como se ha explicado anteriormente.
- 4. Estos cambios permanecerán activos hasta que apague el monitor. Para realizar cambios permanentes en la configuración de D/A, consulte la información proporcionada más arriba.
- 5. Una vez realizados todos los cambios deseados, lleve a cabo el proceso de conexión; para ello, conecte el cable D/A al dispositivo analógico como se ha explicado anteriormente.

12:0 ADU CON	iopm f Lto Figura	eb 12, Ción. d	12 TRANS. D JANE DOE DE D/A	E DATO	S USB	EN PROGRESO		•	÷ 🍐
					EtC02	+FIN RESP	EtC	02	mmHg
					EtC02				⊏60
	CA1 EtCO2+FIN RESP		FiC02			39	200		
	CA2	FREC.	RESPIRAT.		FREC.	RESPIRAT.			L15
	CA3 ONDA DE CO2		ONDA	DE CO2		FR			
	CA4 SATURACIÓN SpO2			CO2 VÁLIDO		FiCO	2	11	
	CA5	CA5 PULSO			SATU	RACIÓN SpO2	3.0	~	14
	CA6	CA6 ONDA DE SpO2			PULS)	SpO	2	%
	CA7 ONDA CUADR. 1Hz		ONDA DE SpO2		1	00	□		
			ONDA CUADR. 1Hz				85		
					SIEMP	RE ALTO			
					SIEMP	RE BAJO		RP	-
					IPI		SAT	. SEG. 0	77
	DESAC	TIV	RESTABL. PREDET.	C, D	AL /A	INT. CO2		INICIO	

Figura 44 – Pantalla de configuración de digital a analógico de Capnostream™20p

Calibración del dispositivo analógico para Capnostream™20p

Para que funcione con el monitor Capnostream[™]20p, el dispositivo analógico se debe calibrar con el cable D/A siguiendo el procedimiento que se explica más adelante. Como la señal que el monitor envía al dispositivo analógico está en voltios, el dispositivo analógico se debe calibrar de forma que pueda interpretar la cifra de voltaje que recibe como el valor de paciente correcto.

El procedimiento de calibración tiene dos fases: la calibración de ganancia y la calibración de cero.

- La calibración de ganancia se utiliza para indicar el valor máximo para un parámetro, que corresponde al voltaje máximo (1,0 V) en el dispositivo analógico.
- La calibración de cero se utiliza para indicar el valor de paciente mínimo (cero) para un parámetro, que corresponde al voltaje cero (0,0 V) en el dispositivo analógico.

Procedimiento de calibración

- PARA CALIBRAR UN DISPOSITIVO ANALÓGICO (POR EJEMPLO UN POLISOMNÓGRAFO) Y UTILIZARLO CON CAPNOSTREAMTM20P:
 - 1. Asegúrese de que el monitor Capnostream[™]20p y el dispositivo analógico se hayan conectado utilizando un cable D/A como se ha explicado anteriormente, y de que se haya asignado el valor de señal necesario a cada canal, como se indica en la Tabla 28 Valores de calibración de D/A, más adelante, si lo desea.
 - Para la calibración de cero, utilice el mando de control para seleccionar el botón de menú CAL D/A y seleccione el ajuste CAL BAJO. Todos los canales quedarán definidos como SIEMPRE BAJO. Confirme que la salida en el dispositivo analógico es cero en los canales pertinentes.
 - 3. Para la calibración de ganancia, utilice el mando de control para seleccionar el botón de menú CAL D/A y seleccione el ajuste *CAL ALTO*. Todos los canales quedarán definidos como *SIEMPRE ALTO*. Confirme que la salida en el dispositivo analógico son los canales pertinentes, lo que corresponde a la salida más alta de los mismos.
 - 4. Gire el mando de control en la barra de menús y haga clic en *REAJUSTE DE CAL*. Todos los canales volverán a enviar una señal en función de los valores de medición reales.

- 5. Una vez finalizado el proceso de calibración, la escala de D/A queda establecida. Por tanto, el dispositivo analógico podrá interpretar la señal que reciba procedente del monitor y registrar correctamente los valores del paciente. Por ejemplo, como ahora sabe que 0 V = 0 mmHg (para el CO₂ exhalado) y 1,0 V = 111 mmHg (para el CO₂ exhalado), cuando el dispositivo reciba una señal de 0,37 V procedente del monitor la interpretará como 41 mmHg.
- 6. Una vez establecida la escala de D/A, las calibraciones de cero y de ganancia de **cada** canal se deben llevar a cabo por separado en el polisomnógrafo.
- 7. Compruebe si los valores de CapnostreamTM20p se transfieren de forma precisa al dispositivo analógico; para ello, controle la monitorización unos instantes y, seguidamente, compruebe los valores tanto en el monitor como en el dispositivo analógico. Si los valores no se han transferido con precisión, es posible que la calibración o las asignaciones de canales no se hayan realizado correctamente.

Parámetro	Escala	Valor 0 V (valor bajo para Cal cero)	Valor 1,0 V (valor alto para Cal de ganancia)
La indicación EtCO ₂ +FIN RESP (valor de EtCO ₂ cuando se señaliza el final de la respiración, si no es 0 V)	100 mmHg = $0,9 V$ (rango predeterminado de EtCO ₂ para D/A) O bien 150 mmHg = $0,9 V$ (cambio opcional para el rango de EtCO ₂ para D/A, se puede realizar en la pantalla Configuración de D/A)	0 = 0 V	111 mmHg = 1,0 V O bien 167 mmHg = 1,0 V (en función de la escala empleada)
EtCO ₂	100 mmHg = 0,9 V	0 = 0 V	111 mmHg = 1,0 V
FiCO ₂	100 mmHg = 0,9 V	0 = 0 V	111 mmHg = 1,0 V
FR	150 rpm (respiraciones por minuto) = 0,9 V	0 = 0 V	167 lpm = 1,0 V
Onda de CO ₂	100 mmHg = 0,9 V	0 = 0 V	111 mmHg = 1,0 V
Medición de CO ₂ válido	0 V = Sí; 1 V = No	0 = 0 V	N/A
Saturación SpO2	100% Sat = 0,9 V	0 = 0 V	111% = 1,0 V
Pulso	250 lpm (latidos por minuto) = 0,9 V	0 = 0 V	278 lpm = 1,0 V
Onda de SpO ₂ (forma de onda pletismográfica)	255 plet. = 0,9 V	0 = 0 V	283 plet. = 1,0 V
Onda cuadrada a 1 Hz, 50% del ciclo de funcionamiento	0 V –1 V p-p	0 = 0 V	N/A
Sin señal (siempre alto)	1 V.	0 = 0 V	N/A
Sin señal (siempre bajo)	0 V.	0 = 0 V	N/A
IPI*	0 IPI = 0 V 10 IPI = 0.9 V	$0 = \overline{0 V}$	11 IPI = 1.0 V

Tabla	a 28 –	Valores	de	calibración	de	D/A

* Una señal IPI no válida (que se recibirá cuando no estén disponibles los valores de todos los parámetros y, en consecuencia, no se pueda calcular el IPI) recibirá un valor de 1,0 V.

Sesión de trabajo con el sistema digital/analógico

Una vez que ha conectado y calibrado los dispositivos como se ha explicado anteriormente, ya puede empezar a trabajar con el sistema. Tenga en cuenta la siguiente información.

Funcionamiento del monitor

El monitor funciona con normalidad durante la comunicación.

Nota: Recuerde que no es necesario utilizar el botón DESACTIV de la barra de menús de D/A de Capnostream ™20p. De forma predeterminada, la opción D/A de Capnostream ™20p está activada. (Cuando la comunicación D/A está activada, este botón aparece como DESACTIV.) Este botón sirve para desactivar la opción D/A en Capnostream ™20p, si hiciera falta.

Solución de problemas

A continuación se explican algunos de los problemas que puede encontrarse a la hora de configurar el sistema de conversión digital/analógico, junto con las sugerencias para resolverlos.

Opción	Componente afectado	Problema	Solución
Los datos de CO ₂ no se transfieren.	Dispositivo analógico	La calibración no se ha realizado, o se ha realizado incorrectamente.	Calibre el dispositivo analógico como se explica en este documento.
Los datos de CO ₂ no se transfieren.	Cable de D/A	Se ha producido un cortocircuito en un conector no utilizado del cable D/A.	No cortocircuite cables/conectores que no estén en uso.
Los datos de CO ₂ no se transfieren.	Monitor	La comunicación de D/A se ha desactivado.	Acceda a la pantalla Configuración de D/A de Capnostream™20p y haga clic en el botón ACTIVAR de la barra de menús.
Los datos se transfieren pero los valores no son los mismos que los de Capnostream™20p.	Monitor y dispositivo analógico	La calibración no es correcta.	Repita el procedimiento de calibración que establece la escala de voltios para el valor de los parámetros.
Los datos se transfieren pero los valores no son los mismos que los de Capnostream™20p.	Monitor y dispositivo analógico	Las asignaciones de los canales no son correctas.	Compruebe las asignaciones de los canales.

T	abla	29 -	- Soluci	ón de	problemas
-	abia	~~	001001	011 00	problomido

Función de llamada a enfermera

El monitor Capnostream[™]20p le permite una conexión a un sistema externo de llamada a enfermera. Cuando está conectado, el monitor envía información al sistema oficial de llamada a enfermera para notificar que se ha producido un estado de alarma y avisar al personal médico de que el paciente requiere atención médica. Los únicos datos transferidos a un sistema de llamada a enfermera son los datos de la alarma, como se indica en la Tabla 31 – Indicadores de llamada a enfermera de la página 119.

La alarma de llamada a enfermera se activa al mismo tiempo que se emite la alarma en el monitor y permanece activa mientras la situación de alarma esté presente. Cuando la situación de alarma ya no exista (es decir, la alarma ha cesado en el monitor), la alarma de llamada a enfermera también se desactiva.

Puede comprar un cable de llamada a enfermera (3,5 m) a Medtronic (número de referencia 011149). Debe conectar un extremo del cable de llamada a enfermera al monitor Capnostream[™]20p. El cable se suministra sin ningún conector en su extremo, de modo que pueda acoplarle el más adecuado para el sistema de llamada a enfermera que vaya a utilizar.

Tipos de sistemas de llamada a enfermera

Desde el punto de vista de la activación o desactivación de las alarmas de llamada a enfermera, estos sistemas se pueden configurar de dos modos: con bloqueo o sin bloqueo.

Sistemas con bloqueo: la luz/alarma de llamada a enfermera permanecerá activa hasta que cese la alarma del dispositivo conectado *y* hasta que la enfermera cancele la alarma pulsando el botón *CANCELAR ALARMA*.

Sistemas sin bloqueo: la luz/alarma de llamada a enfermera permanece activa hasta que cese la alarma en el dispositivo conectado. La intervención del usuario *NO* es necesaria si desaparece la situación de alarma. Esto significa que, si la situación de alarma se corrige por sí sola, la luz y el tono de la función de llamada a enfermera se detendrán automáticamente.

Cuando Capnostream[™]20p se conecta a un sistema de llamada a enfermera, se debe usar la configuración **sin bloqueo**.

Tenga en cuenta que ninguno de los dos tipos de sistemas de llamada a enfermera permite silenciar la alarma mientras haya una alarma activa en un dispositivo conectado, en este caso el monitor CapnostreamTM20p.

Cable de llamada a enfermera

El monitor tiene un relé incorporado que se puede conectar al sistema de llamada a enfermera del hospital mediante el cable de llamada a enfermera. A continuación se indican los detalles del cable de llamada a enfermera.

Parámetro	Valor
Corriente nominal admisible	2 A
Corriente máxima permitida	2 A
Voltaje máximo permitido	24 V CC
Toma de sonido estéreo	3,5 mm (1/8 in)

Tabla 30 – Especificaciones del cable de llamada a enfermera



Figura 45 – Conector de sonido estéreo para llamada a enfermera

En la Figura 45 – Conector de sonido estéreo para llamada a enfermera, más atrás, puede ver un diagrama de la patilla del conector de sonido estéreo. Tenga en cuenta lo siguiente:

- N1 (COMÚN) N2 (NORMALMENTE CERRADO): configuración de relé normalmente cerrado
- N1 (COMÚN) N3 (NORMALMENTE ABIERTO): configuración de relé normalmente abierto
- > PARA CONFIGURAR LA TRANSFERENCIA DE DATOS DE LLAMADA A ENFERMERA:
 - 1. Para usar la función de llamada a enfermera, conecte el cable de llamada a enfermera al conector correspondiente de la parte trasera del monitor como se indica a continuación.
 - 2. Conecte el otro extremo del cable al sistema del centro conforme a los requisitos de dicho centro.
 - 3. Active la conexión de llamada a enfermera como se explica en Activación de la llamada a enfermera, más adelante.



Figura 46 – Punto de conexión para la llamada a enfermera

Activación de la llamada a enfermera

En la configuración predeterminada, la llamada a enfermera está desactivada; para poder usarla es preciso habilitarla primero. Esto se puede hacer en la pantalla Configuración del sistema, sin embargo, la función se volverá a deshabilitar cuando se apague el monitor. Para activar de forma permanente la función de llamada a enfermera, habilítela en la pantalla del monitor, en la sección Configuración oficial del modo de servicio como se explica a continuación.

> PARA ACTIVAR LA LLAMADA A ENFERMERA:

- Encienda el monitor y espere a que aparezca la pantalla de inicio. Use el mando de control para seleccionar el botón SISTEMA para abrir la pantalla Sistema, luego seleccione SERVICIO e introduzca la contraseña de servicio (consulte Contraseña de servicio de Capnostream[™] en la página 150).
- 2. Desde la pantalla de servicio, seleccione CONFIG. OFICIAL y después seleccione MONITOR.
- 3. Use el mando de control para seleccionar LLAMADA A ENFERMERA y cambie la opción a ACTIV.
- 4. Seleccione ATRÁS, ATRÁS e INICIO para salir del modo de servicio. La configuración nueva queda almacenada.
- 5. Compruebe el sistema de llamada a enfermera como se explica en Comprobación de la llamada a enfermera, más adelante.
- 6. Tenga en cuenta que los datos de llamada a enfermera no se transferirán si las alarmas se han silenciado de forma temporal (mediante el botón de silenciamiento de alarmas de la parte frontal del monitor). Consulte Silenciamiento de alarmas en la página 81 para obtener más información sobre esta función. Los datos de llamada a enfermera se seguirán transfiriendo si las alarmas se han silenciado mediante la configuración oficial (consulte Configuración oficial predeterminada en la página 131).

Comprobación de la llamada a enfermera

Verifique si el sistema está funcionando; para ello, fuerce la aparición de una alarma de prueba (por ejemplo, respire en la FilterLineTM durante unos cuantos segundos y luego deje de respirar en ella para crear una alarma SINRESP). Confirme si se recibe el resultado esperado conforme al estándar establecido para el sistema de llamada a enfermera del centro en cuestión. Puede ser una luz de advertencia que se enciende o la emisión de una señal sonora cuando se produce el evento de alarma.

En la tabla siguiente puede ver cuáles son las alarmas indicadas por el sistema de llamada a enfermera.

Tipo de alarma	Activa la llamada a enfermera
Alarmas urgentes de prioridad alta (en rojo) sobre el paciente	SÍ
Alarmas de advertencia (en amarillo)	NO
Alarmas de prioridad media	SÍ
Mensajes de aviso	NO
Mensajes de aviso silenciosos	NO

Tabla 31 – Indicadores de llamada a enfermera

Funcionamiento con sistemas de datos de pacientes del hospital

El monitor Capnostream[™]20p ofrece conectividad con los sistemas de datos de pacientes del hospital (Bernoulli y Oxinet III) fabricados o comercializados por Cardiopulmonary Corporation (CPC). Esta opción permite una transferencia periódica en tiempo real de los datos del monitor a los sistemas de datos de pacientes del hospital. Hay disponibles configuraciones para 8 o 12 camas.

Antes de iniciar el proceso de conexión, asegúrese de que dispone del siguiente equipamiento:

- Sistema Bernoulli u Oxinet III instalado en el hospital
- Bernoulli-MSM u Oxinet Client Bridge (puente cliente) terminado en un cable con conector D de 9 patillas
- Monitor CapnostreamTM20p

Conecte el sistema como se explica en las Instrucciones de uso que acompañan a Bernoulli-MSM u Oxinet Client Bridge (puente cliente). El sistema se utiliza con un cable en Y que se conecta a Client Bridge (puente cliente), a Capnostream[™]20p y a la toma de corriente de la pared. Asegúrese de que todos los conectores estén bien conectados y de que Capnostream[™]20p recibe alimentación procedente de la toma de corriente de la pared durante el funcionamiento con este sistema.

Una vez realizada la conexión entre los dispositivos como se ha explicado anteriormente, los datos en formato binario se transferirán automáticamente del monitor Capnostream[™]20p al sistema Bernoulli/Oxinet[®] III. No hace falta ninguna configuración adicional del monitor.

Los datos de medición que se transfieren son los siguientes:

- CO₂ instantáneo
- EtCO₂
- FiCO₂
- Frecuencia respiratoria
- SpO₂
- Pulso

Además, se transfiere la información relacionada con el tipo de paciente, datos de alarma y configuración del dispositivo (límites de alarma, etc.).

El sistema Bernoulli pone a su disposición una interfaz de señales vitales de salida a un sistema de información clínico, así como una interfaz de entrada ADT (alta, baja y traslado).

Para obtener más información sobre el sistema Bernoulli/Oxinet III, o para solucionar problemas del procedimiento de instalación, póngase en contacto con su distribuidor local.

PRECAUCIÓN: Si la conectividad con el sistema de datos de pacientes del hospital falla como consecuencia de una avería en el sistema propiamente dicho o en su cableado, Capnostream[™]20p no enviará datos al sistema.

PRECAUCIÓN: Las indicaciones de alarma sonora de CapnostreamTM20p solo deben apagarse tras haberse asegurado de que la monitorización del paciente se seguirá realizando ininterrumpidamente por otros medios aceptables.

Funcionamiento con sistemas VEGA™* de Nuvon

CapnostreamTM20p también se puede conectar con el sistema VEGATM* de Nuvon para fines de interconexión con sistemas de información clínica para realizar gráficos electrónicos de las señales vitales del paciente.

La conexión de CapnostreamTM20p al sistema VEGATM* la lleva a cabo en su totalidad el especialista técnico de Nuvon en el centro sanitario con la ayuda de un representante del departamento informático del hospital. Todos los datos fisiológicos de los pacientes desarrollados por CapnostreamTM20p se envían al sistema VEGATM* para que lo utilice el sistema de información clínica. Para obtener más información sobre el sistema VEGATM* de Nuvon, póngase en contacto con un representante de ventas de Medtronic o un representante de ventas de Nuvon directamente.

Capítulo 13

Mantenimiento y solución de problemas

Introducción Información sobre las horas que faltan para el mantenimiento del monitor Calibración de CO₂ Comprobación de calibración de CO₂ Mantenimiento Sustitución de fusibles Sustitución del rollo de papel de la impresora Limpieza Solución de problemas Envío del monitor para su revisión Asistencia técnica

Introducción

Capnostream[™]20p no precisa de tareas de mantenimiento periódicas, a excepción de las pruebas de funcionamiento exigidas por la institución del operario. Por su parte, el monitor requiere una revisión que debe ser realizada por personal de mantenimiento cualificado únicamente cada 30 000 horas de funcionamiento.

El mecanismo de detección de CO_2 del monitor debe calibrarse periódicamente como se explica más adelante en la sección Calibración de CO2 de la página 122. La calibración de CO_2 puede comprobarse en cualquier momento para garantizar que se encuentra dentro de los límites operativos adecuados.

En la sección Solución de problemas de la página 126 se tratan dificultades potenciales que pueden surgir y sus causas posibles, y ofrece sugerencias para resolverlas.

Nota: Póngase en contacto con su distribuidor local o consulte el manual de servicio para obtener información sobre las instrucciones de servicio, así como sobre las pruebas de rendimiento y las comprobaciones.

Información sobre las horas que faltan para el mantenimiento del monitor

En la pantalla Servicio encontrará la información sobre cuántas horas faltan hasta la próxima tarea de mantenimiento o calibración. Para acceder a la pantalla de servicio, seleccione *SISTEMA* en la barra de menús en la parte inferior de la pantalla de inicio y después selecciones *SERVICIO*. No se necesita ninguna contraseña para ver el número de horas que faltan hasta la próxima tarea de mantenimiento. A continuación se muestra la pantalla de servicio principal.

12:00AM 31 M/ ADULTO REPARACIÓN	AR 12	NTRAS			•<->
SpO2 HORAS D	E USO	ND			
CO2 HORAS RE	ST. P. REPARAC			19967	
CO2 HORAS R	EST. P. CALIBRA	С.		1167	
CO2 NÚMERO I REV. HARDWAF	DE SERIE RE	121212121212 A.00.01	12 REV. SOI	TWARE (01.00
REV. HARDWAR REV. SOFTWAR	RE SpO2 E DSP	8192 V4.8.1.4	REV. SO	т мси	V1.0.3.1
NÚMERO DE SE	RIE DEL MONIT	OR B300	0001001		2
REV. HARDWAR	E	1.1	REV. SOFTW	ARE	8.1
IMPRESORA CO	NECTADA				
	ASISTENCIA 1	ÉCNICA techni	calsupport@oric	lion.com	
MODE DEMO	CONFIG. OFICIAL	DATOS DE SERVICIO	MANTAN. SOFTWARE	CALIBRAC. CO2	

Figura 47 – Pantalla de servicio

Cuando el monitor alcance las 30 000 horas de uso, envíelo a un centro de servicio técnico autorizado. Póngase en contacto con su representante local para obtener las instrucciones de envío.

Calibración de CO₂

Nota: La unidad se entrega ya calibrada.

El monitor debe calibrarlo personal técnico cualificado después de las primeras 1.200 horas de uso o cuando hayan transcurrido 12 meses, lo que ocurra antes. A partir de esto, la calibración se debe realizar cada 12 meses o después de 4.000 horas de funcionamiento, lo que ocurra antes.

Para ayudarle a planificar por adelantado el próximo proceso de calibración, el monitor almacena tanto el número de horas de funcionamiento que falta para la calibración como la fecha en la que se realizó la última calibración.

Cuando llega el momento de realizar la calibración, el monitor mostrará el mensaje de aviso SE REQUIERE CALIBRACIÓN en el área de mensajes.

El número de horas de funcionamiento que faltan para realizar la calibración se muestra en la pantalla de saludo cada vez que se enciende el monitor (vea la Figura 9 – Pantalla de saludo de la página 33). Una vez superado el límite de horas de funcionamiento, el mensaje cambiará a *¡CALIBRACIÓN ATRASADA!*. El número de horas de funcionamiento que faltan para realizar la calibración también puede verse en la pantalla de servicio, la cual cambiará también a *¡CALIBRACIÓN ATRASADA!* igual que la pantalla de saludo si se ha alcanzado el límite establecido. Los datos de la pantalla de servicio se actualizan cuando se enciende el monitor, así como cada vez que se introduce la contraseña para acceder al modo de servicio.

Nota: Se recomienda calibrar el monitor en el plazo de dos semanas posterior a la aparición del mensaje SE REQUIERE CALIBRACIÓN en el monitor.

Nota: La monitorización de CO₂ en el monitor Capnostream[™]20p entrará automáticamente en modo de espera cuando el monitor lleve 30 minutos o más sin una FilterLine[™] conectada. Este modo de espera automático reduce la necesidad de llevar a cabo calibraciones frecuentes en los casos de uso en los que el monitor se deja encendido durante largos periodos de tiempo sin una FilterLine[™] conectada. En estos casos, los periodos de tiempo durante los que un monitor está encendido sin tener conectada una FilterLine[™] no se incluyen en el tiempo que falta para la calibración, lo que evita la necesidad de realizar calibraciones innecesarias.

Para que aparezca la fecha en la que se realizó la última calibración, acceda al modo de servicio y vaya a la pantalla de calibración. Desde la pantalla de inicio seleccione el botón *SISTEMA* para abrir la pantalla de sistema y después seleccione el botón *SERVICIO* para abrir la pantalla de servicio. Introduzca la contraseña de servicio y después seleccione *CALIBRAC. CO*₂. Esta pantalla muestra el número de horas que quedan antes de tener que realizar el mantenimiento, la fecha en que tuvo lugar la última calibración y la fecha en la que debe llevarse a cabo la siguiente calibración (un año después de la calibración más reciente). Para ver esta pantalla es necesaria la contraseña requerida para acceder al modo de servicio.

Comprobación de calibración de CO₂

Dependiendo de la política y procedimientos oficiales, el monitor puede comprobarse en cualquier momento para determinar si la detección de CO_2 está dentro de los límites aceptados. En la sección siguiente Procedimiento de comprobación de la calibración encontrará las instrucciones paso a paso para realizar una comprobación de la calibración.

PRECAUCIÓN: La comprobación de la calibración se debe realizar con un kit de calibración autorizado por el fabricante con una mezcla de gases compuesta de 5 % de CO₂, 21 % de O₂ y Balance N₂, y los medios de conexión autorizados (pieza en "T").

Puede adquirir un equipo de calibración aprobado por el fabricante a través de Airgas, Scott Medical Products Division (número de referencia Z03NI748BDC002, número de referencia anterior: 4653ORF-2BD). Se entrega en un paquete de 2 e incluye:

- Gas de calibración con un 5 % de CO2, 21 % de O2 y Balance $N_{\rm 2}$
- Adaptador de tubos (pieza en "T")
- Línea de calibración (FilterLine[™] de calibración)
- **Nota:** Si realiza este proceso mientras el monitor recibe alimentación de una batería, asegúrese de que esa batería esté totalmente cargada.
- **Nota:** Antes de comprobar la calibración, confirme que la línea de calibración suministrada con el kit de calibración esté correctamente conectada.

Procedimiento de comprobación de la calibración

Nota: En cualquier etapa del procedimiento de comprobación de la calibración, puede regresar a la primera pantalla haciendo clic en el botón *ATRÁS*.

➢ PARA REALIZAR LA COMPROBACIÓN DE CALIBRACIÓN:

- Use el mando de control para navegar a la pantalla COMPROBACIÓN CALIBRACIÓN CO₂. Desde la pantalla de inicio, seleccione el botón SISTEMA y después seleccione COMPR. CAL. CO₂. O bien, en la pantalla de servicio, seleccione CALIBRAC. CO₂ y luego seleccione COMPR. CAL CO₂. Aparece ahora la pantalla COMPROBACIÓN CALIBRACIÓN CO₂. Las instrucciones que irán mostrándose en la pantalla le guiarán por una serie de pasos de comprobación de la calibración.
- 2. En la pantalla aparece el mensaje: CONECTAR FILTERLINE AL MONITOR. Conecte la línea de calibración al monitor y seleccione INICIAR para comenzar la comprobación de la calibración.
- 3. En la pantalla aparece el mensaje: CONECTAR EL GAS DE CALIBRACIÓN [5% CO₂, 21% O₂, BALANCE N₂]. Conecte el otro extremo de la línea de calibración al bote de gas, después seleccione CONTINUAR.
- 4. En la pantalla aparece el mensaje: *ABRIR EL SUMINISTRO DE GAS DE LA BOTELLA*. Abra el bote de gas y seleccione *CONTINUAR*.

En este momento, el módulo realiza una comprobación de la calibración. Mientras se realiza, aparece el mensaje *COMPROBANDO CALIBRACIÓN*. Mientras el módulo de CO₂ se calienta, el monitor mostrará el mensaje *NO ESTÁ PREPARADO PARA CALIBRAR*. Espere hasta que el módulo esté listo y después seleccione *CONTINUAR*.

5. Cuando el módulo haya finalizado las mediciones de comprobación de la calibración y esté procesando los datos, muestra el mensaje:

CÁLCULO DE RESULTADOS, PUEDE CERRAR EL SUMINISTRO DE GAS.

- 6. Cierre el suministro de gas de la comprobación de la calibración. Si tiene que detener la comprobación de la calibración antes de que finalice, use el mando de control para seleccionar *DETENER*.
- 7. En la pantalla aparece el mensaje: DESCONECTAR GAS DE CALIBRACIÓN Y FILTERLINE y CONTINUAR.

Entonces el módulo indica:

COMPROBACIÓN DE CALIBRACIÓN COMPLETA

MEDICIÓN DE CO₂ X,X%

EXACTITUD PARA UN 5% DE GAS ES 4,7 A 5,3%.

Seleccione ATRÁS para regresar a la pantalla de inicio o *INICIAR* para realizar la comprobación de la calibración otra vez.

- Si el resultado de la comprobación de la calibración indica que el monitor no está calibrado, aparece el mensaje MEDICIÓN DE CO₂ FUERA DE ESPECIFICACIONES. CALIBRACIÓN RECOMENDADA. En este caso, se debe realizar el procedimiento de calibración. Consulte el manual de servicio o al personal de mantenimiento autorizado de Medtronic.
- 9. Si el monitor no puede terminar la comprobación de la calibración, aparece el mensaje *ERROR EN LA CALIBRACIÓN* con uno de los siguientes mensajes de error:

FILTERLINE NO CONECTADO

ERROR EN LA CALIBRACIÓN: SIN GAS, CONCENTRACIÓN INCORRECTA DE GAS O GAS INESTABLE

ERROR DE MEDIDA. COMPROBAR TODAS LAS CONEXIONES E INTENTAR OTRA VEZ CALIBRACIÓN ABORTADA POR EL USUARIO

AUTOTEST DE MÓDULO CO₂ INTERNO

Nota: Eliminación de los gases de calibración respetando la normativa local aplicable a la eliminación de gases

Mantenimiento

El monitor no precisa de tareas de mantenimiento periódicas, a excepción de las pruebas de funcionamiento exigidas por la institución del operario. La sección Solución de problemas de la página 126 explica dificultades potenciales que pueden surgir y sus causas posibles, y ofrece sugerencias para resolverlas.

Se recomienda efectuar el mantenimiento periódico conforme a las horas de funcionamiento:

- La bomba de CO₂ se debe reemplazar cada 30 000 horas de funcionamiento.
- Se debe realizar una calibración después de las primeras 1200 horas de uso y, a partir de ahí, una vez al año o cada 4000 horas de funcionamiento, lo que ocurra primero (consulte la sección Calibración de CO2 en la página 122).
- El número de horas que le faltan al monitor para llegar el límite de 30 000 horas de funcionamiento antes de tener que realizar la revisión aparece cada vez que se enciende la unidad. También se puede consultar esta información en la pantalla de servicio.
- El tiempo de reserva de la batería de ion litio puede degradarse con el tiempo. Para evitar la degradación de la capacidad de la batería, se recomienda reemplazar la batería cada dos años.
- **Nota:** Póngase en contacto con su representante local para solicitar piezas de repuesto o kits de calibración o para que le responda a cualquier pregunta que pueda surgirle sobre las tareas de servicio y mantenimiento periódico.

Sustitución de fusibles

El monitor está protegido contra las subidas rápidas en la tensión eléctrica mediante dos fusibles. Si se funden los fusibles, el monitor no se encenderá y el paquete de baterías no se cargará.

Para cambiar los fusibles, apague el monitor y desconecte el cable de alimentación del mismo.

Los fusibles están situados en la parte trasera del monitor, bajo el enchufe para conectar el cable de alimentación eléctrica. Use un destornillador plano para hacer palanca y extraer la tapa de la caja de fusibles y proceda a cambiar los fusibles por otros del mismo amperaje (tipo F de capacidad de ruptura baja de 3,15 A y 250 V). Coloque la tapa de la caja de fusibles y haga presión sobre ella para cerrarla, vuelva a conectar el cable de alimentación y encienda el monitor.

Nota: Unos fusibles fundidos indican que se ha producido un estado eléctrico anormal. Si desconoce la causa, póngase en contacto con su representante para determinar si es necesario realizar una revisión.

Sustitución del rollo de papel de la impresora

Si la impresora se queda sin papel, cambie el rollo por otro de papel térmico para impresora (número de referencia de Medtronic 010516) o un papel similar que cumpla con las especificaciones indicadas en la sección Impresora térmica interna (opcional) de la página 143.

> PARA CAMBIAR EL PAPEL DE LA IMPRESORA:

- 1. Abra la tapa de plástico de la impresora.
- 2. Retire el rollo vacío del compartimiento de papel.
- 3. Coloque un rollo de papel nuevo en la dirección que se muestra en la siguiente figura, de modo que el extremo suelto del papel entre en contacto con la parte superior de la tapa de plástico.



Botón de alimentación de papel

Figura 48 – Colocación del rollo de papel en la impresora

4. Cierre la tapa y asegúrese de oír el chasquido que indica que está bien cerrada. Pulse suavemente el botón de alimentación de papel para verificar que el papel está correctamente alineado y que no está atrapado en el borde de la tapa.

Limpieza

Para limpiar las superficies del monitor, humedezca levemente un paño con una solución de alcohol al 70% y limpie con él todas las superficies. También puede usar toallitas humedecidas con alcohol. La frecuencia del procedimiento de limpieza debe ajustarse a lo establecido en la política del hospital.

Para limpiar la pantalla, use un paño húmedo que no deje pelusa.

Para limpiar los sensores reutilizables Nellcor[™], primero retírele el sensor al paciente y desconéctelo del dispositivo Capnostream[™]20p. La superficie de los sensores se puede limpiar con una solución de, por ejemplo, alcohol isopropílico al 70%. Si solo hace falta una desinfección de bajo nivel, utilice una solución de lejía en una proporción de 1:10. No use lejía sin diluir (5%~5,25% de hipoclorito de sodio) ni ninguna otra solución de limpieza distinta a la recomendada en este documento, pues podría causar daños permanentes al sensor. El sensor del clip para la oreja se puede limpiar pasándole un paño o sumergiéndolo (durante 10 minutos) en alcohol isopropílico (70%). Si opta por sumergir el clip para la oreja, asegúrese de enjuagarlo bien con agua y dejarlo secar al aire antes de usarlo en el siguiente paciente. No esterilice el clip para la oreja mediante radiación, vapor u óxido de etileno. Consulte las Instrucciones de uso de cada sensor reutilizable para obtener instrucciones específicas.

ADVERTENCIA: No esterilice este dispositivo en autoclave ni de ninguna otra forma.

PRECAUCIÓN: No rocíe ni vierta ningún líquido directamente sobre el monitor, sus accesorios o sus consumibles.
PRECAUCIÓN: No use soluciones de limpieza cáusticas ni abrasivas, ni disolventes fuertes, incluidas las soluciones con base de petróleo o de acetona, para limpiar el dispositivo.
PRECAUCIÓN: Los consumibles Microstream[™] etCO₂ han sido diseñados para ser utilizados una sola vez en un único paciente, por lo que no se pueden volver a usar. No trate de limpiar, desinfectar ni soplar la FilterLineTM; si lo hace el monitor podría resultar dañado.
PRECAUCIÓN: No exponga las patillas del conector del sensor SpO₂ a soluciones de limpieza; si lo hace, el sensor podría resultar dañado.
PRECAUCIÓN: Si utiliza toallitas con una solución de lejía en una proporción de 1:10 (solución de hipoclorito de sodio del 0,5% al 1%) para desinfectar las superficies externas del monitor, evite exponer los conectores y la pantalla a la solución de las superficies y dejar cierto residuo en ellas.

Solución de problemas

Esta sección presenta los posibles problemas que pueden producirse durante el uso del monitor, así como sugerencias para resolverlos. Si no logra solucionar el problema, póngase en contacto con personal de servicio técnico cualificado o con su representante local.

Electricidad

Problema	Causa	Acción	
El monitor no se enciende.	La batería interna está totalmente descargada y el cable de alimentación está mal conectado o desconectado, o la conexión eléctrica del cable está defectuosa.	Compruebe la conexión del cable de alimentación.	
	No llega suministro eléctrico a la toma de corriente de la pared y la batería interna no está cargada.	Compruebe las conexiones y corrija el problema.	
	Fusibles fundidos.	Cambie los fusibles. Póngase en contacto con su representante para determinar la causa del problema eléctrico.	

El paquete de baterías no está bien conectado al monitor.	Abra el compartimiento de la batería y
	compruebe que el cable de la batería esté bien conectado a la toma de la batería. (Consulte Instalación del paquete de baterías en la página 23).
El monitor no está recibiendo suministro eléctrico.	Compruebe si el indicador luminoso de alimentación naranja está encendido. Si no lo está, compruebe que el cable de alimentación de CA esté correctamente enchufado a una toma de alimentación de CA que funcione.
La batería no se ha recargado por completo.	Desenchufe el monitor de la toma de alimentación de CA durante 3 o 4 horas y luego vuelva a enchufarlo. La batería se recargará ahora por completo cuando la conecte a la alimentación de CA. Si sigue sin cargarse por completo,
Es Lc	il monitor no está recibiendo uministro eléctrico. a batería no se ha recargado por ompleto.

Problemas de CO₂

Problema	Causa	Acción
El mensaje SIN RESPIRACIÓN aparece constantemente y el indicador de alarma rojo parpadea.	Causa fisiológica.	Compruebe el estado del paciente.
	La FilterLine™ está obstruida o bloqueada.	Compruebe la FilterLine™ y reemplácela si está bloqueada.
	La FilterLine™ se ha enganchado con algo o el tubo está retorcido.	Compruebe toda la extensión de la FilterLine™ (desde el monitor hasta el paciente) para ver si la línea está retorcida, si un doblez está interrumpiendo el flujo o está enganchada en la cama o el equipo.
La FilterLine™ está conectada pero la	La FilterLine™ no está conectada correctamente.	Compruebe que el conector de la FilterLine™ esté bien enroscado al monitor.
bomba no funciona y no se muestran las lecturas de CO ₂ , EtCO ₂ ni FR.	Anillo dorado gastado o sucio.	Compruebe que el anillo dorado del extremo del conector de la FilterLine™ esté presente y que no esté dañado ni cubierto de suciedad. Limpie la suciedad o sustituya la FilterLine™ si fuera necesario.
La lectura de los valores de etCO ₂ es errática.	Un paciente conectado a un sistema de ventilación mecánica empieza a respirar espontáneamente.	No se requiere acción alguna.
	Una fuga en las vías aéreas.	Compruebe la conexión y el tubo para detectar posibles fugas y corregirlas en caso necesario.
Los valores de etCO ₂ son regularmente más altos o bajos de lo esperado.	Calibración incorrecta.	Compruebe la calibración. Consulte Comprobación de calibración de CO2 en la página 123.
	Ajuste BTPS desactivado.	Compruebe el ajuste BTPS en la configuración oficial. Para obtener más información, consulte Parámetros de CO2 en la página 138.

Sensor SpO₂

Problema	Causa	Acción
No hay señal de SpO ₂ : Se muestra Cero para los valores de saturación de oxígeno y de pulso.	El sensor no está correctamente conectado al monitor o al cable de extensión.	Compruebe que el sensor y el cable de extensión (si se usa) estén correctamente conectados al monitor.
En la pantalla de Capnostream™20p aparece un mensaje indicando que se sustituya el sensor de SpO₂.	La placa de SpO2 no recibe la información del cable.	Desconecte el sensor SpO ₂ , conéctelo de nuevo y vuelva a intentarlo. Si el mensaje no desaparece, sustituya el cable o el sensor.
Pérdida de la señal del pulso o de SpO ₂ : Se	El paciente no tiene bien colocado el sensor.	Compruebe la colocación del sensor.
muestra Cero para los valores de saturación de oxígeno y de pulso	La perfusión del paciente puede ser insuficiente.	Verifique el estado del paciente.
de oxigeno y de puiso.	El sensor o el cable de extensión del sensor pueden estar dañados.	Sustituya el sensor o el cable de extensión del sensor.
	Movimiento excesivo del paciente o interferencia electroquirúrgica.	Si es posible, haga que el paciente no se mueva. Compruebe si el sensor está bien sujeto y colocado correctamente. Si fuera necesario, sustituya el sensor, muévalo a otro lugar o use un sensor que tolere mejor el movimiento.
Mediciones de SpO2 imprecisas.	Iluminación excesiva.	Compruebe la colocación del sensor o cubra el sensor con material oscuro u opaco.
	El sensor se ha colocado en una extremidad donde hay un manguito de presión sanguínea, un catéter arterial o una línea intravascular, o esmalte de uñas.	Compruebe la colocación del sensor.
	El estado del paciente.	Compruebe el estado del paciente.
	El paciente se mueve demasiado.	De ser posible, haga que el paciente no se mueva y use un sensor que tolere mejor el movimiento.

Impresora

Problema	Causa	Acción
La impresora no imprime. La luz de alarma roja de la impresora está parpadeando.	La tapa de la impresora está abierta.	Abra del todo la tapa de plástico de la impresora, asegúrese de que fuera del monitor haya un poco de papel del rollo de la impresora y cierre la tapa hasta que oiga el chasquido que indica que está en su sitio.
	El papel de la impresora no está bien colocado sobre la tapa de plástico o está atrapado en la tapa de plástico.	Abra la tapa de plástico de la impresora y tire del papel para que quede un poco fuera del monitor. Sujete el rollo de modo que el lateral corto del papel de impresora quede fuera del monitor y, a continuación, cierre la tapa hasta que oiga el chasquido que indica que está en su sitio.
	La impresora no tiene papel.	Abra la tapa de plástico y coloque un rollo de papel nuevo.

Problema	Causa	Acción
La impresora no imprime. La luz de alarma roja de la impresora está parpadeando.	La tapa de la impresora está abierta.	Abra del todo la tapa de plástico de la impresora, asegúrese de que fuera del monitor haya un poco de papel del rollo de la impresora y cierre la tapa hasta que oiga el chasquido que indica que está en su sitio.
	El papel de la impresora no está bien colocado sobre la tapa de plástico o está atrapado en la tapa de plástico.	Abra la tapa de plástico de la impresora y tire del papel para que quede un poco fuera del monitor. Sujete el rollo de modo que el lateral corto del papel de impresora quede fuera del monitor y, a continuación, cierre la tapa hasta que oiga el chasquido que indica que está en su sitio.
	La impresora no tiene papel.	Abra la tapa de plástico y coloque un rollo de papel nuevo.
La impresora funciona, pero el papel sale en blanco.	El rollo de papel está colocado al revés en el compartimiento de la impresora del monitor.	Abra la tapa de plástico, dele la vuelta al rollo de papel y cierre la tapa de plástico teniendo cuidado de dejar un poco de papel de impresora fuera del monitor.

Llamada a enfermera

Problema	Causa	Acción
La función de llamada a enfermera no funciona.	La función de llamada a enfermera no está habilitada.	Habilite la función de llamada a enfermera en la pantalla Configuración del sistema o en la pantalla Configuración oficial en el modo de servicio.
	Problema con el cableado del conector de sonido.	Compruebe el cableado y que el conector de sonido está conectado a la toma de llamada a enfermera de la parte trasera del monitor.

Calibración de CO₂

Problema	Causa	Acción
En el monitor aparece el mensaje SE REQUIERE CALIBRACIÓN, pero la pantalla de bienvenida muestra que aun faltan algunas horas para realizar la siguiente calibración.	Ha pasado más de un año desde la última calibración de CO ₂ .	Realice una calibración de CO ₂ .

Envío del monitor para su revisión

Si tuviera que enviar el monitor para que lo reparen, póngase en contacto con su representante local para que le comunique las instrucciones de envío.

Para volver a empaquetar el monitor, desconecte los accesorios del monitor. Empaquete el monitor en la misma caja donde lo recibió. Si ya no tiene la caja original, use una caja adecuada rellenándola con la cantidad necesaria de material de embalaje. No es necesario devolver los sensores, consumibles Microstream[™] EtCO₂ ni los cables de alimentación.

Si el monitor no funciona correctamente, embálelo con cuidado con un consumible que no haya sido utilizado de la misma caja o lote que el consumible que se estaba utilizando en el momento de producirse el fallo y envíelos para su inspección.

Asistencia técnica

Para obtener información sobre asistencia técnica, póngase en contacto con su representante local de Medtronic o escriba a <u>Capnographytechnicalsupport@medtronic.com</u>.

El manual de servicio incluye información necesaria para el personal cualificado que vaya a realizar el mantenimiento del monitor.

Si tuviera que enviar el monitor para que lo reparen, póngase en contacto con su representante local para que le comunique las instrucciones de envío.

Configuración oficial

Configuración oficial predeterminada Modificación de la configuración oficial Restablecimiento de la configuración predeterminada Carga o descarga de la configuración oficial Modificación de la configuración del monitor

Configuración oficial predeterminada

CapnostreamTM20p se entrega de fábrica con todos sus ajustes configurables definidos conforme a las tablas de la sección Modificación de la configuración del monitor de la página 132. A estos ajustes se les denomina configuración predeterminada. Si el entorno específico donde se utiliza indica que es preferible o necesario usar unos ajustes distintos, o la política del centro exige unos valores diferentes a los predeterminados de fábrica, puede cambiar los ajustes predeterminados de modo que se apliquen cada vez que encienda el monitor. Esto es más seguro que confiar en que los miembros del personal cambien los ajustes antes de cada uso.

Un técnico autorizado o un ingeniero biomédico pueden cambiar manualmente la configuración predeterminada para establecer la configuración oficial. La configuración predeterminada se ajusta desde la pantalla Configuración oficial, a la que se accede desde la pantalla de servicio. La pantalla de servicio está protegida mediante contraseña. El procedimiento se explica en la sección Modificación de la configuración oficial, más adelante.

Modificación de la configuración oficial

Desde la pantalla de inicio use el mando de control para seleccionar el botón *SISTEMA* y después seleccione el botón *SERVICIO* en el menú para abrir la pantalla de servicio. El cuadro para introducir la contraseña aparece cerca de la parte superior de la pantalla.



Como se explica en la sección Desplazamiento por la pantalla de la página 40, use el mando de control para seleccionar *INTR.CONTRAS*. Con el mando de control, introduzca la contraseña y haga clic en el mando de control otra vez después de la última letra. La contraseña se muestra en la sección Contraseña de servicio de CapnostreamTM de la página150. La página de la contraseña de servicio se puede quitar del manual por motivos de seguridad.

Use el mando de control para seleccionar CONFIG. OFICIAL. Si lo desea, puede cambiar la configuración predeterminada de LÍMITES DE ALARMA, TENDENCIAS, MONITOR, CO₂ y SpO₂.

Después de cambiar cualquier ajuste predeterminado de fábrica a un valor específico de configuración oficial, apague el dispositivo con el botón de encendido/apagado y, seguidamente, vuelva a encenderlo para asegurarse de que se ha guardado el la configuración nueva.

ADVERTENCIA: La modificación de la configuración podría afectar negativamente a la monitorización de los pacientes. Los cambios en la configuración oficial solo debe llevarlos a cabo personal autorizado.

Nota: El dispositivo no monitorizará pacientes mientras se encuentre en modo de servicio, aunque esté conectado a un paciente en ese momento. (El monitor pasa a estar en modo de servicio cuando se introduce la contraseña de servicio). Por tanto, quizá desee retirar la FilterLine[™] del paciente o desconectar la FilterLine[™] del monitor cuando ponga el monitor en modo de servicio. Mientras el monitor se encuentre en el modo de servicio, no se registrará ningún dato; por tanto, intentar realizar cualquier monitorización en este modo provocará problemas de ausencia de datos.

Restablecimiento de la configuración predeterminada

Cada sección de ajustes que se describe a continuación le permite restablecer la configuración predeterminada para esa sección específica. También puede restablecer de una vez la configuración predeterminada de todos los ajustes de todas las secciones. Para esto, seleccione *RESET* cuando seleccionó previamente la pantalla de configuración oficial predefinida.

11:15	AM JUN 06,	,06					
CONF	IGURACIÓN	OFICIAL					
	ESTO	S AJUSTES C	ontinúan di	ESPUÉS APA	GASE EL MON	ITOR	
	PULSE RESET PARA ESTABLECER LA CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA DEL FABRICANTE						
		REINI	RES	BET	INCIA		
	LÍMITES ALARMA	TENDENCIA	MONITOR	PARÁCO2	PARÁSpO2	ATRÁS	

Figura 49 – Pantalla de configuración oficial

Carga o descarga de la configuración oficial

CapnostreamTM20p ofrece la opción de descargar la configuración oficial desde el monitor a una memoria USB, o cargarla desde una memoria USB al monitor.

Esta utilidad sirve, por ejemplo, para simplificar el proceso cuando una institución desea que todos los dispositivos de un grupo o sección concretos usen la misma configuración oficial. En este caso, se puede modificar la configuración oficial en un dispositivo y cargar esa configuración modificada en una memoria USB como se explica a continuación. Seguidamente, esa configuración se puede descargar a otros dispositivos CapnostreamTM20p de la sección/institución mediante este procedimiento.

> PARA CARGAR O DESCARGAR UNA CONFIGURACIÓN:

- Para la carga, conecte una memoria USB con al menos 2 KB de memoria libre en el puerto USB de Capnostream[™]20p. Para la descarga, conecte al puerto USB de Capnostream[™]20p la memoria USB en la que se ha cargado de antemano la configuración oficial.
- 2. Haga clic en el botón de menú SISTEMA para acceder a la pantalla del sistema principal

- 3. Haga clic en el botón SERVICIO de la barra de menús para acceder a la pantalla de servicio e introducir la contraseña de servicio (consulte Contraseña de servicio de Capnostream[™] en la página 150).
- Haga clic en el botón MANTEN. SOFTWARE de la barra de menús para acceder a la pantalla de mantenimiento de software. Puede ver la pantalla de mantenimiento de software en la Figura 50 – Pantalla de mantenimiento de software de la página 133.
- 5. Haga clic en el botón S. PRED. para cargar la configuración predeterminada en la memoria USB desde Capnostream[™]20p, o bien haga clic en el botón D. PRED. para descargar la configuración predeterminada de la memoria USB a Capnostream[™]20p. Al descargar la configuración predeterminada se crea una carpeta denominada settings (configuración) en la memoria USB que contiene archivos que se pueden utilizar para cargar la configuración predeterminada en otro Capnostream[™]20p. Tras cargar la configuración predeterminada, el monitor se apagará automáticamente; reinícielo para reanudar su funcionamiento.

12:0	DOAM 31 MAR	र 12			- -
MAN	NTENIMIENTO	DE SOFTWARE			• ~~
со	2 HORAS DE U	JSO	97		
SpC	D2 HORAS DE	USO	ND		
со	2 HORAS RES	T. P. REPARAC.		19967	
co	2 HORAS RES	st. P. Calibrac		1167	
со	2 NÚMERO DE	SERIE	1212121212121	2	
RE	V. HARDWARE		A.00.01	REV. SOFTWARE	E 01.00
RE	V. HARDWARE	SpO2	8192		
RE	V. SOFTWARE	DSP	V4.8.1.4	REV. SOFT MCU	V1.0.3.1
NÚ	MERO DE SER		DR B3000	0001001	
RE	V. HARDWARE		1.1	REV. SOFTWARE	7.4
IMF	PRESORA CON	IECTADA	()		
		ASISTENCIA T	ÉCNICA technic	alsupport@oridion.com	1
	COMDIR CO2	SOFTWARE MONITOR	D. PRED.	S. PRED.	ATRÁS

Figura 50 – Pantalla de mantenimiento de software

Modificación de la configuración del monitor

Límites de alarma

Hay dos grupos de límites de alarma que pueden almacenarse en el monitor, uno para pacientes del tipo Adulto/Pediátrico y otro para pacientes del tipo Infantil/Neonato. (Los límites para Adulto/Pediátrico se aplican a los pacientes adultos y a los tres tipos de pacientes pediátricos). La configuración predeterminada para los límites de alarma Adulto y Neonato están indicados en la Tabla 32 – Configuración predeterminada de los límites de alarma/indicadores de la página 134.

Para cambiar los límites de alarma para cada tipo de paciente, abra la pantalla de configuración oficial. Seleccione *LÍMITES DE ALARMA* y use el mando de control para seleccionar *DEF. INFANT/NEONAT*, *DEF. ADULT/PED* o *ESTAB RET ALARMA* según corresponda. Aparecerá la pantalla Configuración oficial: Límites de alarma: Neonato/Infantil o Configuración oficial: Límites de alarma: Adulto/Pediátrico, o bien la pantalla Retraso alarma. Para obtener más información sobre las opciones de retraso de las alarmas, consulte la sección Retraso de alarma en la página 74.

Cambie los ajustes como se explica en la sección Cambio de los límites de alarma de la página 82.

Por defecto, las alarmas de advertencia están desactivadas y en la pantalla Límites de alarmas los números correspondientes a los ajustes de las alarmas de advertencia aparecen en gris. Seleccione ACTIVAR ADVERT. si desea activar las alarmas de advertencia. Cuando haya activado las alarmas de advertencia, los números de los ajustes de la alarmas de advertencia cambiarán del color gris al blanco.

	UNDS	ALARM.URG.	ALARM ADVE	
EtCO2AL	mmHg	60	55	
EtC02BA	mmHg	15	17	
FiC02AL	mmHg	8	8	
FR AL	bpm	30	25	
FR BA	bpm	5	7	
SINRESP	sec	30	с. Х.	
Sp02AL	%	100	100	
Sp02BA	%	85	90	
FP ALTO	bpm	140	140	
FP BAJO	bpm	50	50	
IPI BAJ		3	5	

Figura 51 – Pantalla de límites de alarma de la configuración oficial

A continuación se indica la configuración predeterminada de los límites de alarma para pacientes de tipo adulto/pediátrico e infantil/neonato.

Tabla 32 - Configuración predeterminada de los límites de alarma/indicadores

Parámetro	Alarma urgente en rojo para pacientes adult/ped	Alarma de advertencia en amarillo para pacientes adult/ped	Alarma urgente en rojo para pacientes inf/neonat	Alarma urgente en amarillo para pacientes inf/neonat	Intervalo
EtCO ₂ alto	60	55	50	45	5-150 mmHg
EtCO ₂ bajo	15	17	20	22	0-145 mmHg
FiCO ₂ AL	8	8	5	5	2-98 mmHg
FR alta	30	25	65	60	5-150 lpm
FR baja	5	7	25	28	0-145 lpm
Sin respiración	30	N/A	15	N/A	10-60 s
SpO ₂ alto	100	100	98	98	25-100% de saturación
SpO₂ bajo	85	90	85	90	20-95% de saturación
Pulso alto	140	140	200	200	30-240 lpm
Pulso bajo	50	50	100	100	25-235 lpm
IPI bajo	3	5	N/A	N/A	1-9 o Desactivado
SatSec	25	25	25	25	10, 25, 50, 100 o Desactivado

Retraso de alarma

Hay varias alarmas que se pueden retrasar 10, 15, 20 o 30 segundos, o no retrasarse (retraso de alarma desactivado). Esta opción está disponible para todos los tipos de pacientes.

El retraso de alarma se puede establecer desde la pantalla Configuración oficial a la que se accede mediante SISTEMA>SERVICIO>INTR. CONTRAS. SERVICIO (consulte Contraseña de servicio de Capnostream™ en la página 150) >CONFIG. OFICIAL>LÍMITES DE ALARMA>ESTAB RET ALARMA.

Tabla 33 – Configuración predeterminada y configuración opcional del retraso de alarma

Parámetro	Opciones	Valor predeterminado
RETARDO EN ALARMA ETCO₂ ALTO	10, 15, 20 o 30 segundos o DESACT	DESACT
RETARDO EN ALARMA FR ALTA	10, 15, 20 o 30 segundos o DESACT	DESACT
RETARDO DE ALARMA DE BAJA SpO2	10, 15, 20 o 30 segundos o DESACT	DESACT
RETARDO DE ALARMA DE BAJA FP	10, 15, 20 o 30 segundos o DESACT	DESACT
RETARDO DE ALARMA DE ALTA FP	10, 15, 20 o 30 segundos o DESACT	DESACT

Ajustes de tendencias

La configuración oficial se puede ajustar para cambiar las tendencias almacenadas en el monitor y el modo de presentarse en la pantalla. Para la configuración específica de las tendencias de SpO_2 y CO_2 , consulte la configuración individual indicada a continuación para los parámetros SpO_2 y CO_2 .

Parámetro	Opciones	Valor predeterminado
RESOLUCIÓN GRABAC. TEND.	5 segundos durante 12 horas 10 segundos durante 24 horas 30 segundos durante 72 horas	30 segundos durante 72 horas
INCR.TABULAR PANT.PREDET.	MÍNIMO, 1.5, 3, 15 o 60 minutos	1,5 minutos
VISTA GRÁFICA PREDET.	2, 4 o 12 horas	4 horas

Tabla 34 – Configuración predeterminada y configuración opcional de las tendencias

La pantalla del IPI de inicio predeterminada (consulte Pantalla del IPI en la página 66) también aparece en la pantalla de configuración predeterminada de tendencias.

La resolución de grabación de tendencias predeterminada determina cuántas horas de información sobre el paciente se puede registrar.

La pantalla de incremento tabular permite definir los valores predeterminados conforme a los de la tabla.

La vista gráfica predeterminada se puede cambiar de modo que la ventana de tendencias muestre un periodo de tiempo diferente de datos.

Nota: Al cambiar la resolución de las tendencias se borrará la memoria de tendencias, lo cual eliminará todos los datos del paciente almacenados en el monitor.

Para realizar cambios en la configuración predeterminada de las tendencias, haga clic en

SERVICIO>CONFIG. OFICIAL>TENDENCIA en la barra de menús. Use el mando de control para acceder a los parámetros descritos anteriormente y haga clic para ver las opciones. Seleccione una opción con el mando de control y haga clic otra vez para registrar la opción como predeterminada.

Cambio del orden de los parámetros de la pantalla de tendencias

Las pantallas Gráfica y Tabular muestran cinco parámetros de paciente distintos. El orden de aparición de los parámetros de tendencias se puede cambiar en la pantalla Configuración oficial para poder ver los parámetros más relevantes en la primera pantalla de visualización de tendencias en lugar de en la segunda. El proceso es el siguiente: Haga clic en *SISTEMA>SERVICIO>*Introduzca la contraseña de servicio (consulte Contraseña de servicio de Capnostream[™] en la página 150) >*CONFIG. OFICIAL>TENDENCIA> PANTALLA CONFIG.* para abrir la pantalla Configuración oficial: Tendencia: Pantalla Configuración.

Para cada posición que desee cambiar, use el mando de control para mover el cursor hasta esa línea, haga clic en el mando de control y, en la columna de parámetros disponibles, seleccione los parámetros que desea que aparezcan en esa línea. Por ejemplo, en la posición de parámetro 1, el valor predeterminado es EtCO₂. Para cambiar la vista de las tendencias para que el IPI aparezca como primer parámetro en la pantalla de tendencias, mueva el cursor a Parámetros seleccionados: EtCO₂, haga clic en el mando de control y desplácese con este hasta llegar a IPI en la columna de parámetros disponibles. Haga clic con el mando de control para ubicar el IPI como el primer parámetro en la visualización de tendencias.

Haga clic en *ATRÁS*>*ATRÁS*>*INICIO* para conservar las selecciones realizadas una vez que haya terminado de cambiar la visualización de tendencias. Para regresar a la pantalla predeterminada, haga clic en *CONFIG. PREDET.* en la pantalla Configuración oficial: Tendencia: Pantalla Configuración.

Las etiquetas de evento usadas en la grabación de tendencias también se pueden cambiar en la pantalla Configuración oficial: Tendencia mediante la barra de menús. En la sección Eventos, más adelante, se explica esto detalladamente.

Eventos

En Capnostream[™]20p se pueden almacenar hasta 10 nombres de eventos en cada una de las tres categorías. Esto permite al profesional sanitario describir el evento presente en la memoria del monitor. Las tres categorías son: administración de medicación, actividad del paciente e intervenciones clínicas.

La configuración predeterminada incluye la mayoría de los nombres de los eventos y varios espacios en blanco en cada una de las tres categorías. Sin embargo, los 30 nombres de eventos se pueden editar para que su descripción se adapte mejor al entorno en el que se va a usar el monitor.

Cada nombre de evento puede tener hasta 11 caracteres alfanuméricos. Si se selecciona el nombre de un evento que se ha dejado en blanco, ese evento quedará almacenado en la memoria de tendencias como un evento rápido (consulte Introducción de eventos de paciente en la página 47 para más información sobre el uso de los eventos).

Eventos de medicación

Permite al centro introducir un grupo de 10 etiquetas de evento que el operario puede usar para marcar la administración de un medicamento en el momento de la monitorización. Los medicamentos predefinidos son: FENTANILO, VERSED, MIDAZOLAM, MORFINA, DEMEROL, PROPOFOL, SURFACTANTE y OTROS. Los últimos tres espacios están en blanco. Todos los ajustes se pueden cambiar. Para restablecer los eventos de medicación a su configuración predeterminada, use el mando de control para seleccionar *CONFIG. PREDET*.

Eventos de pacientes

Permite al centro introducir un grupo de 10 etiquetas de evento que el operario puede usar para marcar los eventos que le ocurran al paciente en el momento de la monitorización. Los eventos de paciente predefinidos son: COMIDA, BEBIDA, TOSER, DEAMBULAR, TF PECHO, VUELTO, RONCAR y OTROS. Los últimos dos espacios están en blanco. Todos los ajustes se pueden cambiar. Para restablecer los eventos del paciente a su configuración predeterminada, use el mando de control para seleccionar *CONFIG. PREDET*.

Eventos de intervención

Permite al centro introducir un grupo de 10 etiquetas de evento que el operario puede usar para marcar los eventos cuando se produzca una intervención física o de otro tipo durante la monitorización. Los eventos de

intervención predefinidos son: OXÍGENO, SUCCIÓN, AJUSTVÍARES, NARCAN, ROMAZICON, TTONEBULIZA, ESTIMULAR, INSUFL. CO₂ (insuflación de CO₂), ABG y OTROS. Los últimos dos espacios están en blanco. Todos los ajustes se pueden cambiar. Para restablecer los eventos de intervención a su configuración predeterminada, use el mando de control para seleccionar *CONFIG. PREDET*.

Procedimiento para cambiar la configuración predeterminada de los eventos

Desde la pantalla de servicio, seleccione la pantalla *CONFIG. OFICIAL* y, a continuación, la pantalla *TENDENCIA*. En la barra de menús de la pantalla Configuración oficial: En la pantalla de tendencias están las opciones *MED* para cambiar la configuración de eventos de medicación, *PAC* para cambiar la configuración de eventos de pacientes e *INT* para cambiar la configuración de eventos de intervención. Para cambiar un evento, desplácese hasta la etiqueta de un evento particular y haga clic en ella para borrar el campo e introducir otro nombre de evento.

Configuración del monitor

Desde la pantalla de configuración oficial predefinida, seleccione MONITOR.

12:0	00AN	12	0 FEB	12					
cor	NFIG	URA	CIÓN	OFICIAL: MON	ITOR				
			FORM	MATO DE FECH	IA	dd mmm a	a		
			FORM	MATO DE HOR	4	12 hora			
			IDION	ЛА		ESP			
			VOL.	ALARMA SON	ORA	MÁXIMO			
			MOD	O MARCAJE E	VENTOS	DETALL			
		2	BAUDIOS RS232 [kbps]			9.6			
			LLAMADA DE ENFERMERA			DESACT			
			PANTALLA DE INICIO			PATRÓN			
			PANT. IPI			ACTIV			
			ALAR	(MA IPI		DESACT			
		3	FUNCIÓN RS232		ESTÁNDA	र			
		8	PANTALLA A/h, ODI		ACTIV				
			MODO	D DE ESPERA D	E PARÁMETROS	DESACT			
		D/	A	CONFIG. PREDET.				ATRÁS	

Figura 52 – Configuración oficial: Monitor

La configuración oficial que se puede ajustar para el monitor es la siguiente:

Parámetro	Opciones	Valor predeterminado
Formato de fecha	dd mmm aa <i>o</i> mmm dd, aa	mmm dd, aa
Formato de hora	12 o 24 horas	12 hora
Idioma	Inglés, español, francés, alemán, italiano, holandés, portugués, ruso, sueco, noruego y japonés	Inglés
Silenc. alarm. son.	Máximo, Últ. ajuste, Audio apag.	MÁXIMO
Modo de marcaje de eventos	Rápido/Detall	DETALL
Baudios RS232 [kbps]	AUTO; 9600; 19,2 K; 57,6 K; 115,2 K	AUTO
Llamada a enfermera	Activado, Desactivado	DESACT

Parámetro	Opciones	Valor predeterminado
Pantalla de inicio	Estándar, Num.	ESTÁNDAR
Pant. IPI (en las pantallas INICIO, Tendencia y Revisión de alarma)	Activado, Desactivado	ACTIV*
Alarma de IPI	Activado, Desactivado	DESACT
FUNCIÓN RS232	VueLink: IPI, A/h, ODI VueLink: IPI VueLink: SOLO CO ₂ Estándar	Estándar; VueLink ya no está disponible en Capnostream™20p
Pantalla A/h y ODI (si están disponibles)	Activado, Desactivado	ACTIV*
Modo de espera de parámetros	Activado, Desactivado	DESACT

* Tenga en cuenta que el parámetro IPI no está disponible para pacientes del tipo Infantil/Neonato y, por lo tanto, queda desactivado automáticamente. Además, A/h y ODI no están disponibles para pacientes del tipo Infantil/Neonato ni Pediátrico.

Parámetros de CO₂

La configuración oficial se puede ajustar para todos los parámetros de CO_2 que sean configurables en el monitor. Para cambiar los parámetros, seleccione CO_2 en la pantalla Configuración oficial.

Parámetro	Opciones	Valor predeterminado
Unidades de CO ₂	mmHg, kPa, Vol %	mmHg
BTPS*	Activado/Desactivado	Activado
PANTALLA FICO2	Activado/Desactivado	Activado
FINESP BOMBA OFF [min]	5, 10, 15 o 30	15
Escala de forma onda CO2 [mmHg]	50, 100, 150, Auto	Auto
Escala visualiz. tendencia EtCO ₂ [mmHg]	50; 100; 150	50
Escala visualiz. tendencia FR [rpm]	50; 100; 150	50
Veloc. barrido adulto/ped. (mm/s)	3; 6,3; 12,5; 25	6,3
VEL. BARRI. INF./NEO. (mm/s)	3; 6,3; 12,5; 25	6,3

* BTPS denota la corrección estándar usada durante la medición de la temperatura corporal, la presión y la saturación. BTPS debería estar configurado como activado durante todos los procedimientos de medición. El dispositivo desactiva automáticamente la corrección BTPS durante los procedimientos de calibración y la activa de nuevo tras estos procedimientos. No es necesario que el usuario realice ningún cambio en la configuración del parámetro BTPS.

Parámetros de SpO₂

La configuración oficial se puede ajustar para todos los parámetros de SpO_2 que sean configurables en el monitor. Para cambiar los parámetros, seleccione SpO_2 en la pantalla Configuración oficial.

Parámetro	Opciones	Valor predeterminado
Tono de pulso	Activado/Desactivado	Desactivado
Segundos de saturación	Activado/Desactivado	Activado
ESCALA SpO2 PANT TEND	0-100; 50-100	50-100
ESCALA FP PANT TEND	150; 300	150
Veloc. barrido adulto/ped. (mm/s)	3; 6,3; 12,5; 25	25
VEL. BARRI. INF./NEO. (mm/s)	3; 6,3; 12,5; 25	25

Anexo 2

Especificaciones

Alimentación eléctrica	
Batería	
Controles	
Visualización	
Capnografía Microstream™	
Oximetría de pulso Nellcor™ Oximax™	N
Alarmas	
Salidas	
Impresora térmica interna (opcional)	
Características generales	
Clasificación del equipo	
Cumplimiento	

Alimentación eléctrica

Elemento	Valor
Tensión de entrada	100-240 V CA, 50/60 Hz
Fusibles	Dos de tipo F de baja capacidad de ruptura de 3,15 A y 250 V
Potencia de entrada	90 VA

*Es posible que el fabricante decida suministrar en su lugar fusibles F de 3,15 A y 250 V con alta capacidad de ruptura.

**Use solamente los fusibles suministrados por el fabricante.

Batería

Elemento	Valor
Tipo de batería	14,4 V, 4,5 Ah de ion litio
Funcionamiento de la batería	2,5 h (sin registrador térmico)
Tiempo de carga de la batería	100 % en 12 h

Controles

Elemento	Valor	
Panel frontal	 interruptor para encender y apagar el monitor teclas de función específicas codificador óptico con interruptor 	

Visualización

Elemento	Valor			
Pantalla	Pantalla TFT a color de 162 mm (6,4 in) Tamaño de píxeles: 0,204 (H) x 0,204 (V) mm (0,008 in) Área de pantalla activa: 130,56 (H) x 97,92 (V) mm (5,14 in x 3,86 in) Resolución 640 x 480 píxeles Ángulo de visión (vertical) 110°			
Velocidad de trazado	3.0: 6.3: 12.5 v 25 mm/s			
Velocidad de muestreo de la forma de onda	75,7 muestras/s para SpO ₂ (fijo) 20 muestras/s para capnografía (fijo)			
Almacenamiento de tendencias	Almacenamiento de 8.640 puntos - 12 h con resolución de 5 s - 24 h con resolución de 10 s - 72 h con resolución de 30 s			
Visualización de tendencias	Visualización en gráfico: - vistas de 2 h, 6 h, 12 h Pantalla tabular: - Resolución de 60 min, 15 min, 3 min, 1,5 min y mínima (la resolución mínima se puede ajustar a 5, 10 o 30 segundos)			

Capnografía Microstream[™]

Elemento	Valor		
Unidades de CO ₂	mmHg o kPa o Vol %		
Rango de CO ₂ , EtCO ₂ , FiCO ₂	0-150 mmHg		
Resolución de la forma de onda de CO ₂	0,1 mmHg		
Resolución de EtCO ₂ , FiCO ₂	1 mmHg		
Precisión de CO ₂	0-38 mmHg: ±2 mmHg		
	39-150 mmHg: ± (5 % de lectura + 8 % por cada 1 mmHg por encima de 38 mmHg)		
	La precisión se aplica a frecuencias respiratorias de hasta 80 rpm. Para frecuencias respiratorias por encima de 80 rpm, la precisión es de 4 mmHg o ±12 % de la lectura, el valor que sea más alto, para los valores de etCO ₂ que superen los 18 mmHg.		
Rango de frecuencia respiratoria	0-150 lpm		
Precisión de la frecuencia	0-70 rpm: ±1 rpm		
respiratoria	71-120 rpm: ±2 rpm		
	121-150 rpm: ±3 rpm		
Alarmas de CO ₂	Sin respiración, etCO ₂ alto, etCO ₂ bajo, FR alta, FR baja, IPI bajo (el IPI también exige información de oximetría de pulso)		
Velocidad de flujo	50 (42,5 ≤ flujo ≤ 65) ml/min, flujo medido por volumen		
Muestreo de la forma de onda	20 muestras/s		
Tiempo de respuesta	2,95 s (típico); cuando se usa con líneas de muestreo largas, ~5,0 s		
Tiempo de inicialización	40 s (típico)		
Intervalo de calibración	La primera calibración inicial de la unidad debe realizarse después de 1200 horas de funcionamiento; a partir de ahí una vez al año o después de 4000 horas de funcionamiento, lo que ocurra primero		

Oximetría de pulso Nellcor™ Oximax™

Elemento	Valor	
Intervalo de medición de SpO2	0-100%	
Precisión de SpO ₂ *		
Modos de pacientes adultos y pediátricos		
Rango de SpO ₂ del 70 % al 100 %	±2 dígitos	
Rango de SpO $_2$ del 0 % al 69 %	Sin especificar	
Modo de pacientes infantil/neonato		
Rango de SpO $_2$ del 70 % al 100 %	±3 dígitos	
Rango de SpO $_2$ del 0 % al 69 %	Sin especificar	
Intervalo de pulso	20-250 lpm	
Precisión de pulso	± 3 ppm	
Alarmas	Límites de alarma ajustables	
	SpO2AL, SpO2BA, FP AL, FP BA	
Intervalo de Sat Sec	10; 25; 50; 100	

* La precisión de lectura en presencia de una perfusión baja (modulación por amplitud de pulso IR detectada entre 0,03% y 1,5%) se validó mediante las señales emitidas por un simulador de pacientes. Los valores de SpO₂ y de pulso se variaron durante el intervalo de monitorización en un intervalo de condiciones de señal débil y se compararon con los valores conocidos de saturación y pulso reales de las señales de entrada.

Alarmas

Elemento	Valor
Alarmas de advertencia de	Parpadeo en rojo del indicador LED
prioridad alta (paciente)	Parpadeo en rojo del dato numérico
	Patrón de pitidos repetidos
	Indicador de alarma en la pantalla
	Llamada a enfermera
Alarmas de advertencia del	Parpadeo en amarillo del indicador LED
paciente	Parpadeo en amarillo del dato numérico
	Ninguna alarma sonora
Alarma de prioridad media	Parpadeo en amarillo del indicador LED
	Triple pitido cada treinta segundos
	Indicador de alarma en la pantalla
	Llamada a enfermera
Mensajes de aviso	Un solo pitido
	Mensaje de aviso en la pantalla
Mensajes de aviso silenciosos	Mensaje de aviso en la pantalla
Control del volumen de la alarma	5 pasos
Rango de nivel de presión acústica de la alarma	De 50 a 85 dB (A)
Silenciamiento temporal de las alarmas	Todas las alarmas sonoras se silencian durante 2 minutos

Salidas

Salida analógica

Conector tipo D hembra de 15 patillas Distribución de las patillas:



Patilla	Asignación	Patilla	Asignación
1	Tierra	9	Tierra
2	Señal del canal 1	10	Tierra
3	Tierra	11	Señal del canal 5
4	Señal del canal 2	12	Tierra
5	Tierra	13	Señal del canal 6
6	Señal del canal 3	14	Tierra
7	Tierra	15	Señal del canal 7
8	Señal del canal 4		

Llamada a enfermera

Relé normalmente abierto/normalmente cerrado Corriente nominal admisible: 2 A Corriente máxima permitida: 2 A Voltaje máximo permitido: 24V CC Capacidad del contacto: 2 A a 24 V CC

Conector de sonido estéreo de 3,5 mm Salida de terminales del conector de sonido estéreo



N1 - N2: relé normalmente cerrado N1 - N3: relé normalmente abierto
RS-232

Conector tipo D hembra de 9 patillas Distribución de las patillas

$$5 1$$

$$\underbrace{\circ \circ \circ \circ \circ}_{9 6}$$

Patilla	Asignación
1	
2	PC_RX
3	PC_TX
4	5 V.
5	A tierra aislado
6	
7	5 V.
8	
9	

USB

Conector USB Host tipo A (hembra) Para uso exclusivo con memorias USB

Distribución de las patillas

1234

Patilla	Asignación
1	VBUS
2	Datos -
3	Datos +
4	Tierra

Impresora térmica interna (opcional)

Elemento	Valor
Тіро	Dos canales
Método de impresión	Registro térmico
Densidad de puntos	203 ррр
Anchura del papel	58 mm (2 ¼ in)
Diámetro del rollo de papel (máximo)	40 mm (1 1/2 in)
Longitud del papel (máxima)	15,2 m (50 ft)
Velocidad	25 mm/s

Características generales

Elemento	Valor
Tamaño de la unidad	167 mm (al) x 220 mm (an) x 192 mm (fon)
	(6,6 in (al) x 8,7 in (an) x 7,6 in (fon))
Peso de la unidad	2,2 kg (4,85 lb)
Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F)
Presión y altitud de funcionamiento	Presión: de 430 mmHg a 795 mmHg
	Altitud: de -381 m a 3000 m (de -1250 ft a 9843 ft)
Humedad de funcionamiento	Del 10% al 95% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento y	Hasta el límite inferior de -20 °C (-4 °F)
transporte	Hasta el límite superior de 60 °C (140 °F)
Presión y altitud de	Presión: de 430 mmHg a 795 mmHg
almacenamiento y transporte	Altitud: de -381 m a 4572 m (de -1250 ft a 15 000 ft)
Humedad de almacenamiento y	Del 10% al 95% (sin condensación)
transporte	
Tamaño del paquete	315 mm (al) x 340 mm (an) x 285 mm (fon)
	(12,4 in (al) x 13,4 in (an) x 11,2 in (fon))
Peso empaquetado	5,9 kg (13 lb)

Clasificación del equipo

Elemento	Valor
Tipos de protección contra descargas eléctricas	Clase 1
Grado de protección contra descargas eléctricas	Tipo BF, piezas aplicadas a prueba de desfibrilador
Modo de funcionamiento	Continuo
Grado de protección contra la entrada de líquidos	CEI 60601-1, subcláusula 11.6.5 aplicable a equipos de clase IPX1 a prueba de goteo

* IPx1 indica que el dispositivo está protegido contra los efectos nocivos provocados por la caída vertical de gotas de agua.

Cumplimiento

Este producto está diseñado para cumplir con las normas siguientes:

CEI/EN60601-1 UL 60601-1 CSA C22.2 No 601.1-M90 CEI/EN 60601-1-2 Clase A, Emisiones radiadas y conducidas CEI 60601-1-8 (Alarmas sonoras y visuales) ISO 80601-2-55 (Capnografía) ISO 80601-2-61 (Oximetría de pulso) CEI 60601-2-49 Requisitos particulares para la seguridad del equipo multifunción de monitorización de pacientes

Inmunidad electromagnética

El monitor es apto para ser utilizado en el entorno electromagnético especificado. El usuario del monitor debe asegurarse de que se utiliza en un entorno electromagnético como el que se describe a continuación.

Prueba de emisiones	Cumplimiento	Entorno electromagnético: directrices
Emisiones de RF, EN 55011	Grupo 1	Capnostream [™] 20P usa energía de RF únicamente para su funcionamiento interno. Por consiguiente, sus emisiones de radiofrecuencia son muy bajas y no es probable que causen interferencia alguna en equipos electrónicos adyacentes.
Emisiones de RF EN 55011	Clase A	El monitor es apto para ser utilizado en hospitales.
Emisiones armónicas IEC 61000-3-2	Clase A	
Fluctuaciones de tensión/flicker o parpadeo EN 61000-3-3	Cláusula 5	

Table OF Owie			- I - I	falls of a sector.		all a stress sea	
1 a b a 35 - (40) a	v	declaración	del	tabricante.	emisiones	electrom	adheticas
		acoluluololl		iusiivuiito.	01110101100	0100010111	agnououo
	~						

Tabla 36 – Guía y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética

Prueba de inmunidad	Nivel de prueba EC 60601-1-2	Nivel de cumplimiento	Entorno electromagnético: directrices
Descargas electrostáticas (ESD) EN 61000-4-2	± 8 kV por contacto ± (2, 4, 8, 15) kV aire	± 8 kV por contacto ± (2, 4, 8,15) kV aire	Los suelos deben ser de madera, cemento o baldosas de cerámica. Si los suelos están revestidos de material sintético, la humedad relativa deberá ser del 30 % como mínimo. La combinación de humedad relativa baja y el uso de materiales sintéticos podría dar lugar a una elevada tensión electrostática. Una descarga electrostática de tensión elevada podría provocar alteraciones en el funcionamiento del dispositivo.
Transitorios eléctricos rápidos/ráfagas EN 61000-4-4	 ±2 kV para líneas de suministro de energía ±1 kV para líneas de entrada y de salida 	 ±2 kV para líneas de suministro de energía ±1 kV para líneas de entrada y de salida 	La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico.
Subida rápida de tensión EN 61000-4-5	±2 kV para alimentación de CA ±500 V, ±1 kV en modo diferencial ±500 V, ±1 kV, ±2 kV en modo común	±2 kV para alimentación de CA ±500 V, ±1 kV en modo diferencial ±500 V, ±1 kV, ±2 kV en modo común	La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico.
Caídas de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión en las líneas de entrada de alimentación EN 61000-4-11	0 % en U _T ; 0,5 ciclo (0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° y 315°) 0 % en U _T ; 1 ciclo (0°) 70 % en U _T ; 25/30 ciclos (0°)	0 % en U _T ; 0,5 ciclo 0 % en U _T ; 1 ciclo 70 % en U _T ; 25/30 ciclos	La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico. Si el usuario de Capnostream™20P necesita que siga funcionando durante posibles cortes de corriente, se recomienda accionar el monitor mediante una fuente de alimentación ininterrumpida o una batería.

Prueba de inmunidad	Nivel de prueba EC 60601-1-2	Nivel de cumplimiento	Entorno electromagnético: directrices
Campo magnético de la frecuencia de red (50/60 Hz) EN 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Los campos magnéticos a frecuencia industrial deben tener los niveles propios de un local típico de un entorno comercial u hospitalario típico.
RF conducida según CEI 61000-4-6	3 Vrms, de 150 kHz a 80 MHz 6 Vrms, en banda ISM 150 kHz y 80 MHz	3 Vrms, 6 Vrms (sin modulación)	Los equipos de comunicaciones por RF portátiles y móviles deben utilizarse como mínimo a la distancia de separación recomendada respecto de cualquiera de las partes de Capnostream™20P, incluidos los cables: esta distancia de separación se
RF radiada según CEI 61000-4-3	Campos EM de RF radiada: 3 V/m, de 80 MHz a 2,7 GHz	3 V/m (sin modulación, rms)	calcula a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor. Distancias de separación recomendadas:
	Campos de proximidad de RF		d = $1,2\sqrt{P}$ d = $1,2\sqrt{P}$ de 80 MHz a 800 MHz: d = $2,3\sqrt{P}$ de 800 MHz a 2,5 GHz:
	radiada: 27 V/m, 385 MHz	27 V/m	Donde P es la potencia nominal máxima de salida del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor, y d es la distancia de
	28 V/m, 450 MHz (28 V/m) 9 V/m, 710, 745	28 V/m	separación recomendada en metros (m). ² Las intensidades de campo de los
	780 MHz 28 V/m, 810, 870, 930 MHz	28 V/m	transmisores de RF fijos, tal y como se determinan en la prospección electromagnética del lugar, deben ser inferiores al nivel de cumplimiento en cada intervalo de frecuencia. ^{ab}
	28 V/m, 1720, 1845, 1970 MHz	28 V/m	Puede haber interferencias cerca de equipos que lleven el siguiente símbolo:
	28 V/m, 2450 MHz	28 V/m	(((••)))
	9V/m, 5240, 5500, 5875 MHz	9 V/m	Las distancias de separación mínimas para NIVELES DE INMUNIDAD más altos se calcularán mediante la ecuación siguiente:
			$E = \frac{6}{d}\sqrt{P}$
			Donde P es la potencia máxima en vatios (W), d es la distancia de separación mínima en metros (m), y E es el NIVEL DE PRUEBA DE INMUNIDAD en voltios por metro (V/m).
			La distancia de separación mínima es de 0,3 m en los campos de proximidad.

Prueba de inmunidad	Nivel de prueba EC 60601-1-2	Nivel de cumplimiento	Entorno electromagnético: directrices		
¹ U_T es la tensión de alimentad	ción de CA anterior a la aplica	ción del nivel de prueba.			
² A 80 MHz y 800MHz se apli	ca el intervalo de frecuencias n	nás alto.			
NOTA: Estas instrucciones no	NOTA: Estas instrucciones no se aplican en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la				
reflexión en estructuras, objetos y personas.					
a Las intensidades de campo de l radioaficionados, emisoras de radio transmisores de RF fijos, se debe co Capnostream™20P supera los nivel funciona con normalidad. Si se advie Capnostream™20P.	os transmisores fijos, como los de est AM y FM, y canales de TV, no se pue onsiderar la realización de una prospe es de cumplimiento de RF aplicables erte un funcionamiento anómalo, será	taciones base para radioteléfonos (má eden predecir teóricamente con exacti cción electromagnética del lugar. Si la indicados anteriormente, será preciso preciso adoptar medidas adicionales	óviles/inalámbricos) y radios móviles terrestres, equipos de tud. Para evaluar el entorno electromagnético provocado por a intensidad de campo medida en el lugar en el que se utiliza o observar Capnostream™20P para asegurarse de que , como por ejemplo reorientar o reubicar el		
b En el intervalo de frecuencias d	e 150 kHz a 80 MHz, las intensidades	s de campo deben ser inferiores a [V1] V/m.		

El monitor está diseñado para ser utilizado en un entorno electromagnético en el que las alteraciones por RF irradiada estén controladas. El cliente o el usuario del monitor pueden ayudar a prevenir las interferencias electromagnéticas guardando una distancia mínima entre los equipos de comunicaciones por RF portátiles y móviles (transmisores) y el monitor, tal como se recomienda a continuación, según la potencia máxima de salida de los equipos de comunicaciones en cuestión.

Tabla 37 – Distancias de separación recomendadas entre los equipos de comunicaciones por RF portátiles y móviles y el monitor

Potencia nominal máxima de	Distancia de separación según la frecuencia del transmisor [m] ¹			
salida del transmisor [W]	De 150 kHz a 80 MHz	De 80 MHz a 800 MHz	De 800 MHz a 2,5 GHz	
	d= 1,2√P	d= 1,2√P	d= 2,3 \sqrt{P}	
0,01	0,12	0,12	0,23	
0,1	0,38	0,38	0,73	
1	1,2	1,2	2,3	
10	3,8	3,8	7,27	
100	12	12	23	

En el caso de los transmisores con una potencia nominal de salida máxima no especificada en la lista anterior, la distancia d de separación recomendada en metros (m) se puede calcular a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia nominal de salida máxima del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor.

¹ A 80 MHz y 800 MHz se aplica la distancia de separación para el intervalo de frecuencias más alto.

NOTA: Es posible que estas directrices no se apliquen en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión en estructuras, objetos y personas.

Consumibles Microstream[™] EtCO₂

Consumibles Microstream™ EtCO2

Consumibles Microstream[™] EtCO₂

En la tabla siguiente, los productos H (para uso en entornos húmedos) están marcados con un asterisco (*).

Consumibles Microstream™					
Consumibles intubados					
Conjunto FilterLine™ para pacientes adultos/pediátricos	XS04620				
Conjunto FilterLine™ para pacientes adultos/pediátricos, 100 unidades	010579				
Conjunto FilterLine™ H para pacientes adultos/pediátricos*	XS04624				
Conjunto FilterLine™ H para pacientes adultos/pediátricos, 100 unidades*	010580				
Conjunto FilterLine™ H para pacientes infantiles/neonatos*	006324				
Conjunto FilterLine™ largo para pacientes adultos/pediátricos	007768				
Conjunto FilterLine™ H largo para pacientes adultos/pediátricos*	007737				
Conjunto FilterLine™ H largo para pacientes infantiles/neonatos*	007738				
Conjunto VitaLine™ H para pacientes adultos/pediátricos*	010787				
Conjunto VitaLine™ H para pacientes infantiles/neonatos*	010807				
Consumibles no intubados					
Smart CapnoLine™ Plus (conector de O₂)	009818				
Smart CapnoLine™ Plus (conector de O₂), 100 unidades	010209				
Smart CapnoLine™ Plus largo (conector de O₂)	010340				
Smart CapnoLine™ Plus largo (conector de O₂), 100 unidades	010339				
Smart CapnoLine™ Plus O₂ (tubo de O₂)	009822				
Smart CapnoLine™ Plus O₂ (tubo de O₂), 100 unidades	010210				
Smart CapnoLine™ Plus O₂ largo (tubo de O₂)	009826				
Smart CapnoLine™ Plus O₂ largo (tubo de O₂), 100 unidades	010341				
Smart CapnoLine™ pediátrico	007266				
Smart CapnoLine™ O₂ pediátrico (tubo de O₂)	007269				
Smart CapnoLine™ O₂ pediátrico largo (tubo de O₂)	007743				
Smart CapnoLine™ H Plus O₂ (tubo de O₂)*	010433				
Smart CapnoLine™ H Plus O₂ (tubo de O₂), 100 unidades*	010625				
Smart CapnoLine™ H Plus O₂ largo (tubo de O₂)*	012463				
Smart CapnoLine™ H O₂ pediátrico (tubo de O₂)*	010582				
Smart CapnoLine™ H O₂ pediátrico largo (tubo de O₂)*	012464				
Smart CapnoLine Guardian™ (conector de O₂)	012528				
Smart CapnoLine Guardian™ (conector de O₂), 100 unidades	012537				
Smart CapnoLine Guardian™ O₂ (tubo de O₂)	012529				
Smart CapnoLine Guardian™ O₂ (tubo de O₂), 100 unidades	012538				

Consumibles Microstream™	
Smart CapnoLine Guardian™ O₂ largo (tubo de O₂)	012530
Smart CapnoLine Guardian™ O₂ largo (tubo de O₂), 100 unidades	012539
Cinta con cierre de gancho y bucle	012542
FilterLine™ nasal de O₂/CO₂ para adultos (tubo de O₂)	006912
FilterLine™ nasal de O₂/CO₂ para adultos (tubo de O₂), 100 unidades	010304
FilterLine™ nasal de O₂/CO₂ largo para adultos (tubo de O₂)	007739
FilterLine™ nasal de O₂/CO₂ largo para adultos (tubo de O₂), 100 unidades	010344

Contraseña de servicio de Capnostream™

Contraseña de servicio de Capnostream™

Contraseña de servicio de Capnostream™

La contraseña de servicio es: SERV