



MOM INSPIRED. HOSPITAL TRUSTED.

Purely Yours Ultra™

Breast Pump



Purely Yours Ultra Breast Pump Instructions

English.....page 1

Mode d'emploi du Tire-lait Purely Yours Ultra

Français.....page 16

Instrucciones para la bomba de extracción Purely Yours Ultra

Español..... página 29

Contenu

Précautions importantes	17	Dépannage du tire-lait Purely Yours Ultra	22
Usage prévu	17	Dépannage du système de collecte de lait HygieniKit	22
Avant chaque utilisation	17		
Diagramme du tire-lait Purely Yours Ultra	2	Tire-lait manuel à une main d'Ameda	23
Diagramme du système de collecte de lait HygieniKit d'Ameda	3	Configuration	23
Diagramme du tire-lait manuel à une main d'Ameda	3	<i>Avant la première utilisation</i>	23
		<i>Après chaque utilisation</i>	23
		Assemblage	24
		<i>Conversion d'un pompage électrique à pompage manuel</i>	24
Pièces de rechange et accessoires	4	Pour commencer à pomper	25
Tire-lait Purely Yours Ultra	18	<i>Conversion d'un pompage manuel à un pompage électrique</i>	25
Configuration	18	Conseils pour le pompage	26
<i>Tire-lait</i>	18	<i>Durée du pompage</i>	26
<i>Options d'alimentation</i>	18	<i>Vérification de l'ajustement du manchon de sein</i>	26
<i>Avant la première utilisation</i>	19	Dépannage du tire-lait manuel à une main	27
<i>Après chaque utilisation</i>	19		
<i>Nettoyage du tire-lait</i>	19	Données techniques	27
<i>Nettoyage de l'HygieniKit</i>	19	Alimentation requise	27
Assemblage	20	Conformité à la réglementation	27
<i>Pompage simple et double</i>	20		
Pour commencer à pomper	20	Élimination du produit	27
<i>Enclenchement du pompage</i>	20		
<i>Régler l'aspiration</i>	20	Garantie	28
<i>Régler les vitesses</i>	21		
<i>Pour éteindre le tire-lait</i>	21		
Conseils pour le pompage	21		
<i>Durée du pompage</i>	21		
<i>Vérification de l'ajustement du manchon de sein</i>	21		

MESURES IMPORTANTES DE PROTECTION

En utilisant des produits électriques, tout particulièrement en présence d'enfants, il faut toujours suivre les mesures de sécurité de base.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

Danger : Pour réduire les risques d'électrocution :

- Toujours débrancher les appareils électriques immédiatement après l'usage.
- N'utilisez pas dans la baignoire, sous la douche ou en nageant.
- Ne placez et ne rangez pas où le produit pourrait tomber ou être tiré dans la baignoire, l'évier ou la piscine.
- Ne placez et ne laissez pas tomber le produit dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- N'essayez pas de retirer le produit électrique tombé dans l'eau. Débranchez immédiatement de la prise de courant.

Avertissement : Pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures :

- Ne laissez jamais un produit sans surveillance lorsqu'il est branché à une prise électrique.
- Lorsque le produit est utilisé près des enfants ou des personnes handicapées, il faut une supervision étroite.
- Utilisez le produit seulement aux fins prévues selon la description dans ce manuel.
- N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant.
- N'utilisez jamais si le produit a un cordon ou une fiche endommagé(e), s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été échappé, endommagé ou s'il est humide.
- Utilisez le tire-lait Purely Yours Ultra avec des piles ou un adaptateur de voiture (peut être inclus; également vendu séparément) si la fiabilité de la prise électrique est mise en doute.
- Gardez le cordon et tous les accessoires loin de surfaces chaudes.
- N'utilisez jamais en dormant ou somnolant.

- N'utilisez pas à l'extérieur avec un cordon.
- Ne faites pas fonctionner où l'on utilise des produits en aérosol ou administre de l'oxygène.
- Les piles doivent être retirées du tire-lait lors de l'utilisation d'un adaptateur CA ou de voiture.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Pour votre santé et votre sécurité

Le tire-lait Purely Yours Ultra d'Ameda est un élément de soins personnels et ne doit jamais être partagé entre mères ou revendus ou donnés par une mère à une autre.

Usage prévu

Le tire-lait Purely Yours Ultra d'Ameda vise à faciliter l'aspiration et le recueil du lait d'une femme qui allaite dans le but de nourrir un enfant avec le lait recueilli.

Avant chaque utilisation



Toujours se laver les mains avec de l'eau et du savon avant de manipuler le tire-lait Purely Yours Ultra, tire-lait manuel à une main, le système de collecte de lait HygieniKit, ou d'autres produits Ameda. N'utilisez pas de solvants ou d'abrasifs.

Tire-lait Purely Yours Ultra Configuration



TOUJOURS BIEN SE LAVER LES MAINS AVEC DU SAVON ET DE L'EAU AVANT UN POMPAGE.


REMARQUE : Avant d'utiliser le tire-lait Purely Yours Ultra et le système HygieniKit, vérifiez les pièces pour déceler toute fissure, ébréchure, déchirure, changement de couleur, ou usure. Ils sont susceptibles d'affecter le fonctionnement du kit. Si des pièces doivent être remplacées à cause de toute défaillance, veuillez appeler votre distributeur local ou l'endroit où vous avez acheté le tire-lait. Pour une liste des distributeurs dans votre pays, veuillez visiter le site www.ameda.com.

Tire-lait

Retirez moteur de la pompe de la boîte ou de l'étui. Choisissez une option d'alimentation.


Options d'alimentation

Le tire-lait Purely Yours Ultra possède trois options d'alimentation :

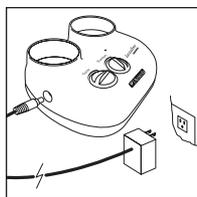


Adaptateur CA (inclus)

Utilisez uniquement l'adaptateur CA recommandé pour le tire-lait Purely Yours Ultra.

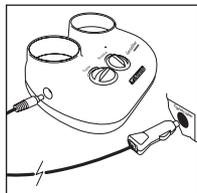

Adaptateur de voiture (peut être inclus; également vendu séparément)

Utilisez uniquement avec l'adaptateur de voiture recommandé pour le tire-lait Purely Yours Ultra.

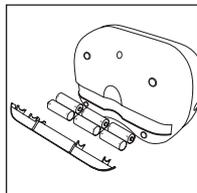

6 piles AA alcalines ou rechargeables (non incluses)

- Retirez les piles si le tire-lait ne sera pas utilisé pendant une longue période. Jetez les piles convenablement.
- Lorsque les piles sont à l'intérieur du tire-lait et que l'adaptateur CA ou l'adaptateur de voiture est branché, le tire-lait ne puisera pas dans l'alimentation électrique des piles.

Avertissement : Les piles doivent être retirées du tire-lait lors de l'utilisation d'un adaptateur CA ou de voiture.



TOUJOURS BIEN SE LAVER LES MAINS AVEC DU SAVON ET DE L'EAU AVANT UN POMPAGE.


Avant la première utilisation



Si votre système HygieniKit est marqué « STERILE », ouvrez et utilisez.
Si votre système HygieniKit N'est PAS marqué « STERILE », avant la première utilisation :

- Faites bouillir toutes les pièces—sauf le tube, l'embout d'adaptateur, et l'adaptateur de tube—pendant 20 minutes.
- Retirez immédiatement toutes les pièces de l'eau après avoir fait bouillir;
- Laissez les pièces sécher à l'air libre avant l'assemblage et l'utilisation.

Ne pas faire bouillir ou laver le tube, l'embout d'adaptateur et l'adaptateur de tube.

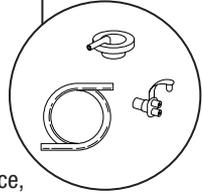

REMARQUE : Avant d'utiliser le système HygieniKit, vérifiez les pièces pour déceler toute fissure, ébréchure, déchirure, changement de couleur, ou usure. Ils sont susceptibles d'affecter le fonctionnement du kit. Si des pièces doivent être remplacées à cause de toute défaillance, veuillez appeler :

Aux É.-U. : 1.866.99.AMEDA (26332)

Au Canada : 1.800.604.6225


Dans d'autres pays : Appelez votre distributeur local ou l'endroit où vous avez acheté votre tire-lait. Pour une liste des distributeurs dans votre pays, veuillez visiter le site www.ameda.com.

Après chaque utilisation

Nettoyage du tire-lait


Essuyez le tire-lait Purely Yours Ultra avec un chiffon propre humide.

Nettoyage de l'HygieniKit

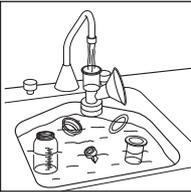

- Démontez le système HygieniKit à nettoyer.
- Rincez tout résidu de lait des pièces du tire-lait à l'eau tiède.
- Lavez délicatement à la main—sauf le tube, l'embout d'adaptateur, et l'adaptateur de tube—dans de l'eau chaude savonneuse.
- Rincer abondamment à l'eau chaude claire.


Ne pas faire bouillir ou laver le tube, l'embout d'adaptateur et l'adaptateur de tube.

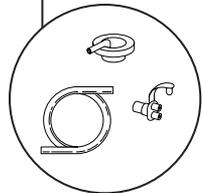


Ne rien insérer dans la valve blanche pendant le nettoyage.

- Laissez les pièces sécher à l'air libre sur une surface propre.

Les grandes pièces en plastique (manchons de seins et bouteilles) peuvent être lavées sur la grille supérieure d'un lave-vaisselle ménager standard.

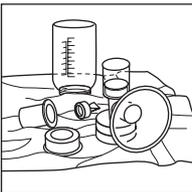


Assemblage

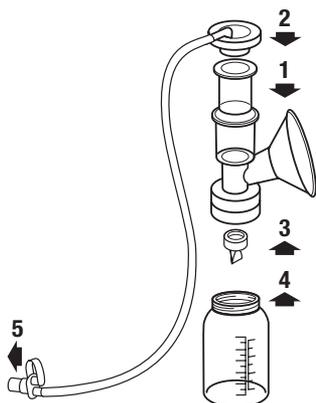

1. Insérez le diaphragme dans la chambre supérieure du manchon de sein.
2. Encliquez l'embout d'adaptateur avec le tube sur la chambre supérieure.
3. Appuyez délicatement la valve blanche fermement sur l'anneau sur la face inférieure du manchon de sein.
4. Vissez la bouteille sur le manchon de sein.
5. Poussez l'adaptateur de tube à l'extrémité du tube dans le port d'adaptateur de tube sur le tire-lait.


Pompage simple et double

Le kit peut être utilisé pour un pompage simple ou double.

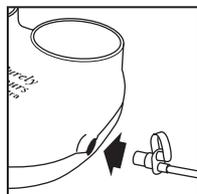

En pompage simple :

Retirez un tube et fermez l'adaptateur de tube.

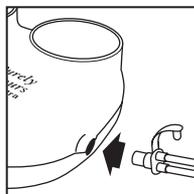

En pompage double :

Les deux tubes doivent être reliés à l'adaptateur de tube.


Insérez l'adaptateur de tube dans le port d'adaptateur de tube du tire-lait.

Pour commencer à pomper

- Centrez le(s) mamelon(s) dans le(s) manchon(s) de sein.
- Remplissez le(s) manchon(s) de sein avec le(s) sein(s) afin de créer une étanchéité à l'air.


Enclenchement du pompage

- Choisissez une option d'alimentation, et branchez le tire-lait à une source d'alimentation.
- Tournez le bouton de réglage de l'aspiration vers la droite jusqu'à ce que la lumière s'allume. Le tire-lait est maintenant en marche.

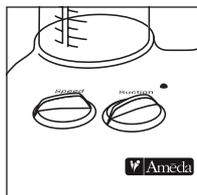

Tournez les boutons de réglage vers la droite (dans le sens des aiguilles d'une montre) pour augmenter les paramètres du tire-lait (vitesse plus rapide, aspiration plus forte). Tournez les boutons de réglage vers la gauche (dans le sens contraire des aiguilles d'une montre) pour diminuer les paramètres du tire-lait (vitesse plus lente, aspiration plus faible).

Le pompage double à une seule main vous laisse une main libre pour d'autres choses.

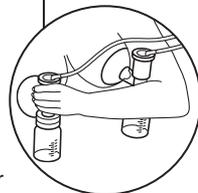

Régler l'aspiration

- Commencez le pompage au niveau le plus élevé d'aspiration confortable pour vous.
- Augmentez l'aspiration en tournant le bouton de réglage de l'aspiration vers la droite (dans le sens des aiguilles d'une montre) jusqu'à atteindre un niveau de confort maximal.

- Si un inconfort se fait sentir au niveau du/des mamelon(s) ou du/des sein(s), diminuez l'aspiration. Si une gêne se fait sentir à tous les paramètres d'aspiration, éteignez le tire-lait, insérez un doigt entre le(s) sein(s) et le(s) manchon(s) de sein pour rompre l'aspiration et retirez le(s) manchon(s) de sein de la poitrine. Cessez de pomper et contactez votre fournisseur de soins de santé.

Régler les vitesses

- Démarrez avec le bouton de réglage de la vitesse tourné dans le sens des aiguilles d'une montre au niveau le plus rapide.
- Une fois que le lait s'écoule (éjection), tournez le bouton de réglage de la vitesse dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à un niveau plus lent pour drainer les seins plus vite.
- Lorsque le débit de lait s'affaiblit, tournez le bouton de réglage de la vitesse dans le sens des aiguilles d'une montre afin d'aider à déclencher une nouvelle éjection.
- À la prochaine éjection, tournez le bouton de réglage de la vitesse dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à un niveau plus lent.
- Répétez les étapes à mesure que le débit de lait varie pour pomper plus de lait.

Pour éteindre le tire-lait

- Lorsque vous avez terminé un pompage, tournez le bouton de réglage de l'aspiration dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre, jusqu'au bout, pour éteindre le tire-lait.
- Après avoir éteint le tire-lait, si nécessaire, insérez un doigt entre le(s) sein(s) et le(s) manchon(s) de sein pour rompre l'aspiration
- Retirez le(s) manchon(s) de sein du/des sein(s).

Conseils pour le pompage


Durée du pompage

Parlez-en à votre médecin pour savoir combien de temps il vous faut pomper. Dans la plupart des cas, 10 à 15 minutes par sein sont proposés.

Vérification de l'ajustement du manchon de sein


La taille de manchon de sein standard (25,0mm) s'adapte très bien à certaines mères. Si le pompage cause un inconfort, même sur un réglage d'aspiration faible, vous avez peut-être besoin d'un manchon de sein ou d'une pièce de taille différente. Un bon ajustement du manchon de sein pourrait rendre le pompage plus confortable et pourrait exprimer plus de lait.

Pour vérifier l'ajustement du manchon de sein, observez vos mamelons pendant le pompage. Utilisez les images ci-dessous pour vous guider.

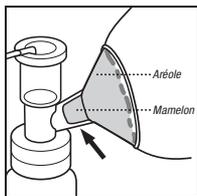


Bon ajustement

Pendant le pompage, votre mamelon se meut librement dans le tunnel du manchon de sein. Vous voyez un espace autour du mamelon. Peu d'aréole est aspirée dans le tunnel avec le mamelon.

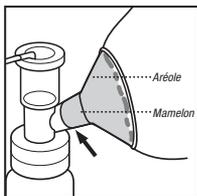

Trop petit

Pendant le pompage, tout ou partie de votre mamelon se frotte contre les parois du tunnel du manchon de sein.

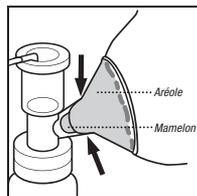

Trop grand

Pendant le pompage, plus d'aréole est aspirée dans le manchon de sein avec votre mamelon. Votre aréole pourrait se frotter contre la paroi du tunnel du manchon de sein.

Visitez le site www.ameda.com pour plus d'informations.

Dépannage du tire-lait Purely Yours Ultra

Pour vérifier l'aspiration du tire-lait depuis moteur :

- Retirez l'adaptateur de tube du port d'adaptateur de tube du tire-lait.
- Placez un doigt sur le tube.
- Si une aspiration se fait sentir, le moteur du tire-lait fonctionne correctement.
- Si une aspiration n'est pas ressentie, débranchez l'adaptateur CA, attendez quelques secondes, rebranchez dans la prise électrique.

Le tire-lait Purely Yours Ultra possède une fonction de réinitialisation. Si le moteur du tire-lait Purely Yours Ultra pompe cesse de fonctionner :

- Débranchez le cordon de l'adaptateur CA de la prise électrique.
- Attendez quelques secondes, puis rebranchez l'adaptateur CA dans une prise.

Dépannage du système de collecte de lait HygieniKit

Si le lait s'écoule trop lentement à l'intérieur de la bouteille :

- Réglez le bouton de réglage de la vitesse à un niveau plus rapide.
- Remplacez la/les membrane(s) de silicone et la/les valve(s) blanche(s).

Si le pompage est inconfortable :

- Réglez le tire-lait à un niveau d'aspiration inférieur.
- Vérifiez l'ajustement du manchon de sein. Un manchon de sein ou une pièce plus grande/plus petite peut être nécessaire.

Si l'aspiration est faible :

- Vérifiez que la/les valve(s) blanche(s) est/sont pressée(s) contre le/les manchon(s) de sein.
- Vérifiez la/les valve(s) blanche(s) pour déceler toute déchirure ou distension. Remplacer si nécessaire.
- Si pompage simple, retirez un tube et fermez un côté de l'adaptateur de tube.
- Vérifiez l'adaptateur de tube pour déceler toute fissure. Le cas échéant, remplacer.
- Réglez le tire-lait à un niveau d'aspiration supérieur.

Les valves blanches sont essentielles pour une aspiration adéquate. Pour bien fonctionner, elles doivent être intactes et être fermées lorsque la pompe n'est pas en usage. Pour prolonger la vie d'une valve blanche, suivez les instructions de nettoyage.

Tire-lait manuel à une main d'Ameda

Remarque : Assemblage de poignée à une main fournie avec certaines versions.
Également vendu séparément.

Configuration



TOUJOURS BIEN SE LAVER LES MAINS AVEC DU SAVON ET DE L'EAU AVANT UN POMPAGE.

Avant la première utilisation




Si votre tire-lait manuel à une main est marqué « STERILE », ouvrez et utilisez.


Si votre tire-lait manuel à une main **N'est PAS** marqué « STERILE », avant la première utilisation :

- Faites bouillir toutes les pièces pendant 20 minutes.
- Retirez immédiatement toutes les pièces de l'eau après avoir fait bouillir;
- Laissez les pièces sécher à l'air libre avant l'assemblage et l'utilisation.


Après chaque utilisation

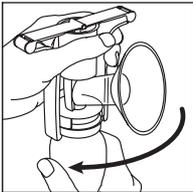


- 1.** Démontez le tire-lait manuel à une main.
Dévissez la bouteille du manchon de sein.

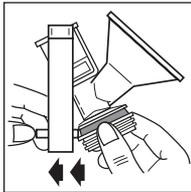


- 2.** Faites glisser le bas de la poignée hors du manchon de sein.

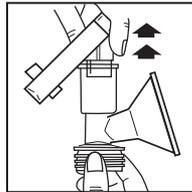


- 3.** Retirez le piston de la chambre supérieure.

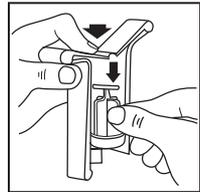

- 4.** Poussez vers le bas sur la poignée pour libérer le piston.

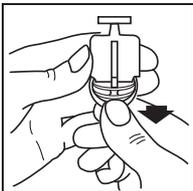


- 5.** Décoller le joint de piston du piston.

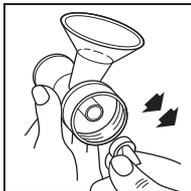


- 6.** Retirez la valve blanche du manchon de sein.

Remarque :

Saisissez la valve blanche délicatement par les côtés épais, non par le bord mince pour éviter tout dommage.

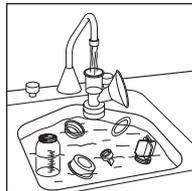

- 7.** Rincez tout résidu de lait des pièces du tire-lait à l'eau tiède.
Lavez toutes les pièces dans de l'eau chaude savonneuse.
Rincez bien à l'eau propre et tiède.

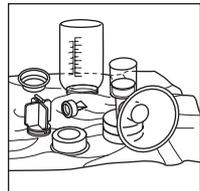


- 8.** Laissez les pièces sécher à l'air libre sur une surface propre.


Les grandes pièces en plastique (manchons de seins et bouteilles) peuvent être lavées sur la grille supérieure d'un lave-vaisselle ménager standard. Lavez le joint de piston, le piston et la valve blanche délicatement à la main. **Ne rien insérer dans la valve blanche pendant le nettoyage.**

Assemblage


Conversion d'un pompage électrique à pompage manuel

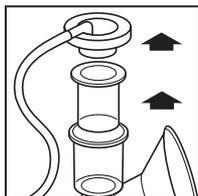


1. Décliquez et retirez l'embout d'adaptateur.
2. Retirez le diaphragme de la chambre supérieure du manchon de sein.

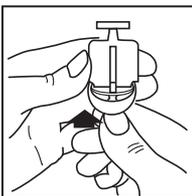


3. Fixez le joint de piston à la base du piston.

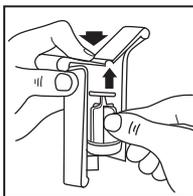

4. Poussez le centre de la poignée vers le bas et encliquez le haut du piston dans la rainure sur la poignée.

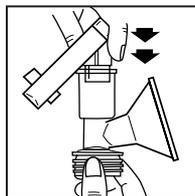


5. Enfoncez le piston dans la chambre supérieure du manchon de sein.

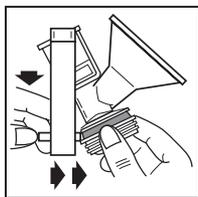


6. Tirez la poignée vers le bas et encliquez le collier de la poignée autour du sillon du manchon de sein.

(Voir la zone ombrée sur le diagramme ci-dessus.)

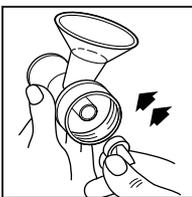


7. Appuyez délicatement la valve blanche fermement sur l'anneau sur la face inférieure du manchon de sein.

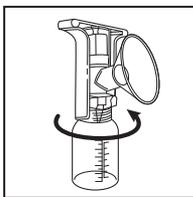


8. Vissez le manchon de sein à la bouteille.

La poignée est correctement fixée si le haut du manche est une ligne droite.


Pour commencer à pomper

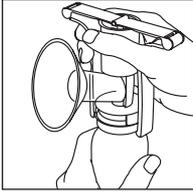


1. Saisir la poignée avec le pouce à l'avant et les doigts derrière la chambre supérieure du manchon de sein.

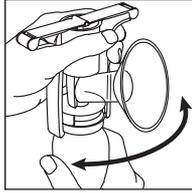


2. Pivotez la poignée pour un confort du poignet.

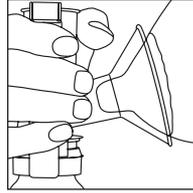

3. Centrez le mamelon dans le manchon de sein.

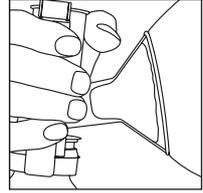

4. Maintenez le manchon de sein sur la poitrine pour créer une étanchéité à l'air.

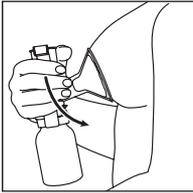


5. Inclinez légèrement le manchon de sein vers le bas pour que le lait s'écoule à l'intérieur de la bouteille.


Surveillez votre débit de lait que vous pompez. Utilisez-le pour vous guider.

- Faites de rapides et légères compressions quelques minutes pour déclencher l'éjection du lait.
- Quand le lait s'écoule, utilisez une compression, maintenez et relâchez le mouvement pour pomper le lait ou pour des compressions lentes, fortes mais confortables.
- Lorsque le débit de lait s'affaiblit, utilisez de plus rapides compressions afin d'aider à déclencher une nouvelle éjection.
- Répétez les étapes ci-dessus à mesure que le débit de lait varie.
- Si une gêne se fait sentir pendant le pompage, insérez un doigt entre le sein et le manchon de sein pour rompre l'aspiration et retirer le manchon de sein de la poitrine. Cessez de pomper et contactez votre fournisseur de soins de santé.

Conversion d'un pompage manuel à un pompage électrique

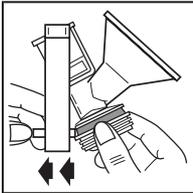

1. Détachez le collier de la poignée du manchon de sein et sortez le piston de la chambre supérieure.

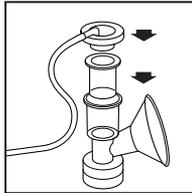


2. Placez le diaphragme dans la chambre supérieure.


3. Encliquetez l'embout d'adaptateur avec le tube sur la chambre supérieure.

4. Insérez l'adaptateur de tube dans le port d'adaptateur de tube sur le tire-lait électrique Purely Yours Ultra.

Le kit peut être utilisé pour un pompage simple ou double.

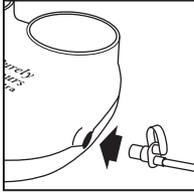

En pompage simple :
Retirez un tube et fermez l'adaptateur de tube.

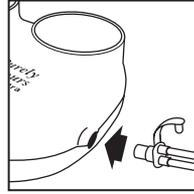

En pompage double :
Les deux tubes doivent être reliés à l'adaptateur de tube.

Conseils pour le pompage


Durée du pompage

Parlez-en à votre médecin pour savoir combien de temps il vous faut pomper. Dans la plupart des cas, 10 à 15 minutes par sein sont proposés.

Vérification de l'ajustement du manchon de sein


La taille de manchon de sein standard (25,0mm) s'adapte très bien à certaines mères. Si le pompage cause un inconfort, même sur un réglage d'aspiration faible, vous avez peut-être besoin d'un manchon de sein ou d'une pièce de taille différente. Un bon ajustement du manchon de sein pourrait rendre le pompage plus confortable et pourrait exprimer plus de lait.

Pour vérifier l'ajustement du manchon de sein, observez vos mamelons pendant le pompage. Utilisez les images ci-dessous pour vous guider.

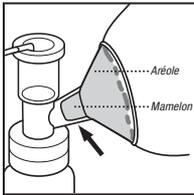


Bon ajustement

Pendant le pompage, votre mamelon se meut librement dans le tunnel du manchon de sein. Vous voyez un espace autour du mamelon. Peu d'aréole est aspiré dans le tunnel avec le mamelon.

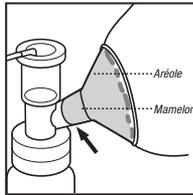

Trop petit

Pendant le pompage, tout ou partie de votre mamelon se frotte contre les parois du tunnel du manchon de sein.

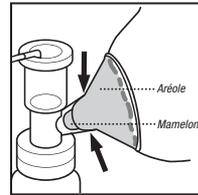

Trop grand

Pendant le pompage, plus d'aréole est aspirée dans le manchon de sein avec votre mamelon. Votre aréole pourrait se frotter contre la paroi du tunnel du manchon de sein.

Visitez le site www.ameda.com pour plus d'informations.

Dépannage du tire-lait manuel à une main

Si le lait ne s'écoule pas assez rapidement, ajustez la compression, maintenez, relâchez la fréquence.


Si le pompage est inconfortable :

- Utilisez des compressions de poignée plus légères.
- Vérifiez l'ajustement du manchon de sein. Un manchon de sein ou une pièce plus grande/plus petite est peut-être nécessaire.

Si l'aspiration est faible :

- Vérifiez que la valve blanche est entièrement pressée contre le manchon de sein.
- Vérifiez la valve blanche pour déceler toute déchirure ou distension. Remplacer si nécessaire.
- Retirez le joint de piston, distendez sur une surface plane, et remplacez le piston.

Décolliez le joint de piston. Tendez le joint de piston.

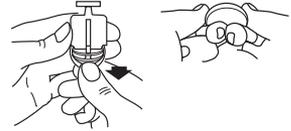

Données techniques

Alimentation requise

Adaptateur CA (inclus)

Adaptateur CA - Configuration de prise Nord-Américaine
9V/1.3A, 100-240V, 50/60Hz, prise directe dans l'adaptateur CA.

Adaptateur CA - Configuration de prise Australienne, Britannique, Européenne
9VDC/1.0A, 100-240V, 50/60Hz, prise directe dans l'adaptateur CA.


Adaptateur de voiture (peut être inclus; également vendu séparément)


12VDC, F1.5A L250V fused adapter.

Piles (non incluses)

Six piles AA alcalines de 1,5 V ou rechargeables de 1,2 V

Renseignements techniques

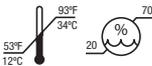Fonctionnement 

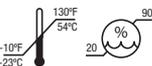Transport/Rangement 

Fragile 

Protéger des rayons du soleil 

Maintenir au sec 

Conformité à la réglementation

Réglementation: CE 0086

Adaptateurs CA : UL, CSA

Moteur: UL E189700, CSA LR76525

Élimination du produit

Ce produit contient de l'équipement électrique et électronique.



1. Les composants internes de ce produit peuvent contenir des matériaux dangereux. Mettez ce produit au rebut conformément aux règlements et systèmes d'administration des déchets locaux ou régionaux.
2. Ne mettez pas au rebut comme déchet municipal non trié.
3. Pour obtenir d'autres renseignements au sujet des performances environnementales de ce produit, veuillez visiter notre site www.ameda.com.

Garantie

Le tire-lait électrique Purely Yours Ultra d'Ameda (« Produit ») est garanti au premier utilisateur — qu'il soit institutionnel ou individuel (« Premier Utilisateur ») — uniquement.

À partir de la date d'achat de ce produit par le premier utilisateur, Ameda, Inc (« Ameda») garantit le produit au premier utilisateur contre les défauts de matériau ou de fabrication pour une période d'un an sur le mécanisme du tire-lait et pour une période de 90 jours sur tous les composants du tire-lait. La seule obligation d'Ameda sous cette garantie limitée sera la réparation ou le remplacement, à la discrétion d'Ameda, de tout Produit qui s'avère défectueux selon Ameda et qui est considéré couvert par cette garantie limitée expresse. La réparation ou le remplacement sous cette garantie limitée est le seul recours unique du premier utilisateur. **Une preuve d'achat sous forme de facture reçue ou d'acte de vente indiquant que le produit est encore dans la période de garantie doit être présentée pour obtenir le service sous garantie.** Cette garantie limitée est offerte par Ameda SEULEMENT au Premier Utilisateur et n'est ni négociable ni transférable. Pour contacter le service de garantie, contactez Ameda au 1.866.99.AMEDA (26332).

SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU D'APTITUDE À UN EMPLOI PARTICULIER DU PRODUIT EST RÉFUTÉE PAR LA PRÉSENTE. AMEDA NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES INDIRECTS, CONSÉCUTIFS, SPÉCIAUX OU PUNITIFS DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT POUR TOUTE RUPTURE DE GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT OU TOUTE GARANTIE IMPLICITE PAR OPÉRATION DE LA LOI, AUTRE QUE LA GARANTIE LIMITÉE PRÉSENTÉE PLUS HAUT. IL N'Y A AUCUNE AUTRE GARANTIE QUI ACCOMPAGNE CE PRODUIT ET TOUTE REPRÉSENTATION ORALE, ÉCRITE OU AUTRE EXPRESSE DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT EST RÉFUTÉE PAR LA PRÉSENTE.

Non-applicabilité de la garantie

En plus de toutes autres limitations de garantie discutées précédemment, la garantie expirera et ne sera plus en vigueur ou en effet suite à l'un des cas suivants : et ne sera plus en vigueur ou en effet suite à l'un des cas suivants :

- (i) la cause des dommages au produit découle d'une mauvaise manipulation ou utilisation.
- (ii) le Produit n'est pas correctement entretenu par le Premier Utilisateur, tel que déterminé par Ameda
- (iii) des accessoires ou pièces de rechange non appropriés par Ameda sont utilisés avec le produit tel que déterminé par Ameda.

Si l'une des situations se produit, Ameda ne sera pas responsable des dommages au produit, à ses pièces ni des blessures en décollant, directement ou indirectement. Les conditions de garantie énoncées ci-dessus remplacent toutes les garanties précédentes à l'égard du produit acheté, soit par écrit soit autrement.

En dehors des États-unis : Appelez votre distributeur local ou l'endroit où vous avez acheté le produit. Pour une liste des distributeurs dans votre pays, veuillez visiter le site www.ameda.com.



MOM INSPIRED. HOSPITAL TRUSTED.

Distributed in USA by:

Ameda, Inc.

485 Half Day Road
Buffalo Grove, IL 60089
1.866.99.AMEDA (26332)

Distributed in Canada by:

Distribue' au Canada par :

Ameda, Inc.

485 Half Day Road
Buffalo Grove, IL 60089
1.866.99.AMEDA (26332)

Mothers Choice Products Ltd.

2133-11871 Horseshoe Way
Richmond, BC V7A5H5
1.800.604.6225

Distributed in Australia by:

Advantage Health Care

34 Percy Street
Mordialloc, VIC 3195
61 (3) 9580 9288

Distribution in other countries:

For product information or feedback, visit
www.ameda.com

www.ameda.com

CE 0086



EMERGO EUROPE

Molenstraat 15
2513 BH, The Hague
The Netherlands
Phone: +31.70.345.8570
Fax: +31.70.346.7299



Ameda, Inc.
485 Half Day Road
Buffalo Grove, IL 60089
USA

Ameda, Flexishield, Purely Yours Ultra, Cool 'N Carry,
Store 'N Pour, HygieniKit and associated logos are
trademarks of Ameda, Inc.

©2013 Ameda, Inc.
25704502-0813