



Purely Yours Ultra™

Breast Pump



Purely Yours Ultra Breast Pump Instructions

English.....page 1

Mode d'emploi du Tire-lait Purely Yours Ultra

Français.....page 16

Instrucciones para la bomba de extracción Purely Yours Ultra

Español..... página 29

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar productos eléctricos, especialmente en presencia de niños, se deben seguir siempre las siguientes precauciones básicas de seguridad.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO

Peligro: Para reducir el riesgo de electrocución:

- Desenchufe siempre los aparatos eléctricos inmediatamente después del uso.
- No los utilice mientras se baña, se ducha o nada.
- No coloque ni almacene el producto donde pueda caerse o halar a una bañera, lavabo o piscina.
- No coloque ni deje que el producto se caiga en agua u otros líquidos.
- No intente recoger un aparato eléctrico que haya caído al agua. Desenchúfelo de la toma de corriente de pared inmediatamente.

Advertencia: para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales:

- No deje nunca el producto desatendido cuando esté enchufado a una toma de corriente eléctrica.
- Es necesario realizar una supervisión detenida cuando el producto se use cerca de niños o personas inválidas.
- Utilice el producto únicamente para el uso previsto descrito en este manual.
- No use accesorios que no sean los que recomienda el fabricante.
- No utilice el producto si tiene un cable o enchufe dañado, no funciona adecuadamente o se ha caído, dañado o se moja.
- Haga funcionar la bomba de extracción Purely Yours Ultra con las pilas o el adaptador para el automóvil (es posible que se incluya, también se vende por separado) si duda de la fiabilidad del tomacorriente.
- Mantenga el cable y todos los accesorios alejados de superficies calientes.

- No lo utilice nunca mientras duerme o si tiene somnolencia.
- No lo utilice en exteriores con el cable.
- No lo utilice donde se estén usando productos vaporizadores en aerosoles o se esté administrando oxígeno.
- Las pilas deben retirarse de la bomba al usar el adaptador de CA o el adaptador para automóvil.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Para su salud y seguridad

La bomba de extracción Purely Yours Ultra de Ameda es un artículo de cuidado personal y nunca debe compartirlo con otras madres ni revenderse ni dárselo a otras madres.

Uso previsto

La función del sacaleches Purely Yours Ultra de Ameda es facilitar la extracción y obtención de la leche materna de una mujer que está amamantando con el objetivo de alimentar al niño con la leche obtenida.

Antes de cada uso



Siempre lávese bien las manos con agua y jabón antes de manipular la bomba de extracción Purely Yours Ultra manual para una sola mano, el sistema de recolección de leche HygieniKit u otros productos Ameda. No use solventes ni productos abrasivos.

Bomba de extracción Purely Yours Ultra Configuración



SIEMPRE LÁVESE BIEN LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN ANTES DE UNA EXTRACCIÓN.


NOTA: antes de usar la bomba de extracción Purely Yours Ultra y el sistema HygieniKit, verifique que las piezas no presenten grietas, astillas, desgarros, cambios de color ni desgaste. Esto puede afectar el funcionamiento del kit. Si debe reemplazar piezas debido a defectos, llame a su distribuidor local o al lugar en que compró la bomba. Para obtener una lista de distribuidores en su país, visite www.ameda.com.

Bomba

Quite el motor de la bomba de la caja o estuche. Elija la opción de corriente.


Opciones de corriente

La bomba de extracción Purely Yours Ultra tiene tres opciones de corriente:

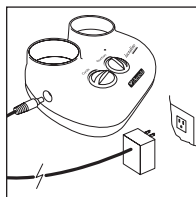


Adaptador de CA (se incluye)

Utilice únicamente el adaptador de CA recomendado para la bomba de extracción Purely Yours Ultra.

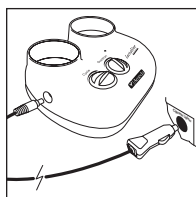

Adaptador de automóvil (puede incluirse; también se vende por separado)

Utilice únicamente con el adaptador de automóvil recomendado para la bomba de extracción Purely Yours Ultra.

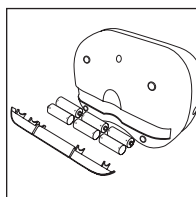

6 pilas AA alcalinas o recargables (no se incluyen)

- Quite las pilas si no va a usar la bomba durante mucho tiempo. Deseche las pilas correctamente.
- Cuando las pilas estén dentro de la bomba y el adaptador de CA o el adaptador para el automóvil esté enchufado, la bomba no gastará corriente de las pilas.

Advertencia: las pilas deben retirarse de la bomba al usar el adaptador de CA o el adaptador para automóvil.



SIEMPRE LÁVESE BIEN LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN ANTES DE UNA EXTRACCIÓN.

Antes del primer uso




Si su sistema HygieniKit tiene la marca “STERILE” (estéril), ábralo y úselo.

Si su sistema HygieniKit **NO** tiene la marca “STERILE” (estéril), antes de usarlo por primera vez:

- Hierva todas las piezas (excepto los tubos, la tapa de adaptador y el adaptador de tubos) durante 20 minutos.
- Retire todas las piezas del agua enseguida después de hervir.
- Deje secar las piezas al aire antes de armar y usar.

No hierva ni lave el tubo, la tapa del adaptador, ni el adaptador del tubo.

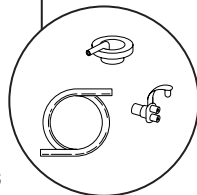

NOTA: antes de usar el sistema HygieniKit, verifique que las piezas no presenten grietas, astillas, desgarros, cambios de color ni desgaste. Esto puede afectar el funcionamiento del kit. Si debe reemplazar piezas debido a defectos, llame:

En EE.UU.: 1.866.99.AMEDA (26332)

En Canadá: 1.800.604.6225


En otros países: llame a su distribuidor local o al lugar donde compró su bomba. Para obtener una lista de distribuidores en su país, visite www.ameda.com.

Después de cada uso

Limpieza de la bomba


Limpe la bomba de extracción Purely Yours Ultra con un trapo limpio y húmedo.

Limpieza del HygieniKit

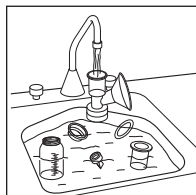

- Desarme el sistema HygieniKit para limpiarlo.
- Enjuague con agua fría los residuos de leche que hayan quedado en las piezas de la bomba.
- Lave a mano con cuidado (excepto los tubos, la tapa de adaptador y el adaptador de tubos) con agua tibia y jabón.
- Enjuague bien con agua tibia y limpia.


No hierva ni lave el tubo, la tapa del adaptador, ni el adaptador del tubo.

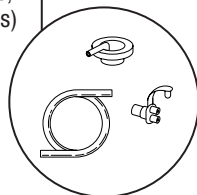


No introduzca nada en la válvula blanca mientras la limpia.

- Deje secar las piezas al aire sobre una superficie limpia.

Las piezas de plástico grandes (embudos de lactancia y biberones) se pueden lavar en la rejilla superior de un lavavajillas doméstico estándar.

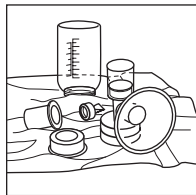


Armado

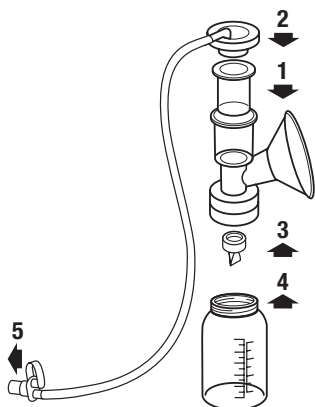


1. Introduzca el diafragma en la cámara superior del embudo de lactancia.
2. Calce la tapa del adaptador con el tubo en la parte de arriba de la cámara superior.
3. Presione suavemente la válvula blanca con firmeza sobre el anillo en el lado de abajo del embudo de lactancia.
4. Enrosque el biberón en el embudo de lactancia.
5. Presione el adaptador del tubo en el extremo del tubo en el puerto del adaptador del tubo que está en la bomba.

Extracción simple y doble

El kit se puede usar con uno o dos extractores.

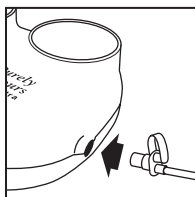

Para extracción simple:
Quite un tubo y cierre el adaptador del tubo.

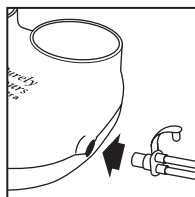

Para extracción doble:
Ambos tubos tienen que estar conectados al adaptador del tubo.


Introduzca el adaptador del tubo en el puerto del adaptador del tubo de la bomba.

Para comenzar la extracción

- Centre el (los) pezón(es) en los embudos de lactancia.
- Llene el (los) embudos de lactancia con el (los) pechos para formar un sello que impida la entrada de aire.


Encendido de la bomba

- Elija la opción de corriente y conecte la bomba a la fuente de corriente.
- Gire el disco de SUCCIÓN a la derecha hasta que se encienda la luz. La bomba está encendida.

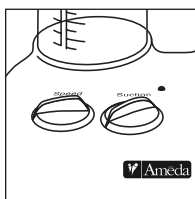

Gire los discos a la derecha (sentido horario) para aumentar la definición de la extracción (VELOCIDAD más rápida, mayor SUCCIÓN).
Gire los discos a la izquierda (sentido antihorario) para disminuir la definición de la extracción (VELOCIDAD más lenta, menor SUCCIÓN).

La extracción doble con una mano le permite tener una mano libre para hacer otras cosas.

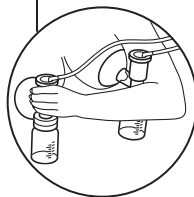

Ajuste de la succión

- Comience la extracción en la configuración de SUCCIÓN más alta que le resulte cómoda.
- Aumente la succión girando el disco de SUCCIÓN a la derecha (sentido horario) hasta lograr el nivel máximo de comodidad.

- Si siente molestias en el pezón(es) o el pecho, disminuya la succión. Si siente molestias en todas las configuraciones de succión, apague la bomba, introduzca un dedo entre el pecho y el embudo de lactancia para romper la succión y quite el embudo de lactancia del pecho. Deje de bombear y póngase en contacto con un proveedor de atención médica.

Ajuste de velocidad

- Comience con el disco de VELOCIDAD girado en sentido horario a la configuración más rápida.
- Una vez que la leche comience a salir (reflejo de eyección), gire el disco de VELOCIDAD en sentido antihorario a una configuración más lenta para drenar los pechos más rápidamente.
- Cuando el flujo de leche disminuya gire el disco de VELOCIDAD en sentido horario para ayudar a activar otro reflejo de eyección.
- En la siguiente eyección, gire el disco de VELOCIDAD en sentido antihorario a una configuración más lenta.
- Repita los pasos a medida que el flujo de leche cambia para bombear más leche.

Apagado de la bomba

- Cuando haya terminado la extracción, gire el disco de SUCCIÓN completamente en sentido antihorario para apagar la bomba.
- Luego de apagada la bomba, si fuera necesario, coloque un dedo entre el pecho y el embudo de lactancia para eliminar la succión.
- Quite el (los) embudos de lactancia del pecho(s).

Consejos para la extracción


Tiempo de extracción

Hable con su profesional de la salud sobre cuánto tiempo debe durar la extracción. En la mayoría de los casos, se sugieren de 10 a 15 minutos por pecho.

Verificación del calce del embudo de lactancia


El tamaño estándar (25.0mm) del embudo de lactancia calza bien para algunas madres. Si la extracción provoca molestias, incluso en baja succión, podría necesitar otro embudo de lactancia o tamaño de inserto. Un buen calce de embudo de lactancia podría hacer más cómoda la extracción y extraer más leche.

Para verificar el calce del embudo de lactancia, mire el pezón durante la extracción. Utilice las fotografías a continuación como guía.

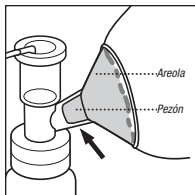


Buen calce

Durante la extracción, su pezón se mueve libremente en el túnel del embudo de lactancia. Verá espacio alrededor del pezón. No mucho de la areola es succionado al túnel junto con el pezón.

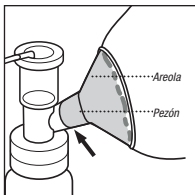

Demasiado pequeño

Durante la extracción, parte o todo su pezón se roza contra las paredes del embudo de lactancia.

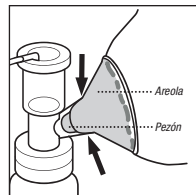

Demasiado grande

Durante la extracción, entra más areola al embudo de lactancia con su pezón. Su areola podría rozarse contra el lado del túnel del embudo de lactancia.

Visite www.ameda.com para obtener más información.

Resolución de problemas de la bomba de extracción Purely Yours Ultra

Para verificar la succión de la bomba desde el motor:

- Retire el adaptador del tubo del puerto del adaptador del tubo que está en la bomba.
- Ponga un dedo sobre el puerto del adaptador del tubo.
- Si siente succión, el motor de la bomba funciona bien.
- Si no siente succión, desenchufe el adaptador de CA, espere unos segundos, vuelva a enchufarlo en el tomacorriente.

La bomba de extracción Purely Yours Ultra tiene una característica de reinicio. Si el motor de la bomba de extracción Purely Yours Ultra deja de funcionar:

- Desenchufe el adaptador de CA del tomacorriente.
- Espere unos segundos y luego vuelva a enchufar el adaptador de CA en el tomacorriente.

Resolución de problemas del sistema de recolección de leche HygieniKit

Si la leche gotea demasiado lento en el biberón:

- Defina el disco de VELOCIDAD en la definición más rápida.
- Reemplace los diafragmas de silicona y las válvulas blancas.

Si la extracción provoca molestias:

- Defina la bomba a una SUCCIÓN más baja.
- Verifique el calce del embudo de lactancia. Podría necesitar un embudo de lactancia o inserto más grande o más pequeño.

Si la succión es baja:

- Verifique que las válvulas blancas estén colocadas en los embudos de lactancia.
- Verifique que las válvulas blancas no tengan grietas ni estén estiradas. Reemplácelas si fuera necesario.
- Si es extracción simple, quite un tubo y cierre un lado del adaptador del tubo.
- Compruebe que el adaptador del tubo no tenga grietas. Si ve alguna, reemplácelo.
- Defina la bomba a una SUCCIÓN más alta.

Las válvulas blancas son cruciales para una correcta succión. Para funcionar bien, deben estar intactas y protegerse cuando no use la bomba. Para prolongar la vida útil de la válvula blanca, siga las instrucciones de limpieza.

Bomba de extracción manual para una sola mano de Ameda

Nota: el ensamble del mango a una sola mano se incluye con algunas versiones. También se vende por separado.

Configuración



SIEMPRE LÁVESE BIEN LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN ANTES DE UNA EXTRACCIÓN.

Antes del primer uso




Si su bomba de extracción manual para una sola mano tiene la marca “STERILE” (estéril), ábrala y úsela.

Si su bomba de extracción manual para una sola mano **NO** tiene la marca “STERILE” (estéril), antes del primer uso:


- Hierva todas las piezas durante 20 minutos.
- Retire todas las piezas del agua enseguida después de hervir.
- Deje secar las piezas al aire antes de armar y usar.

Después de cada uso

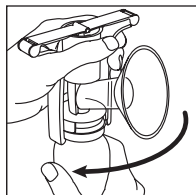


- 1.** Desarme la bomba de extracción manual para una sola mano.


Desenrosque el biberón del embudo de lactancia.

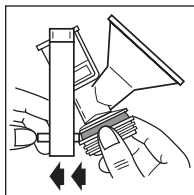


- 2.** Deslice la parte inferior del mango fuera del embudo de lactancia.

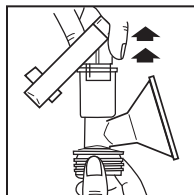


- 3.** Quite el pistón de la cámara superior.

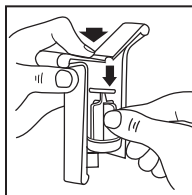

- 4.** Presione el mango hacia abajo para liberar el pistón.

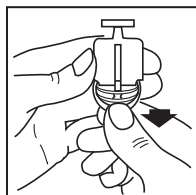


- 5.** Retire el sello del pistón.

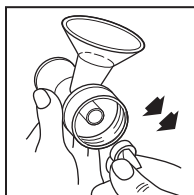


- 6.** Retire la válvula blanca del embudo de lactancia.

Nota: tome la válvula blanca suavemente por los lados gruesos, **no** por el borde fino, para evitar daños.

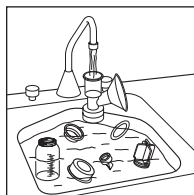

- 7.** Enjuague con agua fría los residuos de leche que hayan quedado en las piezas de la bomba. Lave todas las piezas con agua tibia y jabón. Enjuague bien con agua tibia y limpia

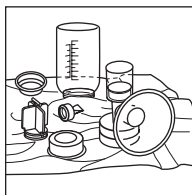


- 8.** Deje secar las piezas al aire sobre una superficie limpia.

Las piezas de plástico grandes (embudos de lactancia, mango y biberones) se pueden lavar en la rejilla superior de un lavavajillas doméstico estándar. Lave a mano el pistón, el sello del pistón y la válvula blanca con suavidad. **No introduzca nada en la válvula blanca mientras la limpia.**


Armado

Paso de la extracción eléctrica a la extracción manual

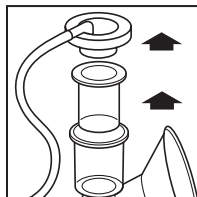


1. Abra y quite la tapa del adaptador.


2. Quite el diafragma de la cámara superior del embudo de lactancia.

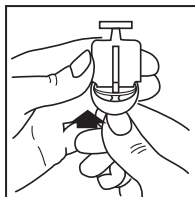


3. Calce el sello del pistón en la base del pistón.

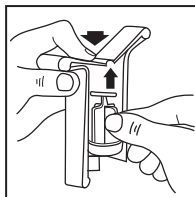

4. Presione el centro del mango hacia abajo y calce la parte superior del pistón en la ranura del mango.

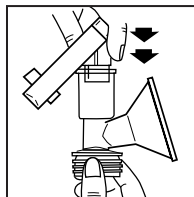


5. Presione el pistón en la cámara superior del embudo de lactancia.

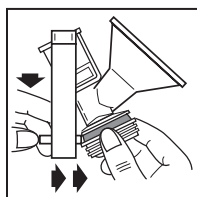


6. Tire del mango hacia abajo y calce el anillo del mango alrededor de la ranura del embudo de lactancia.

(Vea el área sombreada en el diagrama anterior)

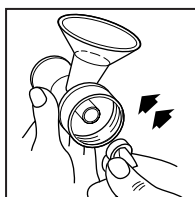


7. Presione suavemente la válvula blanca con firmeza sobre el anillo en el lado de abajo del embudo de lactancia.

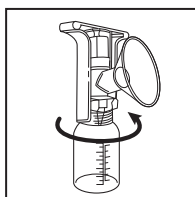


8. Enrosque el embudo de lactancia en el biberón.

El mango está bien puesto si la parte superior está recta.


Para comenzar la extracción

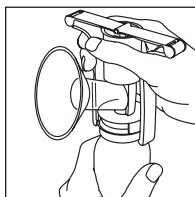


1. Tome el mango con el pulgar en frente y los dedos detrás de la cámara superior del embudo de lactancia.

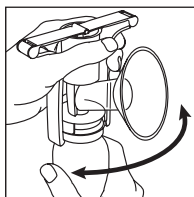


2. Mango giratorio para comodidad de la muñeca.

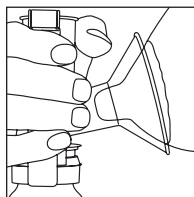

3. Centre el pezón en el embudo de lactancia.

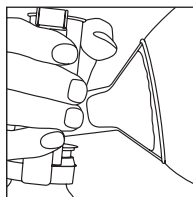

4. Sostenga el embudo de lactancia contra el pecho para crear un sello que impida la entrada de aire.

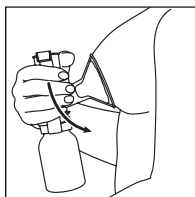


5. Incline el embudo de lactancia apenas hacia abajo para que la leche fluya hacia el biberón.


Mire el flujo de leche mientras se realiza la extracción. Use esto como guía.

- Durante unos minutos apriete rápido y suave para activar la bajada de leche.
- Cuando la leche fluya, use un movimiento de apretar, mantener y soltar para bombear la leche o apriete de forma lenta, fuerte pero cómodamente.
- Cuando el flujo de leche disminuya, apriete más rápidamente para ayudar a activar otro reflejo de eyección.
- Repita los pasos anteriores a medida que cambia el flujo de leche.
- Si siente molestias al bombear, introduzca un dedo entre el pecho y el embudo de lactancia para romper la succión y quite el pecho del embudo de lactancia. Deje de bombear y póngase en contacto con un proveedor de atención médica.

Paso de la extracción manual a la extracción eléctrica

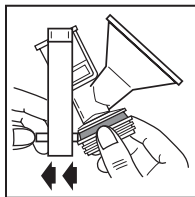

1. Desconecte el anillo del mango del embudo de lactancia y levante y quite el pistón de la cámara superior.

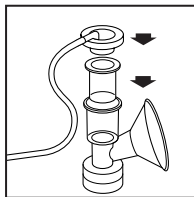


2. Coloque el diafragma en la cámara superior.


3. Calce la tapa del adaptador con el tubo en la cámara superior.

4. Introduzca el adaptador del tubo en el puerto del adaptador del tubo en la bomba de extracción eléctrica Purely Yours Ultra.

El kit se puede usar con uno o dos extractores.

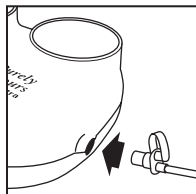

Para extracción simple:
Quite un tubo y cierre el adaptador del tubo.

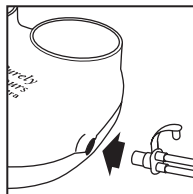

Para extracción doble:
Ambos tubos tienen que estar conectados al adaptador del tubo.

Consejos para la extracción


Tiempo de extracción

Hable con su profesional de la salud sobre cuánto tiempo debe durar la extracción. En la mayoría de los casos, se sugieren de 10 a 15 minutos por pecho.

Verificación del calce del embudo de lactancia


El tamaño estándar (25.0mm) del embudo de lactancia calza bien para algunas madres. Si la extracción provoca molestias, incluso en baja succión, podría necesitar otro embudo de lactancia o tamaño de inserto. Un buen calce de embudo de lactancia podría hacer más cómoda la extracción y extraer más leche.

Para verificar el calce del embudo de lactancia, mire el pezón durante la extracción. Utilice las fotografías a continuación como guía.

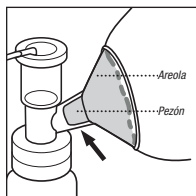


Buen calce

Durante la extracción, su pezón se mueve libremente en el túnel del embudo de lactancia. Verá espacio alrededor del pezón. No mucho de la areola es succionado al túnel junto con el pezón.

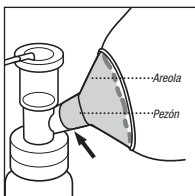

Demasiado pequeño

Durante la extracción, parte o todo su pezón se roza contra las paredes del embudo de lactancia.

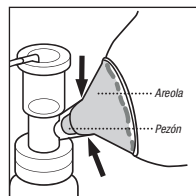

Demasiado grande

Durante la extracción, entra más areola al embudo de lactancia con su pezón. Su areola podría rozarse contra el lado del túnel del embudo de lactancia.

Visite www.ameda.com para obtener más información.

Resolución de problemas de la bomba de extracción manual para una sola mano

Si la leche no fluye lo suficientemente rápido, ajuste la frecuencia con que aprieta, sostiene y suelta.


Si la extracción provoca molestias:

- Apriete el mango de un modo más suave.
- Verifique el calce del embudo de lactancia. Podría necesitar un embudo de lactancia o inserto más grande o más pequeño.

Si la succión es baja:

- Verifique que la válvula blanca esté totalmente apoyada sobre el embudo de lactancia.
- Verifique que la válvula blanca no tenga grietas ni esté estirada. Reemplácela si fuera necesario.
- Quite el sello del pistón, estírelo sobre una superficie plana y vuelva a colocarlo en el pistón.

Retire el sello del pistón

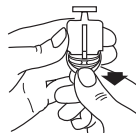

Estire el sello del pistón



Datos técnicos

Requisitos de corriente

Adaptador de CA (se incluye)

Adaptador de CA – configuración de enchufe para América del Norte
9V/1.3A, 100-240V, 50/60Hz, enchufe directo en adaptador de corriente CA.

Adaptador de CA – configuración de enchufe para Australia, el Reino Unido, Europa
9VDC/1.0A, 100-240V, 50/60Hz, enchufe directo en adaptador de corriente CA.


Adaptador de automóvil (puede incluirse; también se vende por separado)
12VCC, adaptador con fusible F1.5A L250V.

Pilas (no vienen incluidas)


Seis pilas AA, 1.5 V alcalinas o 1.2 V recargables.

Información técnica

Funcionamiento

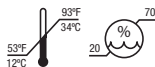

Transporte/almacenamiento

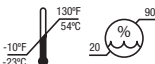

Frágil



Proteja de la luz del sol



Mantenga seco



Cumplimiento normativo

Legislación: CE 0086

Adaptadores de CA: UL, CSA

Unidad del motor: UL E189700, CSA LR76525

Eliminación del producto

Este producto contiene equipos eléctricos y electrónicos.



1. Los componentes internos de este producto pueden contener materiales peligrosos. Deseche este producto de acuerdo con los sistemas y las reglamentaciones locales o regionales para la manipulación de residuos.
2. No lo arroje a la basura municipal sin clasificar.
3. Para obtener más información sobre el comportamiento ambiental de este producto, visite nuestro sitio web www.ameda.com.

Garantía

La bomba de extracción eléctrica Purely Yours Ultra de Ameda (el “Producto”) tiene garantía para el usuario original únicamente, ya sea éste institucional o individual (“Primer usuario”).

A partir de la fecha de compra de este Producto por parte del Primer usuario, Ameda, Inc. (“Ameda”) garantiza el Producto al Primer usuario contra defectos del material o de la mano de obra durante un período de un año para el mecanismo de la bomba y un período de 90 días en todos los demás componentes de la bomba. La única obligación de Ameda bajo esta garantía limitada será reparar o reemplazar, a su entera discreción, cualquier Producto que Ameda determine como defectuoso y que se confirme que está cubierto por esta garantía limitada expresa. La reparación o el reemplazo bajo esta garantía limitada es el único y exclusivo recurso para el Primer usuario. **A fin de obtener servicio de garantía, deberá presentarse comprobante de compra en la forma de una factura recibida o documento de venta que pruebe que el Producto se encuentra dentro del periodo de garantía.**

Esta garantía limitada es emitida por Ameda ÚNICAMENTE al Primer usuario y no es asignable ni transferible. Para obtener servicios bajo garantía póngase en contacto con Ameda por el 1.866.99.AMEDA (26332).

POR LA PRESENTE SE NIEGA RESPONSABILIDAD RESPECTO A TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR DEL PRODUCTO, SALVO HASTA DONDE LO PROHÍBAN LAS LEYES CORRESPONDIENTES. AMEDA NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSIGUIENTE, ESPECIAL NI PUNITIVO DE TIPO ALGUNO POR INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA SOBRE EL PRODUCTO NI DE NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA POR IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY. SALVO LA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA ANTERIORMENTE ESTIPULADA, NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS SOBRE ESTE PRODUCTO, Y POR LA PRESENTE SE DESLINDA RESPONSABILIDAD SOBRE CUALQUIER REPRESENTACIÓN ORAL, ESCRITA O DE CUALQUIER OTRO TIPO.

No aplicabilidad de la garantía

Además de cualquier otra limitación de la garantía anteriormente comentada, la garantía vencerá y perderá vigencia o efecto si ocurriera cualquiera de las siguientes cosas:

- (i) La causa del daño al Producto se debe a manipulación o uso inadecuado.
- (ii) el Producto no recibió el mantenimiento adecuado por parte del Primer usuario conforme a las indicaciones de Evenflo.
- (iii) Se usaron accesorios o repuestos no aprobados por Ameda en el Producto conforme a las indicaciones de Evenflo.

Si ocurriera cualquiera de lo anteriormente descrito, Ameda no será responsable del daño del Producto, de sus piezas ni de lesiones que surjan de ello, ya sea directa o indirectamente. Los términos de la garantía establecida previamente sustituyen a todas las garantías previas respecto al Producto comprado, ya sea por escrito o por otro medio.

Fuera de los Estados Unidos: llame a su distribuidor local o al lugar donde compró el Producto. Para obtener una lista de distribuidores en su país, visite www.ameda.com.



MOM INSPIRED. HOSPITAL TRUSTED.

Distributed in USA by:

Ameda, Inc.

485 Half Day Road
Buffalo Grove, IL 60089
1.866.99.AMEDA (26332)

Distributed in Canada by:

Distribue' au Canada par :

Ameda, Inc.

485 Half Day Road
Buffalo Grove, IL 60089
1.866.99.AMEDA (26332)

Mothers Choice Products Ltd.

2133-11871 Horseshoe Way
Richmond, BC V7A5H5
1.800.604.6225

Distributed in Australia by:

Advantage Health Care

34 Percy Street
Mordialloc, VIC 3195
61 (3) 9580 9288

Distribution in other countries:

For product information or feedback, visit
www.ameda.com

www.ameda.com

CE 0086



EMERGO EUROPE

Molenstraat 15
2513 BH, The Hague
The Netherlands
Phone: +31.70.345.8570
Fax: +31.70.346.7299



Ameda, Inc.
485 Half Day Road
Buffalo Grove, IL 60089
USA

Ameda, Flexishield, Purely Yours Ultra, Cool 'N Carry,
Store 'N Pour, HygieniKit and associated logos are
trademarks of Ameda, Inc.

©2013 Ameda, Inc.
25704502-0813